

Шкафы медицинские «БТ-МЕБЕЛЬ».

Инструкция по установке и эксплуатации.

**Убедительно просим Вас во избежание недоразумений, до начала установки/эксплуатации
внимательно изучить инструкцию по установке и эксплуатации!**

СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!

1. Характеристики.

Настоящая инструкция распространяется на Шкафы медицинские «БТ-МЕБЕЛЬ» (далее Мебель, изделия). Шкафы медицинские «БТ-МЕБЕЛЬ» представляют собой набор унифицированной мебели, предназначенной для кабинетов врача, стоматологических и зуботехнических кабинетов, лабораторий, больниц, поликлиник, аптек, медицинских и учебных заведений.

Шкафы предназначены для размещения лекарственных средств, дезсредств, средств любого химического состава, не запрещенного для применения в медицине, документации, справочной литературы, одежды персонала, принадлежностей медицинского персонала и пациента, для размещения медицинских приборов и аппаратов, для стерилизации и хранения инструментов, для хранения перевязочных материалов и т.д.

Конструктивное исполнение шкафов унифицировано типоразмерам.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

2. Рекомендации по установке

В большинстве случаев шкафы медицинские БТ-МЕБЕЛЬ устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство ее применения.

Составные части мебели должны быть фиксированы между собой и к окружающим предметам в соответствии с действующими, общепринятыми предписаниями

При установке соблюдайте необходимые расстояния, для беспрепятственной работы с подвижными частями изделий (ящики, дверцы и т.д.)

Чтобы облегчить установку мебели необходимо:

- установить составные части мебели в той последовательности и на том месте, где предполагается ее использование;
- отрегулировать по высоте и в горизонтальной плоскости изделия, путем регулировки высоты опорных ножек под изделиями;
- совместить сопрягаемые отверстия на изделиях между собой;
- с помощью фиксирующих винтов соединить сопрягаемые изделия друг с другом;
- при необходимости зафиксировать изделия к стенам и потолку помещения с помощью анкерных болтов;
- при необходимости подсоединить изделия к системе водоснабжения и канализации.

3. Эксплуатация

Шкафы медицинские «БТ-МЕБЕЛЬ» должны эксплуатироваться обученным медицинским персоналом.

Соблюдайте температурный режим эксплуатации мебели - от +5 до +50° С.

Для обеспечения длительного срока службы необходимо своевременно очищать элементы мебели от пыли, грязи и органических загрязнений.

Эксплуатация фурнитуры:

1. Не перегружайте створки дверей и ящики мебели дополнительной нагрузкой;

2. Не перегибайте створки дверей при открытии настежь
3. Избегайте ударов створок дверей и ящиков мебели об другие части мебели или предметы интерьера;
4. Не вставляйте дополнительные предметы в притвор между дверцей и корпусом;
5. Избегайте загрязнений элементов фурнитуры

Уход за фурнитурой

Для ухода за фурнитурой настоятельно рекомендуем использовать средства, не разрушающие защиту от коррозии, не содержащие кислоты и смолы.

Не менее одного раза в год смазывайте маслом все подвижные детали, замки и места запоров

Уход за пластиковыми поверхностями

Пластиковые поверхности мебели рекомендуется очищать специальными средствами для ПВХ, либо с помощью воды и обычного моющего средства.

Категорически запрещается:

1. Ставить раскаленные предметы на пластиковые поверхности мебели
2. Прислонять раскаленные предметы к пластиковым поверхностям мебели

4. Рекомендации и советы.

Не следует подсоединять к электрическим блокам мебели, какое-либо дополнительное оборудование, без письменного согласия производителя.

При проведении ремонтных работ шкафов медицинских «БТ-МЕБЕЛЬ» рекомендуем защищать пленочным материалом от попадания на поверхность изделий растворов, штукатурных материалов и красок

При возникновении любых дополнительных вопросов обращайтесь к представителям производителя.

5. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание шкафов медицинских БТ-МЕБЕЛЬ должно осуществляться сертифицированными специалистами ООО ПТК «БЕЛВА»

6. Гарантийный срок.

В течении гарантийного срока ООО ПТК «БЕЛВА» гарантирует качество изготовленных изделий согласно требованиям ГОСТ 15150, а также:

- Стабильность цвета рабочих поверхностей, пластика в процессе эксплуатации;
- Механическую целостность фурнитуры (ручек, петель, замков и т.д.);
- Целостность изделий.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения мебели, указанной в гарантийном талоне.

Гарантия распространяется:

- на изделия, входящие в состав шкафов медицинских «БТ-МЕБЕЛЬ», при условии, что изделия эксплуатировались в соответствии с Правилами по уходу и эксплуатации;
- на монтажные работы, при условии, что установка изделий осуществляется специалистами, уполномоченными ООО ПТК «БЕЛВА»

Гарантия не распространяется на изделия: