

Тумбы медицинские «БТ-МЕБЕЛЬ».

Инструкция по установке и эксплуатации.

**Убедительно просим Вас во избежание недоразумений, до начала установки/эксплуатации
внимательно изучить инструкцию по установке и эксплуатации!**

СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ!

1. Характеристики.

Настоящая инструкция распространяется на Тумбы медицинские «БТ-МЕБЕЛЬ» (далее Мебель, изделия). Тумбы медицинские «БТ-МЕБЕЛЬ» представляют собой набор унифицированной мебели, предназначенной для кабинетов врача, стоматологических и зуботехнических кабинетов, лабораторий, больниц, поликлиник, аптек, медицинских и учебных заведений.

Тумбы предназначены для размещения лекарственных средств, дезсредств, средств любого химического состава, не запрещенного для применения в медицине, документации, справочной литературы, одежды персонала, принадлежностей медицинского персонала и пациента, для размещения медицинских приборов и аппаратов, для стерилизации и хранения инструментов, для хранения перевязочных материалов и т.д.

Конструктивное исполнение тумб унифицировано типоразмерам.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

2. Рекомендации по установке

В большинстве случаев тумбы медицинские БТ-МЕБЕЛЬ устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство ее применения.

Составные части тумб должны быть фиксированы между собой и к окружающим предметам в соответствии с действующими, общепринятыми предписаниями

При установке соблюдайте необходимые расстояния, для беспрепятственной работы с подвижными частями изделий (ящики, дверцы и т.д.)

Чтобы облегчить установку мебели необходимо:

- установить составные части мебели в той последовательности и на том месте, где предполагается ее использование;
- отрегулировать по высоте и в горизонтальной плоскости изделия, путем регулировки высоты опорных ножек под изделиями;
- совместить сопрягаемые отверстия на изделиях между собой;
- с помощью фиксирующих винтов соединить сопрягаемые изделия друг с другом;
- при необходимости зафиксировать изделия к стенам и потолку помещения с помощью анкерных болтов;
- при необходимости подсоединить изделия к системе водоснабжения и канализация.

3. Эксплуатация

Тумбы медицинские «БТ-МЕБЕЛЬ» должны эксплуатироваться обученным медицинским персоналом.

Соблюдайте температурный режим эксплуатации мебели - от +5 до +50° С.

Для обеспечения длительного срока службы необходимо своевременно очищать элементы мебели от пыли, грязи и органических загрязнений.

Эксплуатация фурнитуры:

1. Не перегружайте створки дверей и ящики мебели дополнительной нагрузкой;

- поврежденные в результате нарушения Правил по уходу и эксплуатации;
- поврежденные в результате воздействия со стороны третьих лиц или вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (СТИХИЯ, ПОЖАР, НАВОДНЕНИЕ И Т.Д.);
- поврежденные в результате умышленных или ошибочных действий;
- поврежденные в результате деформации, возникшей по причине естественной усадки объекта, куда устанавливается медицинская мебель, и погрешностей, допущенных при строительстве;
- ремонт и замена деталей которых осуществлялась самостоятельно, либо предприятиями и частными лицами, не уполномоченными на это ООО ПТК «БЕЛВА».

Не подлежат безвозмездному устранению недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, которые могли быть обнаружены при осмотре в момент получения изделий.

7. Утилизация.

Тумбы медицинские БТ-МЕБЕЛЬ подвергаются утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими на территории, где производится утилизация.

8. Сертификация продукта.

Товар сертифицирован на территории России.

Тумбы медицинские «БТ-МЕБЕЛЬ» изготавливают в исполнении УХЛ, категории 4.2 по ГОСТ 15150.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий тумбы медицинские «БТ-МЕБЕЛЬ» относятся к 1-ой группе, если изделия расположены на ножках, или ко 2-му и 3-му классу, если изделия расположены на колесиках по ГОСТ Р 50444.

В зависимости от потенциального риска применения тумбы медицинские «БТ-МЕБЕЛЬ» относятся к классу 1 по ГОСТ Р 51609.

В зависимости от возможных последствий отказа тумбы медицинские «БТ-МЕБЕЛЬ» относятся к классу В по ГОСТ Р 50444.

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью Производственно – Торговая компания «Белва» (ООО ПТК «Белва»)

Адрес: Россия, 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 42 строение 1

Телефон/факс: (495) 258-98-96

Электронная почта: info@belva.ru