

ОКП 94 5210

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО Производственно-торговая
компания «БЕЛВА»
А.В. Мазанов
«19», декабря 2016 г.



**СТОЛЫ ДЛЯ ПЕЛЕНАНИЯ И САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ
НОВОРОЖДЕННЫХ «БТ-МЕБЕЛЬ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЕЛВ 9452.009 РЭ

Инв. № подл.	Подпись и дата
Зам инж	Инв № дуб.
Подпись и дата	

2016

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение изделия.....	3
2 Технические требования.....	3
3 Комплектность.....	7
4 Варианты исполнения.....	12
5 Подготовка изделия к работе.....	14
6 Меры безопасности.....	14
7 Условия транспортирования и хранения.....	14
8 Маркировка.....	14
9 Упаковка.....	15
10 Утилизация изделия.....	15
11 Свидетельство о приемке.....	15
12 Гарантийные обязательства.....	15
13 Отрывной талон.....	16
Приложение А.....	17
Приложение Б.....	39
Приложение В.....	46
Лист регистрации изменений.....	47

Инв. № подл.	Подпись и дата	Зам. инж.	Инв. № дуб.	Подпись и дата

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Столы для пеленания и санитарной обработки новорожденных «БТ-Мебель» с принадлежностями (далее – столы) предназначены для ухода за новорожденными: санитарной обработки или замены пеленок в условиях стационарных медицинских учреждений и реабилитационных центров.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Столы соответствуют требованиям ГОСТ Р 50444, ТУ 9452-009-99653782-2016 и комплекта документации БЕЛВ.9452.009.

2.2. Основные параметры и размеры

Габаритные размеры и масса столов указана в таблице 1.

Таблица 1

№ пп.	Модель	Длина, мм ± 5 мм	Ширина, мм ± 5 мм	Высота, мм ± 5 мм	Высота бортиков, мм	Масса, не более кг
1	БТ-СП-90	900	600	990	максимальная – 85 ± 5 мм; минимальная – 25 ± 3 мм	31
2	БТ-СП-90/75	900	750	990	максимальная – 85 ± 5 мм; минимальная – 25 ± 3 мм	37
3	БТ-СП-90/64	900	640	1015	Максимальная – 150 ± 5 мм	33
4	БТ-СП-90-К	900	600	990	максимальная – 85 ± 5 мм; минимальная – 25 ± 3 мм	34
5	БТ-СП-90/75-К	900	750	990	максимальная – 85 ± 5 мм; минимальная – 25 ± 3 мм	39
6	БТ-СП-90/64-К	900	640	1015	Максимальная – 150 ± 5 мм	35
7	БТ-ТД-90-Н	900	600	990	максимальная – 85 ± 5 мм; минимальная – 25 ± 3 мм	39
8	БТ-ТД-90/75-Н	900	750	990	максимальная – 85 ± 5 мм; минимальная – 25 ± 3 мм	43
9	БТ-ТД-90/64-Н	900	640	1015	Максимальная –	41

Подпись и дата

Зам инж

Подпись и дата

Ив. № подл.

					150±5мм	
10	БТ-25-90-Н	900	600	990	максимальная -- 85±5мм; минимальная - 25±3мм	47
11	БТ-25-90/75-Н	900	750	990	максимальная -- 85±5мм; минимальная - 25±3мм	48
12	БТ-25-90/64-Н	900	640	1015	Максимальная - 150±5мм	46
13	БТ-ТД-90-К	900	600	990	максимальная -- 85±5мм; минимальная - 25±3мм	39
14	БТ-ТД-90/75-К	900	750	990	максимальная -- 85±5мм; минимальная - 25±3мм	43
15	БТ-ТД-90/64-К	900	640	1015	Максимальная - 150±5мм	41
16	БТ-25-90-К	900	600	990	максимальная -- 85±5мм; минимальная - 25±3мм	49
17	БТ-25-90/75-К	900	750	990	максимальная -- 85±5мм; минимальная - 25±3мм	51
18	БТ-25-90/64-К	900	640	1015	Максимальная - 150±5мм	46
19	БТ-24-90-Н	900	600	990	максимальная -- 85±5мм; минимальная - 25±3мм	47
20	БТ-ТМ-90-Н	900	600	990	максимальная -- 85±5мм; минимальная - 25±3мм	39
21	БТ-24-180-Н*	1800	600	990	максимальная -- 85±5мм; минимальная - 25±3мм	115
22	БТ-ТМ-180-Н*	1800	600	990	максимальная -- 85±5мм; минимальная -	94

Подпись и дата

Зам инн

Подпись и дата

№ подл.

БЕЛВ 9452.009 РЭ

Лист

4

Подпись и дата

Зам инж

Подпись и дата

Ив.№ подл.

					25±3мм	
--	--	--	--	--	--------	--

Габаритные размеры матрасов столов должны соответствовать указанным в таблице 1.1.

Таблица 1.1

№ пп.	Модель	Длина матраса, мм ±1 мм	Ширина матраса, мм ±1 мм	Толщина матраса, мм ±1 мм
1	БТ-СП-90	840	540	30
2	БТ-СП-90/75	840	690	30
3	БТ-СП-90-К	840	540	30
4	БТ-СП-90/75-К	840	690	30
5	БТ-ТД-90-Н	840	540	30
6	БТ-ТД-90/75-Н	840	690	30
7	БТ-25-90-Н	840	540	30
8	БТ-25-90/75-Н	840	690	30
9	БТ-ТД-90-К	840	540	30
10	БТ-ТД-90/75-К	840	690	30
11	БТ-25-90-К	840	540	30
12	БТ-25-90/75-К	840	690	30
13	БТ-24-180-Н	840	540	30
14	БТ-ТМ-180-Н	840	540	30

Габаритные размеры чаши мойки столов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Модель	Длина, мм ±5мм	Ширина, мм ±5мм	Глубина, не более мм
БТ-24-90-Н	648	345	200
БТ-ТМ-90-Н	648	345	200
БТ-24-180-Н	648	345	200
БТ-ТМ-180-Н	648	345	200

*Столы для санитарной обработки новорожденных «БТ-Мебель», модели БТ-24-180-Н и БТ-ТМ-180-Н могут изготавливать с мойкой, расположенной с правой или с левой стороны стола.

2.2.1 Столы и принадлежности изготовлены из материалов, разрешенных для применения в установленном порядке.

Столы изготовлены из следующих материалов:

- трубы стальные бесшовные холоднодеформированные по ГОСТ 8734 и ГОСТ 8733, краска порошковая серого цвета марки Pulverit (Италия) или профиль алюминиевый анодированный по ГОСТ 22233 (производитель ООО «Росла», Россия) – каркасы;

- АБС/ПММА-пластик по ТУ 2246-002-33513246-2003 (ООО «Лада-Лист», Россия) – столешницы, бортики, мойки;

- искусственная кожа цвета оранжевый лосось марки EKOTAP SKADEN 1004;
искусственная кожа цвета глубокий оранжевый марки EKOTAP SKADEN 1017;
искусственная кожа цвета бежевый марки EKOTAP SKADEN 1044;
искусственная кожа цвета жёлтый глубокий марки EKOTAP SKADEN 1123;
искусственная кожа цвета золотой жёлтый марки EKOTAP SKADEN 1089;
искусственная кожа цвета бежево-красный марки EKOTAP SKADEN 1210;
искусственная кожа цвета красный марки EKOTAP SKADEN 3022;
искусственная кожа цвета чёрный графит марки EKOTAP SKADEN 9011;
искусственная кожа цвета сливочно-белый марки EKOTAP SKADEN 1118;
искусственная кожа цвета серо-белый марки EKOTAP SKADEN 9001;
искусственная кожа цвета чистый пурпурный марки EKOTAP SKADEN 3036;
искусственная кожа цвета коричнево-красный марки EKOTAP SKADEN 3096;
искусственная кожа цвета красный насыщенный марки EKOTAP SKADEN 3104;
искусственная кожа цвета лёгкий синий марки EKOTAP SKADEN 5040;
искусственная кожа цвета синий сапфир марки EKOTAP SKADEN 5061;
искусственная кожа цвета ультрамарин марки EKOTAP SKADEN 5118;
искусственная кожа цвета синяя пастель марки EKOTAP SKADEN 5154;
искусственная кожа цвета красная сирень марки EKOTAP SKADEN 5161;
искусственная кожа цвета синий капри марки EKOTAP SKADEN 5141;
искусственная кожа цвета бриллиантовый синий марки EKOTAP SKADEN 5182;
искусственная кожа цвета бирюзовый зелёный марки EKOTAP SKADEN 6001;
искусственная кожа цвета бледный зелёный марки EKOTAP SKADEN 6021;
искусственная кожа цвета зелёный изумруд марки EKOTAP SKADEN 6098;
искусственная кожа цвета бирюзово-синий марки EKOTAP SKADEN 6099;
искусственная кожа цвета зелёный воск марки EKOTAP SKADEN 6100;
искусственная кожа цвета весенний зелёный марки EKOTAP SKADEN 6156;

искусственная кожа цвета серая белка марки EKOTAP SKADEN 7000 (производитель «Sunwill», Польша) – обивка матраца, столешниц, бортиков (цвет обивки выбирается заказчиком);

- ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) по ГОСТ 10632 (производитель «Русский ламинат», Россия), профиль алюминиевый анодированный по ГОСТ 22233 (производитель ООО «Росла», Россия), сталь листовая 08ПС малоуглеродистая холоднокатаная, 08ПС по ГОСТ 9045, ГОСТ 19904 – корпуса тумб;

- пластик бумажно-слоистый (HPL) (производители «Resopal GmbH», Германия; «Formica Group», Финляндия; ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ, Россия; ОАО «Слотекс», Россия по ТУ 2256-006-11111530-2003), ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) по ГОСТ 10632 (производитель «Русский ламинат», Россия) – фасады (цвет и/или дизайнерское оформление фасадов определяется заказчиком);

- АБС-пластик марки QSD-0170 – колеса.

- латунь марки CW601N, покрытая хромом CAS 7440-47-3 (производитель Italmix s.r.l.) – смесители;

- каучук марки DSE350U, окрашенный красителем чёрного цвета марки RAL9005 – кнопка на изливе смесителя WE-0800CR;

Подпись и дата

Зам. инж.

Подпись и дата

Ив. № подл.

- Поролон марки EL2545 плотности 25/45 - наполнитель матрасов.

2.3 Характеристики

2.3.1 Столешница (ложе) столов выдерживает нагрузку не менее 150 кг.

2.3.2 Диаметр колес должен быть не более 125 мм. Колеса должны вращаться свободно без заеданий.

2.3.3 Тормоза должны полностью блокировать колеса во включенном состоянии. Усилие нажатия на тормоз должно быть не более 41 Н, усилие снятия с тормоза – не более 40 Н.

2.3.4 Стол должен стоять на ровной поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из опор (одним из колес) должен быть не более 1,5 мм.

2.3.5 Усилие, необходимое для перемещения изделий на колесах по гладкой поверхности, должно быть не более 50 Н.

2.3.6 Общая высота колеса не должна превышать 175 мм;

2.3.7 Смещение колеса не должно превышать 56 мм;

2.3.8 Грузоподъемность колеса должна быть не менее 715 Н;

2.3.9 Люфт колес не должен превышать 0,62 мм;

2.3.10 Металлические и неметаллические неорганические покрытия столов соответствуют требованиям по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.306 для группы условий эксплуатации 1 климатического исполнения УХЛ 4.2.

2.3.11 Лакокрасочные покрытия изделий выполнены по ГОСТ 9.032 для группы условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104 климатического исполнения УХЛ 4.2.

2.3.12 Наружные поверхности столов, матрасы устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16.

Мойки устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 протираaniem наружных поверхностей салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина. После испытаний вид наружного покрытия не должен измениться.

2.3.13 Изделия при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

2.3.14 Изделия при транспортировании устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5, а при хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 2.

2.3.15 Изделия при эксплуатации обладают вибропрочностью по ГОСТ Р 50444-92 для группы 2.

2.3.16 Изделия, упакованные в транспортную тару, обладают вибропрочностью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444-92.

2.3.17 Средний срок службы не менее 5 лет.

За критерий предельного состояния столов для пеленания и санитарной обработки новорожденных принимается состояние, при котором стоимость восстановления её внешнего вида достигает половины стоимости нового изделия.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки столов соответствует таблице 3.

Подпись и дата		Имя инн	Подпись и дата	Чл. № подл.					Лист 7
	БЕЛВ 9452.009 РЭ								
ООО ЦИРМИ					Дата				

Таблица 3

Наименование изделия	Обозначение документа	Количество, шт.
Столы для пеленания и санитарной обработки новорожденных «БТ-Мебель», модели:	БЕЛВ 9452.009	
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-СП-90	БЕЛВ 9452.009.001	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-СП-90/75	БЕЛВ 9452.009.002	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-СП-90/64	БЕЛВ 9452.009.003	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-СП-90-К	БЕЛВ 9452.009.004	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-СП-90/75-К	БЕЛВ 9452.009.005	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-СП-90/64-К	БЕЛВ 9452.009.006	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-ТД-90-Н	БЕЛВ 9452.009.007	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-ТД-90/75-Н	БЕЛВ 9452.009.008	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-ТД-90/64-Н	БЕЛВ 9452.009.009	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-25-90-Н	БЕЛВ 9452.009.010	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-25-90/75-Н	БЕЛВ 9452.009.011	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-25-90/64-Н	БЕЛВ 9452.009.012	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-ТД-90-К	БЕЛВ 9452.009.013	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-ТД-90/75-К	БЕЛВ 9452.009.014	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-ТД-90/64-К	БЕЛВ 9452.009.015	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-25-90-К	БЕЛВ 9452.009.016	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-25-90/75-К	БЕЛВ 9452.009.017	1
Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-25-90/64-К	БЕЛВ 9452.009.018	1
Стол для санитарной обработки новорожденных «БТ-Мебель», модель БТ-24-90-Н	БЕЛВ 9452.009.019	1
Стол для санитарной обработки новорожденных «БТ-Мебель», модель БТ-ТМ-90-Н	БЕЛВ 9452.009.020	1
Стол для санитарной обработки новорожденных «БТ-Мебель», модель БТ-24-180-Н	БЕЛВ 9452.009.021	1
Стол для санитарной обработки новорожденных «БТ-Мебель», модель БТ-ТМ-180-Н	БЕЛВ 9452.009.022	1
Эксплуатационная документация Руководство по эксплуатации	БЕЛВ 9452.009 РЭ	1 экз.

Подпись и дата

Зам инж

Подпись и дата

Ив. № подл.

Принадлежности:

- Для модели БТ-СП-90:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;
2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.;

- Для модели БТ-СП-90/75:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;
2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.;

- Для модели БТ-СП-90/64:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;
2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.;

- Для модели БТ-СП-90-К:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;
2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.;

- Для модели БТ-СП-90/75-К:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;
2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.;

- Для модели БТ-СП-90/64-К:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;
2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.;

- Для модели БТ-ТД-90-Н:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;
2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.;

- Для модели БТ-ТД-90/75-Н:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;

Подпись и дата

Зам инж

Подпись и дата

Ив. № подл.

- Для модели БТ-25-90-К:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;
2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.

- Для модели БТ-25-90/75-К:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;
2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.

- Для модели БТ-25-90/64-К:

1. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;
2. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
3. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
4. Выдвижной ящик, не более 8 шт.

- Для модели БТ-ТМ-90-Н:

1. Смеситель медицинский локтевой, модель KL 0900 CR (Italmix s.r.l., Италия);
2. Смеситель медицинский с вытяжным душем, модель WE-0800 CR (Italmix s.r.l., Италия);
3. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;
4. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
5. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
6. Выдвижной ящик, не более 8 шт.;

- Для модели БТ-24-90-Н:

1. Смеситель медицинский локтевой, модель KL 0900 CR (Italmix s.r.l., Италия);
2. Смеситель медицинский с вытяжным душем, модель WE-0800 CR (Italmix s.r.l., Италия);
3. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;
4. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
5. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
6. Выдвижной ящик, не более 8 шт.;

- Для модели БТ-ТМ-180-Н:

1. Смеситель медицинский локтевой, модель KL 0900 CR (Italmix s.r.l., Италия);
2. Смеситель медицинский с вытяжным душем, модель WE-0800 CR (Italmix s.r.l., Италия);
3. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;
4. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
5. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
6. Выдвижной ящик, не более 8 шт.;

Подпись и дата

Зам инж

Подпись и дата

нв. № подл.

- Для модели БТ-24-180-Н:

1. Смеситель медицинский локтевой, модель KL 0900 CR (Italmix s.r.l., Италия);
2. Смеситель медицинский с вытяжным душем, модель WE-0800 CR (Italmix s.r.l., Италия);
3. Контейнер для мусора из нержавеющей стали;
4. Контейнер для мусора из пластика (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
5. Контейнер для мусора с открыванием коленом (H+H SYSTEM GmbH, Австрия);
6. Выдвижной ящик, не более 8 шт.

Примечание: Принадлежности поставляются по требованию заказчика.

- Фотографические изображения и характеристики принадлежностей представлены в приложении Б.

4 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СТОЛОВ

4.1 Модель БТ-СП-90, стол пеленальный на ножках с полкой, столешница из АБС/ПММА-пластика, с матрасом, каркас из стальной трубы с порошковой окраской или анодированного алюминиевого профиля (см. Приложение А рис.1).

4.2 Модель БТ-СП-90/75, стол пеленальный на ножках с полкой, столешница из АБС/ПММА-пластика, с матрасом, каркас из стальной трубы с порошковой окраской или анодированного алюминиевого профиля (см. Приложение А рис.2).

4.3 Модель БТ-СП-90/64, стол пеленальный на ножках, с полкой, столешница - искусственная кожа с наполнителем из пенополиуретана, каркас из стальной трубы с порошковой окраской или анодированного алюминиевого профиля (см. Приложение А рис.3).

4.4 Модель БТ-СП-90-К, стол пеленальный на колесах с полкой, столешница из АБС/ПММА-пластика, с матрасом, каркас из стальной трубы с порошковой окраской или анодированного алюминиевого профиля (см. Приложение А рис.4).

4.5 Модель БТ-СП-90/75-К, стол пеленальный на колесах с полкой, столешница из АБС/ПММА-пластика с матрасом, каркас из стальной трубы с порошковой окраской или анодированного алюминиевого профиля (см. Приложение А рис.5).

4.6 Модель БТ-СП-90/64-К, стол пеленальный на колесах, с полкой, столешница - искусственная кожа с наполнителем из пенополиуретана, каркас из стальной трубы с порошковой окраской или анодированного алюминиевого профиля (см. Приложение А рис.6).

4.7 Модель БТ-ТД-90-Н, Стол пеленальный с тумбой из ДСП, или из ДСП с каркасом из алюминиевого профиля, фасады из ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница из АБС/ПММА-пластика, с матрасом (см. Приложение А рис.7).

4.8 Модель БТ-ТД-90/75-Н, стол пеленальный с тумбой из ДСП, или из ДСП с каркасом из алюминиевого профиля, фасады из ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница из АБС/ПММА-пластика, с матрасом (см. Приложение А рис.8).

4.9 Модель БТ-ТД-90/64-Н, стол пеленальный с тумбой из ДСП, или из ДСП с каркасом из алюминиевого профиля, фасады из ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница - искусственная кожа с наполнителем из пенополиуретана (см. Приложение А рис.9).

Подпись и дата		Зам инн	Подпись и дата	Ив. № подл.		Дата	Лист
БЕЛВ 9452.009 РЭ							12
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU							

4.10 Модель БТ-25-90-Н, Стол пеленальный с тумбой из металла с порошковой окраской, фасады из металла с порошковой окраской, ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница из АБС/ПММА-пластика, с матрасом (см. Приложение А рис.10).

4.11 Модель БТ-25-90/75-Н, стол пеленальный с тумбой из металла с порошковой окраской, фасады из металла с порошковой окраской, ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница из АБС/ПММА-пластика, с матрасом (см. Приложение А рис.11).

4.12 Модель БТ-25-90/64-Н, стол пеленальный с тумбой из металла с порошковой окраской, фасады из металла с порошковой окраской, ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница - искусственная кожа с наполнителем из пенополиуретана (см. Приложение А рис.12).

4.13 Модель БТ-ТД-90-К, стол пеленальный с тумбой из ДСП, или из ДСП с каркасом из алюминиевого профиля, на колесах, фасады из ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница из АБС/ПММА-пластика, с матрасом (см. Приложение А рис.13).

4.14 Модель БТ-ТД-90/75-К, стол пеленальный с тумбой из ДСП, или из ДСП с каркасом из алюминиевого профиля, на колесах, фасады из ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница из АБС/ПММА-пластика, с матрасом (см. Приложение А рис.14).

4.15 Модель БТ-ТД-90/64-К, стол пеленальный с тумбой из ДСП, или из ДСП с каркасом из алюминиевого профиля, на колесах, фасады из ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница - искусственная кожа с наполнителем из пенополиуретана (см. Приложение А рис.15).

4.16 Модель БТ-25-90-К, стол пеленальный с тумбой из металла с порошковой окраской, на колесах, фасады из металла с порошковой окраской, ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница из АБС/ПММА-пластика, с матрасом (см. Приложение А рис.16).

4.17 Модель БТ-25-90/75-К, стол пеленальный с тумбой из металла с порошковой окраской, на колесах, фасады из металла с порошковой окраской, ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница из АБС/ПММА-пластика, с матрасом (см. Приложение А рис.17).

4.18 Модель БТ-25-90/64-К, Стол пеленальный с тумбой из металла с порошковой окраской, на колесах, фасады из металла с порошковой окраской, ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница - искусственная кожа с наполнителем из пенополиуретана (см. Приложение А рис.18).

4.19 Модель БТ-24-90-Н, стол для санитарной обработки новорожденных с мойкой, с тумбой из металла с порошковой окраской, фасады из металла с порошковой окраской, ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница из АБС/ПММА - пластика, со смесителем хирургическим с длинным рычагом или с вытяжным душем (см. Приложение А рис.19).

4.20 Модель БТ-ТМ-90-Н, стол для санитарной обработки новорожденных, с мойкой, с тумбой из ДСП, или из ДСП с каркасом из алюминиевого профиля фасады из, ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница из АБС/ПММА - пластика, со смесителем медицинским с длинным рычагом или с вытяжным душем (см. Приложение А рис.20).

4.21 Модель БТ-24-180-Н, стол для санитарной обработки новорожденных с тумбой из металла с порошковой окраской, с мойкой и пеленальным столом, фасады из металла с порошковой окраской, ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница из АБС/ПММА - пластика, со смесителем медицинским с длинным рычагом или с вытяжным душем, с матрасом (см. Приложение А рис.21).

4.22 Модель БТ-ТМ-180-Н, стол для санитарной обработки новорожденных, с мойкой и пеленальным столом, с тумбой из ДСП, или из ДСП с каркасом из алюминиевого профиля, фасады из, ДСП или ДСП с пластиковым покрытием, столешница из АБС/ПММА - пластика, со смесителем медицинским с длинным рычагом или с вытяжным душем, с матрасом (см. Приложение А рис.22).

5 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

- 5.1 Перед подготовкой стола к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- 5.2 Распакуйте стол, проверьте его визуальным осмотром, проверьте комплектность.
- 5.3 Проверьте работоспособность стола.

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 Перед началом использования проверьте исправность изделия.
- 6.2 Перед началом использования установите стол в рабочее положение.
- 6.3 Используйте одноразовые пеленки перед каждым использованием стола

7 УСЛОВИЯ ТРАНСПАРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 7.1 Столы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта. Транспортирование мебели морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки - контейнерная и мелкая.
- 7.2 Условия транспортирования по условиям климатического исполнения УХЛ 4.2, условия хранения по условиям хранения 2 ГОСТ 15150.
- 7.3 Столы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

8 МАРКИРОВКА

- 8.1 Маркировка столов выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и настоящих ТУ.
- 8.2 На каждом столе прикреплена табличка, на которой указано:
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - наименование или обозначение изделия;
 - модель изделия;
 - серийный номер изделия;
 - обозначение настоящих технических условий.
- 8.3 Маркировка потребительской тары по ГОСТ Р 50444
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - наименование или обозначение изделия;
 - год и месяц упаковывания;
 - обозначение настоящих технических условий;
 - год и месяц переконсервации при необходимости.
- 8.3.1 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192.

Подпись и дата		Зам инн	Подпись и дата	Ив. № подл.		Лист
					БЕЛВ 9452.009 РЭ	14
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU					Дата	

На транспортный ящик нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям:

- «Верх», «Беречь от влаги»;
- надписи: «Условия хранения – 2», «Законсервировано до ...».

9 УПАКОВКА

9.1 Упаковка столов – по ГОСТ Р 50444.

9.2 Перед упаковкой металлические поверхности столов должны быть законсервированы по ГОСТ 9.014 для условий хранения 2: ВЗ-1, ВУ-1.

Срок защиты без переконсервации – 3 года.

9.3 Каждый элемент стола (фасады, ножки/колеса, столешница с матрасом, мойки, каркас, корпус тумбы) вместе с эксплуатационной документацией должен быть упакован в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

9.4 Для транспортирования каждый элемент стола должен быть уложен в короб из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901.

9.5 В каждую транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист по ГОСТ Р 50444.

10 УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

10.1 Материалы, из которых изготовлены столы, не наносят вреда здоровью людей и окружающей среде.

10.2 Все упаковочные части могут быть утилизированы как бытовой мусор.

10.3 Утилизация медицинских изделий должна проводиться в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1 Столы БТ-Мебель изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией, признаны годными для эксплуатации

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие столов для пеленания и санитарной обработки новорожденных требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации столов для пеленания и санитарной обработки новорожденных – 12 месяцев со дня продажи.

12.3 Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

12.4 Гарантийный ремонт и замена производятся изготовителем по адресу:

Россия, 115230 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 42, стр. 1

ООО ПТК «БЕЛВА»

тел./факс 8(495) 258-98-96

E-mail: info@belva.ru

Подпись и дата	
Зам. инж.	
Подпись и дата	
Ив. № подл.	

Действителен
по заполнении

ООО ПТК «Белва»
115230, Москва,
Варшавское шоссе, дом 42, стр.1

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Столы для пеленания и санитарной обработки новорожденных
«БТ-Мебель» _____

Представитель фирмы _____

Заводской номер _____

Дата продажи _____

Продан _____

Наименование организации продавшей изделие

Штамп организации
продавшей изделие

Действителен
по заполнении

ООО ПТК «Белва»
115230, Москва,
Варшавское шоссе, дом 42, стр.1

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Столы для пеленания и санитарной обработки новорожденных
«БТ-Мебель» _____

Представитель фирмы _____

Заводской номер _____

Дата продажи _____

Продан _____

Наименование организации продавшей изделие

Штамп организации
продавшей изделие

Подпись и дата

Зам инж

Подпись и дата

Ив. № подл.

Фото 1. Стол пеленальный «БТ-Мебель». модель БТ-СП-90



Фото 1. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-СП-90



Фото 2. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-СП-90/75



Фото 3. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-СП-90/64



Фото 4. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-СП-90-К



Фото 5. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-СП-90/75-К



Фото 6. Стол пеленальный «БТ-Модель», модель БТ-СП-90/64-К



Фото 8. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-ТД-90/75-Н

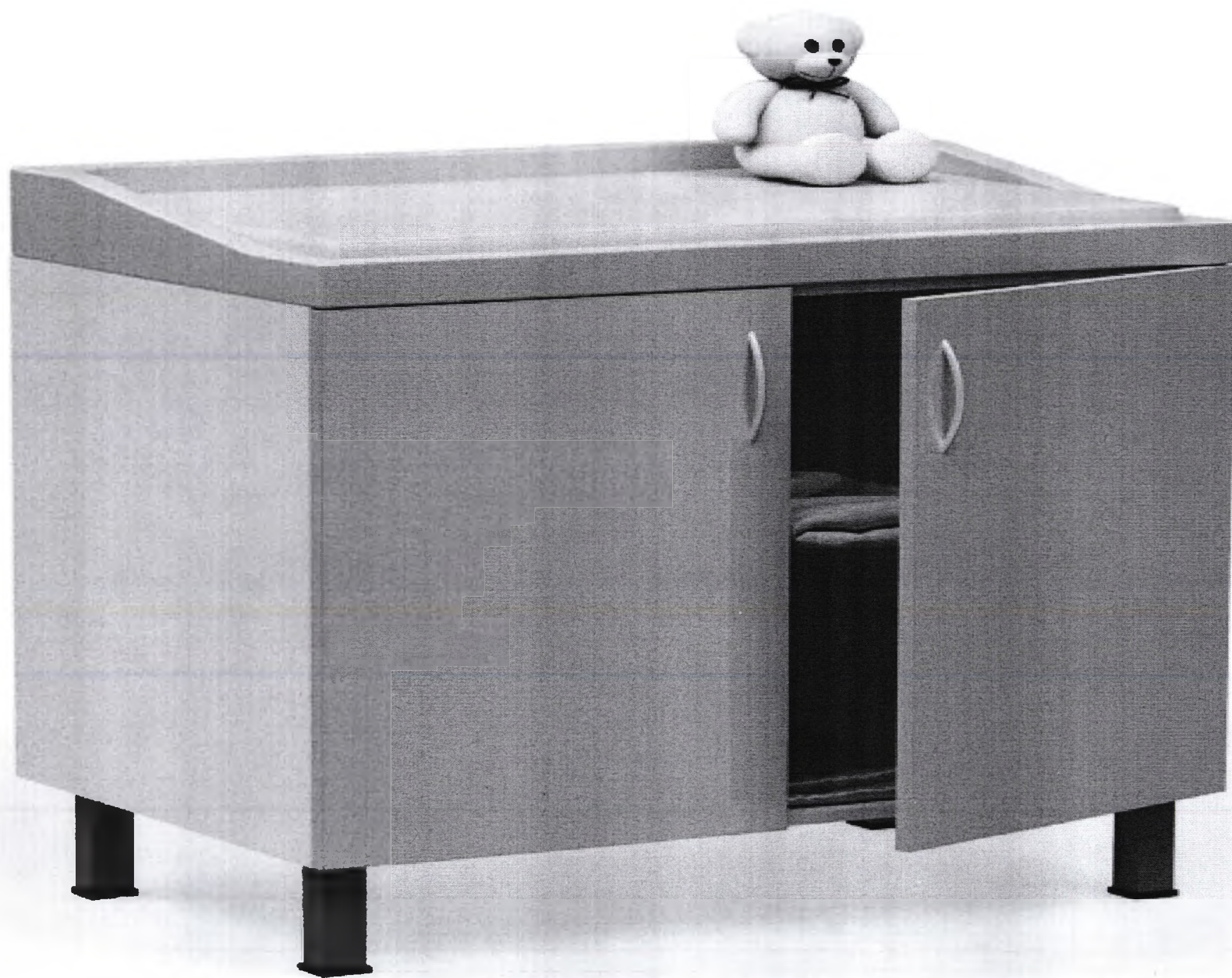


Фото 9. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-ТД-90/64-Н



Фото 10. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-25-90-Н



Фото 11. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-25-90/75-Н



Фото 12. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-25-90/64-Н



Фото 13. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-ТД-90-К

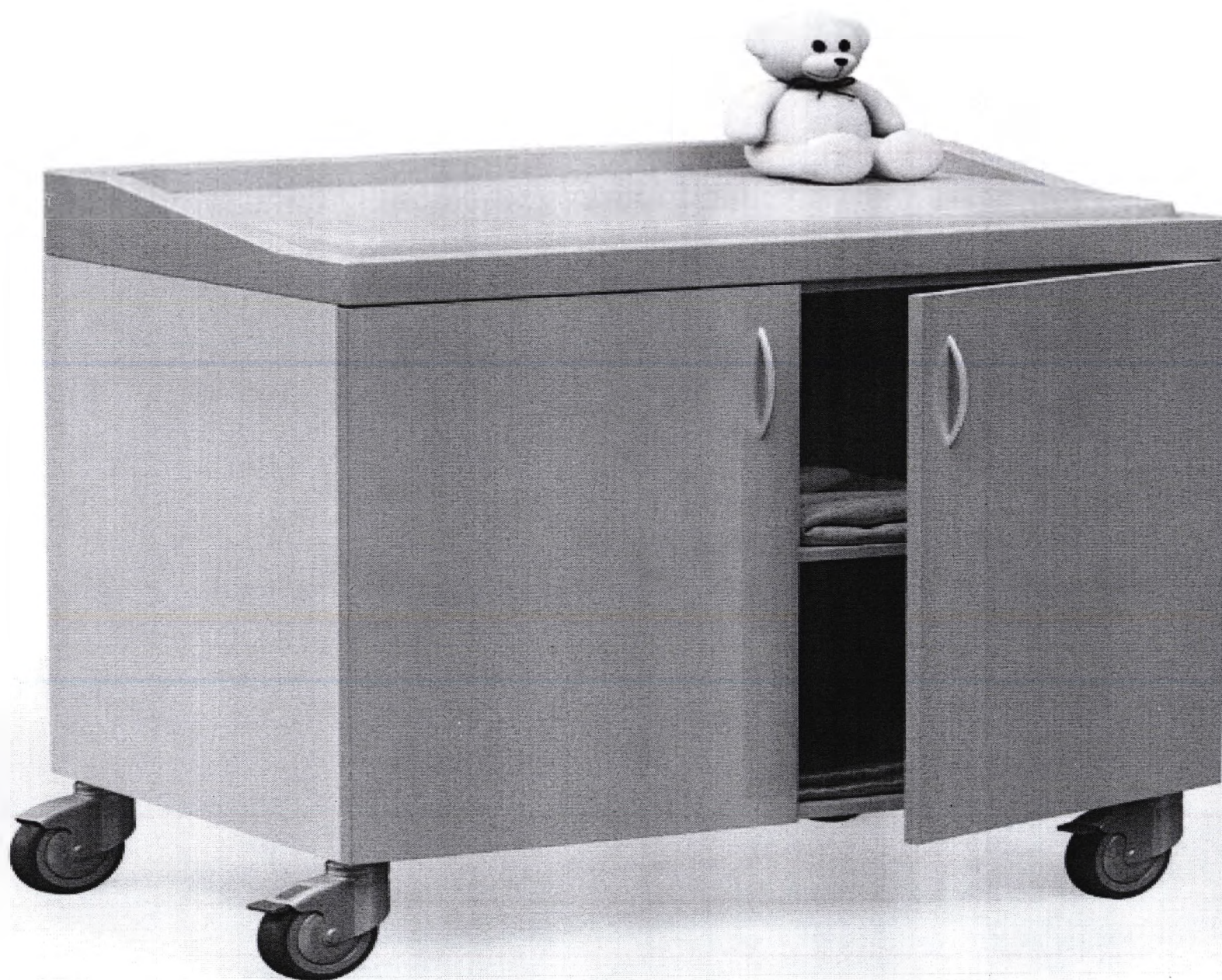


Фото 14. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-ТД-90/75-К



Фото 15. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-ТД-90/64-К

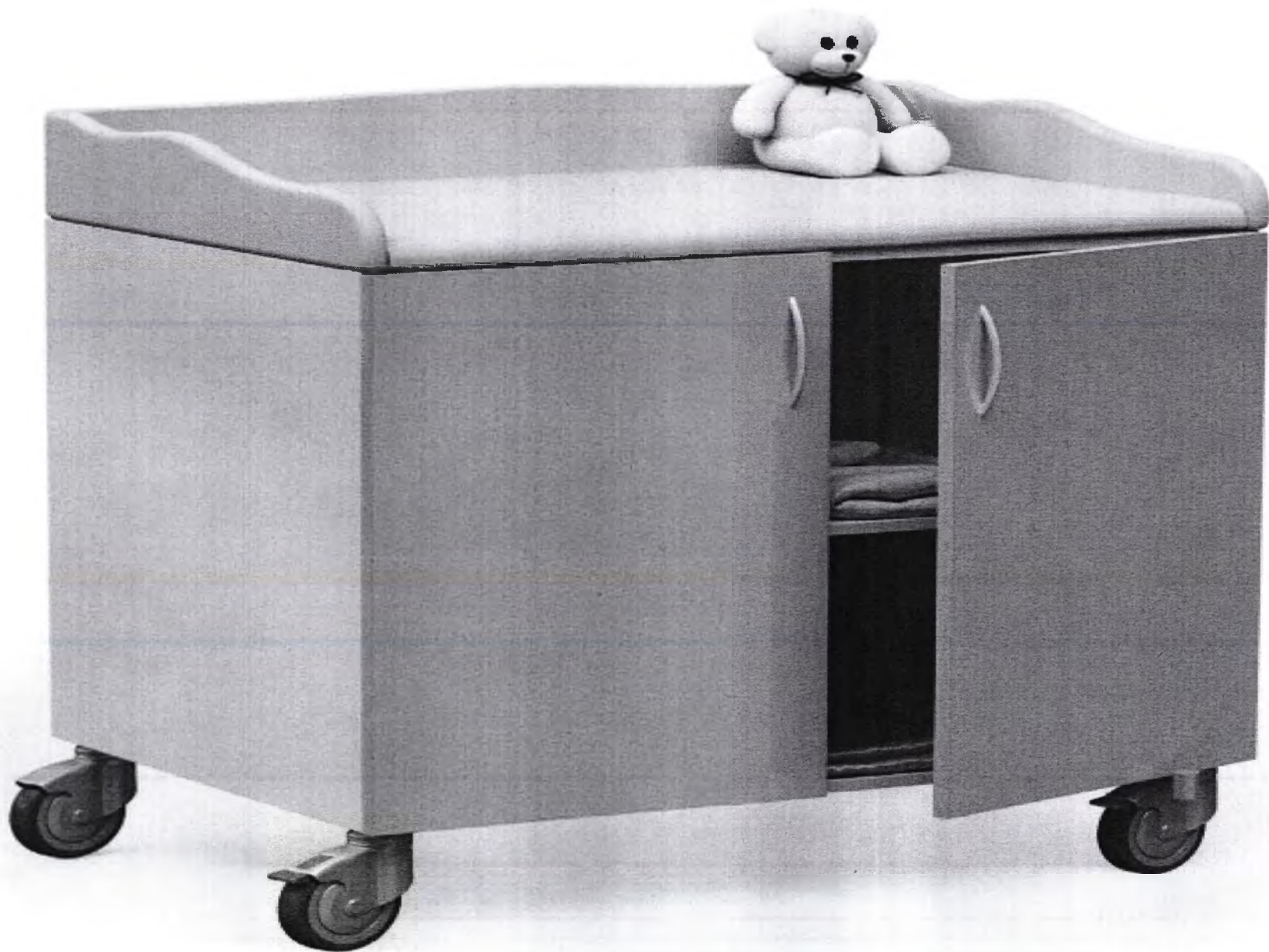


Фото 16. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-25-90-К



Фото 17. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-25-90/75-К



Фото 18. Стол пеленальный «БТ-Мебель», модель БТ-25-90/64-К



Фото 19. Стол для санитарной обработки новорожденных «БТ-Мебель», модель БТ-24-90-Н



Фото 20. Стол для санитарной обработки новорожденных «БТ-Мебель», модель БТ-ТМ-90-Н



Фото 21. Стол для санитарной обработки новорожденных «БТ-Мебель», модель БТ-24-180-Н


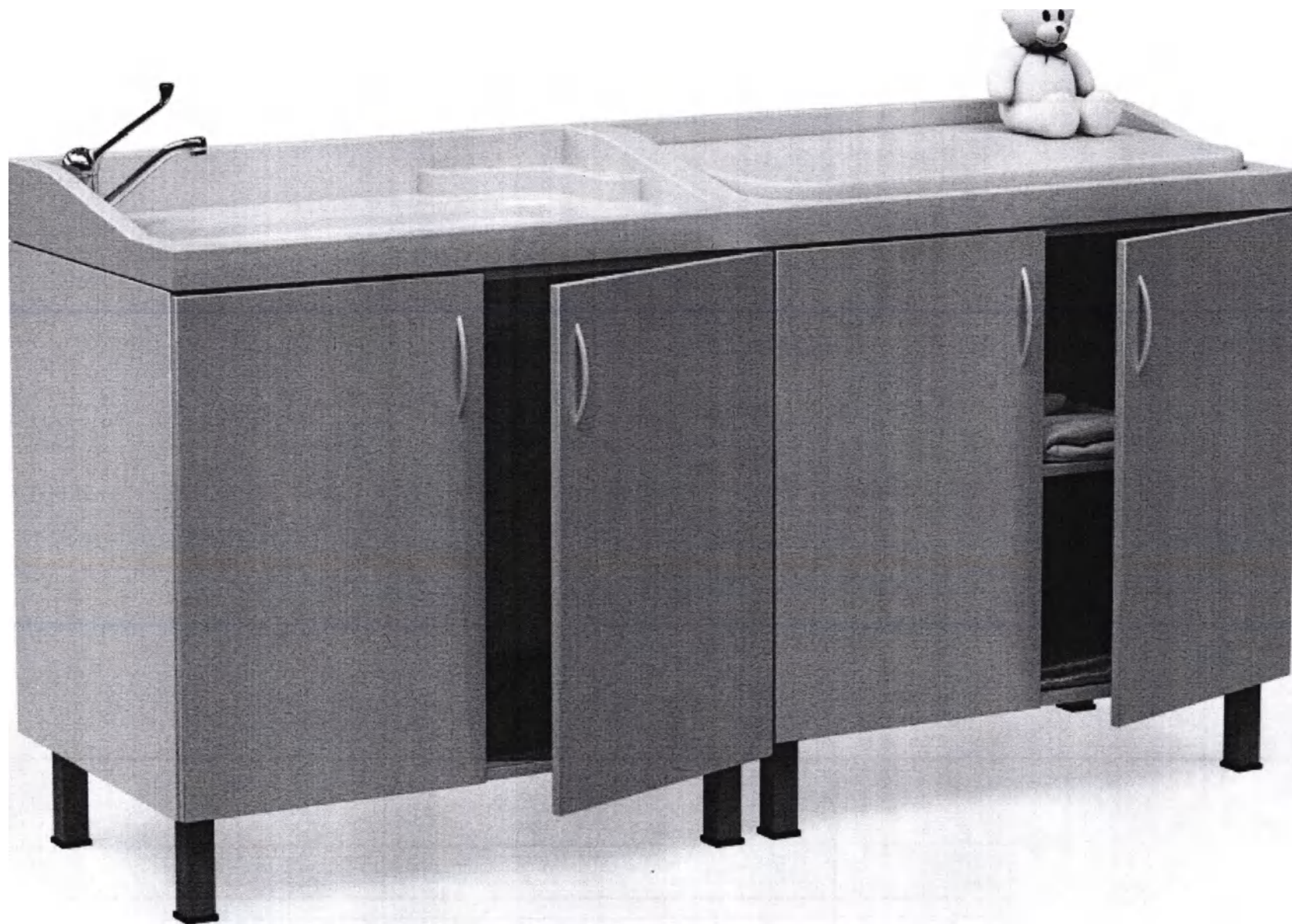


Фото 22. Стол для санитарной обработки новорожденных «БТ-Мебель», модель БТ-ТМ-180-Н

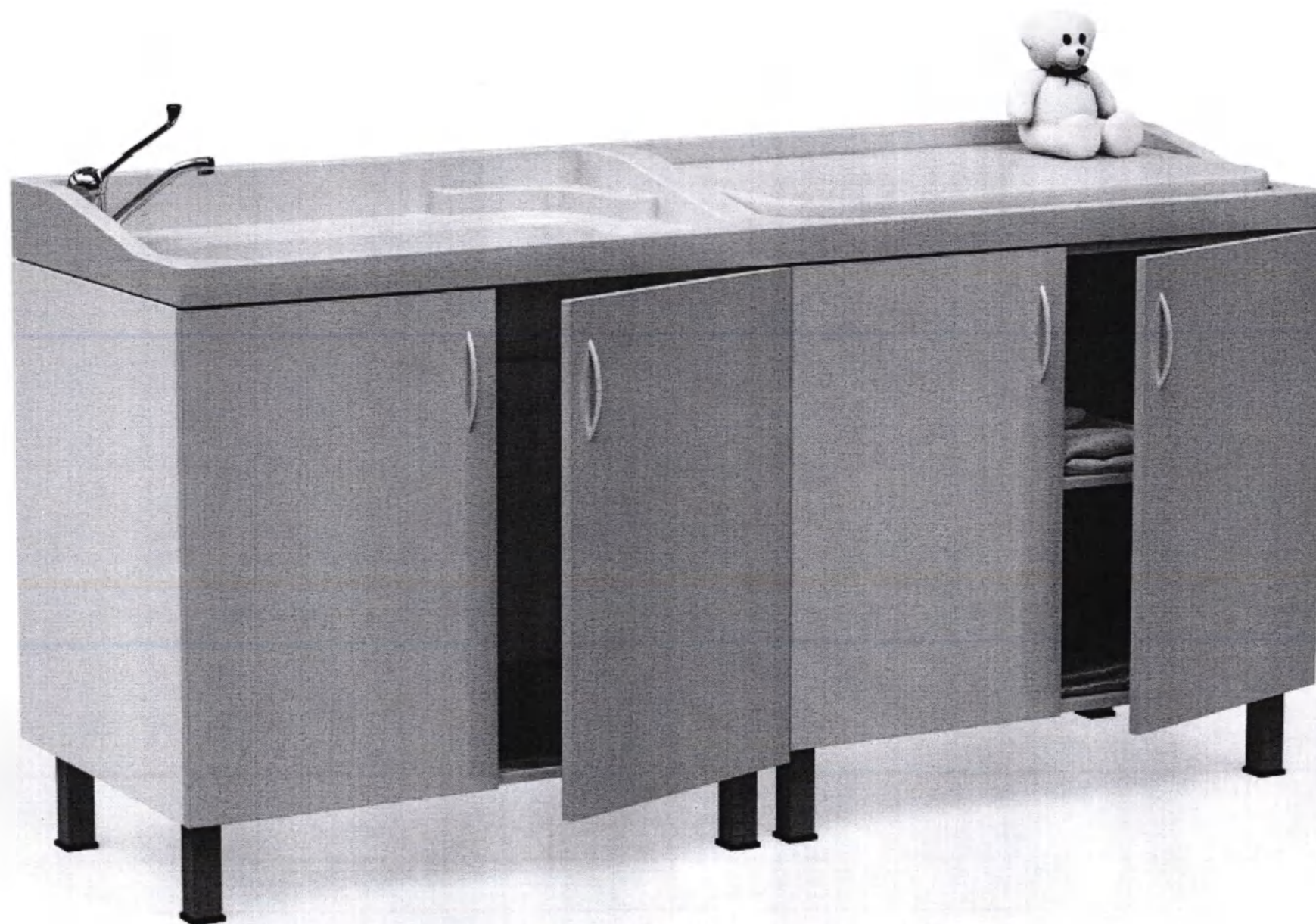


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Внешний вид и характеристики принадлежностей

Смесители

Смеситель медицинский локтевой, модель KL-0900CR
(Изготовитель: Italmixs.r.l. Италия)

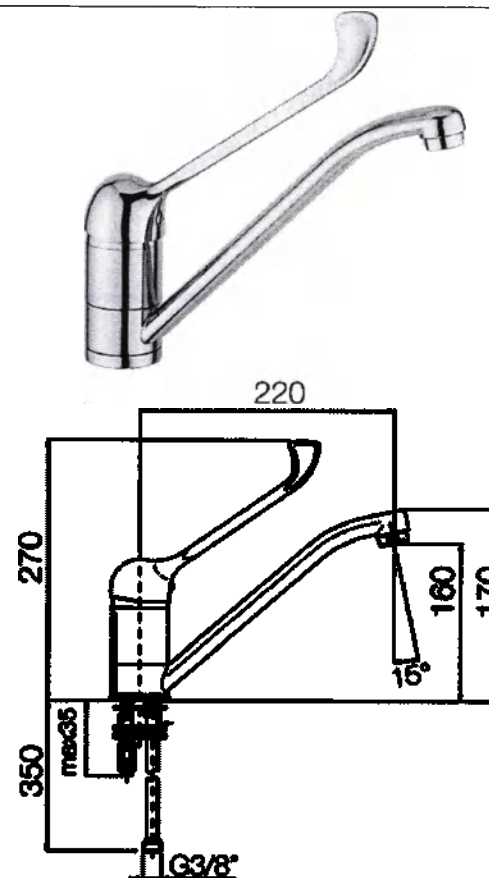

Длина излива - 220 ± 5 мм

Длина локтевого рычага - 190 ± 5 мм

Максимальное рабочее давление - 0,5 МПа

Максимальная рабочая температура - 90°C


Максимальная скорость потока воды - 50 л/мин

Присоединительный размер – 3/8"

Усилие необходимое для регулировки рычага – 1,8 Н $\pm$ 10%

Допустимая нагрузка на смеситель – не более 2 кг.

Смеситель медицинский с вытяжным душем, модель WE-0800CR
(Изготовитель: Italmix s.r.l. Италия)

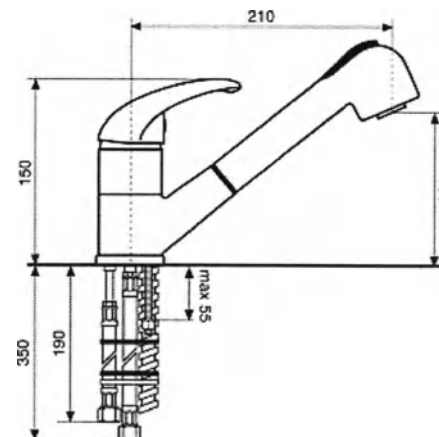

Длина излива – 210 $\pm$ 3 мм

Длина рычага – 120 $\pm$ 2 мм

Максимальное рабочее давление - 0,5 МПа

Максимальная рабочая температура - 70° С

Максимальная скорость потока воды - 50 л/мин

Длина вытяжного душа – не менее 800 мм

Усилие, необходимое для регулировки рычага – 1,8 Н


Усилие, необходимое для нажатия на кнопку на изливе смесителя – не более 2 Н
Допустимая нагрузка на смеситель – не более 2 кг


Так же возможно использование локтевых смесителей других производителей, в этом случае смесители должны отвечать следующим характеристикам

Тип монтажа	Длина излива, не менее, мм	Длина локтевого рычага, не менее, мм	Максимальное рабочее давление, МПа	Максимальная рабочая температура, не менее, ° С	Максимальная скорость потока воды, л/мин	Длина вытяжного душа, мм, не менее	Усилие, необходимое для регулировки рычага, не более, Н	Усилие, необходимое для нажатия на кнопку на изливе смесителя, не более, Н	Допустимая нагрузка на смеситель, не более, кг
На стол	210	1120	0,5	70	50	800	2	2	2

Контейнеры для мусора

Контейнер для мусора из нержавеющей стали
БЕЛВ 9452.009.023

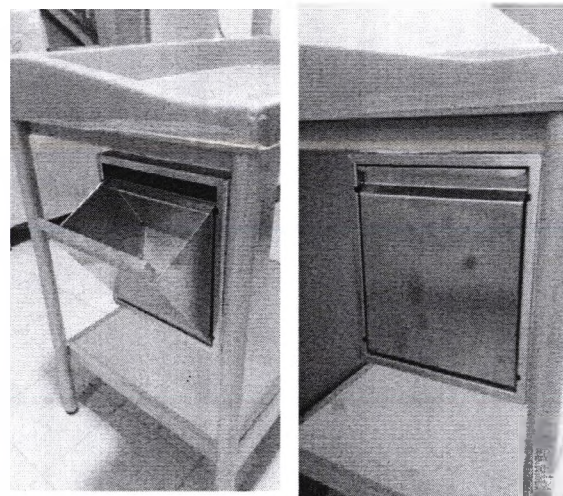

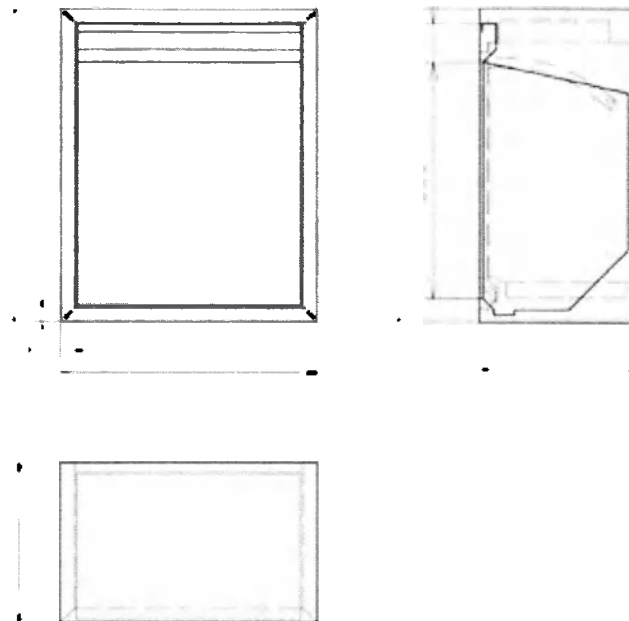

Габаритные размеры: 256*312*160 мм


Емкость контейнера: не менее 5 литров

Материал изготовления: нержавеющая сталь 08X18H10 (AISI 304)

Откидной, легкоъемный контейнер для мусора


Допустимая нагрузка на контейнер – не более 5 кг.

Контейнер для мусора с открыванием коленом
(Изготовитель: H+H SYSTEM GmbH, Австрия)

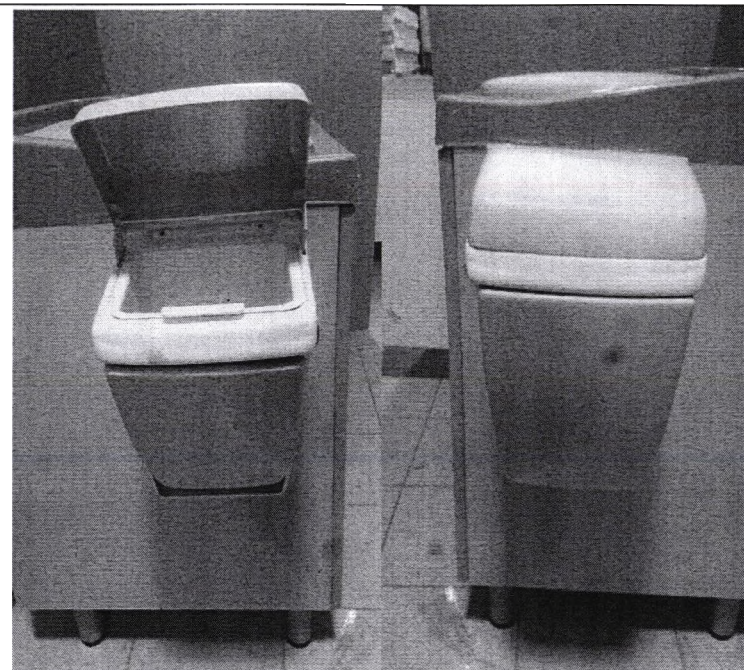

Габаритные размеры: 360*220*200 мм
Емкость контейнера: не менее 8 литров
Съемный внутренний контейнер
Материал изготовления: АВС-Пластик
Усилие нажатия для открывания крышки: 10 Н
Допустимая нагрузка на контейнер – не более 8 кг.

Контейнер для мусора из пластика
(Изготовитель: H+H SYSTEM GmbH, Австрия)

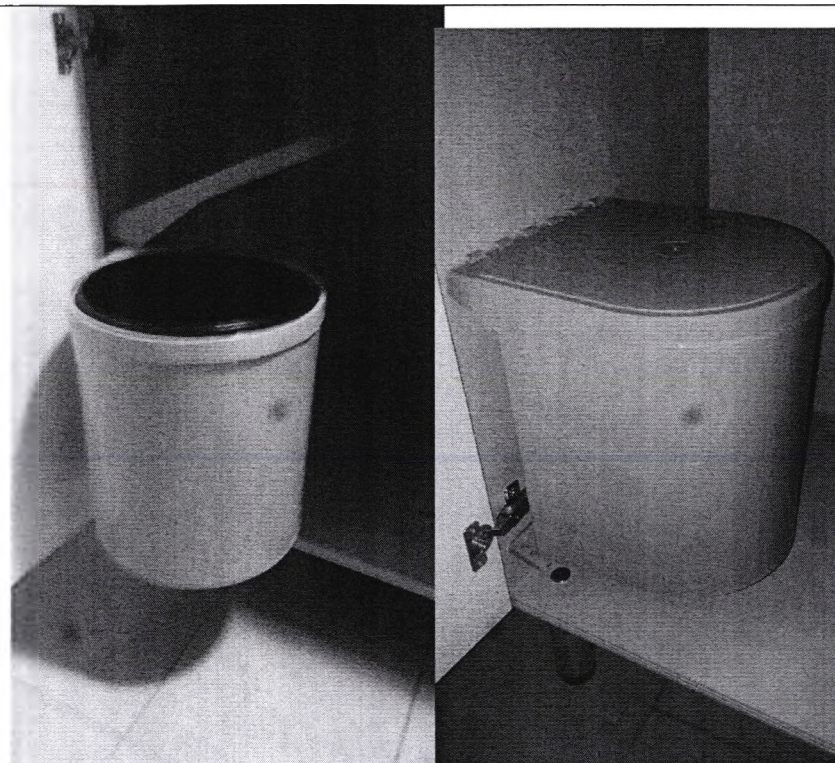

Габаритные размеры: 290 304 365 мм

Емкость контейнера: не менее 10 литров

Съемный внутренний контейнер


Материал изготовления: АВС-Пластик

Крышка контейнера открывается при открывании двери тумбы

Допустимая нагрузка на контейнер - не более 10 кг.

Выдвижной ящик

Выдвижной ящик
БЕЛВ 9452.009.024

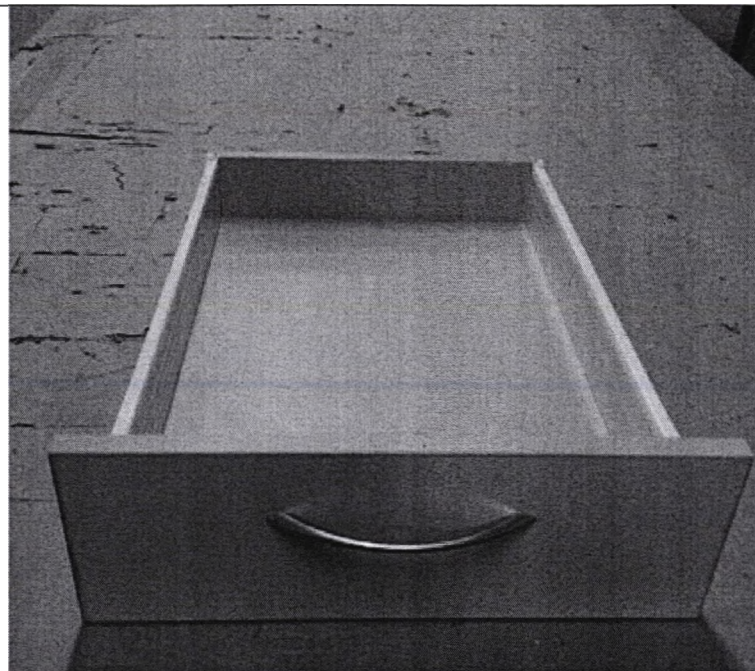

Габаритные размеры: 411х149х500 мм


Направляющие Metabox 86-450

Выдвижные ящики могут собираться в блоки по 2, 4, 6, 8 шт. (см. Приложение Д)

Допустимая нагрузка на ящик - не более 30 кг.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Фото маркировки на примере модели БТ-ТМ-180-Н

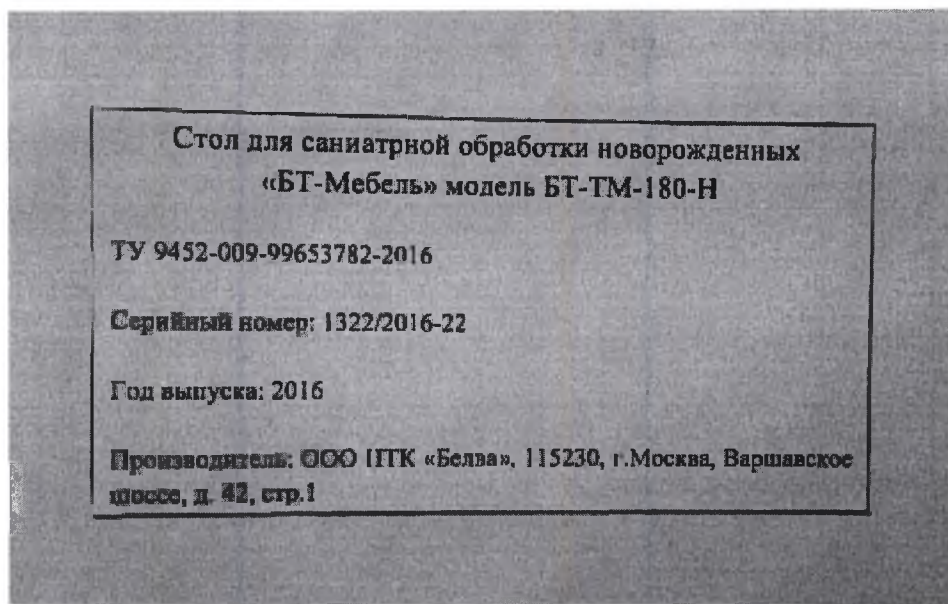[illegible]

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Зам инв	Подпись и дата

					БЕЛВ 9452.009 РЭ	Лист
Изм	Лист	N докум.	Подпись	Дата		47

Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью



(47) листов