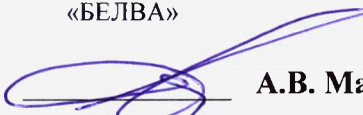


ОКП 94 5210

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО
Производственно-торговая компания
«БЕЛВА»

 **А.В. Мазанов**
« 08 » июня 2015г.

**МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ
«БТ-МЕБЕЛЬ»**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель БТ-00.000 РЭ

2015

Содержание

1	Назначение изделия.....	3
2	Технические характеристики.....	3
3	Комплектность.....	9
4	Устройство	10
5	Подготовка изделия к работе.....	16
6	Меры безопасности.....	16
7	Условия транспортирования, хранения.....	17
8	Маркировка.....	17
9	Упаковка.....	17
10	Утилизация изделия.....	18
11	Свидетельство о приемке.....	18
12	Свидетельство об упаковывании.....	18
13	Гарантийные обязательства.....	19
14	Отрывной талон на гарантийное обслуживание.....	20
15	Приложение 1	21-95
16	Лист регистрации изменений.....	96

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мебель медицинскую для кабинетов и палат «БТ-Мебель» (в дальнейшем БТ-Мебель): табуреты медицинские «БТ-Мебель», стулья медицинские «БТ-Мебель», кресла медицинские «БТ-Мебель», кушетки медицинские «БТ-Мебель», банкетки медицинские «БТ-Мебель», ширмы медицинские «БТ-Мебель», ступеньки медицинские «БТ-Мебель» (в дальнейшем – табуреты, стулья, кресла, кушетки, банкетки, ширмы, ступеньки), предназначенные для оснащения кабинетов и палат, операционных блоков, лабораторий медицинских учреждений, реабилитационных центров.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 «БТ-Мебель» (табуреты - БТ-ТБМ-1 ÷ БТ-ТБМ-6; БТ-ЭРГО-1 ÷ БТ-ЭРГО-4; БТ-СТТ-1 ÷ БТ-СТТ-10; стулья - БТ-СТС-1 ÷ БТ-СТС-10; БТ-СД-Синди D40, Джуно, ИЗО, ЭРА, НЕРОН, Кент; кресла – БТ-СТК-1 ÷ БТ-СТК-4, Гранд, Синди D80, Кент; кушетки – БТ-А01 ÷ БТ-А02, БТ-А04 ÷ БТ-А08; банкетки – БТ-А03-1 ÷ БТ-А03-5; ширмы БТ-Ш-1 ÷ БТ-Ш-6; ступеньки – БТ-СТ-1 ÷ БТ-СТ-5) должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 для группы 1 настоящих технических условий и комплекта документации мебели медицинской «БТ-Мебель» (БЕЛВ.9452.001; БЕЛВ.9452.002; БЕЛВ.9452.003; БЕЛВ.9452.004).

2.2. Основные параметры и размеры

Габаритные размеры и масса изделий указана в таблице 1.

Таблица 1

№ пп.	Модель	Длина не менее, мм	Ширина, не менее, мм	Высота, не менее, мм	Масса, не более, кг
1	2	3	4	5	6
1	Табурет БТ-ТБМ-1	645	645	430	6,0
2	Табурет БТ-ТБМ-2	645	645	430	8,0
3	Табурет БТ-ТБМ-3	645	645	590	9,0
4	Табурет БТ-ТБМ-4	645	645	590	11,0
5	Табурет БТ-ТБМ-5	645	645	580	8,0
6	Табурет БТ-ТБМ-6	645	645	580	12,0

БТ-Мебель - 00.000 РЭ

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Мазанов			
Пров.				
Н. контр.				

Мебель медицинская для
кабинетов и палат
«БТ-Мебель»
Руководство по эксплуатации

Лит.	Лист	Листов
	3	96
ООО ПТК «Белва» ³		

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
7	Табурет БТ-ТБМ-7	645	645	500	11,0
8	Табурет БТ-ТБМ-8	645	645	520	9,0
9	Табурет БТ-ТБМ-9	645	645	605	11,0
10	Табурет БТ-ТБМ-10	645	645	570	9,0
11	Табурет БТ-ЭРГО-1	645	645	530	8,0
12	Табурет БТ- ЭРГО-2	645	645	530	10,0
13	Табурет БТ- ЭРГО-3	645	645	620	9,0
14	Табурет БТ- ЭРГО-4	645	645	620	13,0
15	Табурет БТ- СТТ-1	645	645	480	7,0
16	Табурет БТ- СТТ-2	645	645	570	8,0
17	Табурет БТ- СТТ-3	645	645	565	9,0
18	Табурет БТ- СТТ-4	645	645	480	8,0
19	Табурет БТ- СТТ-5	645	645	570	9,0
20	Табурет БТ- СТТ-6	645	645	480	7,0
21	Табурет БТ- СТТ-7	645	645	570	8,0
22	Табурет БТ- СТТ-8	645	645	570	9,0
23	Табурет БТ- СТТ-9	645	645	440	8,0
24	Табурет БТ- СТТ-10	350	350	470	6,0
25	Стул БТ-СТС-1	645	645	500	11,0
26	Стул БТ-СТС-2	645	645	580	12,0
27	Стул БТ-СТС-3	645	645	530	10,0
28	Стул БТ-СТС-4	645	645	570	12,0
29	Стул БТ-СТС-5	640	640	650	6,0
30	Стул БТ-СТС-6	645	645	620	14,0
31	Стул БТ-СТС-7	640	640	390	12,0
32	Стул БТ-СТС-8	645	645	610	12,0
33	Стул БТ-СТС-9	645	645	470	11,0
34	Стул БТ-СТС-10	333	336	670	12,0
35	Стул БТ-СФ-1	540	500	920	17,0
36	Стул Синди D40	540	540	870	14,0

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
37	Стул Джуно	560	560	870	12,0
38	Стул ИЗО	430	530	790	8,0
39	Стул ЭРА	580	510	780	12,0
40	Стул НЕРОН	430	450	925	9,0
41	Стул Кент	580	510	780	12,0
42	Кресло БТ-СТК-1	645	645	500	14,0
43	Кресло БТ-СТК-2	645	645	500	14,0
44	Кресло БТ-СТК-3	645	645	500	16,0
45	Кресло БТ-СТК-4	645	645	500	16,0
46	Кресло Гранд	620	620	380	14,0
47	Кресло Синди D80	540	540	900	18,0
48	Кресло Кейт	495	465	350	14,0
49	Кушетка БТ-А01	1980	640	750	39,0
50	Кушетка БТ-А02	1980	640	530	37,0
51	Кушетка БТ-А06	1980	640	750	39,0
52	Кушетка БТ-А07	1980	640	530	37,0
53	Кушетка БТ-А08	1980	640	750	39,0
54	Кушетка БТ-А04	1980	640	580	35,0
55	Кушетка БТ-А05	1980	640	750	38,0
56	Банкетка БТ-А03-1	800	385	450	14,0
57	Банкетка БТ-А03-2	1000	385	450	18,0
58	Банкетка БТ-А03-3	1200	385	450	22,0
59	Банкетка БТ-А03-4	1400	385	450	26,0
60	Банкетка БТ-А03-5	1500	385	450	30,0
61	Ширма БТ-Ш-1	900	460	1500	9,0
62	Ширма БТ-Ш-2	1800	460	1500	12,0
63	Ширма БТ-Ш-3	2700	460	1500	15,0
64	Ширма БТ-Ш-4	740	300	1650	8,0
65	Ширма БТ-Ш-5	1500	300	1650	16,0
66	Ширма БТ-Ш-6	2290	300	1650	24,0

БТ-Мебель - 00.000 РЭ

Лист

5

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
67	Ступенька БТ-СТ-1	550	250	350	6,0
68	Ступенька БТ-СТ-2	550	400	400	8,0
69	Ступенька БТ-СТ-3	600	400	245	7,0
70	Ступенька БТ-СТ-4	600	350	220	6,0
71	Ступенька БТ-СТ-5	600	650	440	9,0

2.2.1 При изготовлении мебели медицинской «БТ-Мебель» применяются следующие материалы: фанера, алюминиевый сплав, металлические трубы, литой полиуретан, металлический лист, пластик, соединительные элементы, искусственная кожа марки EKOTAP SKADEN производство компании «Sunwill» (Польша), следующего состава: поливинилсульфат (CAS No: 25191-25-7); полиэфирсульфон (CAS No: 25667-42-9); трикрезифосфат (CAS No: 1330-78-5) – обивка табуретов, стульев, кресел, кушеток и банкеток, пенополиуретан (CAS No: 9009-54-5), производства компании «Mey Chair Systems GmbH» (Германия), обработанный полибромированным эфиром дифенила (CAS No: 80246-27-1), производства компании «Mey Chair Systems GmbH» (Германия), - рукоятки регулировочные табуретов, стульев и кресел...».

2.2.2 Колеса пластиковые, диаметр не менее 50 мм.

2.2.3. При изготовлении используются следующие покупные комплектующие производства компаний **Mey CHAIR SYSTEM GmbH** (Германия), **Effe Tre s.r.l.** (Италия), **DESTEK OTOMOTIV YAN SANAYI VE TICARET A.S.** (Турция).

Комплектующие производства **Mey CHAIR SYSTEMS GmbH** (Германия)

1. Опорные ножки, комплект из 5 штук, артикул 16-5-46
2. Колеса антистатические ESD, комплект из 5 штук, артикул 61027
3. Колеса с мягким краем с системой торможения под нагрузкой, комплект из 5 штук, артикул 61020
4. Регулируемые подлокотники, комплект, артикул 20-05
5. Кронштейн, артикул 14-06
6. Кронштейн, артикул 14-08
7. Нерегулируемые подлокотники, комплект, артикул 20-03
8. Кронштейн, артикул 14-03
9. Механизм для сиденья, артикул 13-10-4B
10. Механизм для сиденья, артикул 13-11-4/TS
11. Механизм для сиденья, артикул 13-11-3
12. Механизм для сиденья, артикул 13-11-2
13. Механизм для сиденья, артикул 13-01-4.1B-0
14. Механизм для сиденья, артикул 13-12-4.1G
15. Механизм для сиденья, артикул 13-16-4-3G-0
16. Механизм для сиденья, артикул 13-18-4R
17. Ручка 10°, артикул 26-001
18. Ручка 35°, артикул 26-002
19. Система ножного управления, артикул 18-13
20. Кронштейн для спинки, артикул 19-1-080
21. Кронштейн для спинки, артикул 19-1-040
22. Кронштейн подлокотника, артикул 14-20 CHR
23. Сиденье полиуретановое, артикул 24-08
24. Сиденье полиуретановое, артикул 24-03
25. Сиденье полиуретановое, артикул 24-60
26. Сиденье полиуретановое, артикул 24-32
27. Сиденье полиуретановое, артикул 24-26

БТ-Мебель - 00.000 РЭ

Лист

6

Комплектующие производства **EFFE TRE s.r.l (Италия)**

1. Газовый поршень, артикул BGK62301/D00
2. Основание для стула, артикул AGLX645C/A00
3. Кронштейн для спинки, артикул DSLM4560/D00
4. Механизм для сиденья, артикул CPRP0L01/CN0
5. Держатель спинки, артикул DNLM0000/D00
6. Колеса пластиковые, артикул DRDN0110/FN0

Комплектующие производства **DESTEK OTOMOTIV YAN SANAYI VE TICARET A.S. (Турция)**

1. Газовая пружина, артикул BL2-10/28-90-350-350N-VP18-T23
2. Система кабельного управления в составе – педаль управления арт. 203 200 839, головка управления арт. 203 200 455, тросик 400 мм.

Допускается применение других материалов и комплектующих, не уступающим по своим техническим характеристикам и качеству, обозначенным выше.

В зависимости от используемых комплектующих к модели изделия может добавляться цифровой артикул, характеризующий конкретную конфигурацию изделия.

2.3 Характеристики

2.3.1 Мебель медицинская «БТ-Мебель» (табуреты, стулья, кресла, кушетки, банкетки, ступеньки) должна выдерживать нагрузку на сиденье и на ложе не менее 130 кг.

2.3.2 Регулировка подъема и опускания сиденья табуретов БТ-ТБМ-1 ÷ БТ-ТБМ-10; БТ-ЭРГО-1 ÷ БТ-ЭРГО-4, БТ-СТТ-1 ÷ БТ-СТТ-10, стульев БТ-СТС-1 ÷ БТ-СТС-10, кресел БТ-СТК -1 ÷ БТ-СТК-4, Гранд, Синди D80, Кейт должна быть не менее размеров, указанных на рисунках (см. Рис.1 – Рис. 23, Рис. 25 – Рис. 34, Рис. 42 -48 Приложение 1 Руководства по эксплуатации БТ-Мебель - 00.000 РЭ).

2.3.3 Регулировка подъема и опускания сиденья табуретов, стульев и кресел должна осуществляться пневматически с помощью рукоятки под сиденьем или ножного кольца.

2.3.4 Стулья БТ-СТС-1 ÷ БТ-СТС-4 должны иметь регулировку спинки по высоте 150 мм, по наклону - не менее $6^{\circ} + 18^{\circ}$, стулья БТ-СТС-5 ÷ БТ-СТС-8 должны иметь регулировку спинки по высоте 150 мм, по наклону - не менее $4^{\circ} + 18^{\circ}$.

2.3.5 Табуреты БТ-ТБМ-2, БТ-ТБМ-3, БТ-ТБМ-6 должны иметь регулировку спинки по высоте не менее 80 мм, БТ-ЭРГО-2 и БТ-ЭРГО-4 регулировку по высоте не менее 170 мм.

2.3.6 Регулировка наклона головной секции кушеток должна осуществляться газовой пружиной или шаговым механизмом типа «ростомат».

2.3.7 На головной секции кушетки БТ-А06 должно быть отверстие для лица.

2.3.8 Диаметр колес должен быть не менее 50 мм. Колесо должно вращаться свободно без заеданий.

2.3.9 Мебель медицинская «БТ-Мебель» должна стоять на ровной поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из опор должен быть не более 1,5 мм.

2.3.10 Усилие, необходимое для перемещения изделий на колесах по гладкой поверхности, должно быть не более 50 Н.

2.3.11 Усилие, необходимое для регулировки подъема и опускания сиденья рукояткой, должно быть не более 20 Н.

2.3.12 Металлические и неметаллические неорганические покрытия изделий должны соответствовать требованиям по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.306 для группы условий эксплуатации 1 климатического исполнения УХЛ 4.2.

2.3.13 Лакокрасочное покрытие изделий должно быть выполнено по ГОСТ 9.032 для группы условий эксплуатации УХЛ 4 по ГОСТ 9.104 климатического исполнения УХЛ 4.2.

2.3.14 Наружные поверхности должны быть устойчивы к дезинфекции по ГОСТ Р 50444.

2.3.15 Дезинфекционная обработка проводится с помощью раствора детергента и чистой ткани.

2.3.16 Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

2.3.17 Изделия при транспортировании и хранении должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

2.3.18 Изделия при эксплуатации должны обладать вибропрочностью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444-92 для группы 2.

2.3.19 Изделия, упакованные в транспортную тару, должны обладать вибропрочностью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444-92.

2.3.20 Средний срок службы мебели должен быть не менее 8 лет.

За критерий предельного состояния мебели БТ принимается состояние, при котором стоимость восстановления её внешнего вида достигает половины стоимости нового изделия.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки мебели медицинской «БТ-Мебель» должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование изделия	Обозначение документа	Количество, шт.
Мебель медицинская «БТ-Мебель»	БТ- Мебель - 00.000	1
<u>Эксплуатационная документация</u> Руководство по эксплуатации	БТ- Мебель -00.000 РЭ	1

Дополнительные принадлежности:

1. Опорные ножки, комплект из 5 штук.
2. Колеса антистатические ESD, комплект из 5 штук.
3. Колеса с мягким краем с системой торможения под нагрузкой, комплект из 5 штук.
4. Регулируемые подлокотники, комплект.
5. Нерегулируемые подлокотники, комплект.
6. Система ножного управления.
7. Держатель рулона бумаги.
8. Заглушка отверстия для лица.

					БТ-Мебель - 00.000 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

4 УСТРОЙСТВО

4.1 Табурет медицинский мобильный БТ-ТБМ-1, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - искусственная кожа различных цветов. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, размер сиденья 375*50 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис.1).

4.2 Табурет медицинский мобильный со спинкой БТ-ТБМ-2, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - искусственная кожа различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*50 мм. Колеса пластиковые, ø 50. (Рис. 2).

4.3 Табурет медицинский мобильный со спинкой и подставкой для ног БТ-ТБМ-3, с пневматической регулировкой высоты сидения (ВЫСОКАЯ ПРУЖИНА) регулировка с помощью рукоятки под сиденьем, основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - искусственная кожа различных цветов. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 590-840 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*50 мм, диаметр кольца для ног 400 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм.(Рис. 3).

4.4 Табурет медицинский мобильный с подставкой для ног БТ-ТБМ-4, с пневматической регулировкой высоты сидения (ВЫСОКАЯ ПРУЖИНА) регулировка с помощью рукоятки под сиденьем, основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - искусственная кожа различных цветов. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 590-840 мм, размер сиденья 375*50 мм., диаметр кольца для ног 400 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 4).

4.5 Табурет медицинский мобильный БТ-ТБМ-5, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка с помощью ножного кольца), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - искусственная кожа различных цветов. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 580-730 мм, размер сиденья 375*50 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 5)

4.6 Табурет медицинский мобильный со спинкой БТ-ТБМ-6, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка с помощью ножного кольца), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - искусственная кожа различных цветов, Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 580-730 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм. Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*50 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 6).

4.7 Табурет медицинский мобильный с ручкой – спинкой БТ-ТБМ-7, вращающейся на 360 градусов, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка кольцом под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - искусственная кожа различных цветов, колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 7).

4.8 Табурет медицинский мобильный с подставкой для ног БТ-ТБМ-8, с пневматической регулировкой высоты сидения регулировка с помощью рукоятки под

сиденьем, основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - искусственная кожа различных цветов. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 8).

4.9 Табурет медицинский мобильный, с пневматической регулировкой высоты сиденья БТ-ТБМ-9 (регулировка с помощью ножного кольца), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - искусственная кожа различных цветов. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 9).

4.10 Табурет медицинский мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья БТ-ТБМ-10 (регулировка с помощью ножного кольца), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - искусственная кожа различных цветов, колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 10).

4.11 Табурет медицинский эргономичный с сиденьем типа "Седло" БТ-ЭРГО-1, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - искусственная кожа различных цветов. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 530-680 мм, размер сиденья 400*330*170/190 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 11).

4.12 Табурет медицинский эргономичный с сиденьем типа "Седло" БТ-ЭРГО-2, со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - искусственная кожа различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 530-680 мм, регулировка угла наклона сиденья от +5° до -8°, регулировка угла наклона спинки от +6° до -16°, Регулировка спинки по высоте 170 мм. Габариты спинки 340*270*30 мм, размер сиденья 400*330*170/190 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис.12).

4.13 Табурет медицинский эргономичный с сиденьем типа "Седло" БТ-ЭРГО-3, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка с помощью ножного кольца), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - искусственная кожа различных цветов. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 620-790 мм, размер сиденья 400*330*170/190 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 13).

4.14 Табурет медицинский эргономичный с сиденьем типа "Седло", со спинкой БТ-ЭРГО-4, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - искусственная кожа различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 620-790 мм, регулировка угла наклона сиденья от +5° до -8°, регулировка угла наклона спинки от +6° до -16°, Регулировка спинки по высоте 170 мм. Габариты спинки 340*270*30 мм, размер сиденья 400*330*170/190 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 14)

4.15 Табурет медицинский мобильный БТ-СТТ-1, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 480-625 мм, размер сиденья 340*30 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 15).

4.16 Табурет медицинский мобильный БТ-СТТ-2, с кольцом для ног, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 570-820 мм, размер сиденья 340*30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 16).

4.17 Табурет медицинский мобильный БТ-СТТ-3, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка с помощью ножного кольца), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета.

Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 565-710 мм, размер сиденья 340*30 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 17).

4.18 Табурет медицинский мобильный БТ-СТТ-4, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета, форма сиденья - в виде чаши с поддержкой для крестца. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 480-625 мм, размер сиденья 480*380*150 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 18).

4.19 Табурет медицинский мобильный БТ-СТТ-5, с кольцом для ног, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета, форма сиденья - в виде чаши с поддержкой для крестца. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 570-820 мм, размер сиденья 480*380*150 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 19).

4.20 Табурет медицинский мобильный БТ-СТТ-6, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 480-620 мм, размер сиденья 320*50 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 20)

4.21 Табурет медицинский мобильный БТ-СТТ-7, с кольцом для ног, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 570-820 мм, размер сиденья 340*50 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 21)

4.22 Табурет медицинский мобильный БТ-СТТ-8, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка с помощью ножного кольца), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 570-710 мм, размер сиденья 320*50 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 22).

4.23 Табурет медицинский мобильный БТ-СТТ-9, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка кольцевой рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - искусственная кожа различных цветов. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 520-660 мм, размер сиденья 340*80 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 23)

4.24 Табурет медицинский мобильный БТ-СТТ-10, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка кольцевой рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - искусственная кожа различных цветов. Диаметр основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 605-860 мм, размер сиденья 340*80 мм. Опора для него хромированная, диаметром 40 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. (Рис. 24).

4.25 Стул медицинский БТ-СТС-1, с профилированным сиденьем и спинкой из литого полиуретана черного цвета, с пневматической регулировкой высоты сиденья, регулировка

производится рукояткой под сиденьем. Размеры сиденья 430*410*70 мм, размеры спинки 380*320*100 мм, регулировка высоты сиденья 500-640 мм, регулировка спинки по высоте 150 мм, регулировка спинки по наклону $-6^{\circ}/+18^{\circ}$. основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 645 мм. Колеса пластиковые, $\varnothing$ 50 мм. (Рис. 25.)

4.26 Стул медицинский БТ-СТС-2, с кольцом для ног, с профилированным сиденьем и спинкой из литого полиуретана черного цвета, с пневматической регулировкой высоты сиденья, регулировка производится рукояткой под сиденьем.

Размеры сиденья 430*410*70 мм, размеры спинки 380*320*100 мм, регулировка высоты сиденья 580-835 мм, регулировка спинки по высоте 150 мм, регулировка спинки по наклону $-6^{\circ}/+18^{\circ}$, основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр кольца для ног - 400 мм.

Диаметр основания 645 мм. Колеса пластиковые, $\varnothing$ 50 мм.. (Рис. 26)

4.27 Стул медицинский БТ-СТС-3, с профилированным сиденьем и спинкой из литого полиуретана черного цвета, с пневматической регулировкой высоты сиденья, регулировка производится рукояткой под сиденьем. Размеры сиденья 440*430*90 мм, размеры спинки 390*260*100 мм, регулировка высоты сиденья 530-680 мм, регулировка спинки по высоте 150 мм, регулировка спинки по наклону $-6^{\circ}/+18^{\circ}$. основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета.

Диаметр основания 645 мм. Колеса пластиковые, $\varnothing$ 50 мм. (Рис. 27).

4.28 Стул медицинский БТ-СТС-4, с кольцом для ног, с профилированным сиденьем и спинкой из литого полиуретана черного цвета, с пневматической регулировкой высоты сиденья, регулировка производится рукояткой под сиденьем. Размеры сиденья 440*430*90 мм, размеры спинки 390*260*100 мм, регулировка высоты сиденья 570-830 мм, регулировка спинки по высоте 150 мм, регулировка спинки по наклону $-6^{\circ} +18^{\circ}$.

основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Диаметр основания 645 мм.

Колеса пластиковые, $\varnothing$ 50 мм. (Рис. 28).

4.29 Стул медицинский БТ-СТС-5, с профилированным сиденьем и спинкой из литого полиуретана черного цвета, с пневматической регулировкой высоты сиденья, регулировка производится рукояткой под сиденьем. Размеры сиденья 375*400 мм, размеры спинки 220*365 мм, регулировка высоты сиденья 510-650 мм, регулировка спинки по высоте 150 мм, регулировка спинки по наклону $-4^{\circ}/+18^{\circ}$. основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 640 мм. Колеса пластиковые, $\varnothing$ 50 мм. (Рис. 29).

4.30 Стул медицинский БТ-СТС-6, с профилированным сиденьем и спинкой из литого полиуретана черного цвета, с пневматической регулировкой высоты сиденья, регулировка производится рукояткой под сиденьем. Размеры сиденья 375*400 мм, размеры спинки 220*365 мм, регулировка высоты сиденья 510-650 мм, регулировка спинки по высоте 150 мм, регулировка спинки по наклону $-4^{\circ}/+18^{\circ}$. основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 640 мм. Колеса пластиковые, $\varnothing$ 50 мм. (Рис. 30).

4.31 Стул медицинский БТ-СТС-7, с профилированным сиденьем и спинкой из литого полиуретана черного цвета, с пневматической регулировкой высоты сиденья,

регулировка производится рукояткой под сиденьем. Размеры сиденья 440*450 мм, размеры спинки 370*390 мм, регулировка высоты сиденья 490-630 мм, регулировка спинки по высоте 150 мм, регулировка спинки по наклону $-4^{\circ}+18^{\circ}$. основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 640 мм. Колеса пластиковые, $\varnothing$ 50 мм. (Рис. 31).

4.32 Стул медицинский, с сиденьем и спинкой БТ-СТС-8 полированной и лакированной фанеры, с подставкой для, с пневматической регулировкой высоты сиденья, регулировка производится рукояткой под сиденьем, регулировка спинки по высоте, основание - пластиковое из, на ножках. (Рис. 32).

4.33 Стул медицинский БТ-СТС-9, с профилированным сиденьем и спинкой из литого полиуретана, с пневматической регулировкой высоты сиденья, регулировка производится рукояткой под сиденьем, регулировка спинки по высоте, регулировка спинки по наклону, основание - литое, полированное из алюминиевого сплава. Колеса пластиковые, антистатические, $\varnothing$ 50 мм. (Рис. 33).

4.34 Стул медицинский БТ-СТС-10, опора для работы стоя, на ножках, с пневматической регулировкой высоты сиденья, регулировка ручкой под сиденьем, сиденье из литого полиуретана. (Рис. 34).

4.35 Стул медицинский БТ-СФ-1 для физиотерапии, на ножках с подлокотниками, изготовлен из шпона натурального бука. (Рис. 35).

4.36 Стул медицинский для пациента Синди D40, на полозьях, со спинкой, с подлокотниками, каркас - сталь с хромированным покрытием, обивка - кожзаменитель. (Рис. 36).

4.37 Стул медицинский для пациента Джуно, на ножках, со спинкой, с подлокотниками, каркас - шпон натурального бука, обивка - кожзаменитель. (Рис. 37).

4.38 Стул медицинский для пациента ИЗО, на ножках, со спинкой, каркас - сталь с хромированным покрытием, обивка - кожзаменитель. (Рис. 38).

4.39 Стул медицинский ЭРА для пациента, на ножках, со спинкой, с подлокотниками, каркас - сталь с хромированным покрытием, обивка - кожзаменитель. (Рис. 39).

4.40 Стул медицинский НЕРОН для пациента, на ножках, с подлокотниками, со спинкой, каркас - сталь с хромированным покрытием, обивка - кожзаменитель. (Рис. 40).

4.41 Стул медицинский для пациента Кент, на ножках, со спинкой, с подлокотниками, каркас - шпон натурального бука, обивка - кожзаменитель. (Рис. 41).

4.42 Кресло медицинское БТ-СТК-1 со спинкой, для врача с пневматической регулировкой высоты сиденья, регулировка производится рукояткой под сиденьем, основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пенополиуретан с обивкой из искусственной кожи. Колеса пластиковые, $\varnothing$ 50 мм. (Рис. 42).

4.43 Кресло медицинское БТ-СТК-2 со спинкой, для врача, с пневматической регулировкой высоты сиденья, регулировка производится рукояткой под сиденьем, основание - пластиковое, черного цвета, чехол на газовом поршне - пластиковый, черного цвета, сиденье и спинка - пенополиуретан с обивкой из искусственной кожи. Колеса пластиковые, $\varnothing$ 50 мм. (Рис. 43).

4.44 Кресло медицинское БТ-СТК-3 со спинкой, для врача, с подлокотниками, с пневматической регулировкой высоты сиденья, регулировка производится рукояткой под сиденьем, основание – литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка – пенополиуретан с обивкой из искусственной кожи. Подлокотники с регулировкой по высоте. Колеса пластиковые, $\varnothing$ 50 мм. (Рис. 44).

4.45 Кресло медицинское БТ-СТК-4 со спинкой, для врача, с подлокотниками, с пневматической регулировкой высоты сиденья, регулировка производится рукояткой под сиденьем, основание – литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка – пенополиуретан с обивкой из искусственной кожи. Подлокотники из полиуретана, нерегулируемые. Колеса пластиковые, $\varnothing$ 50 мм. (Рис. 45).

4.46 Кресло медицинское Гранд для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, опора и опорное кольцо- пластиковые, подлокотники - полиуретан, обивка - кожзаменитель. (Рис. 46).

4.47 Кресло медицинское Синди D80 для персонала на роликовой опоре, механизм – газ/лифт, опора и опорное кольцо- хромированное, подлокотники - хромированные, обивка – кожзаменитель. (Рис. 47).

4.48 Кресло медицинское Кейт для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, опора и опорное кольцо- пластиковые, подлокотники - полиуретан, обивка - кожзаменитель. (Рис. 48).

4.49 Кушетка медицинская БТ-А01 смотровая, 2-х секционная, каркас сварной из профильной трубы, подголовник регулируется по углу наклона, обивка - искусственная кожа, опоры регулируемые. (Рис. 49).

4.50 Кушетка медицинская БТ-А02 смотровая, 2-х секционная, каркас сварной из профильной трубы, подголовник регулируется по углу наклона, обивка - искусственная кожа, опоры регулируемые. (Рис. 50).

4.51 Кушетка медицинская БТ-А06 смотровая, 2-х секционная, каркас сварной из профильной трубы, подголовник регулируется по углу наклона, обивка - искусственная кожа, опоры регулируемые. (Рис. 51).

4.52 Кушетка медицинская БТ-А07 смотровая, 2-х секционная, каркас сварной из профильной трубы, подголовник регулируется по углу наклона, обивка - искусственная кожа, опоры регулируемые. (Рис. 52).

4.53 Кушетка медицинская БТ-А08 смотровая, 2-х секционная, каркас сварной из профильной трубы, подголовник регулируется по углу наклона, обивка - искусственная кожа, опоры регулируемые. (Рис. 53).

4.54 Кушетка медицинская БТ-А04 для физиотерапии, 2-х секционная, каркас из массива натурального бука, подголовник регулируется по углу наклона, обивка - искусственная кожа. (Рис. 54).

4.55 Кушетка медицинская БТ-А05 для физиотерапии, 2-х секционная, каркас из массива натурального бука, подголовник регулируется по углу наклона, обивка - искусственная кожа. (Рис. 55).

4.56 Банкетка медицинская БТ-А03-1, каркас сварной из профильной трубы, обивка – искусственная кожа, опоры регулируемые. (Рис. 56).

4.57 Банкетка медицинская БТ-А03-2, каркас сварной из профильной трубы, обивка – искусственная кожа, опоры регулируемые. (Рис. 57).

- 4.58 Банкетка медицинская БТ-А03-3, каркас сварной из профильной трубы, обивка – искусственная кожа, опоры регулируемые. (Рис. 58).
- 4.59 Банкетка медицинская БТ-А03-4, каркас сварной из профильной трубы, обивка – искусственная кожа, опоры регулируемые. (Рис. 59).
- 4.60 Банкетка медицинская БТ-А03-5, каркас сварной из профильной трубы, обивка – искусственная кожа, опоры регулируемые. (Рис. 60).
- 4.61 Ширма медицинская БТ-Ш-1, передвижная, на колесах, односекционная, каркас - профильная труба с антикоррозионным покрытием, экран из моющегося материала (Рис.61).
- 4.62 Ширма медицинская БТ-Ш-2, передвижная, на колесах, двухсекционная, каркас - профильная труба с антикоррозионным покрытием, экран из моющегося материала (Рис.62).
- 4.63 Ширма медицинская БТ-Ш-3, передвижная, на колесах, трехсекционная, каркас - профильная труба с антикоррозионным покрытием, экран из моющегося материала. (Рис. 63).
- 4.64 Ширма медицинская БТ-Ш-4 для физиотерапии, стационарная, односекционная, каркас- шпон натурального бука, экран из моющегося материала. (Рис. 64).
- 4.65 Ширма медицинская БТ-Ш-5 для физиотерапии, стационарная, двухсекционная, каркас- шпон натурального бука, экран из моющегося материала. (Рис. 65).
- 4.66 Ширма медицинская БТ-Ш-6 для физиотерапии, стационарная, трехсекционная, каркас- шпон натурального бука, экран из моющегося материала. (Рис. 66).
- 4.67 Ступенька медицинская БТ-СТ-1, одна плоскость, каркас- профильная труба с антикоррозионным покрытием, поверхность – пластик. (Рис. 67).
- 4.68 Ступенька медицинская БТ-СТ-2, две плоскости, каркас- профильная труба с антикоррозионным покрытием, поверхность – пластик. (Рис. 68).
- 4.69 Ступенька медицинская БТ-СТ-3 для физиотерапии, одна плоскость изготовлена из массива натурального бука (Рис. 69).
- 4.70 Ступенька медицинская , БТ-СТ-4, одна плоскость, изготовлена полностью из нержавеющей стали. (Рис. 70).
- 4.71 Ступенька медицинская , БТ-СТ-5, две плоскости, изготовлена полностью из нержавеющей стали. (Рис. 71).

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

- 5.1 Перед подготовкой БТ-Мебель к эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- 5.2 Распакуете изделие, проверьте его визуальным осмотром, проверьте комплектность.
- 5.3 Проверьте работоспособность изделия.

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 Перед началом использования проверьте исправность изделия.
- 6.2 Перед началом использования установите «БТ-Мебель» в рабочее положение

7 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ

7.1 БТ-Мебель транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта. Транспортирование мебели морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки - контейнерная и мелкая.

7.2 Условия транспортирования БТ-Мебели, изготовленной по условиям климатического исполнения УХЛ 4.2, по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

7.3 БТ-Мебель в упаковке предприятия - изготовителя должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже + 2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

8 МАРКИРОВКА

8.1 Маркировка мебели БТ – по ГОСТ Р 50444.

8.2 На стульях, табуретах, кушетках и банкетках должны быть прикреплены таблички (см. фотографии), на которых должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование или обозначение изделия;
- номер изделия;
- обозначение настоящих технических условий.

8.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. На ящик должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Верх», «Беречь от влаги», «Законсервировано до ...».

9 УПАКОВКА

9.1 Упаковка мебели БТ – по ГОСТ Р 50444.

9.2. Перед упаковкой металлические поверхности мебели БТ должны быть законсервированы по ГОСТ 9.014 для условий хранения 2: ВЗ-1, ВУ-1.

Срок защиты без переконсервации – 2 года.

9.3 Каждый элемент мебели БТ вместе с эксплуатационной документацией должен быть упакован в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10254.

9.4 Для транспортирования каждый элемент мебели БТ должен быть уложен в короб из гофрированного картона по ГОСТ 7276.

9.5 В каждую транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист по ГОСТ Р 50444.

10 УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

10.1 Перечень утилизируемых составных частей изделий медицинской мебели «БТ-Мебель» состоят из среднего показателя (Σ) материалов:

- Табуреты, Σ : металл 75%, пластик 5%, кожезаменитель 5%, пенополиуретан 10%, фанера 5%;
- Стулья, Σ : металл 60%, кожезаменитель 10%, дерево 15%, пластик 5%;
- Кресла, Σ : металл 65%, кожезаменитель 15%, пенополиуретан 15%, пластик 5%;
- Кушетки, Σ : металл 70%, кожезаменитель 13%, пенополиуретан 15%, пластик 2%;
- Банкетки, Σ : металл 70%, кожезаменитель 13%, пенополиуретан 15%, пластик 2%;
- Ширмы, Σ : металл 70%, пластик 5%, дерево 10%, ткань с пропиткой 15%;
- Ступеньки, Σ : металл 85%, пластик 5%, дерево 10%.

Материалы, из которых изготовлены изделия медицинской мебели, не наносят вреда здоровью людей и окружающей среде.

10.2 Все упаковочные части могут быть выброшены как обычный мусор.

10.3 Утилизация изделий медицинской мебели должна проводиться в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мебель медицинская для кабинетов и палат «БТ-Мебель»

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий
ТУ 9452-008-99653782-2015
и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П. _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Мебель медицинская для кабинетов и палат «БТ-Мебель»

упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1 Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течении 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока все обнаруженные неисправности, произошедшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Изделия с дефектами, возникшими в результате небрежного обращения, к гарантийному обслуживанию не принимаются.

Гарантийный ремонт и замена производятся изготовителем по адресу:

Россия, 115230 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 42, стр. 1

ООО ПТК «БЕЛВА»

тел./факс 8(495) 258-98-96

E-mail:info@belva.ru

Подпись и дата

Дата

Подпись и дата

№ по подл

Действителен

по заполнении

ООО ПТК «Белва»
115230, Москва,
Варшавское шоссе, дом 42, стр.1

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Мебель медицинская для кабинетов и палат БТ-Мебель _____

Представитель фирмы _____

Заводской номер _____

Дата продажи _____

Продан _____

Наименование организации продавшей изделие

Штамп организации
продавшей изделие

Действителен
по заполнении

ООО ПТК «Белва»
115230, Москва,
Варшавское шоссе, дом 42, стр.1

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Мебель медицинская для кабинетов и палат БТ-Мебель _____

Представитель фирмы _____

Заводской номер _____

Дата продажи _____

Продан _____

Наименование организации продавшей изделие

Штамп организации
продавшей изделие

БТ-Мебель - 00.000 РЭ

Лист

20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рис. 1 – Рис. 71.

**Кушетка медицинская «БТ-Мебель» модель БТ-А-05
(фото 1-3)**

ТУ 9451-008-99653782-2015

22

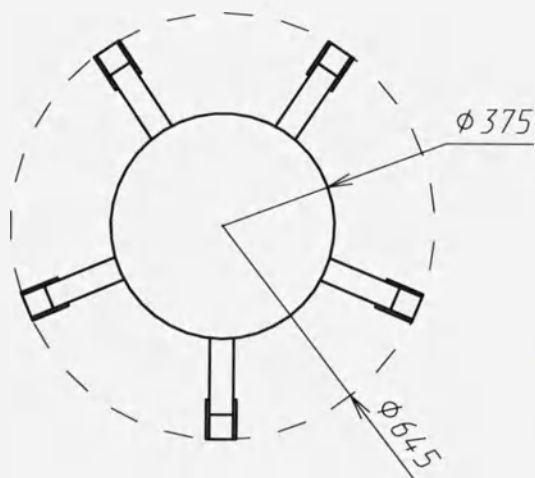
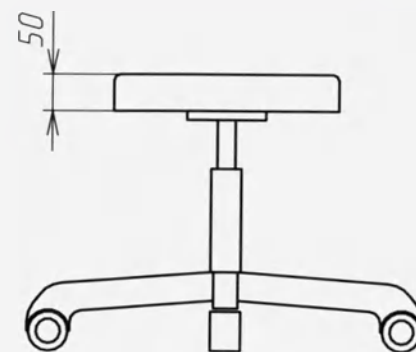
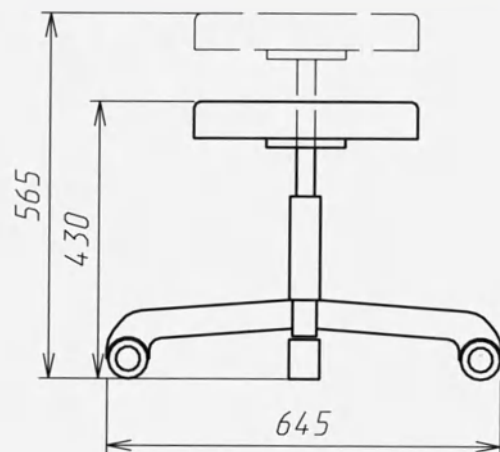


Рис. 1

ТУ 9451-008-99653782-2015

Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ефанова					6 кг	
Проб.							
Табурет медицинский "БТ-Мебель"					Лист 22		
БТ-ТБМ-1					Листов		

ТУ 9451-008-99653782-2015

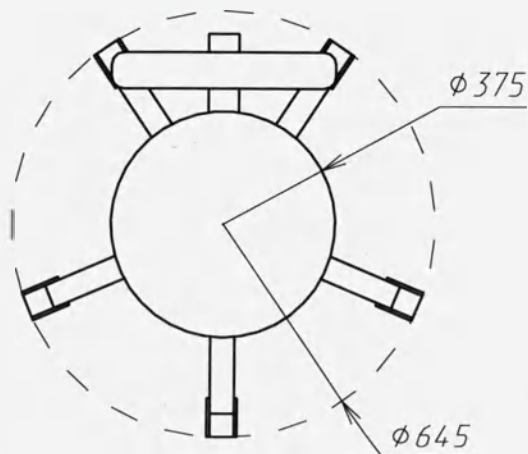
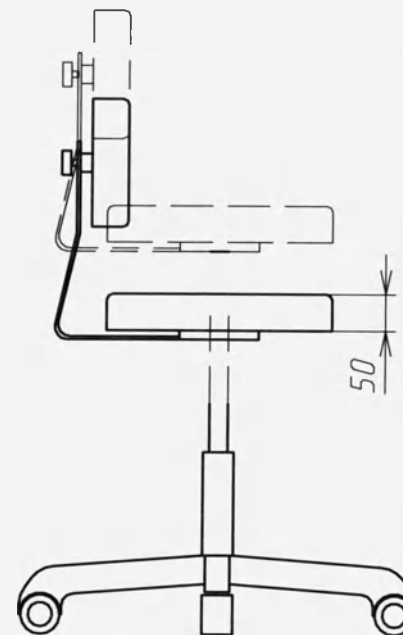
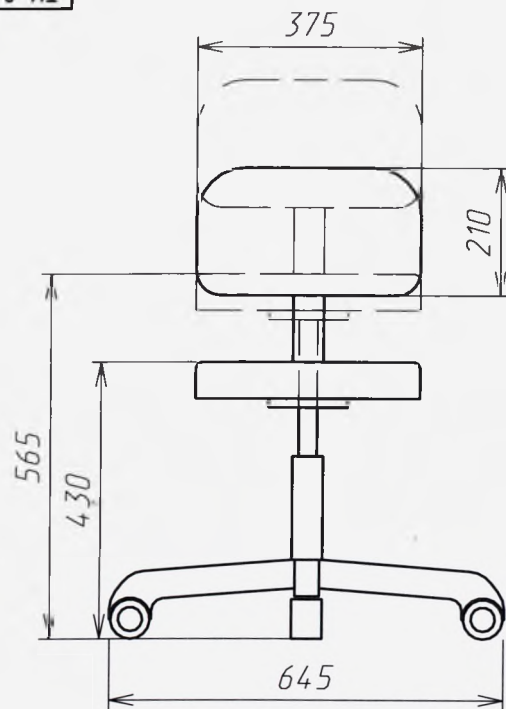


Рис. 2

Изм. №	Подп.	Дата	Взам. инж.	№ инж.	№ док.	Подп.	Дата

ТУ 9451-008-99653782-2015							
Изм.	Лист	И. док.	Подп.	Дата	Табурет медицинский "БТ-Мебель"		
Разраб.	Ефанова				8 кг		
Пров.					Лист 23		
И. док.					Лист 23		

ТУ 9451-008-99653782-2015

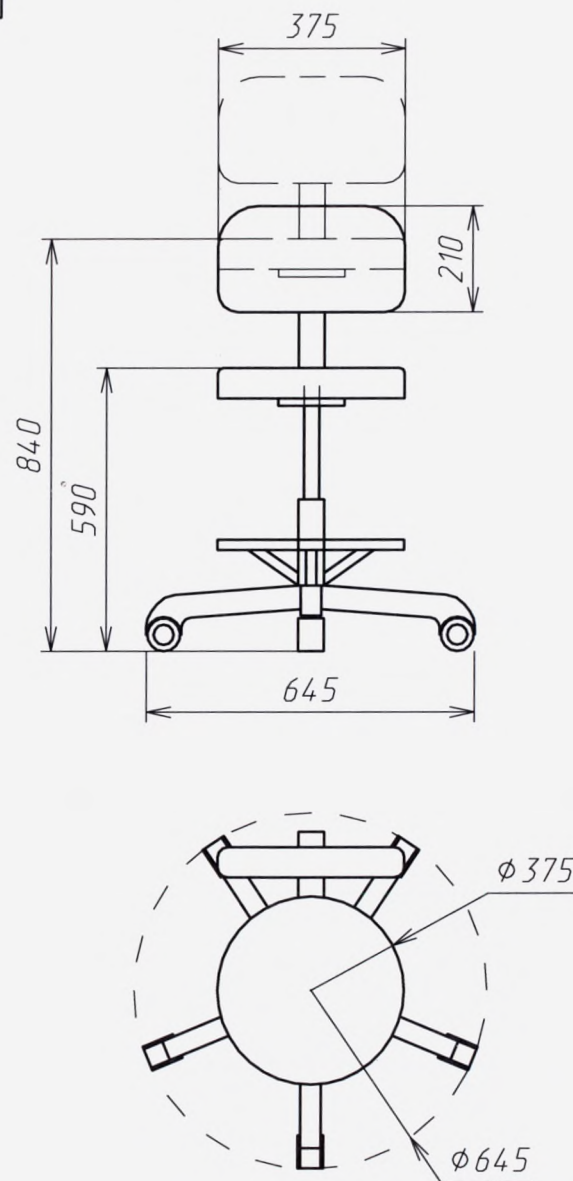


Рис. 3

						ТУ 9451-008-99653782-2015					
						Табурет медицинский "БТ-Мебель" БТ-ТБМ-3			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата						9 кг	
Разраб.		Ефанова									
Пров.									Лист 24	Листов	
						000 ПТК "Белва"					

ТУ 9451-008-99653782-2015

23

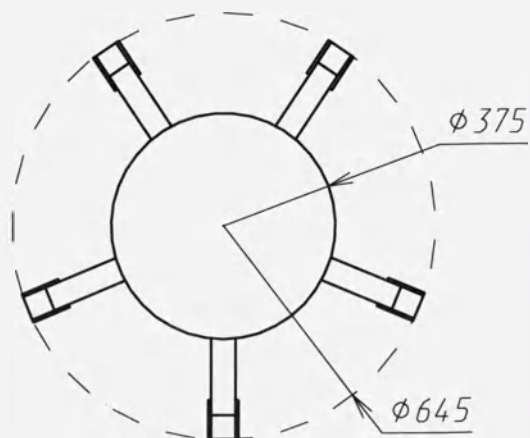
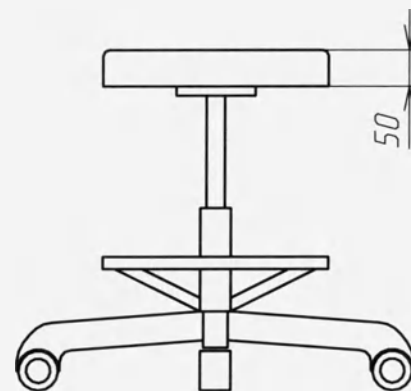
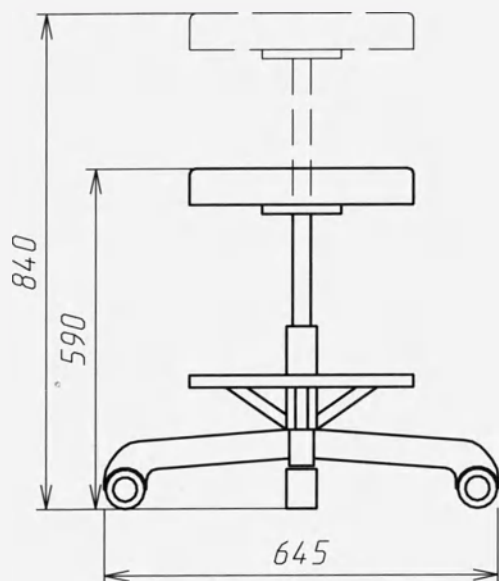


Рис. 4

					ТУ 9451-008-99653782-2015		
					Лит.	Масса	Масштаб
						11кг	
					Лист 23 Листов		
					000 ПТК "Белва"		

И.м.	Лист	И.м. док.м.	Подп.	Дата
Разраб.		Ефанова		
Пров.				

Табурет медицинский "БТ-Мебель"
БТ-ТБМ-4

ТУ 9451-008-99653782-2015

26

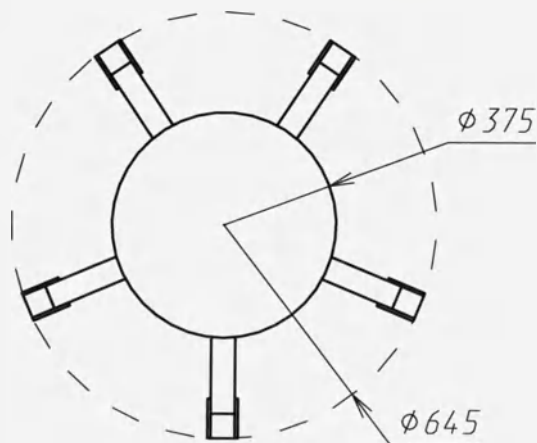
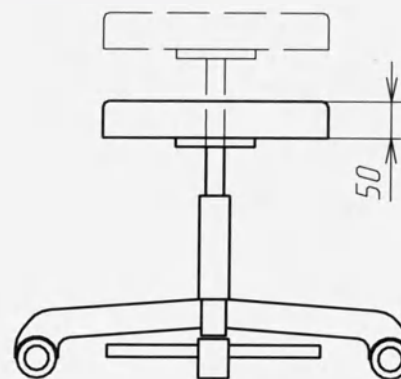
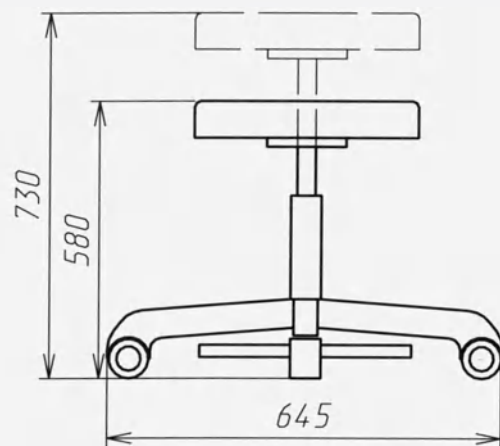


Рис. 5

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. № инв.	№ докл.	Подп. и дата

					ТУ 9451-008-99653782-2015		
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Ефанова				8кг	
Проб.							
Табурет медицинский "БТ-Мебель"							
БТ-ТБМ-5							
					Лист 26	Листов	
					000		

ТУ 9451-008-99653782-2015

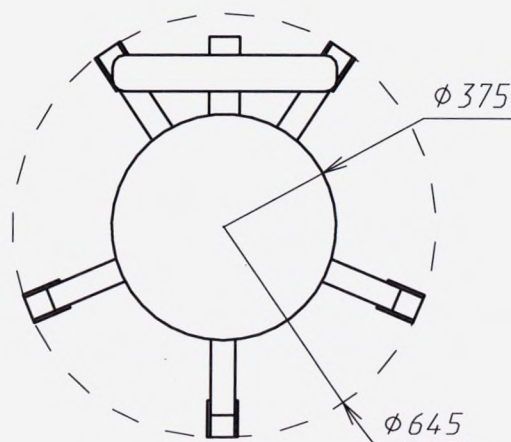
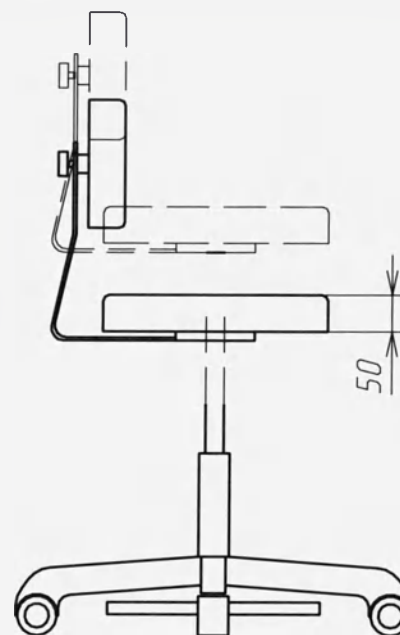
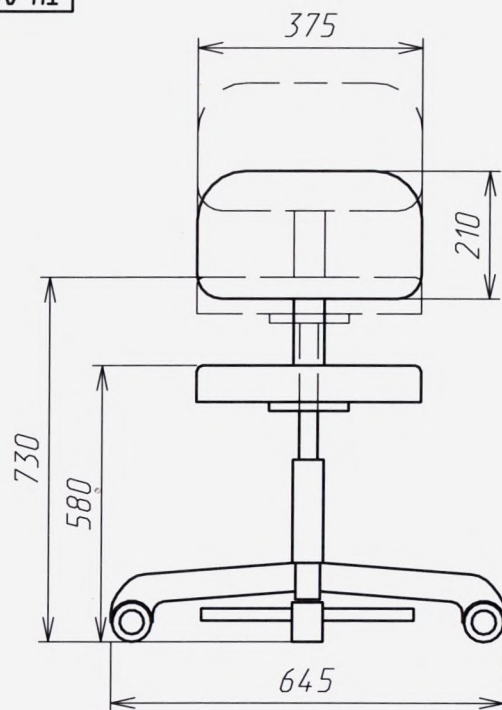


Рис. 6

№ подл.	Подп.	Дата	Изм. инв.	№ инв.	№ дубл.	Подп.	Дата

						ТУ 9451-008-99653782-2015		
						Табурет медицинский "БТ-Медель"		
						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			12 кг	
Разраб.		Ефанова			БТ-ТБМ-6			
Пров.					Лист	1	Листов	1

2

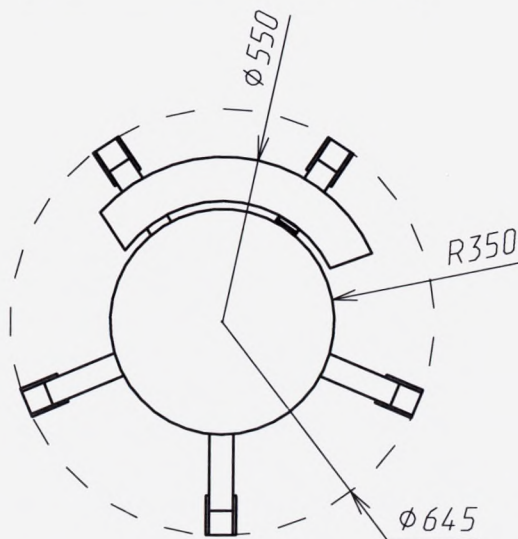
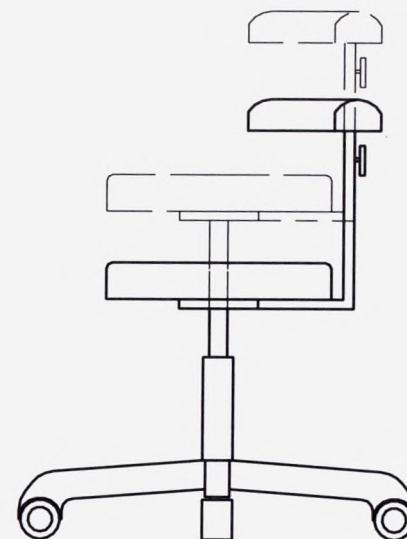
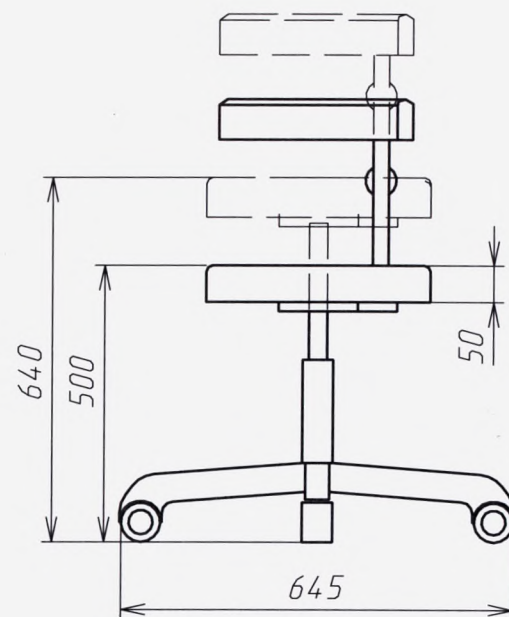


рис. 7

№№ покл.	Подп. и дата	Взам. инв. № инв.	Подп. и дата

						ТУ 9451-008-99653782-2015				
						Табурет медицинский "БТ-Медель"				
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.		Ефанова					1кг±			
Пров.						Лист 28		Листов	000 ПК "Белвет"	
И контр.										

ТУ 9451-008-99653782-2015

29






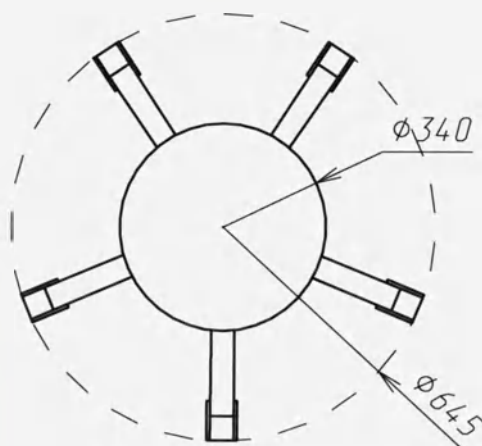


Рис. 8

И. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. № инд.	№ дубл.	Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015					Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	Н докум.	Подп.	Дата	Табурет медицинский "БТ-Медель" БТ-ТБМ-8		
Разраб.	Ефанова						
Проб.					9 кг		
					Лист 25	Листов	

30

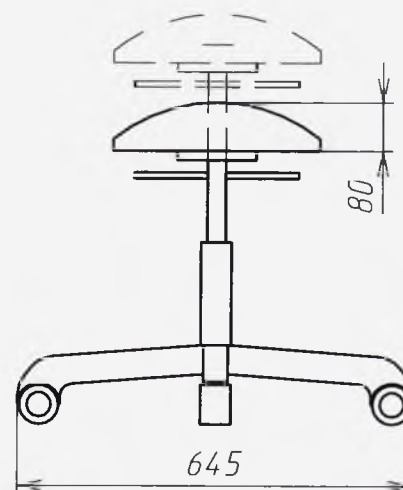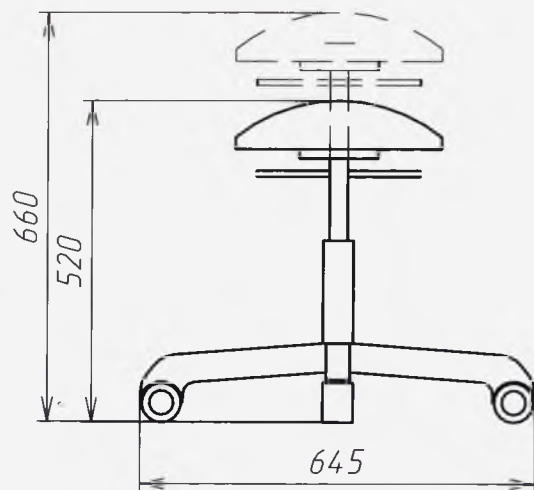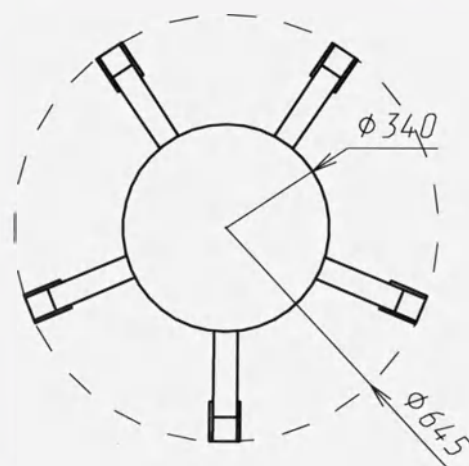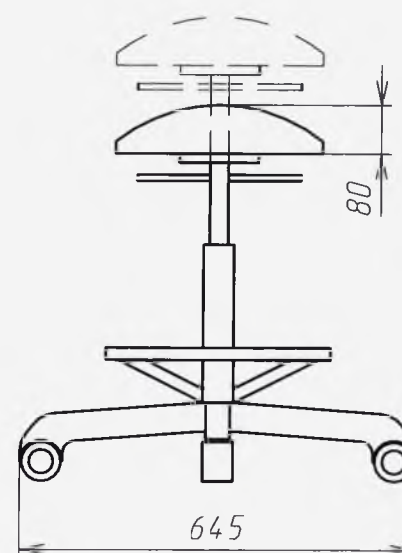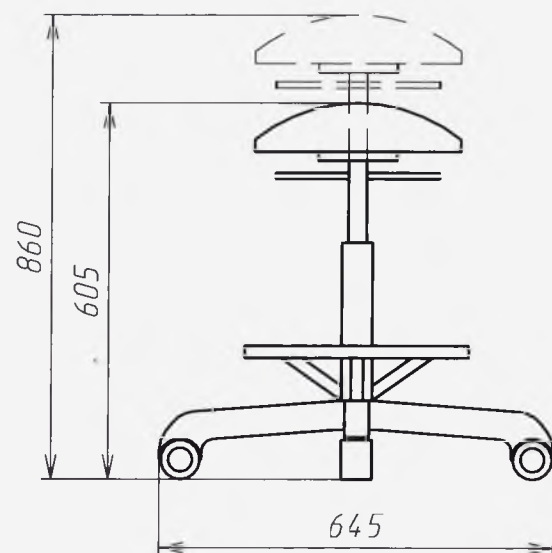

puc. 9

						ТУ 9451-008-99653782-2015					
						Табурет медицинский "БТ-Медель"					
							Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	N докум.		Подп.	Дата			11кг			
Разраб.	Ефанова										
Пробв.											
						Лист 30 из 30					
						ООО ПКФ "Беларусь"					

ТУ 9451-008-99653782-2015

31

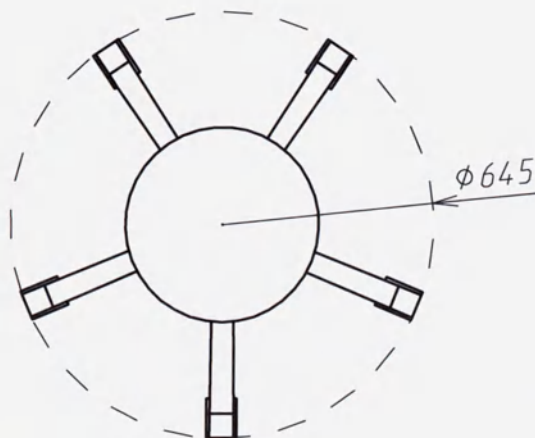
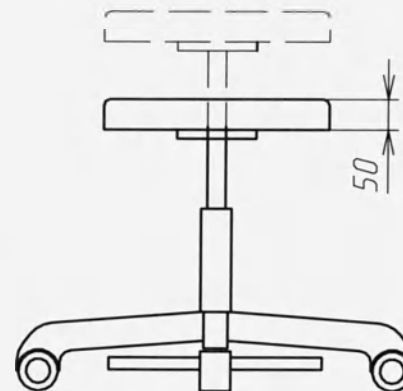
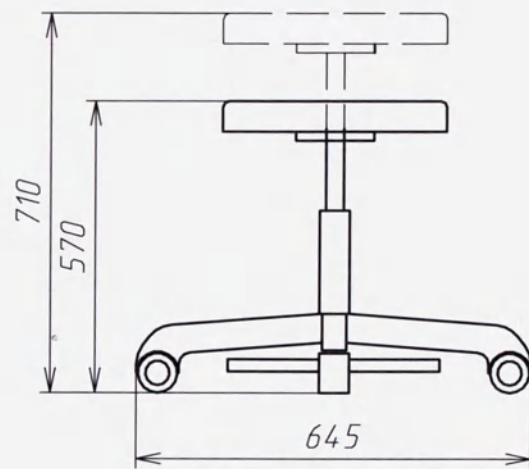


рис. 10

И. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. № инв.	№ дубл.	Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Табурет медицинский "БТ-Медель"		
Разраб.	Ефанова				БТ-ТБМ-10		
Пров.					9 кг		
					Лист 3 из 3		

ТУ 9451-008-99653782-2015

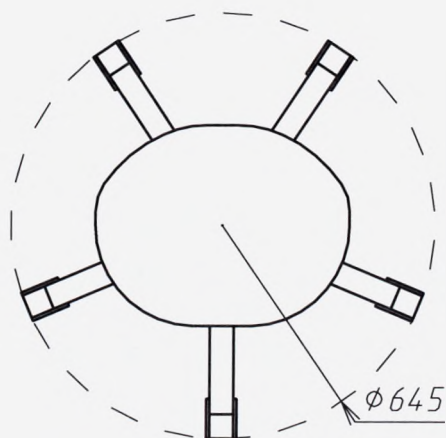
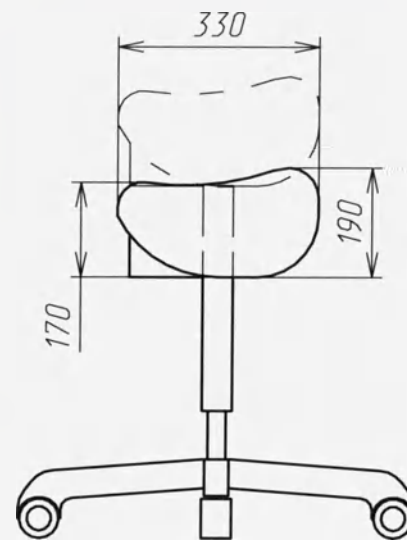
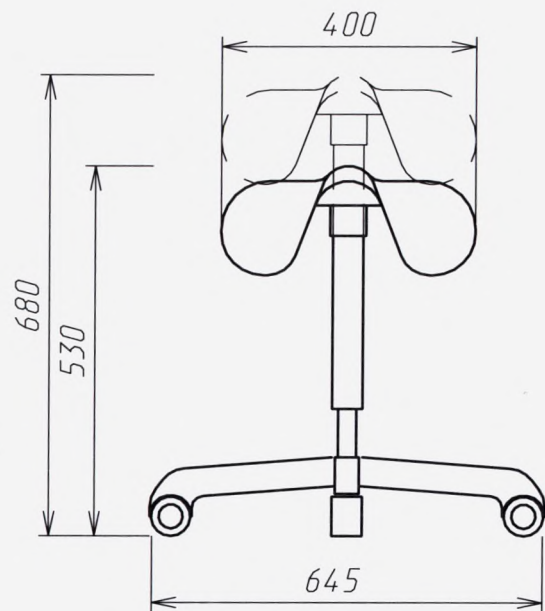


Рис. 11

ТУ 9451-008-99653782-2015

Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ефанова					9кг	
Проб.							

Табулет медицинский "БТ-Мебель"
БТ-ЭРГО-1

И. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. № инв.	№ дубл.	Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015

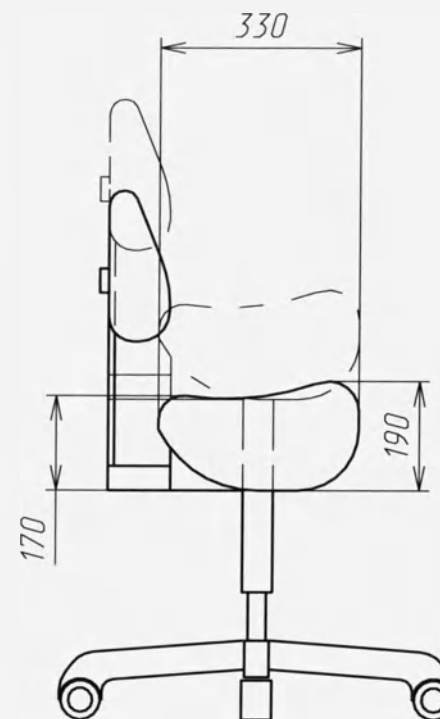
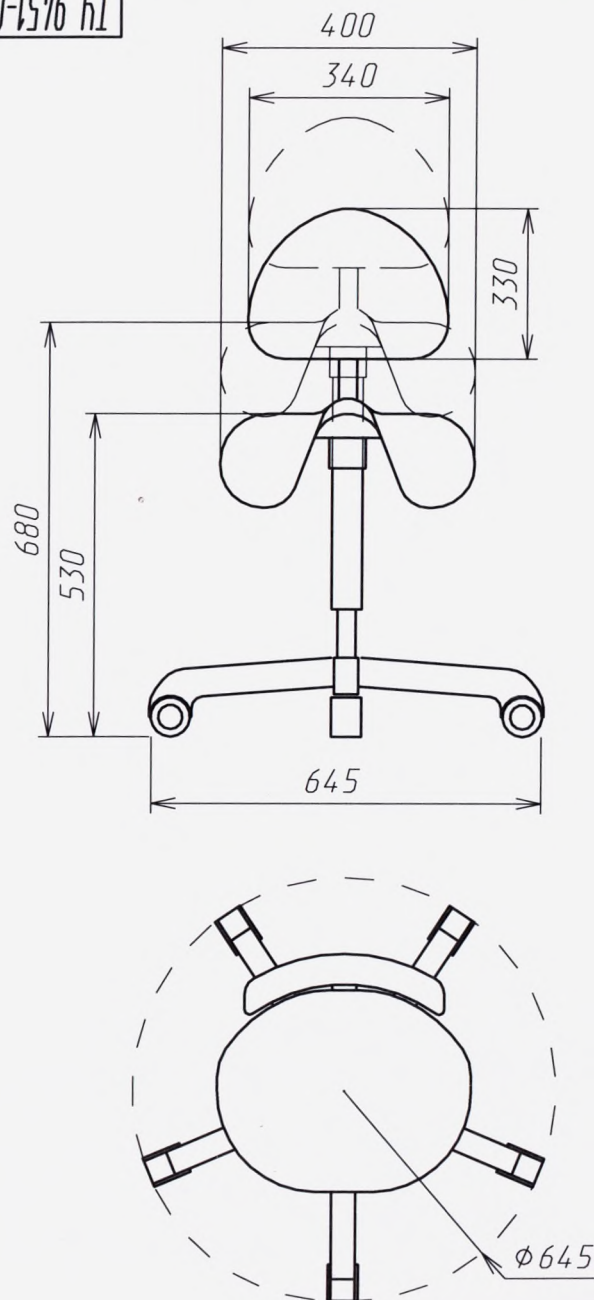


Рис. 12

ТУ 9451-008-99653782-2015					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	Н докум.	Подп.	Дата	Табурет медицинский "БТ-Мебель"			10 кг	
Разраб.	Ефанова				БТ-ЭРГО-2				
Пров.									

ТУ 9451-008-99653782-2015

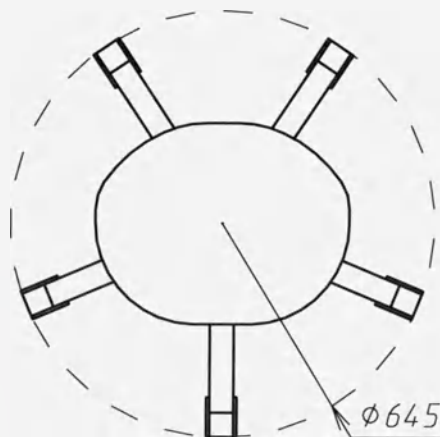
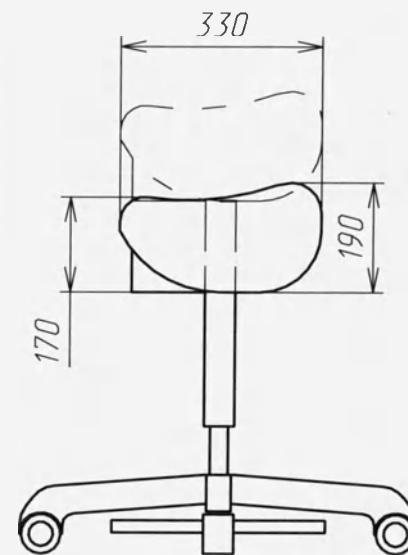
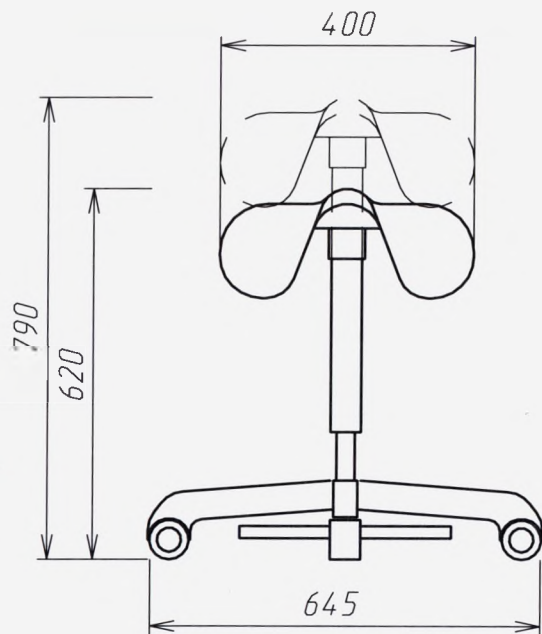


рис. 13

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инд. № инд.	№ инд.	Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015				
Изм.	Лист	Н докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ефанова			
Пров.				
Табурет медицинский "БТ-Медель"				
БТ-ЭРГО-3				
Лит.	Масса	Масштаб	Лист 3 из 4	
	9 кг			

ТУ 9451-008-99653782-2015

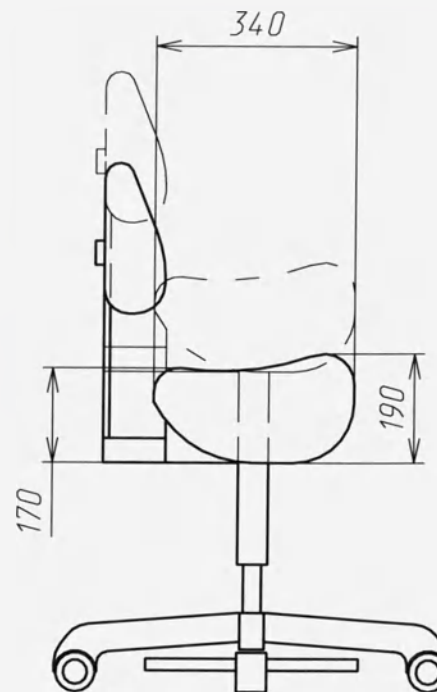
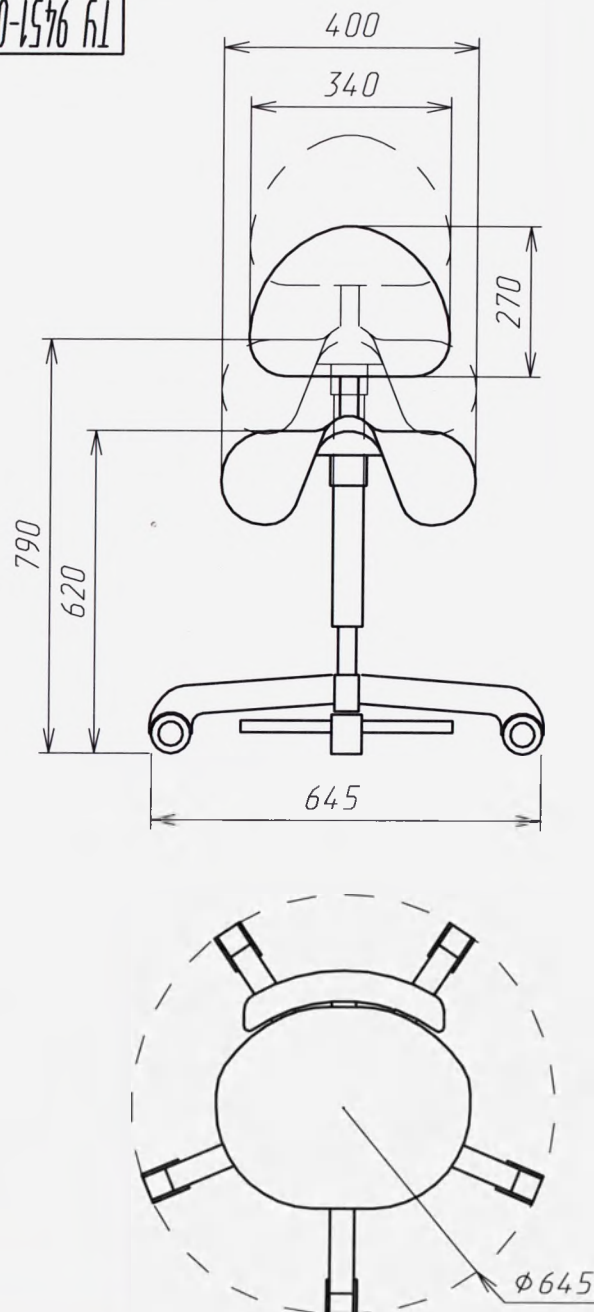


Рис. 14

ТУ 9451-008-99653782-2015					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Табурет медицинский "БТ-Мебель"		
Разраб.	Ефанова				13 кг		
Проб.					Лист 3.5 Листов		
БТ-ЭРГО-4							

ТУ 9451-008-99653782-2015

36

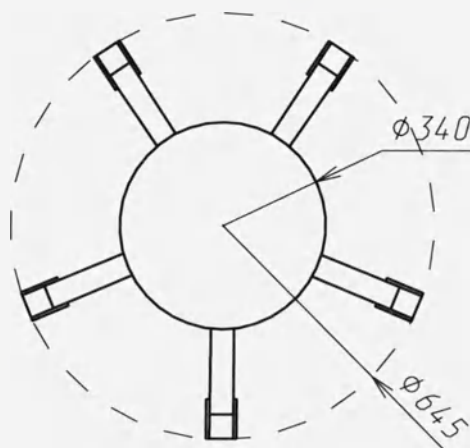
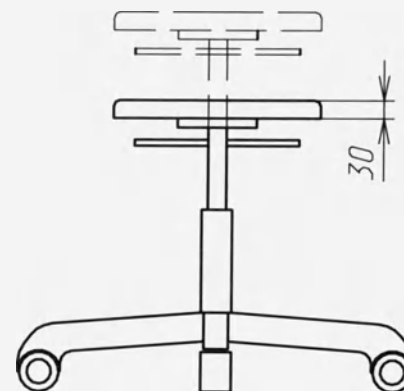
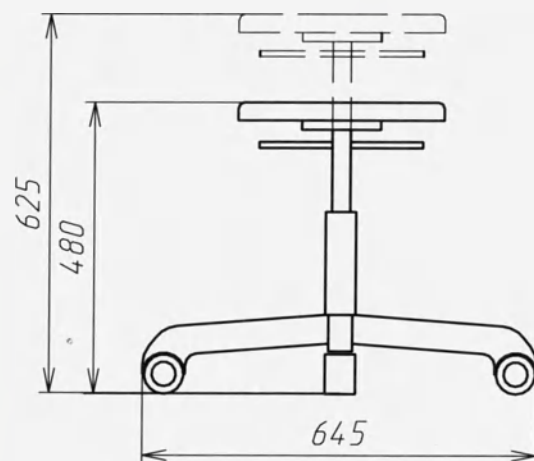


Рис. 15

ТУ 9451-008-99653782-2015					Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Табурет медицинский "БТ-Медель"			7кг	
Разраб.	Ефанова				БТ-СТТ-1				
Проб.									

ТУ 9451-008-99653782-2015

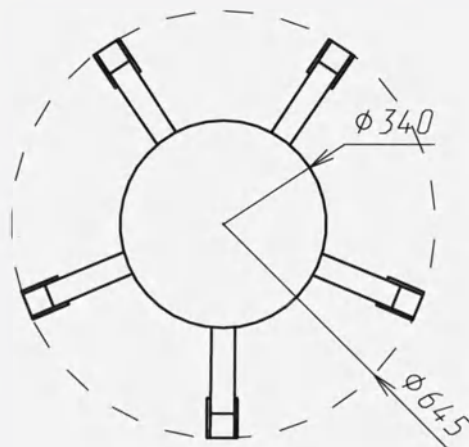
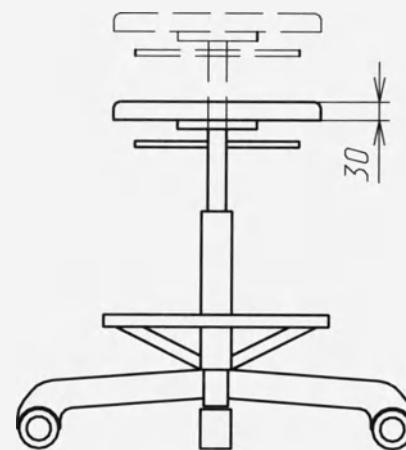
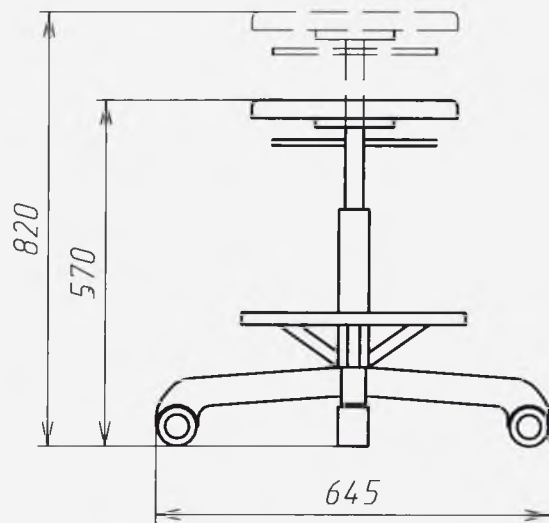


Рис. 16

№ подл.	Подп.	и дата	Взам. инв.	№ инв.	№ докл.	Подп.	и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015							Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Табурет медицинский "БТ-Медель" БТ-СТТ-2				
Разраб.	Ефанова								
Пров.									
							Лист 22	Листов	

ТУ 9451-008-99653782-2015

83

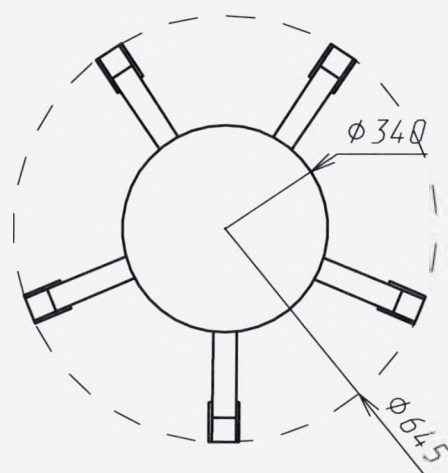
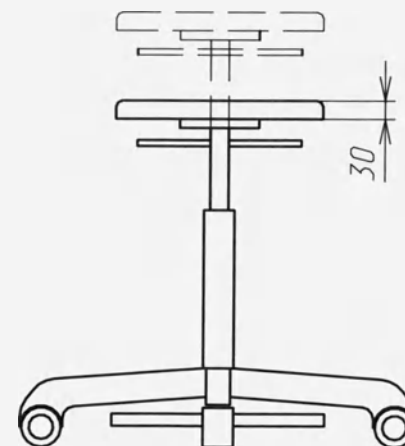
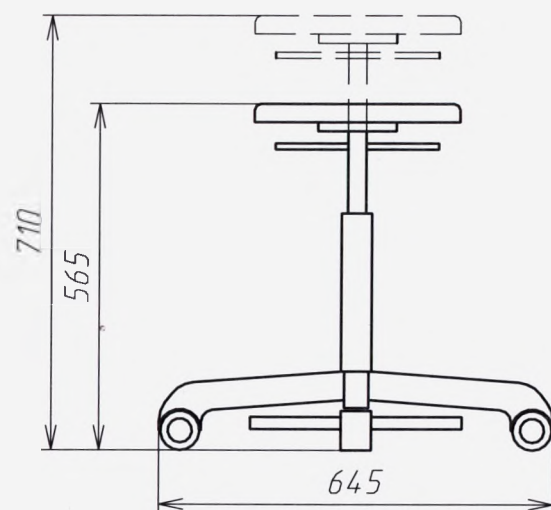


Рис. 17

ТУ 9451-008-99653782-2015

Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Табурет медицинский "БТ-Медель"	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ефанова				БТ-СТТ-3		9кг	
Пров.						Лист 3	Листов	

১৩

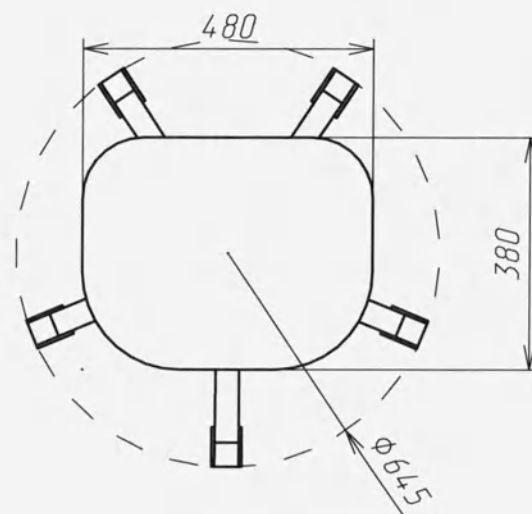
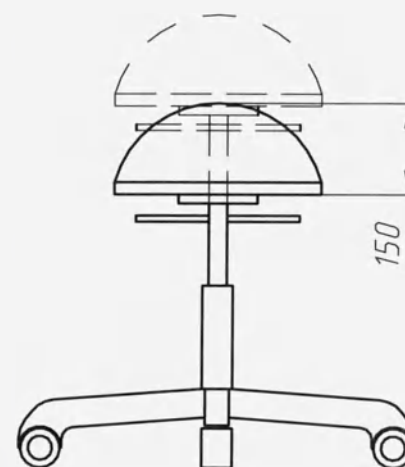
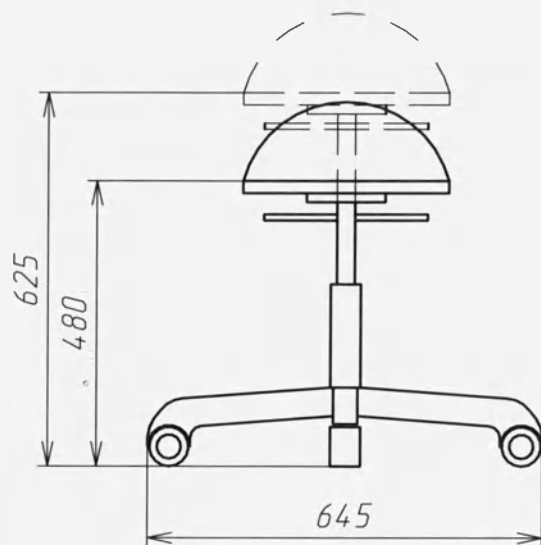


Рис. 18

							ТУ 9451-008-99653782-2015					
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Табурет медицинский "БТ-Медель" БТ-СТТ-4				Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.		Ефанова									8кг	
Пров.									Лист 3 из 3		Листов	

ТУ 9451-008-99653782-2015

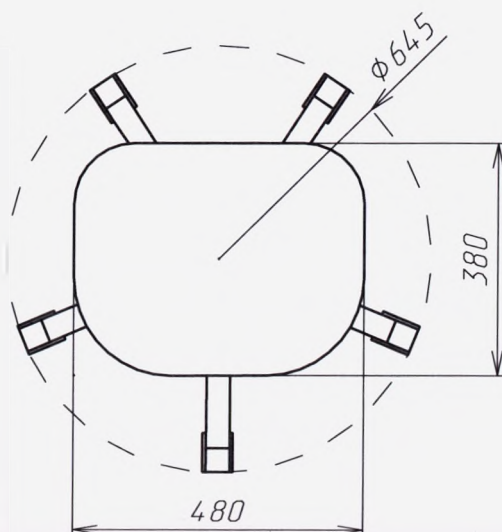
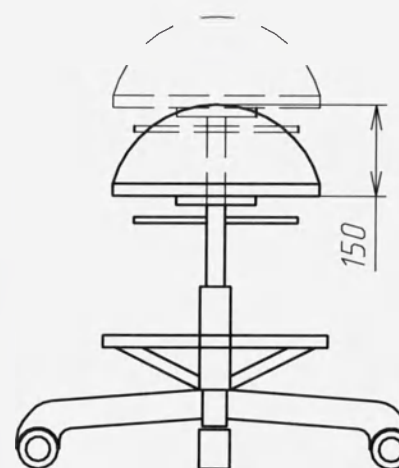
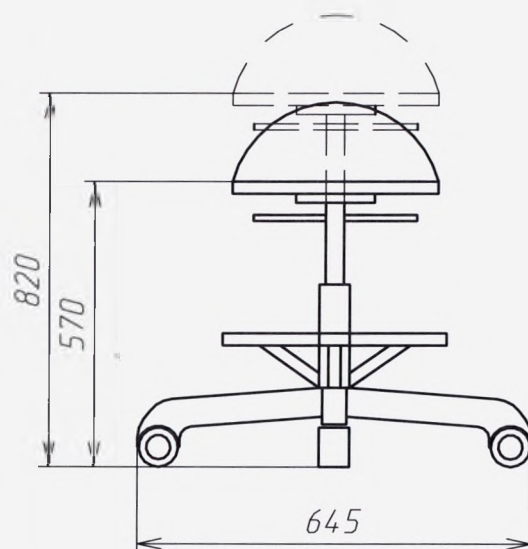


рис. 19

					ТУ 9451-008-99653782-2015				
					Табурет медицинский "БТ-Мебель" БТ-СТТ-5		Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Ефанова							9кг	
Пров.									
						Лист 70	Листов		

ТУ 9451-008-99653782-2015

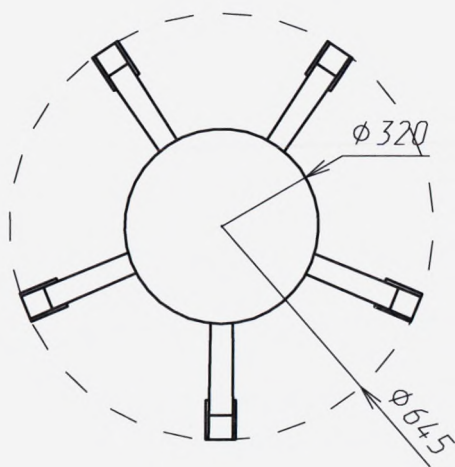
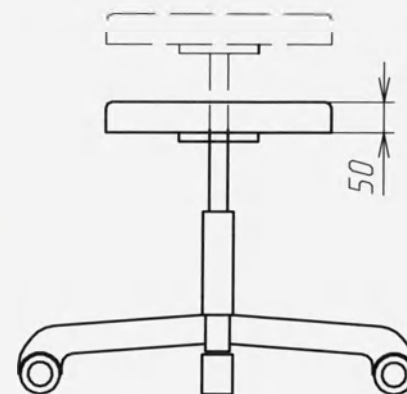
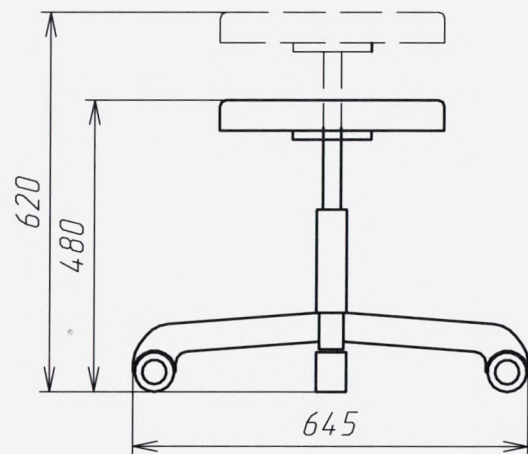


Рис. 20

					ТУ 9451-008-99653782-2015		
Иж.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Ефанова				7кг	
Проб.							
Туалет медицинский "БТ-Медель"					Лист 41	Листов	
БТ-СТТ-6							

ТУ 9451-008-99653782-2015

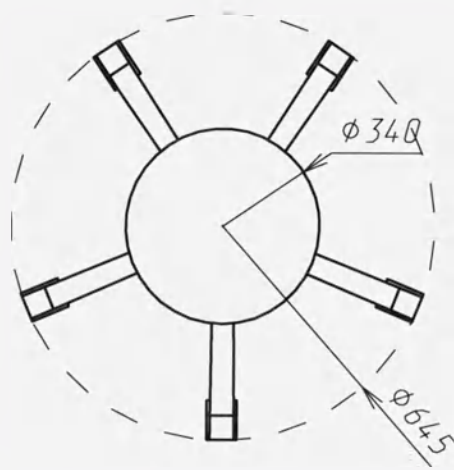
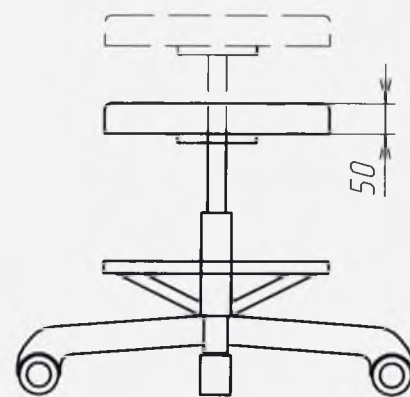
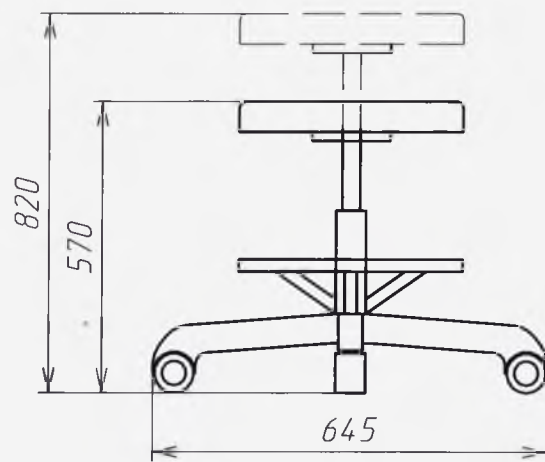


Рис. 21

					ТУ 9451-008-99653782-2015			
					Табурет медицинский "БТ-Мебель" БТ-СТТ-7	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Ефанова					8кг	
Проб.						Лист 21	Листов	

ТУ 9451-008-99653782-2015

43

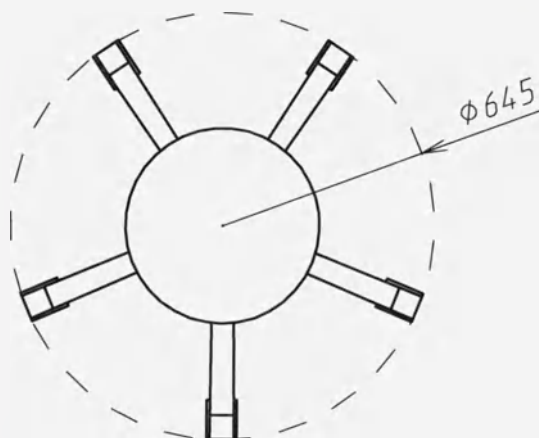
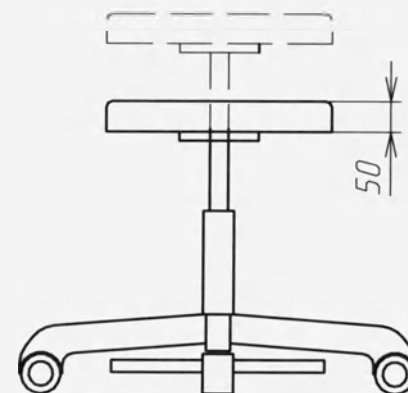
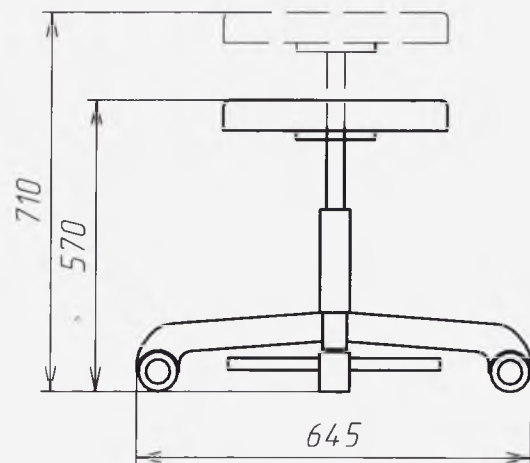


Рис. 22

ТУ 9451-008-99653782-2015					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Табурет медицинский "БТ-Мебель"		
Разраб.	Ефанова				9 кг		
Пров.					БТ-СТТ-8		
					Лист 47	Листов	

Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. № инв.	№ дудл	Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015

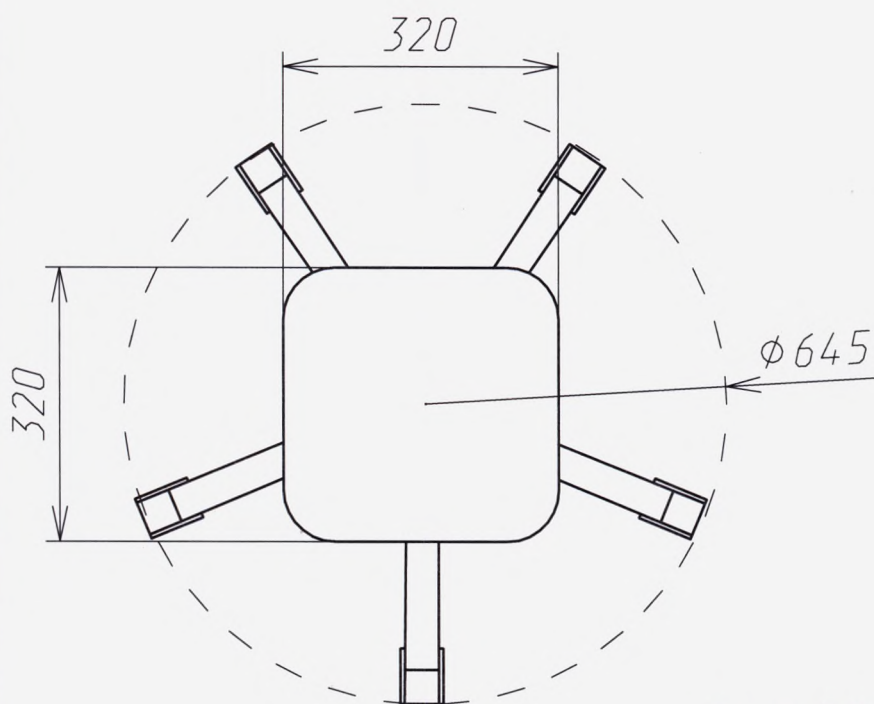
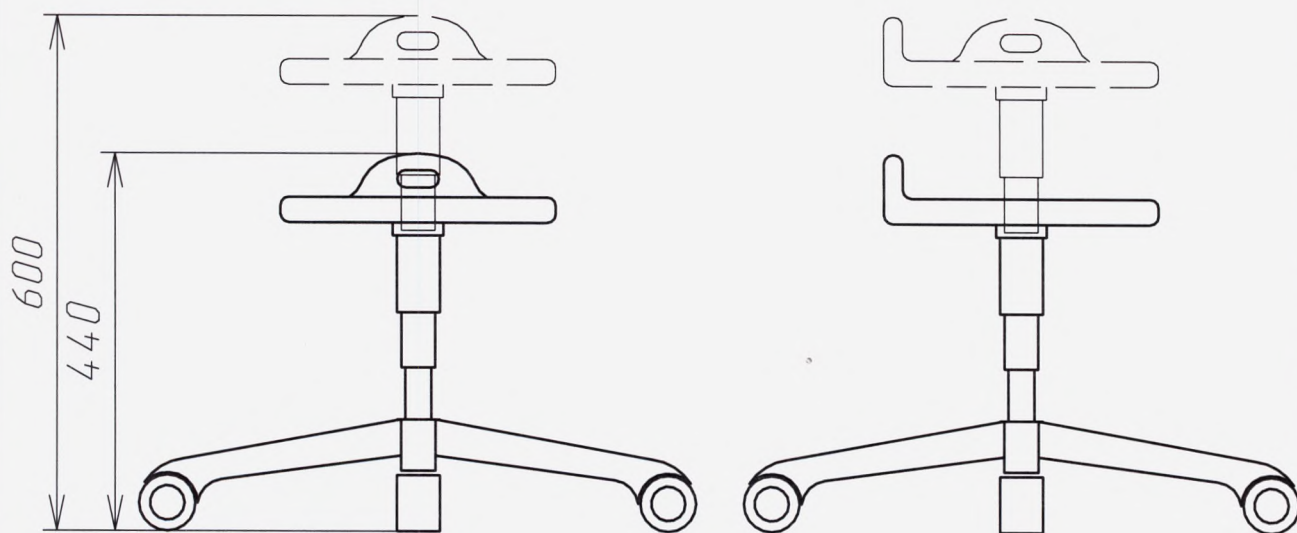


Рис. 23

ТУ 9451-008-99653782-2015							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Табурет медицинский "БТ-Медель" БТ-СТТ-9		
Разраб.	Ефанова						
Пров.							
Н.контр.					000 ПТК "Белва"		
Утв.							
					Лит.	Масса	Масштаб
						8 кг	
					Лист 44	Листов	

Копировал

Формат А4

44

ТУ 9451-008-99653782-2015

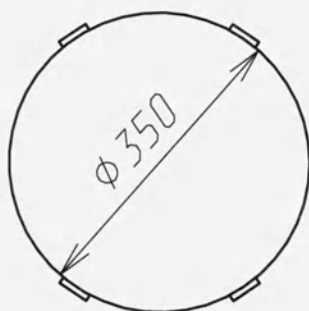
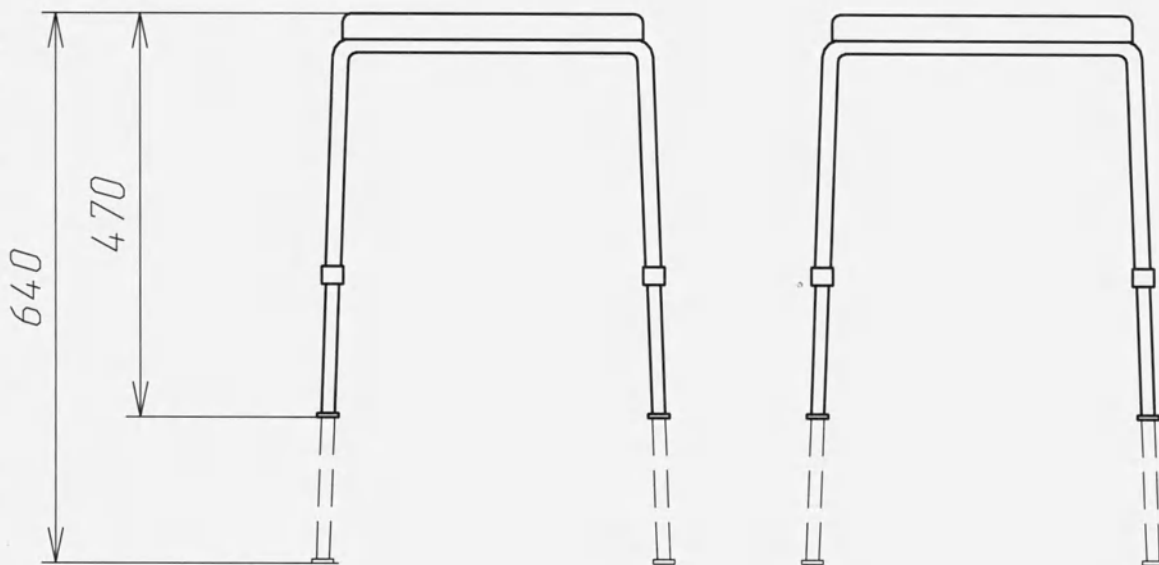


Рис. 24

					ТУ 9451-008-99653782-2015				
					Табурет медицинский "БТ-Медель" БТ-СТТ-10	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Ефанова						6 кг		
Пров.									
						Лист 45	Листов		
Н.контр.						000 ПТК "Белва"			
Утв.									

Копировал

Формат А4

ТУ 9451-008-99653782-2015

46

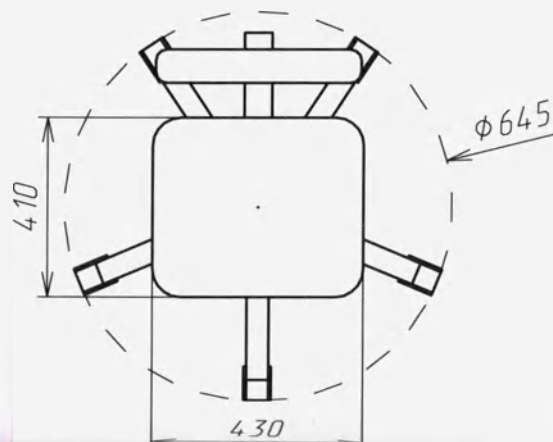
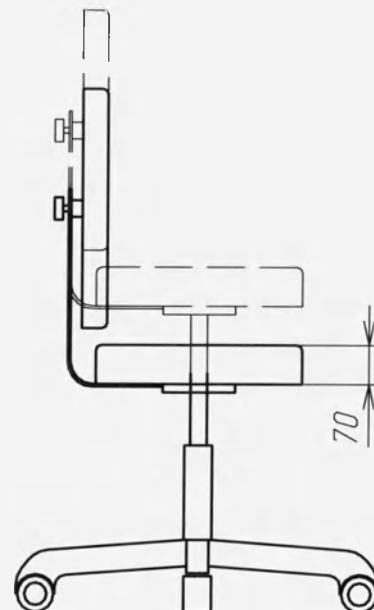
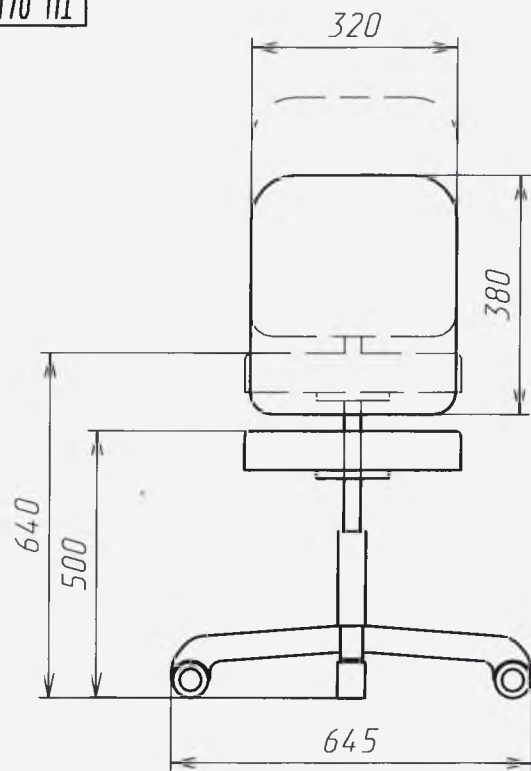


Рис. 25

Изм. Подп. и дата

Взам. инв. № инв. № дубл. Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		11кг	
Разраб.	Ефанова						
Пров.							
Стул медицинский "БТ-Медель"					Лист 46	Листов	
БТ-СТС-1							

ТУ 9451-008-99653782-2015

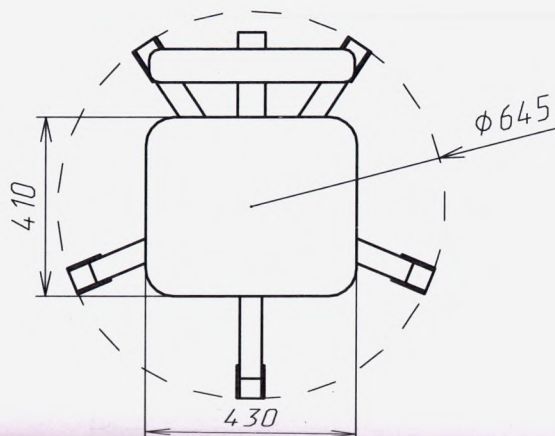
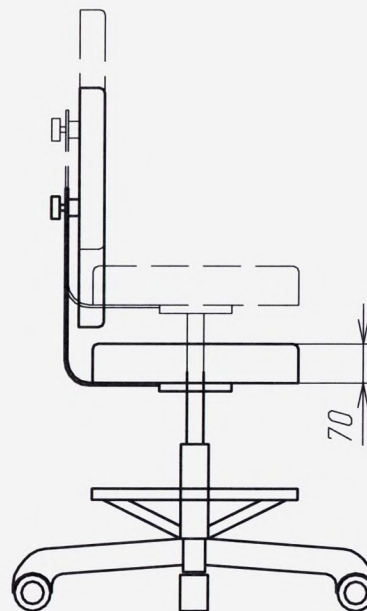
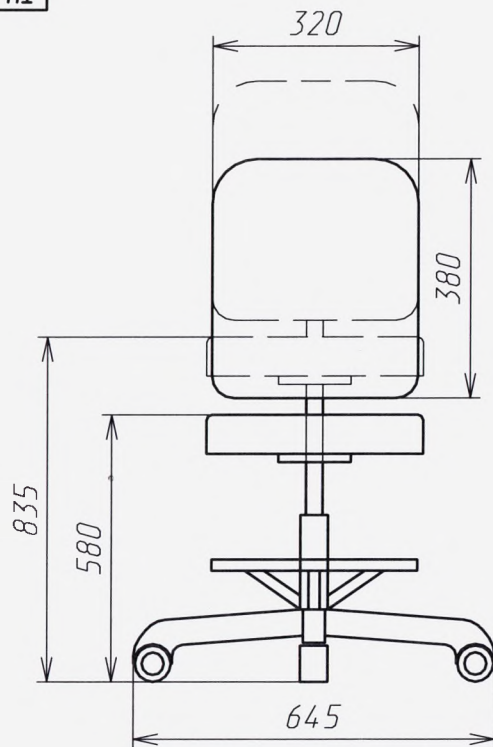


рис. 26

Изм.	Подп.	и дата	Взам. инв.	№ инв.	№ дубл.	Подп.	и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015							Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Стул медицинский "БТ-Мебель"				12кг
Разраб.	Ефанова	Пров.			БТ-СТС-2				
Лист 42							Листов		

ТУ 9451-008-99653782-2015

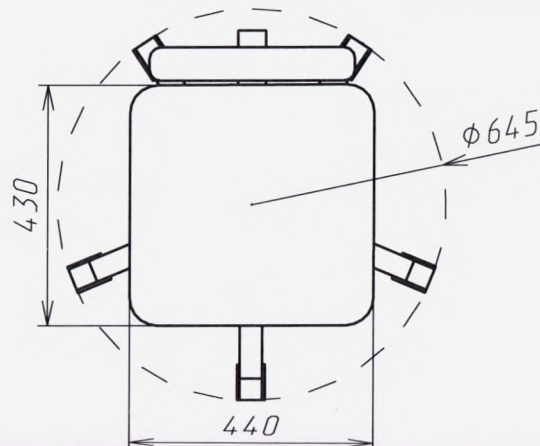
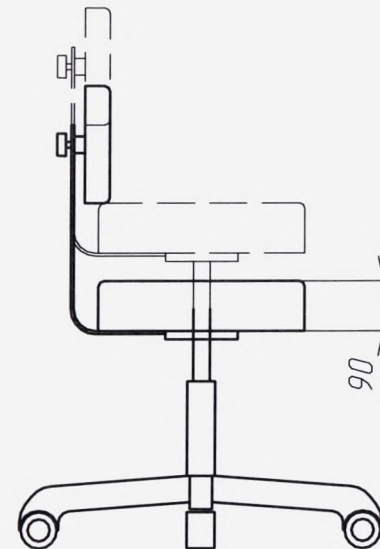
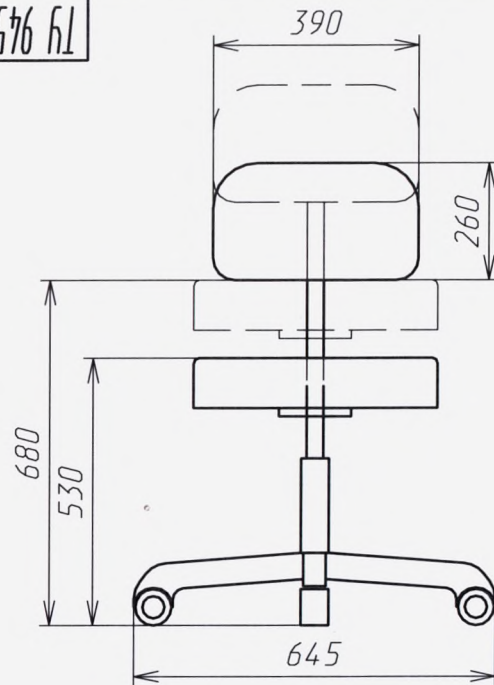


Рис. 27

ТУ 9451-008-99653782-2015				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Стул медицинский "БТ-Мебель" БТ-СТС-3	
Разраб.	Ефанова	Пров.				
				Лист 48	Листов	
				ООО ЦПК "Белва"		

ТУ 9451-008-99653782-2015

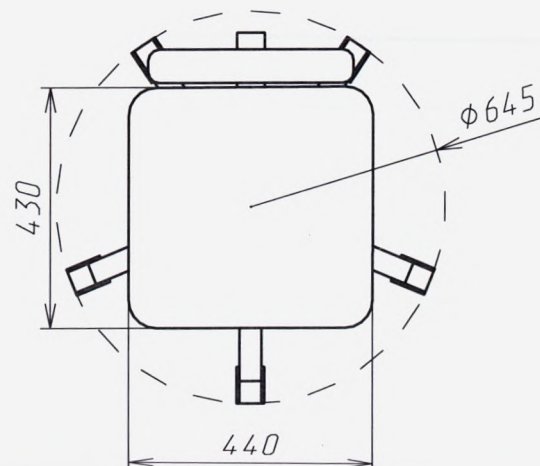
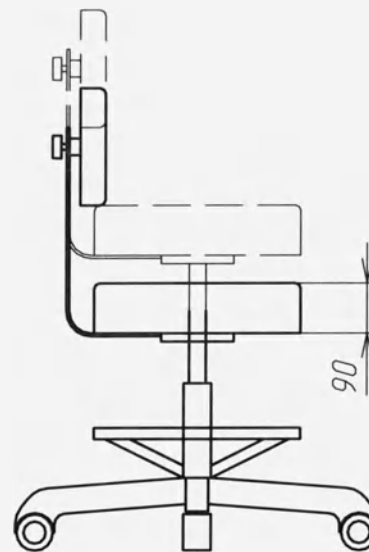
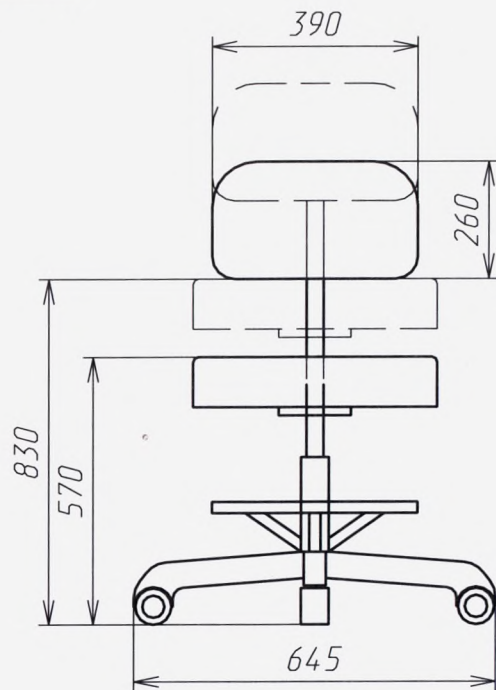


Рис. 28

ТУ 9451-008-99653782-2015					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И. док.	Подп.	Дата		12кг	
Разраб.	Ефанова				Лист 491 Листов		
Пров.					ООО ЦПК "Б-8"		
Стул медицинский "БТ-Мебель"					БТ-СТС-4		

ТУ 9451-008-99653782-2015

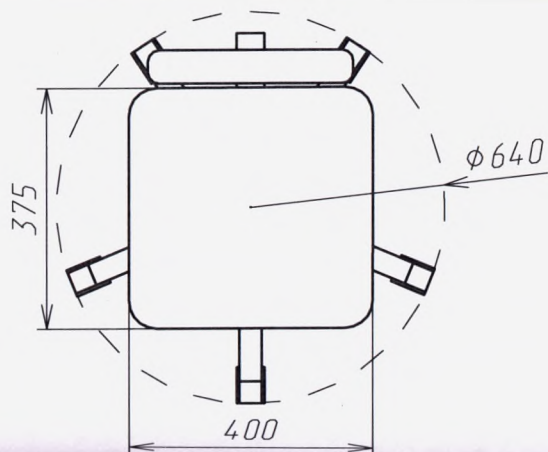
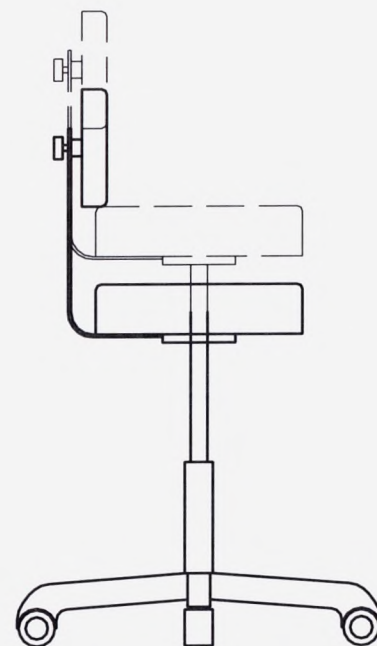
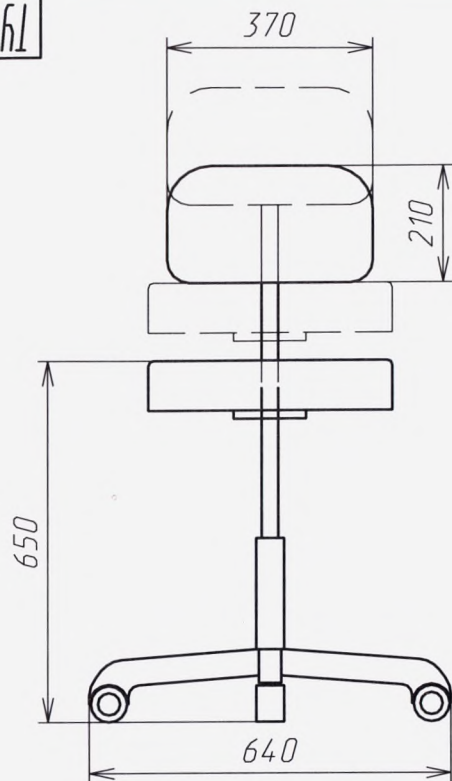


Рис. 29

					ТУ 9451-008-99653782-2015			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стул медицинский "БТ-Медель" БТ-СТС-5	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Ефанова					6,0кг	
Пров.						Лист 50	Листов	

ТУ 9451-008-99653782-2015

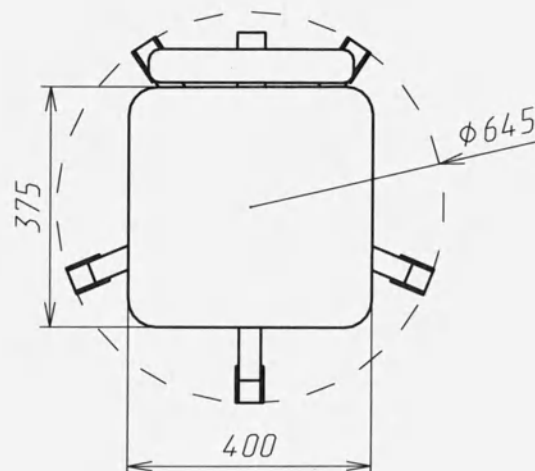
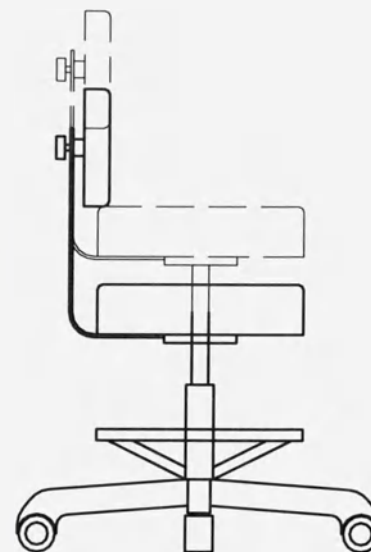
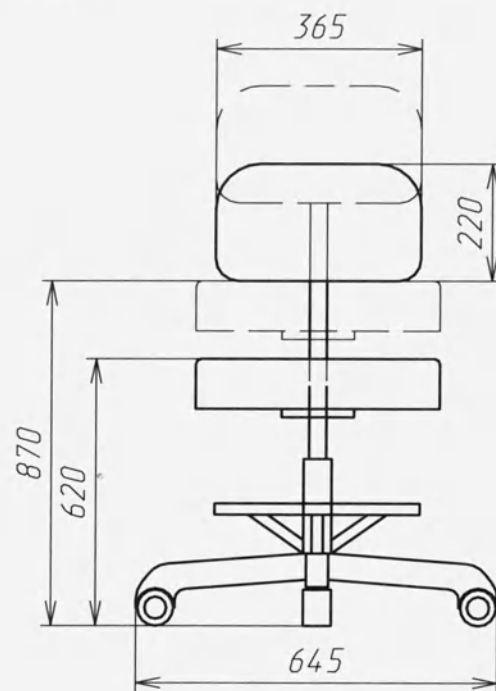


Рис. 30

					ТУ 9451-008-99653782-2015			
Изм.	Лист	И. док.м.	Подп.	Дата	Стул медицинский "БТ-Медель" БТ-СТС-6	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ефанова						14 кг	
Пров.								

И. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015

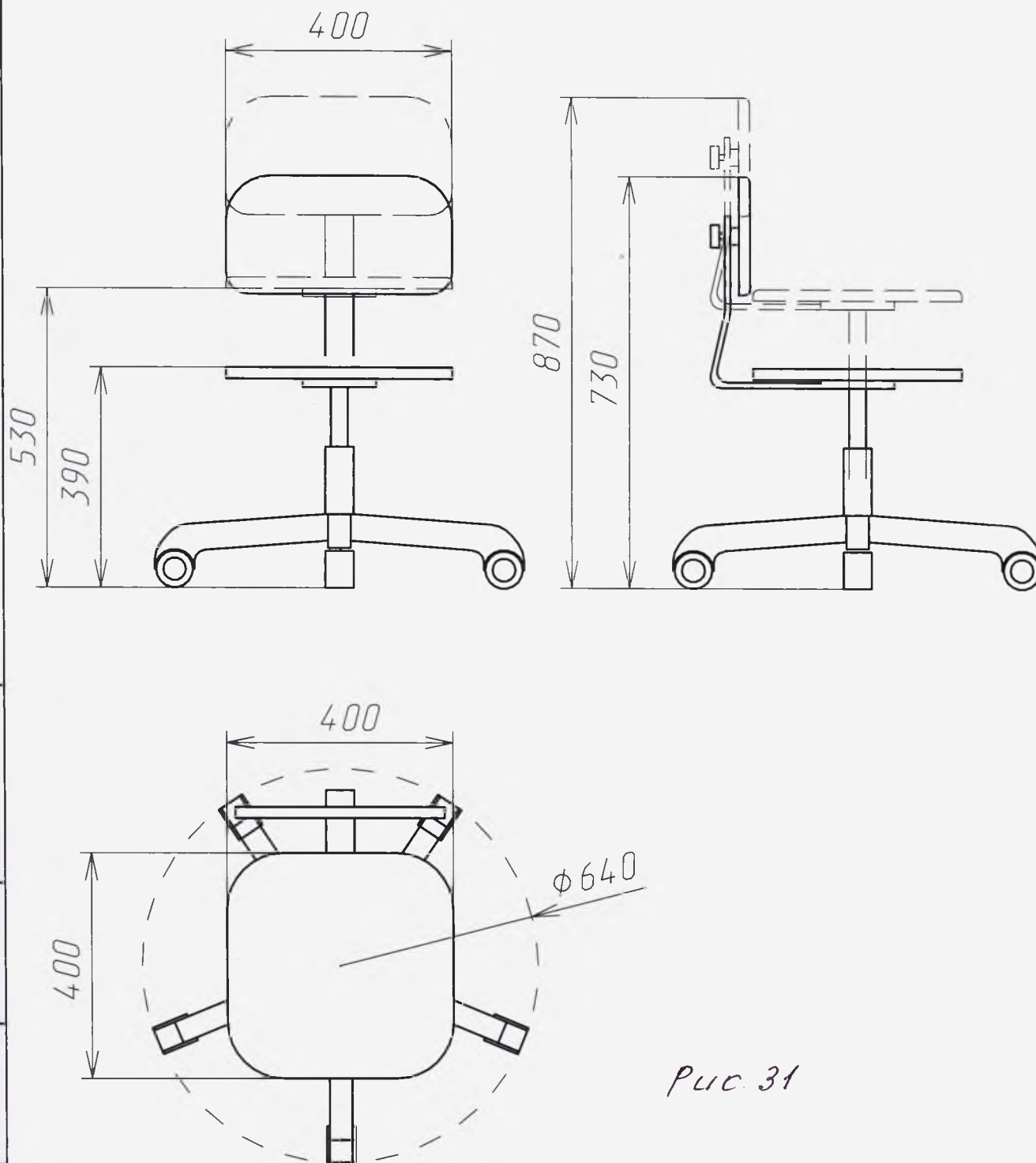


Рис. 31

					ТУ 9451-008-99653782-2015			
					Стул медицинский "БТ-Мебель" БТ-СТС-7	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			12кг	
Разраб.	Ефанова							
Пров.								
						Лист 52		Листов
Н.контр.						000 ПТК "Белва"		
Утв.								

Копировал

Формат А4

ТУ 9451-008-99653782-2015

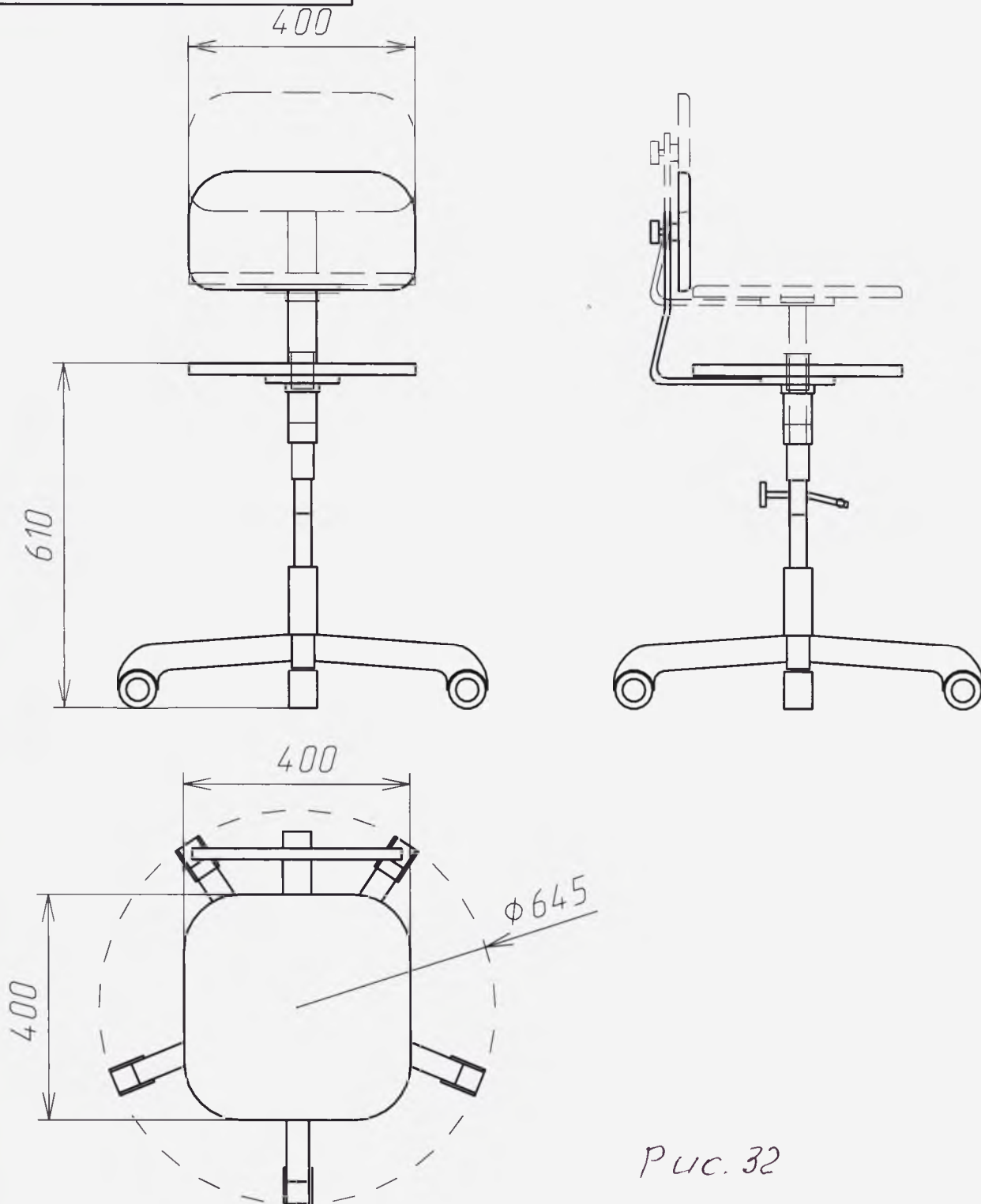


Рис. 32

ТУ 9451-008-99653782-2015

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стул медицинский "БТ-Медель" БТ-СТС-8	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ефанова						12кг	
Пров.						Лист 53	Листов	
Н.контр.						000 ПТК "Белва"		
Утв.								

Копировал

Формат А4

ТУ 9451-008-99653782-2015

54

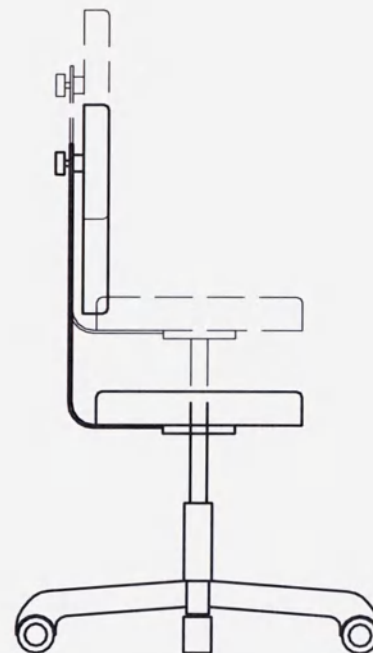
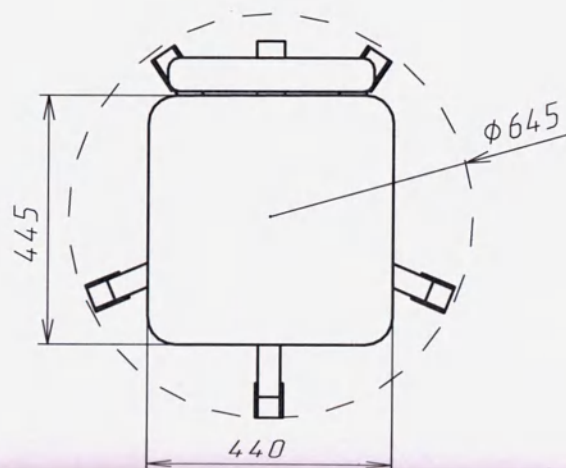
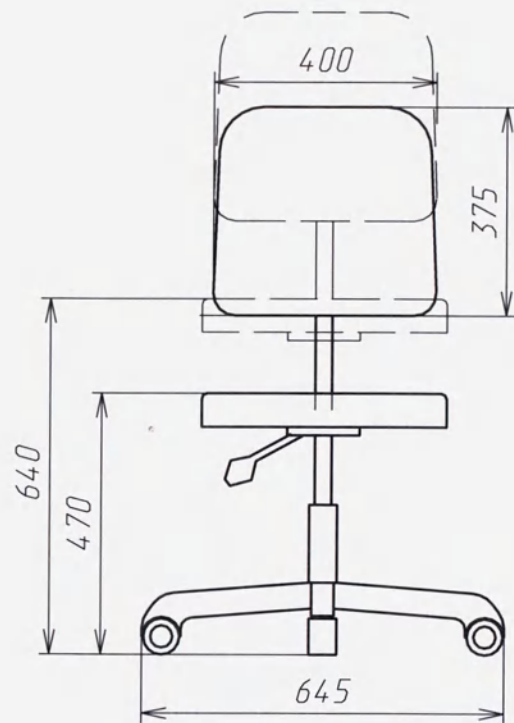


Рис. 33

ТУ 9451-008-99653782-2015					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Стул медицинский "БТ-Медель"		
Разраб.	Ефанова						
Проб.					БТ-СТС-9		
					Лист 54	Листов	
					ООО ПК "Белво"		

ТУ 9451-008-99653782-2015

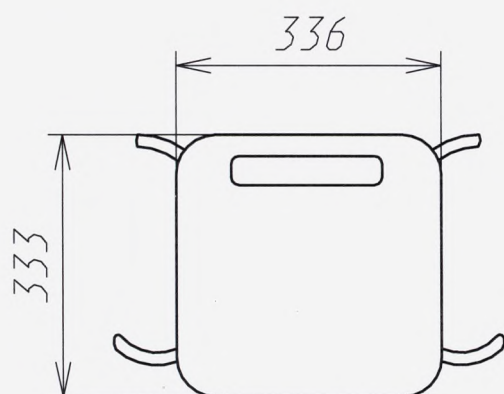
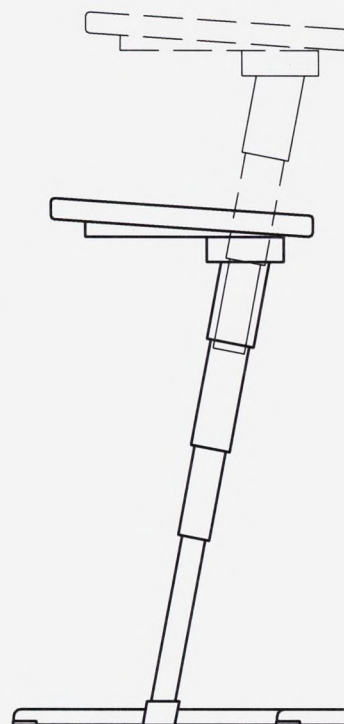
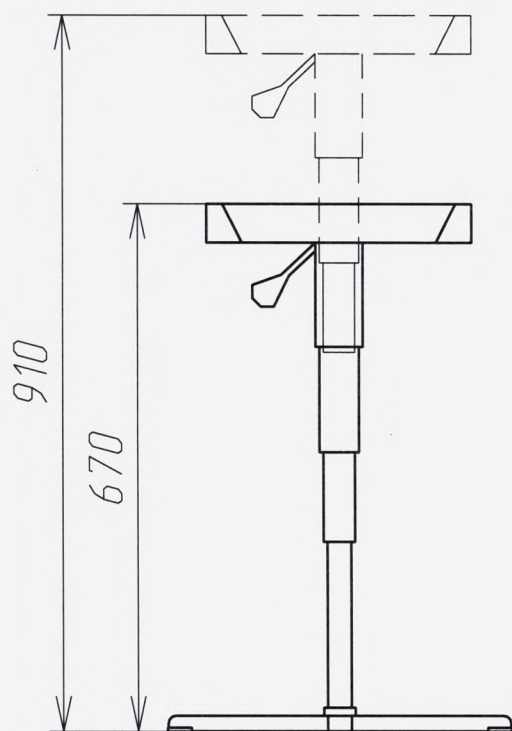


Рис. 34

ТУ 9451-008-99653782-2015

Стул медицинский "БТ-Медель"
БТ-СТС-10

Лит.	Масса	Масштаб
	12 кг	
Лист 55		Листов
000 ПТК "Белва"		

Копировал

Формат А4

55

ТУ 9451-008-99653782-2015

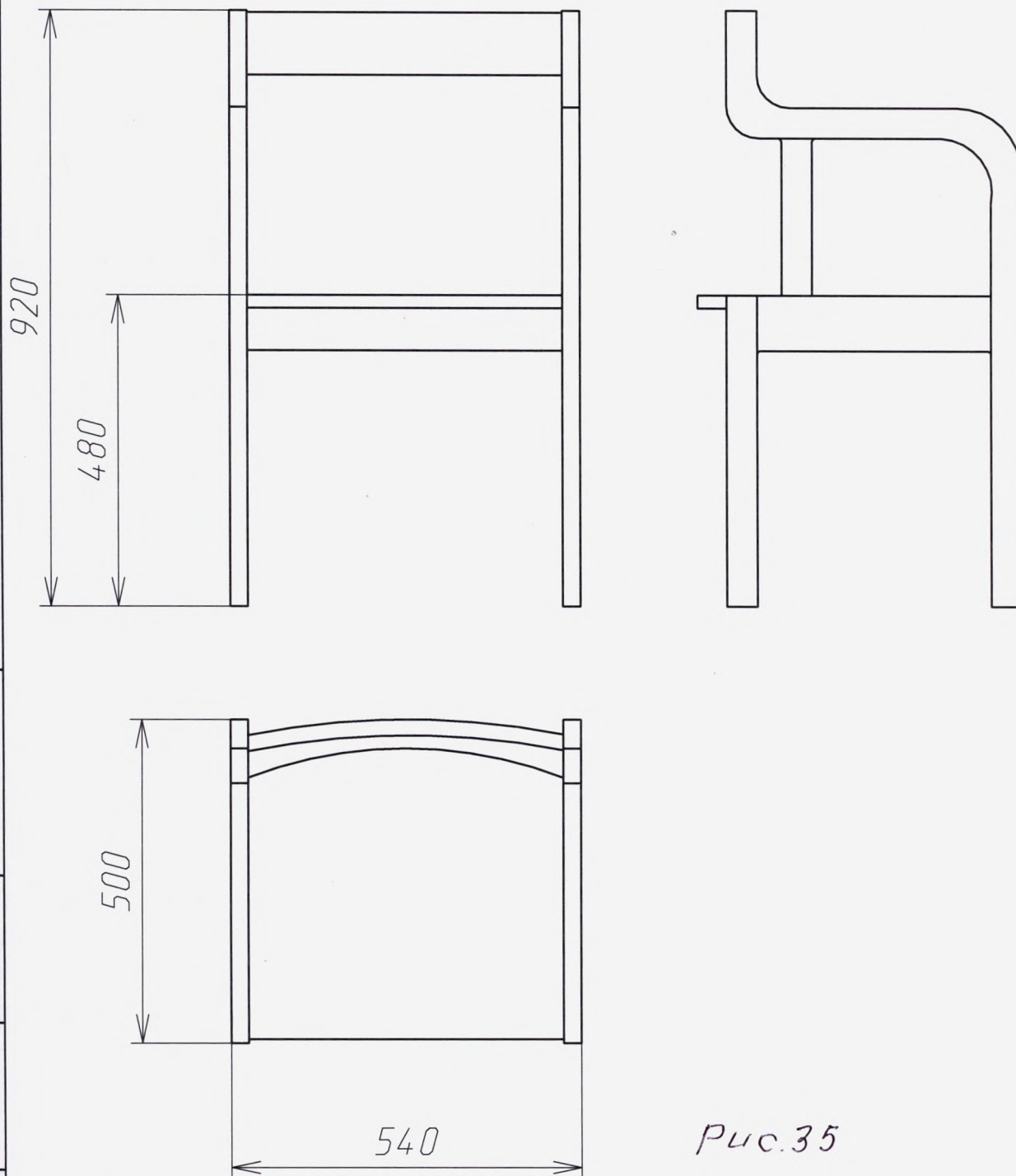


Рис. 35

					ТУ 9451-008-99653782-2015						
					Стул медицинский "БТ-Мебель" БТ-СФ-1			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата						17кг	
Разраб.	Ефанова										
Пров.								Лист 56	Листов		
								000 ПТК "Белва"			
Н.контр.											
Утв.											

Копировал

Формат А4

56

5102-78255966-800-1576 51

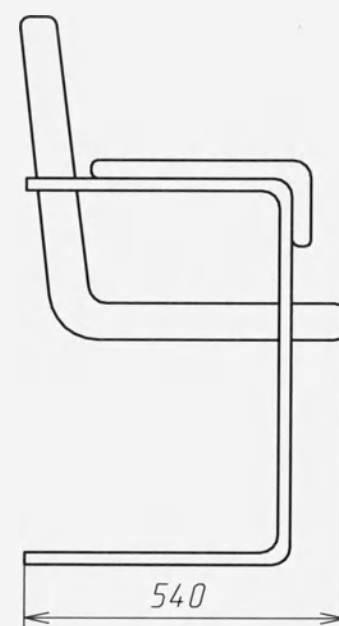
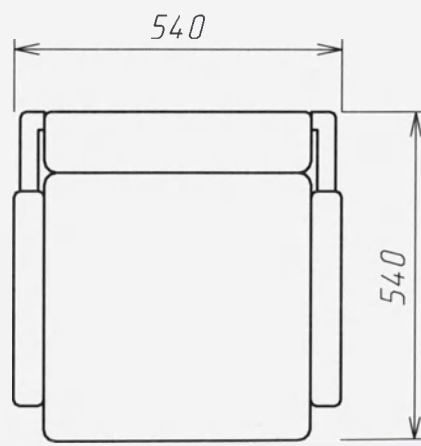
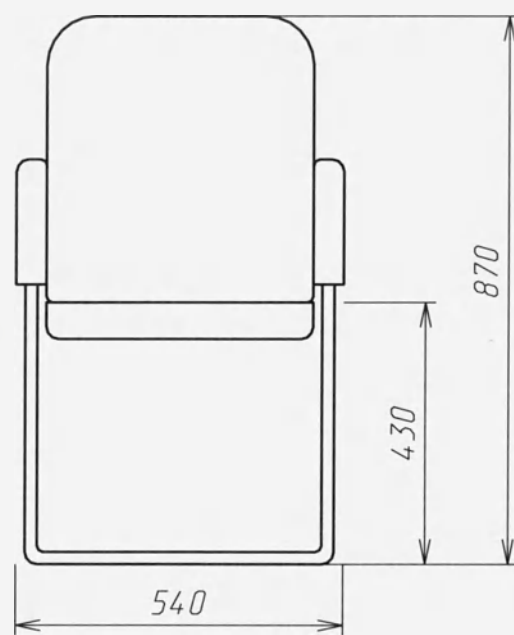


Рис. 36

Изм. №	Подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Инв. №	Инв. №	Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стул медицинский "БТ-Мебель"		14 кг	
Разраб.	Ефимова				Синди D40			
Пров.								

ТУ 9451-008-99653782-2015

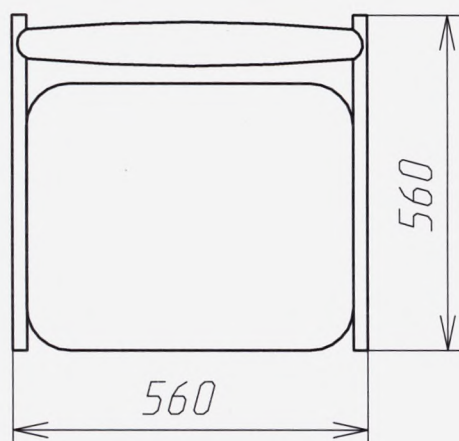
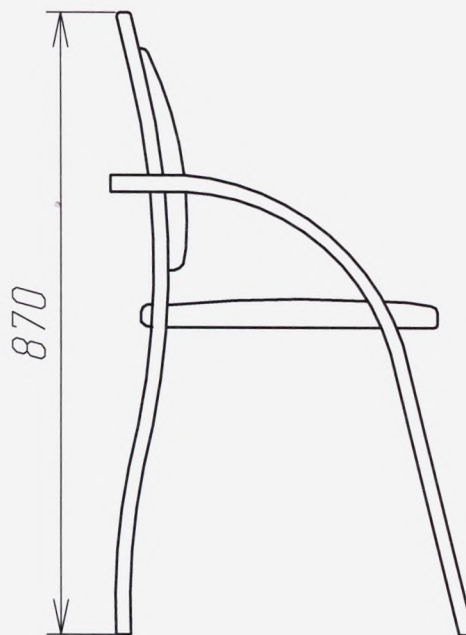
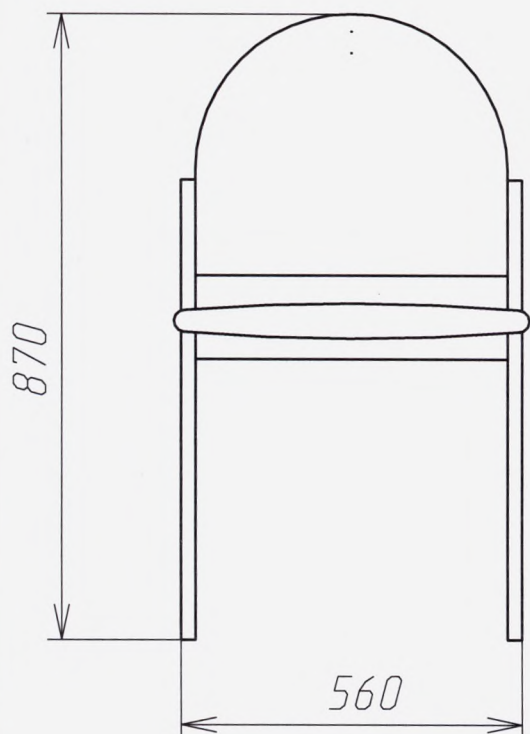


Рис. 37

ТУ 9451-008-99653782-2015							
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Стул медицинский "БТ-Мебель" Джуно		
Разраб.	Ефанова						
Пров.							
И.контр.					000 ПТК "Белва"		
Утв.							
					Лит.	Масса	Масштаб
						12 кг	
					Лист 58	Листов	

Копировал

Формат А4

5102-78255966-800-1546 51

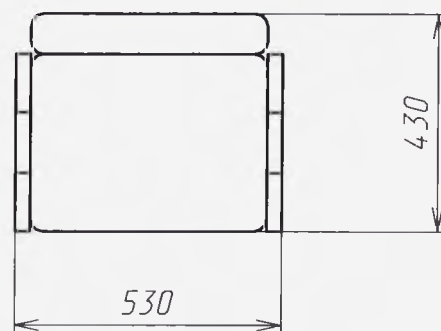
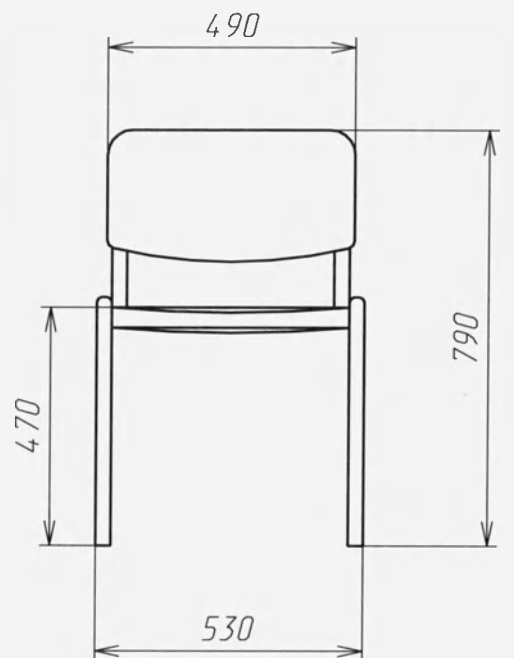


Рис. 38

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. № инв.	№ дудл.	Подп. и дата

					ТУ 9451-008-99653782-2015			
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Стул медицинский "БТ-Мебель" ИЗО	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ефанова						8 кг	
Пров.								

ТУ 9451-008-99653782-2015

60

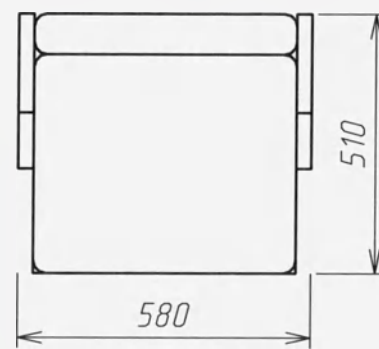
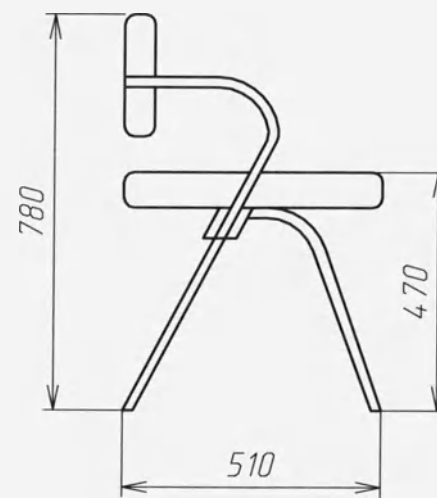
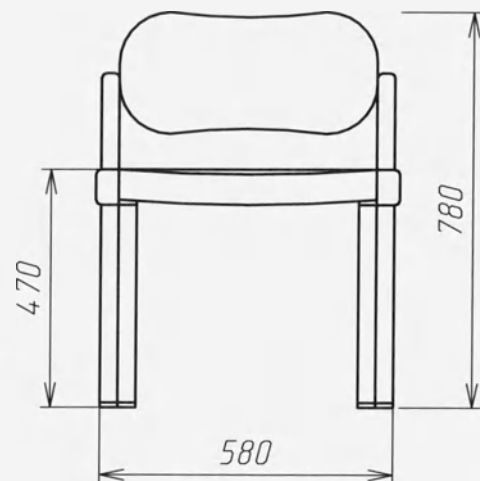


Рис. 39

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. № инв.	№ инв. № докл.	Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Стул медицинский "БТ-Мебель"		
Разраб.	Ефанова						
Проб.							
ЭРА						12 кг	

ТУ 9451-008-99653782-2015

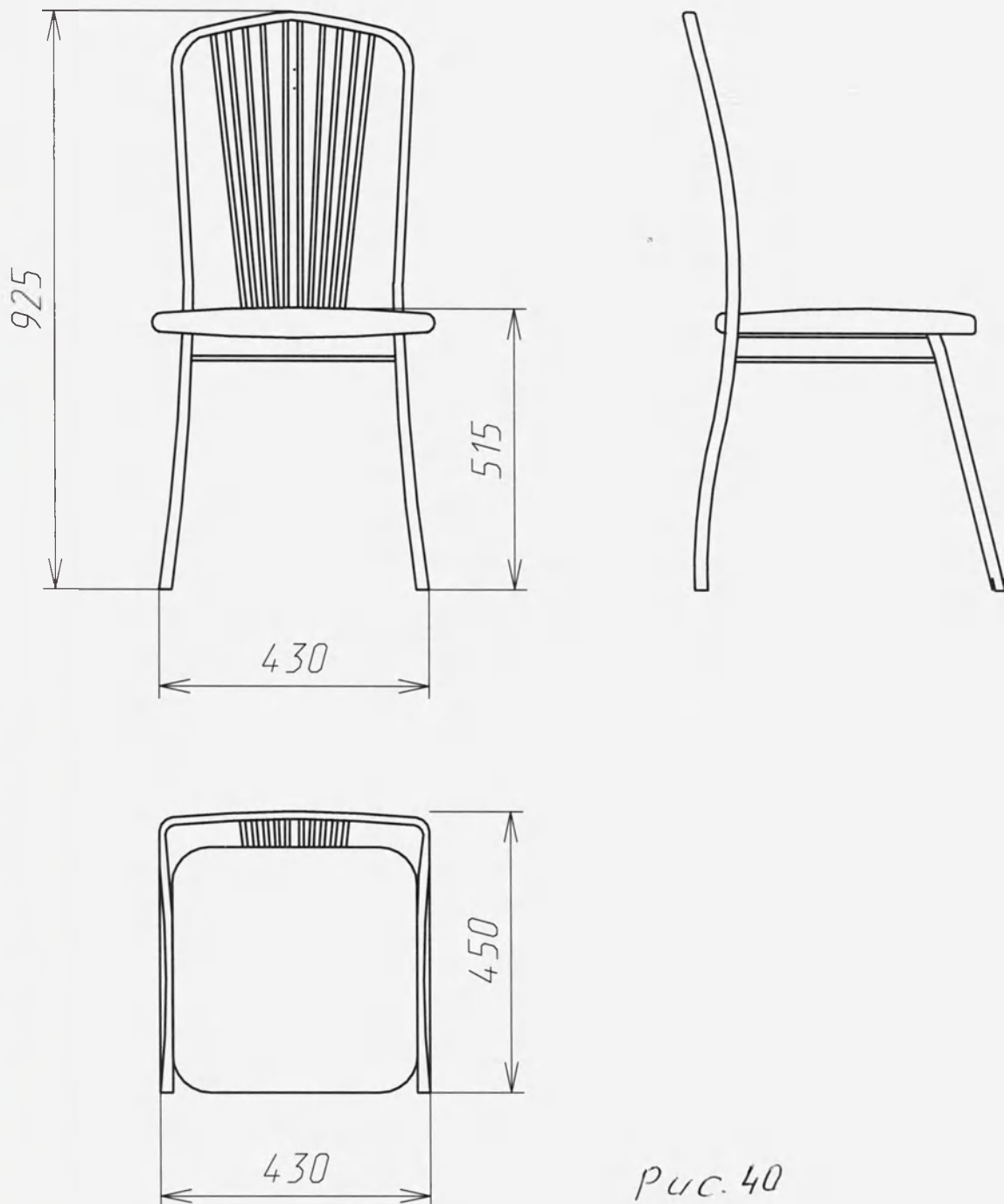


Рис. 40

ТУ 9451-008-99653782-2015							
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Стул медицинский "БТ-Мебель" NERON		
Разраб.	Ефанова						
Пров.							
					Лит.	Масса	Масштаб
						9 кг	
					Лист 61 / Листов		
					ООО ПТК "Белва"		
Н.контр.							
Утв.							

Копировал

Формат А4

ТУ 9451-008-99653782-2015

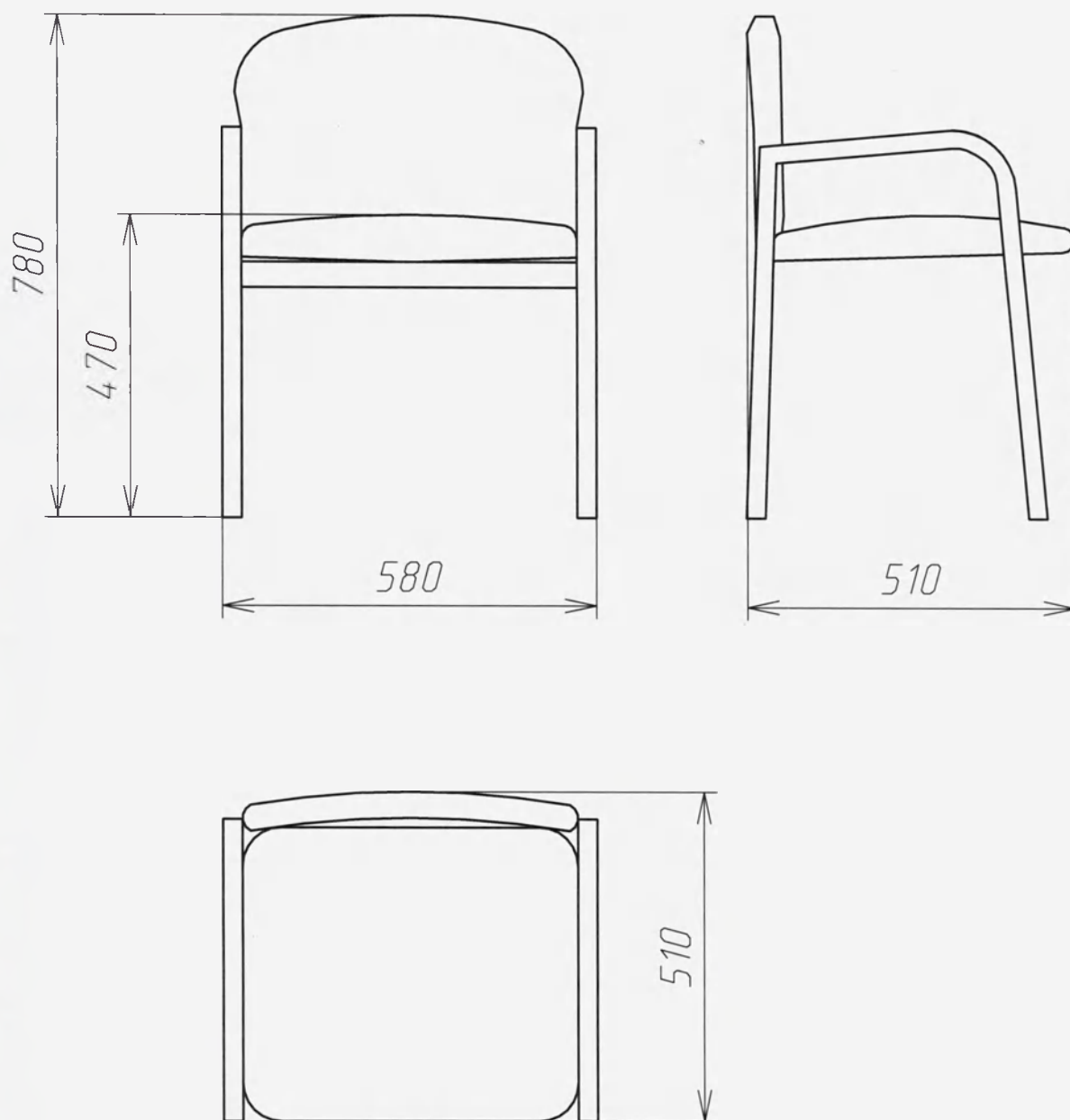


Рис. 41

					ТУ 9451-008-99653782-2015				
					Стул медицинский "БТ-Мебель" Кент	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			12 кг		
Разраб.	Ефанова								
Пров.									
						Лист 62	Листов		
Н.контр.						000 ПТК "Белва"			
Утв.									

Копировал

Формат А4

62

5102-78255966-800-1546 61

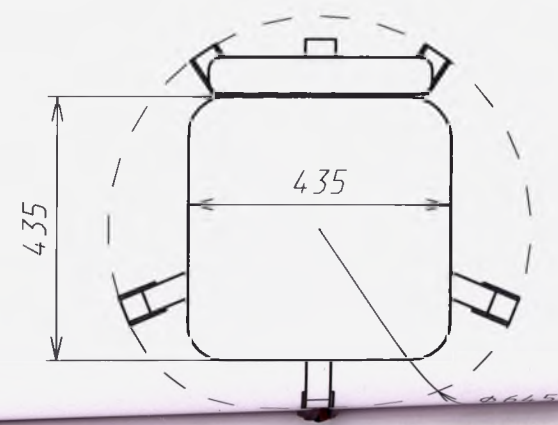
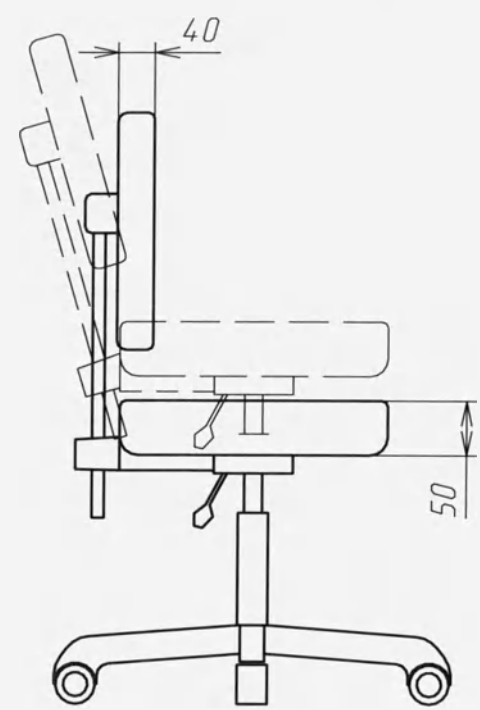
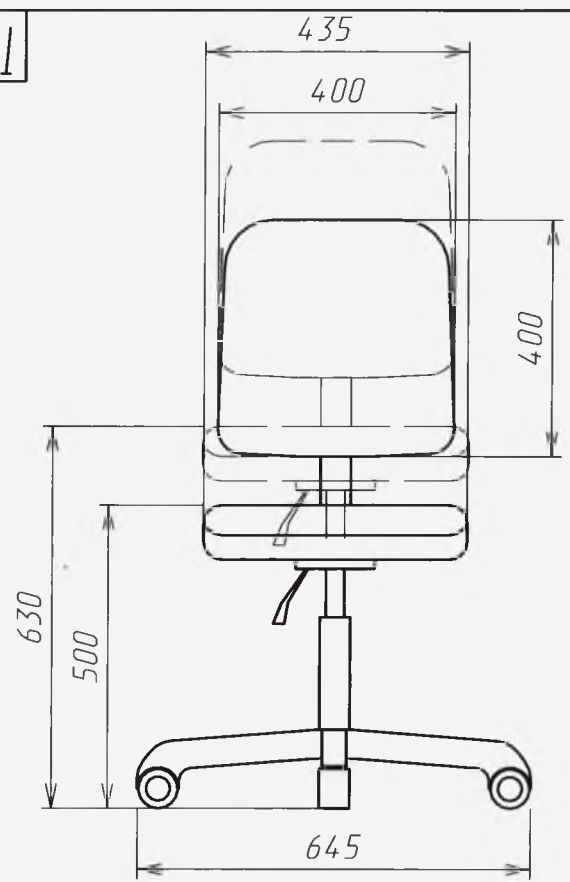


Рис. 42

ТУ 9451-008-99653782-2015					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата		14 кг	
Разраб.	Ефанова						
Пров.							
Кресло медицинское "БТ-Мебель"							
БТ-СТК-1							

ТУ 9451-008-99653782-2015

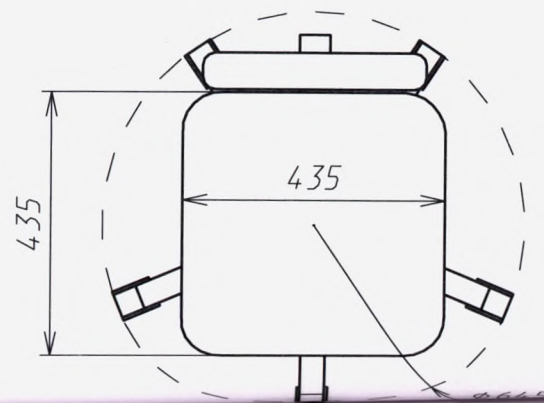
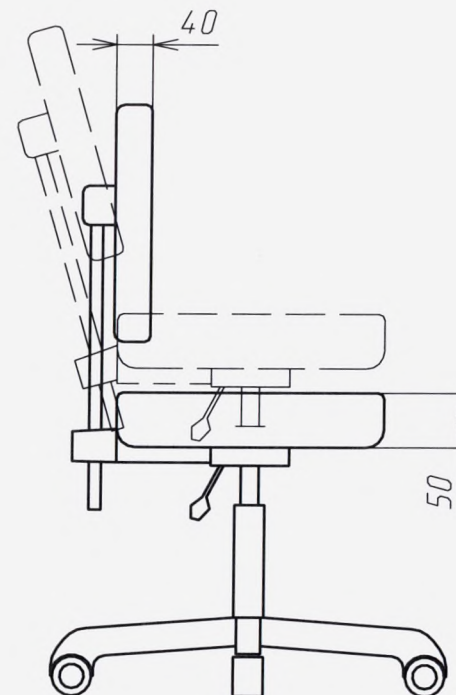
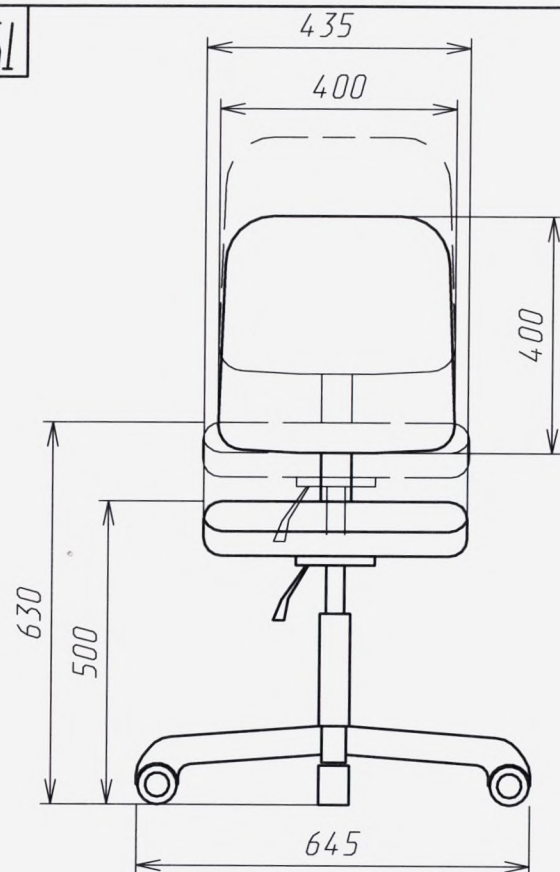


рис. 43

ТУ 9451-008-99653782-2015					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата		14 кг	
Разраб.	Ефанова						
Пров.							
Кресло медицинское "БТ-Медель"					Лист 64	Листов	
БТ-СТК-2							

5102-28655966-800-1576 61

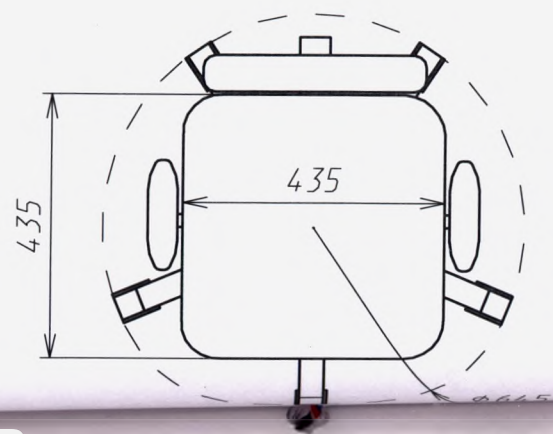
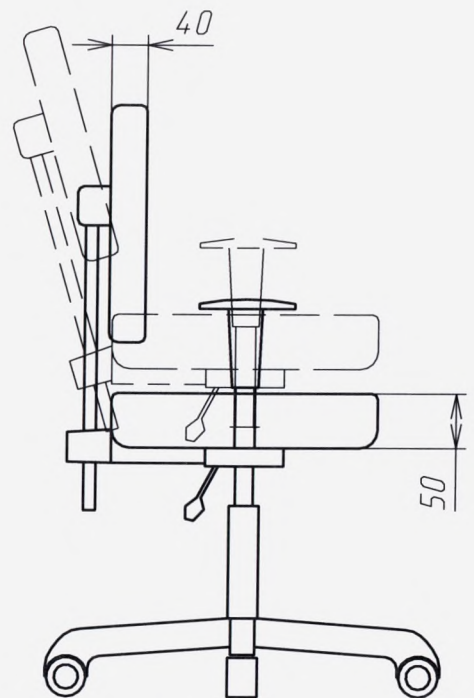
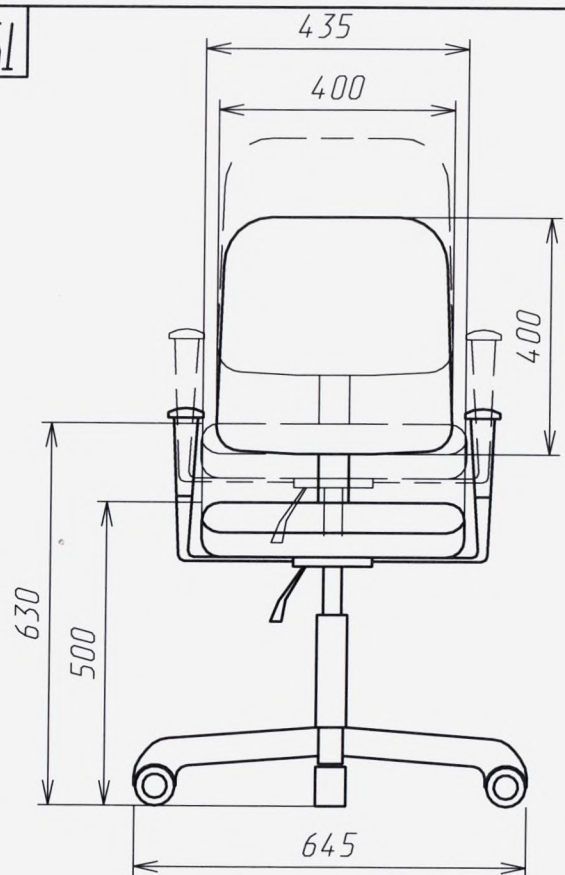


Рис. 44

					ТУ 9451-008-99653782-2015			
						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Кресло медицинское "БТ-Мебель" БТ-СТК-3		16кг	
Разраб.	Ефанова							
Пров.								
						Лист 63 из 63		

ТУ 9451-008-99653782-2015

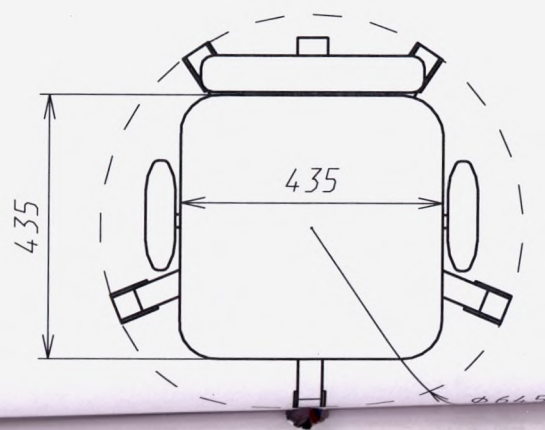
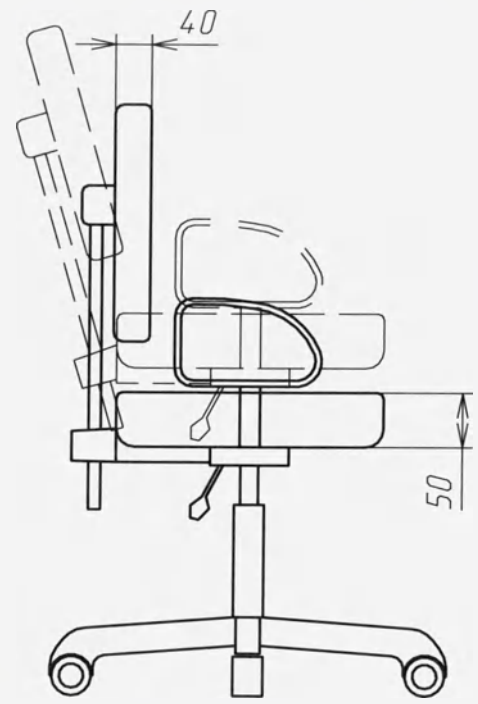
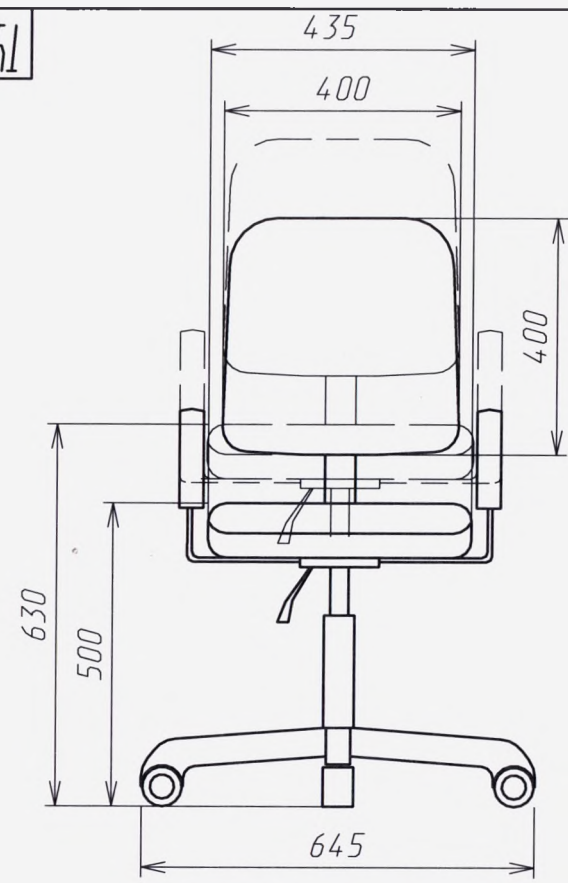


Рис. 45

					ТУ 9451-008-99653782-2015		
					Кресло медицинское "БТ-Мебель"		
					БТ-СТК-4		
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ефанова					16кг	
Пров.							

№ подл.	Подп.	и дата	Взам. инд.	№ инд.	№ инд.	Подп.	и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015

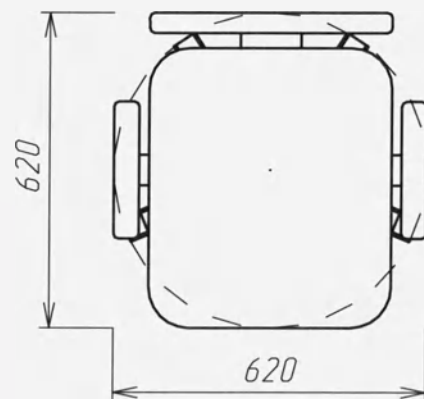
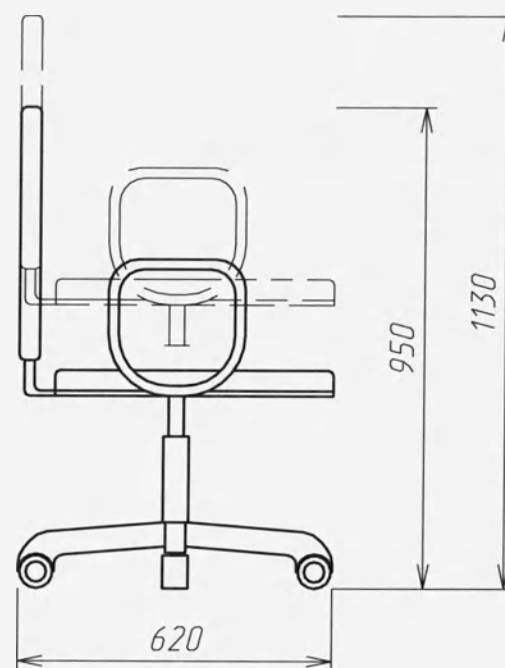
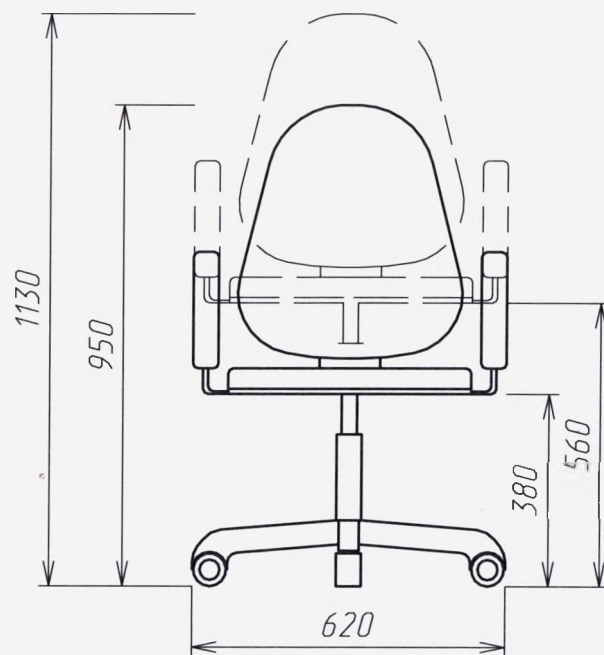


Рис. 46

ТУ 9451-008-99653782-2015						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Кресло медицинское "БТ-Мебель" Гранд		14 кг	
Разраб.	Ефанова							
Пров.								

№ подл.	Подп.	и дата	Взам. инв.	№ инв.	№ докум.	Подп.	и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015

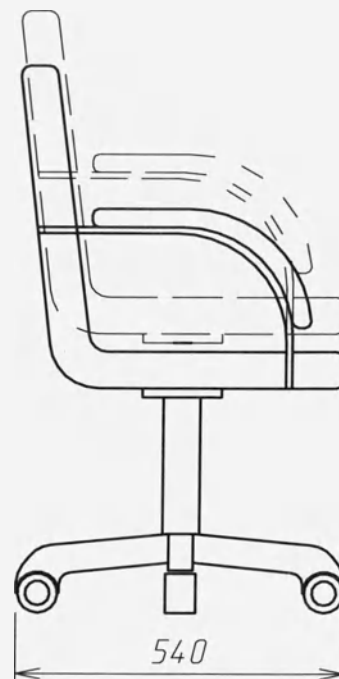
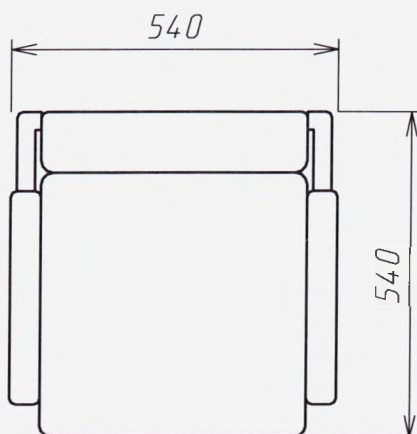
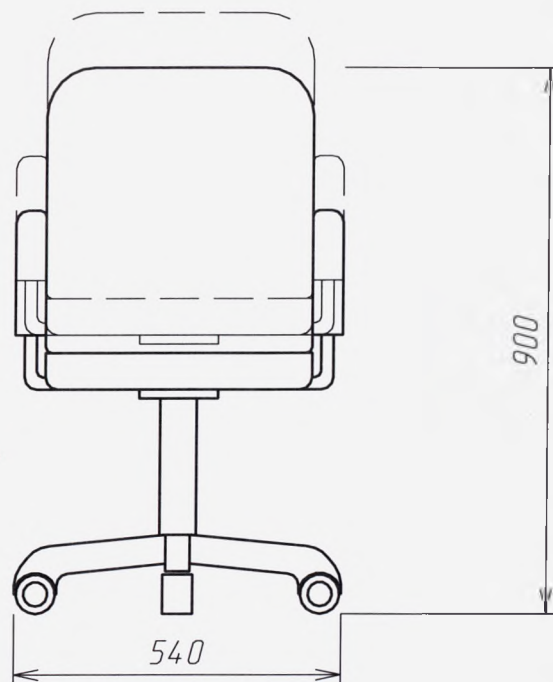


Рис. 47

					ТУ 9451-008-99653782-2015			
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Кресло медицинское "БТ-Мебель"	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Ефанова					18 кг	
Пров.						Лист 68	Листов	
					Синди D80			

И. подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015

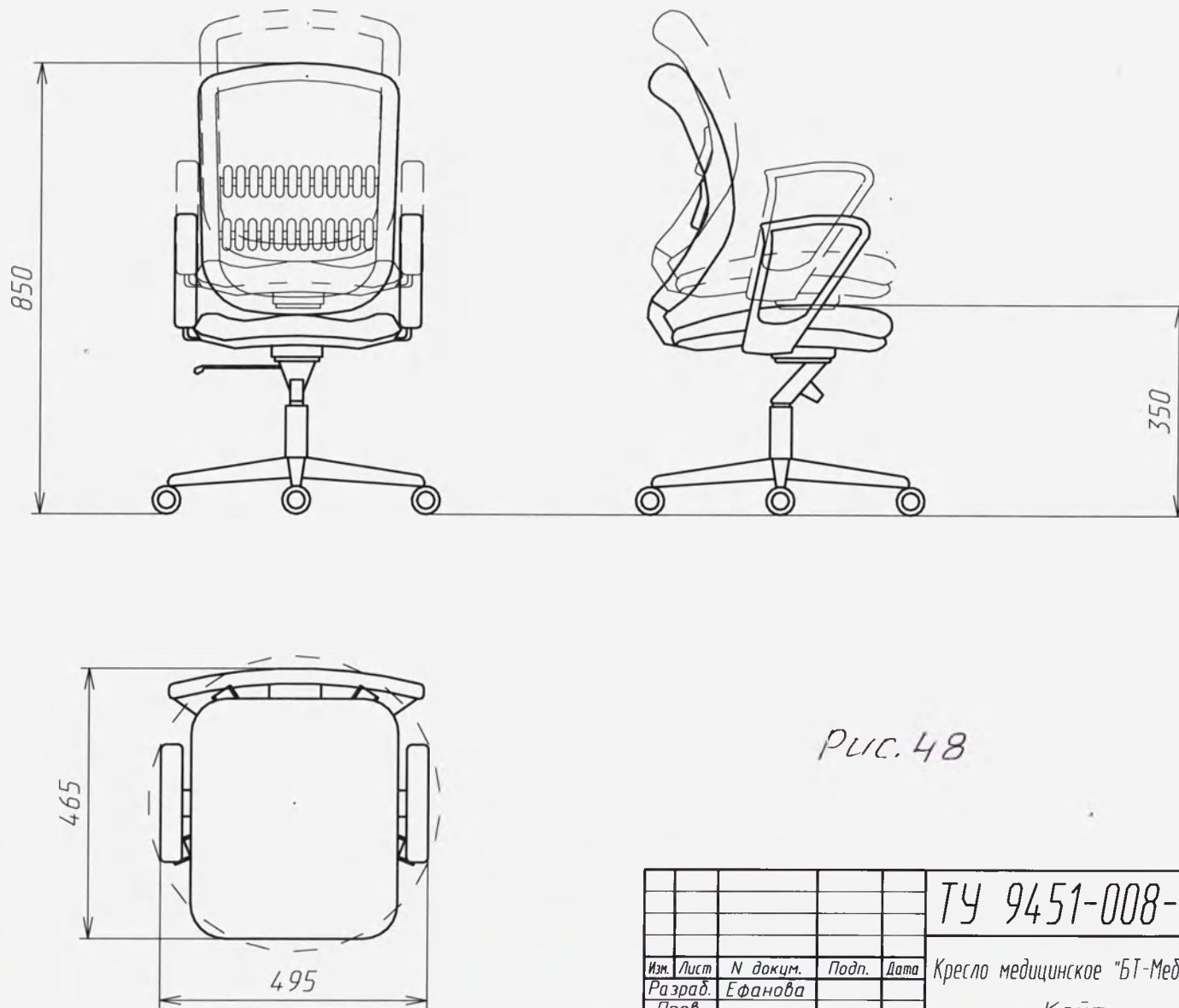


Рис. 48

					ТУ 9451-008-99653782-2015			
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Кресло медицинское "БТ-Мебель" Кейт	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Ефанова					14 кг	
Пров.						Лист 69	Листов	

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. № инв.	№ докл.	Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015

20

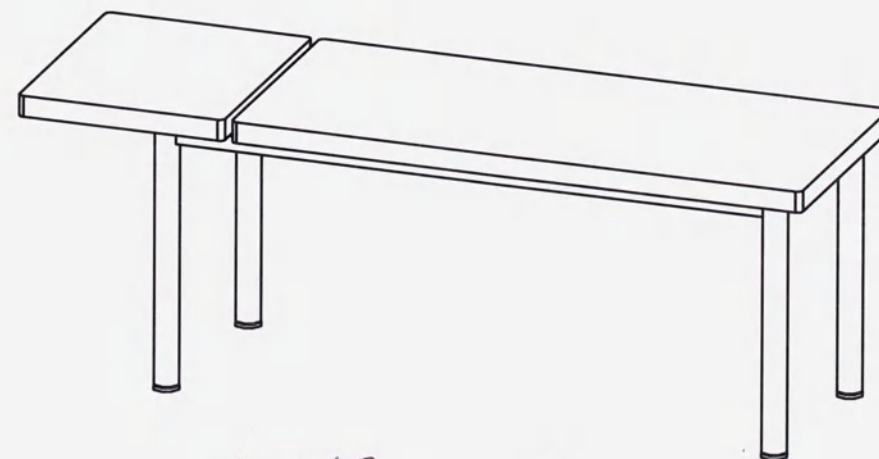
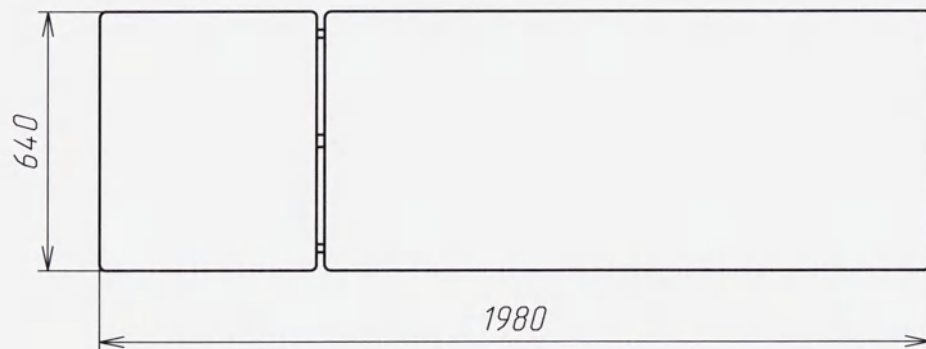
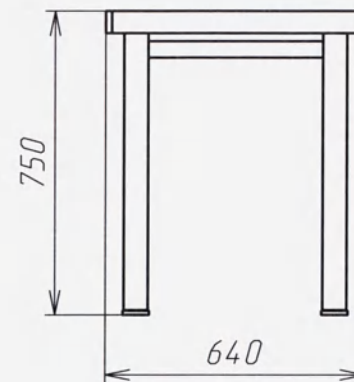
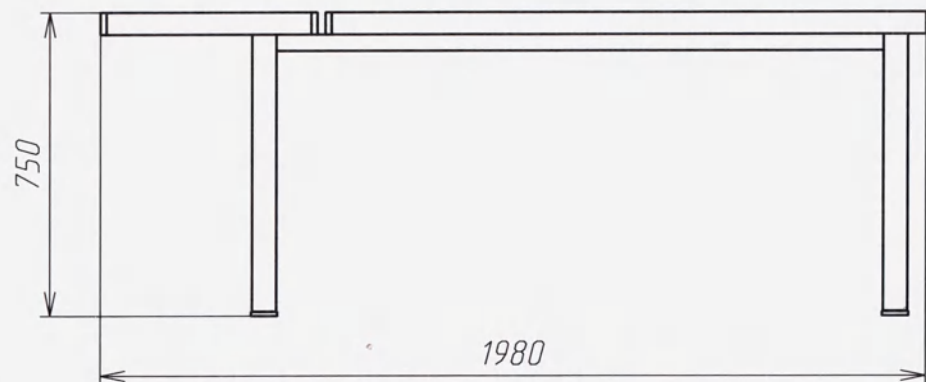


Рис. 49

Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ефанова			
Пров.				

ТУ 9451-008-99653782-2015

Кушетка медицинская "БТ-Мебель"
БТ-А01

Лит.	Масса	Масштаб
	39 кг	
Лист 20	Листов	

ТУ 9451-008-99653782-2015

71

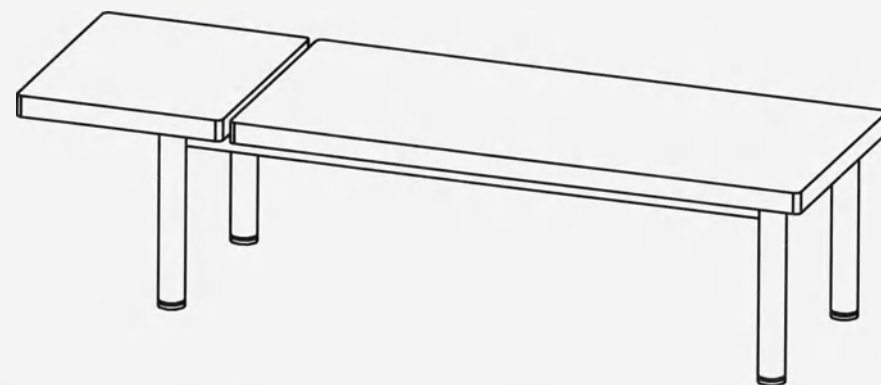
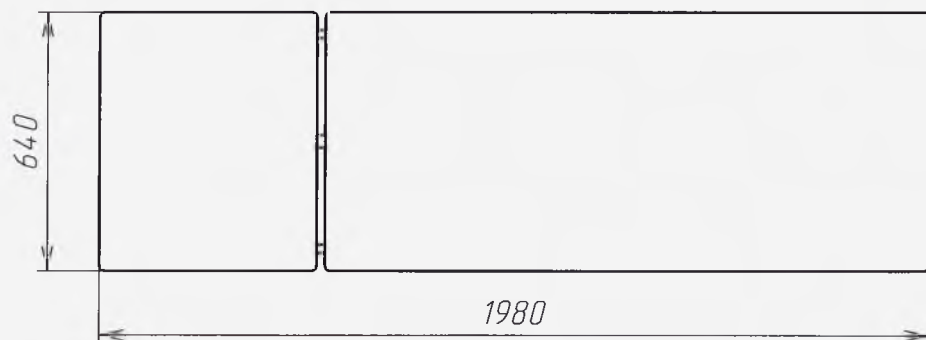
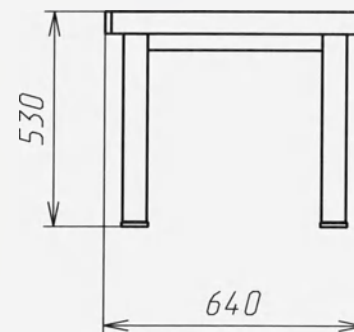
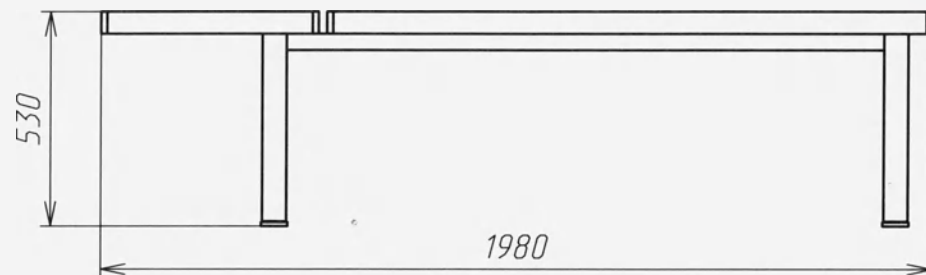


Рис. 50

Подп. и дата
Взам. инв. № инв. № дудл
Подп. и дата

						ТУ 9451-008-99653782-2015		
						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	Н. док.им.	Подп.	Дата	Кушетка медицинская "БТ-Медель" БТ-А02		37 кг	
Разраб.	Ефанова							
Пров.						Лист 71	Листов	

ТУ 9451-008-99653782-2015

72






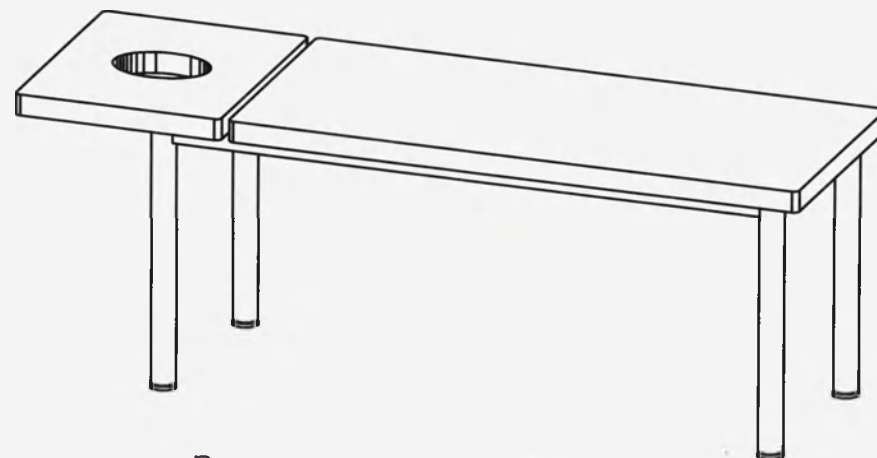


Рис. 51

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инб.	№ инб.	№ док.	Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015					
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Кушетка медицинская "БТ-Мебель"
Разраб.	Ефанова				БТ-А06
Пров.					
Лист 221 Листов					

ТУ 9451-008-99653782-2015

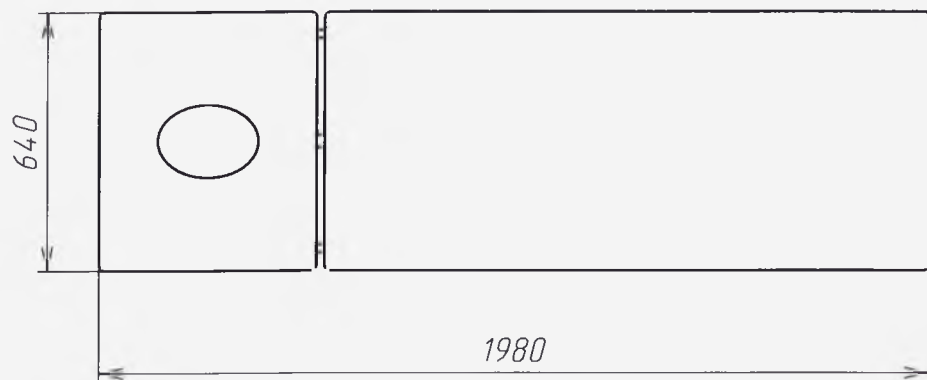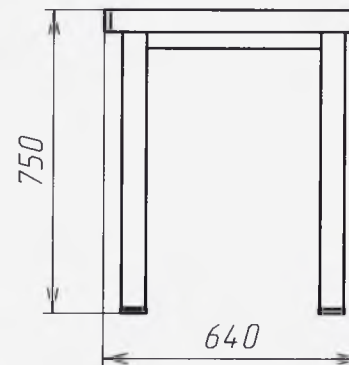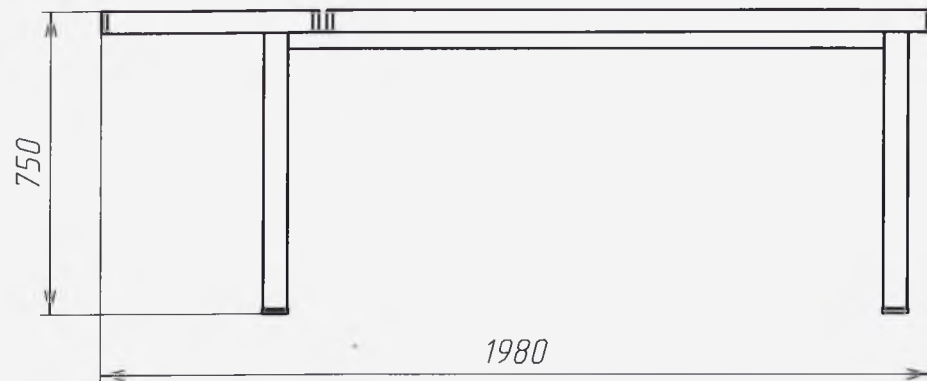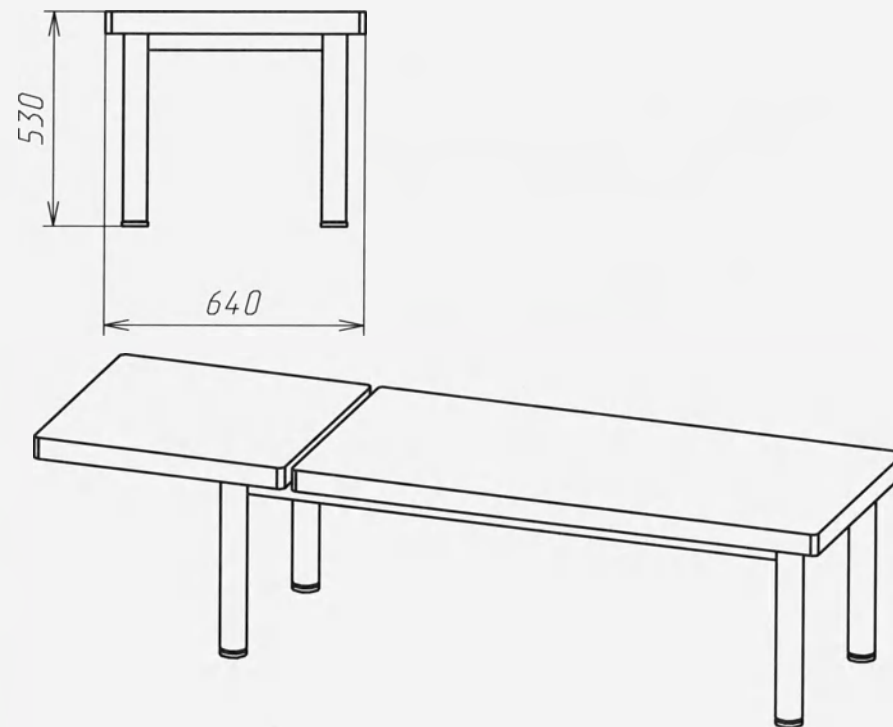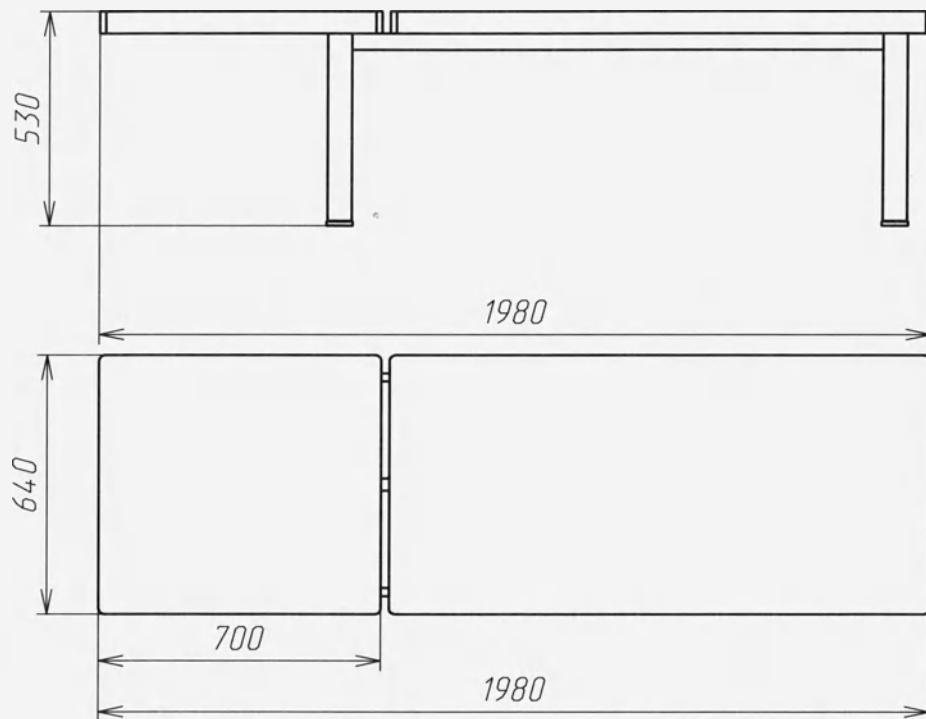

Р4С. 52

№ подл. Подп. и дата Взам. инв. № инв. № дучл. Подп. и дата

					ТУ 9451-008-99653782-2015		
Изм.	Лист	И. док.	Подп.	Дата	Кушетка медицинская "БТ-Медель" БТ-А07		
Разраб.	Ефанова						
Пров.							
					Лит.	Масса	Масштаб
						37 кг	
					Лист 29	Листов	

ТУ 9451-008-99653782-2015

74

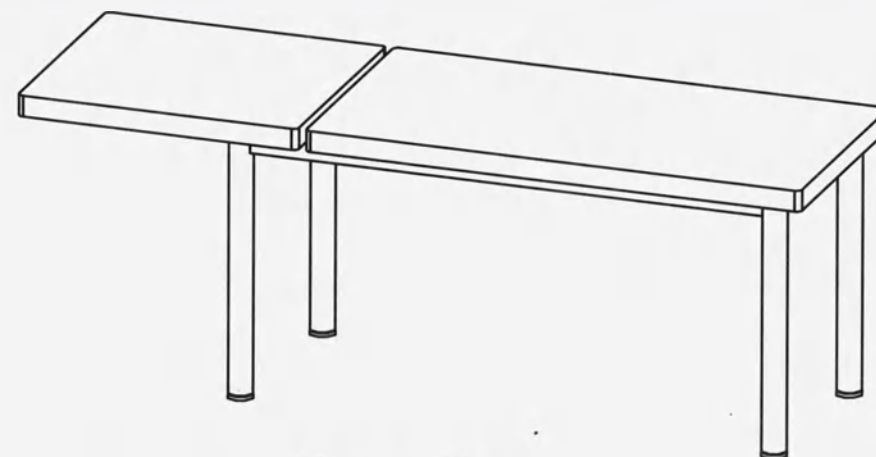
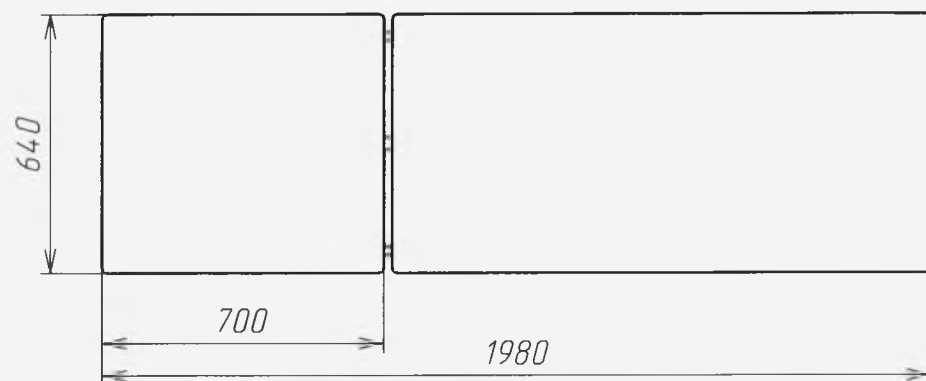
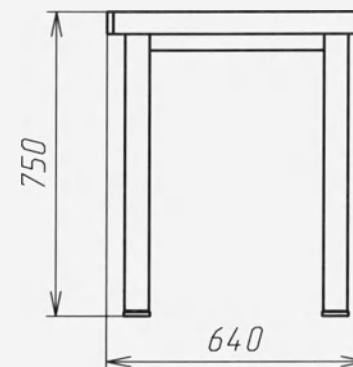
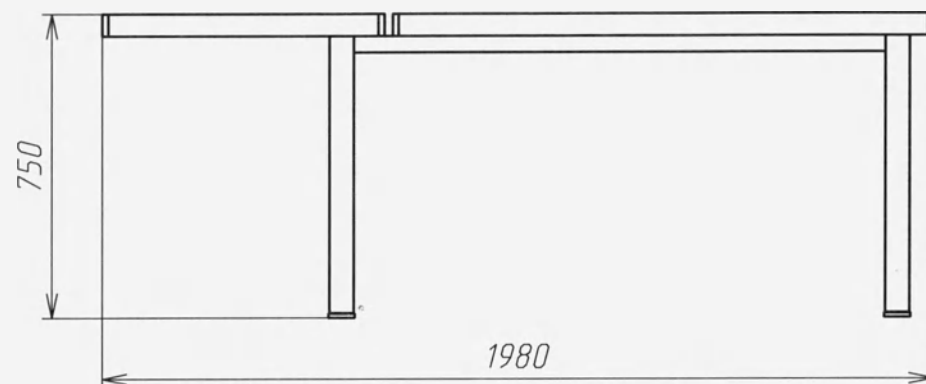


Рис. 53

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Ефанова
Проб.

ТУ 9451-008-99653782-2015				Лит.	Масса	Масштаб
Кушетка медицинская "БТ-Мебель"					39 кг	
БТ-А08				Лист 24	Листов	

ТУ 9451-008-99653782-2015

75

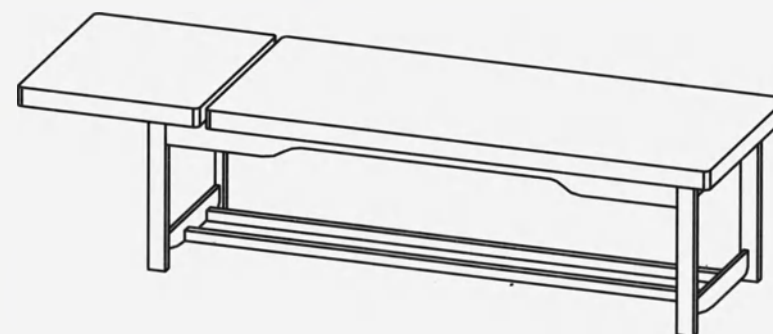
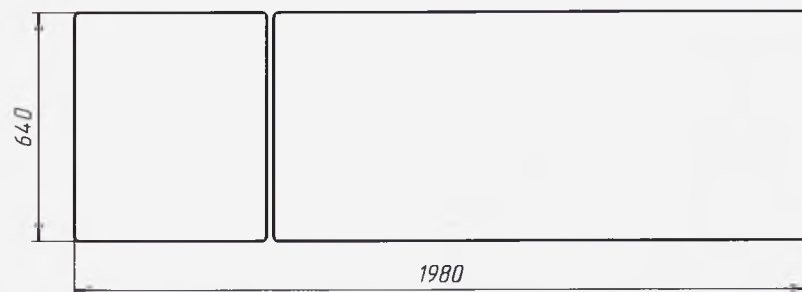
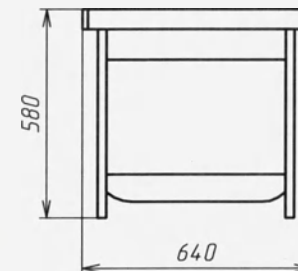
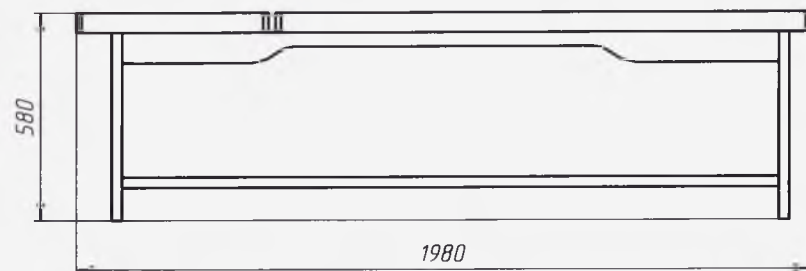


Рис. 54

Лист 1 из 1
Подп. и дата

Изм.	Лист	И. док.	Подп.	Дата
Разр.	Еф.	Еф.		
Проб.				

ТУ 9451-008-99653782-2015			Лит.	Масса	Масштаб
Кушетка медицинская "БТ-Мебель"				35 кг	
для физиотерапии					
БТ-А04					

ТУ 9451-008-99653782-2015

6

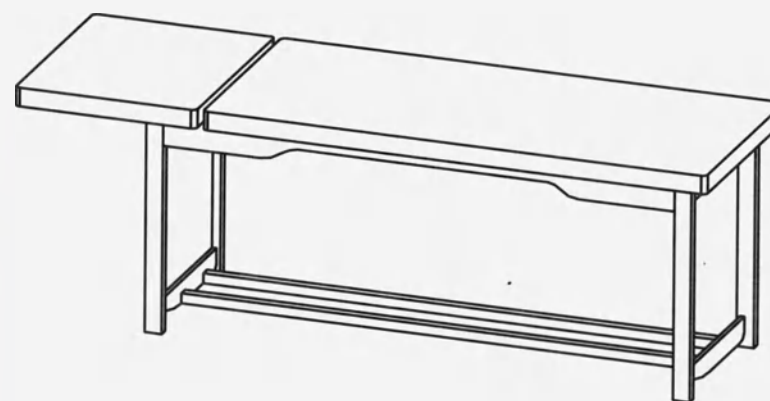
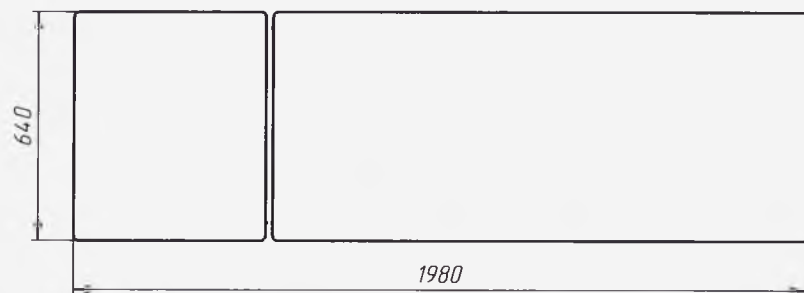
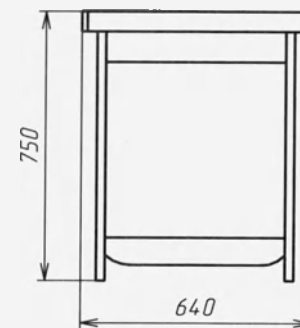
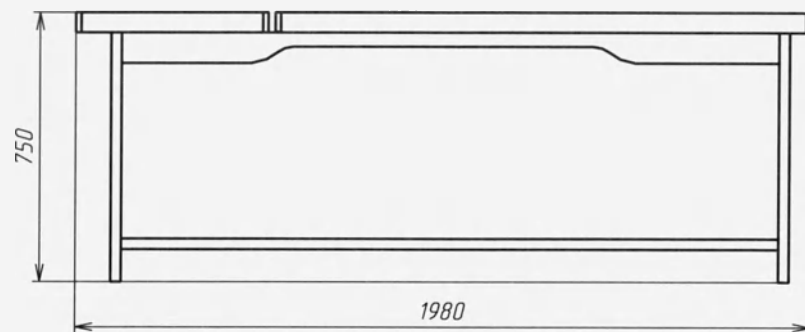


рис. 55

Лист 1 из 1
Изм. 1
Изм. 2
Изм. 3
Изм. 4
Изм. 5
Изм. 6
Изм. 7
Изм. 8
Изм. 9
Изм. 10
Изм. 11
Изм. 12
Изм. 13
Изм. 14
Изм. 15
Изм. 16
Изм. 17
Изм. 18
Изм. 19
Изм. 20
Изм. 21
Изм. 22
Изм. 23
Изм. 24
Изм. 25
Изм. 26
Изм. 27
Изм. 28
Изм. 29
Изм. 30
Изм. 31
Изм. 32
Изм. 33
Изм. 34
Изм. 35
Изм. 36
Изм. 37
Изм. 38
Изм. 39
Изм. 40
Изм. 41
Изм. 42
Изм. 43
Изм. 44
Изм. 45
Изм. 46
Изм. 47
Изм. 48
Изм. 49
Изм. 50
Изм. 51
Изм. 52
Изм. 53
Изм. 54
Изм. 55
Изм. 56
Изм. 57
Изм. 58
Изм. 59
Изм. 60
Изм. 61
Изм. 62
Изм. 63
Изм. 64
Изм. 65
Изм. 66
Изм. 67
Изм. 68
Изм. 69
Изм. 70
Изм. 71
Изм. 72
Изм. 73
Изм. 74
Изм. 75
Изм. 76
Изм. 77
Изм. 78
Изм. 79
Изм. 80
Изм. 81
Изм. 82
Изм. 83
Изм. 84
Изм. 85
Изм. 86
Изм. 87
Изм. 88
Изм. 89
Изм. 90
Изм. 91
Изм. 92
Изм. 93
Изм. 94
Изм. 95
Изм. 96
Изм. 97
Изм. 98
Изм. 99
Изм. 100

ТУ 9451-008-99653782-2015				Кушетка медицинская "Б1-Модель"		
для физиотерапии				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Ефимова				38 кг	

ТУ 9451-008-99653782-2015

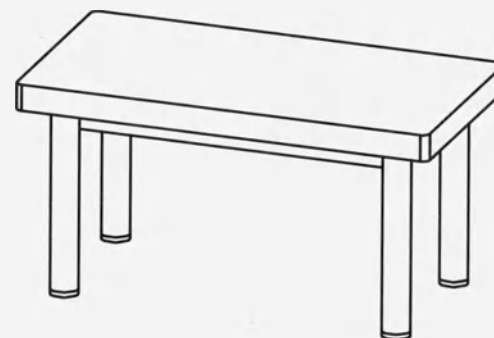
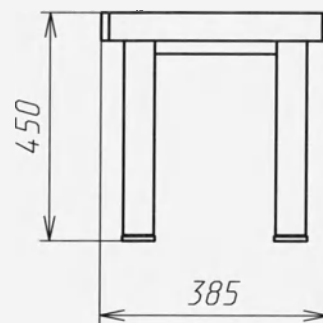
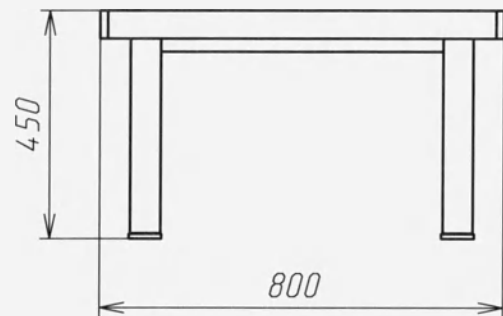


Рис. 56

ТУ 9451-008-99653782-2015					Банкетка медицинская "БТ-Мебель"		
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Лит.		
Разраб.	Ефанова				Масса		
Пров.					14 кг		
БТ-А03-1					Масштаб		
					Лист 27 / Листов		

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инб. № инб.	Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015

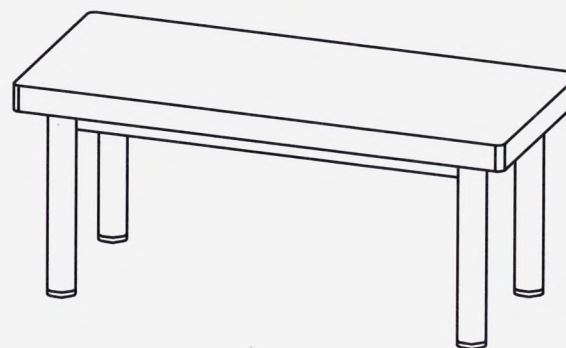
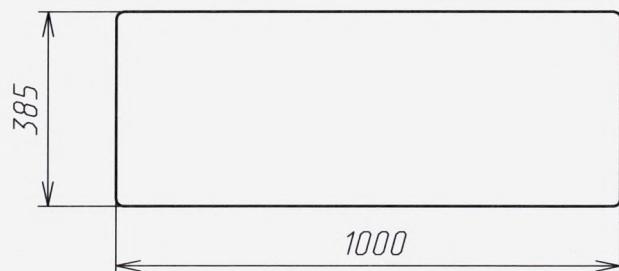
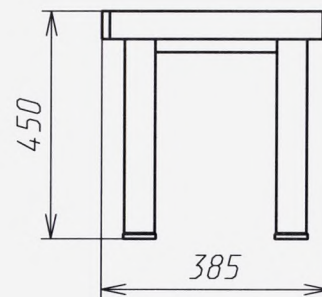
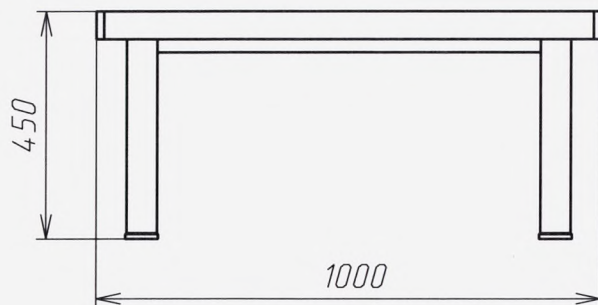


Рис. 57

№ подл. Подп. и дата Взам. инв. № инв. № аудл. Подп. и дата

					ТУ 9451-008-99653782-2015		
					Банкетка медицинская "БТ-Мебель"		
					БТ-А03-2		
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Ефанова				18 кг	
Пров.					Лист 28	Листов	

ТУ 9451-008-99653782-2015

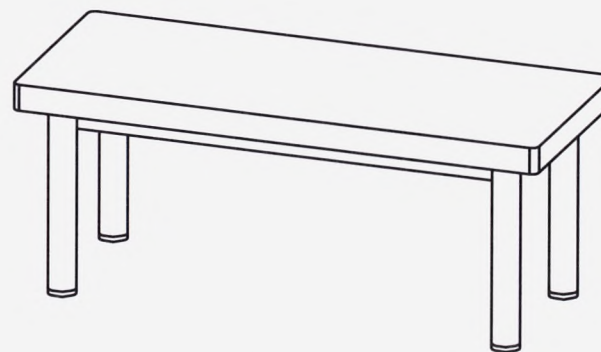
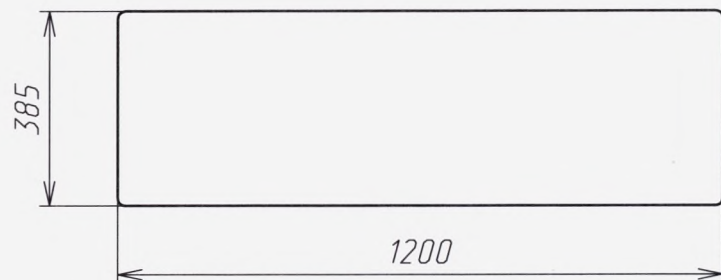
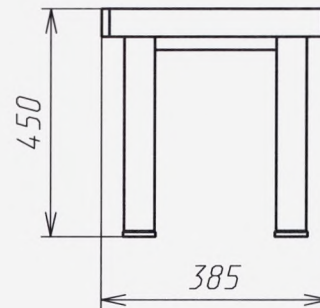
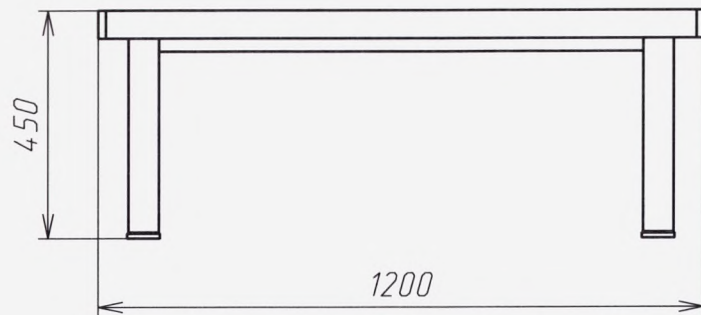


рис. 58

Подп. и дата

Взам. инв. № инв. № дубл.

Подп. и дата

подп.

ТУ 9451-008-99653782-2015

Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ефанова			
Пров.				

Банкетка медицинская "БТ-Медель"
БТ-А03-3

Лит.	Масса	Масштаб
	22 кг	
Лист 79	Листов	

ТУ 9451-008-99653782-2015

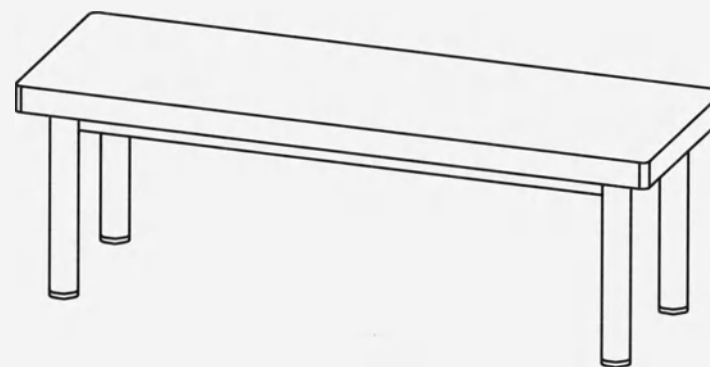
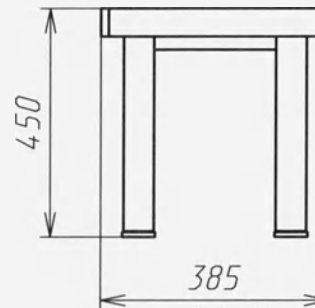


Рис. 59

№ подл.	Подп.	Дата	Взам. инд.	№ инд.	№ докл.	Подп.	Дата

ТУ 9451-008-99653782-2015							Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Банкетка медицинская "БТ-Мебель" БТ-А03-4				
Разраб.	Ефанова								
Пров.									
					Лист 20				Листов

ТУ 9451-008-99653782-2015

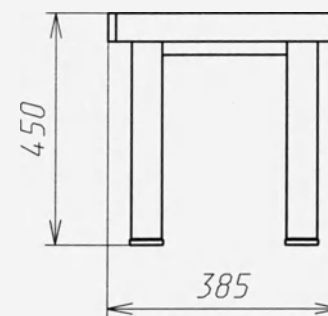
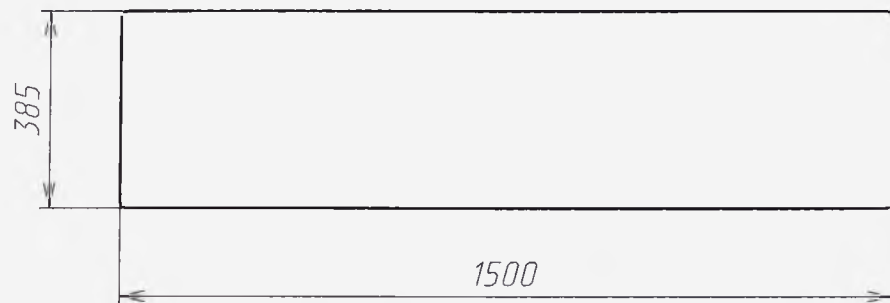
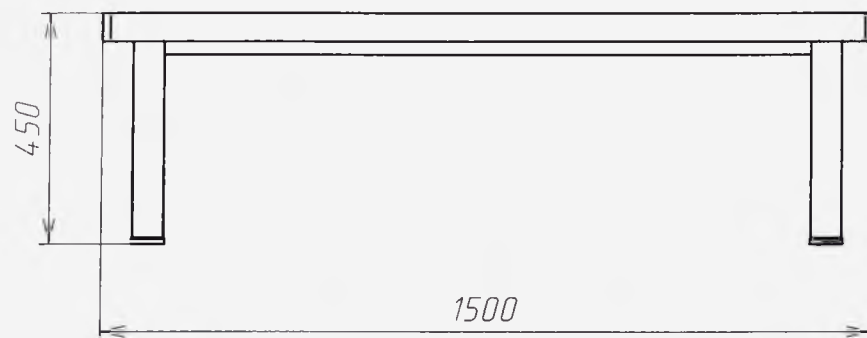


Рис. 60

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инд. № инд.	№ зодл.	Подп. и дата

					ТУ 9451-008-99653782-2015	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Банкетка медицинская "БТ-Мебель"		30 кг	
Разраб.	Ефанова				БТ-А03-5			
Пров.								

ТУ 9451-008-99653782-2015

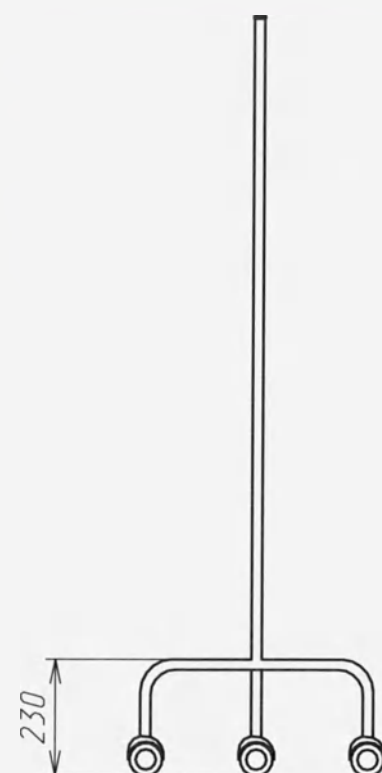
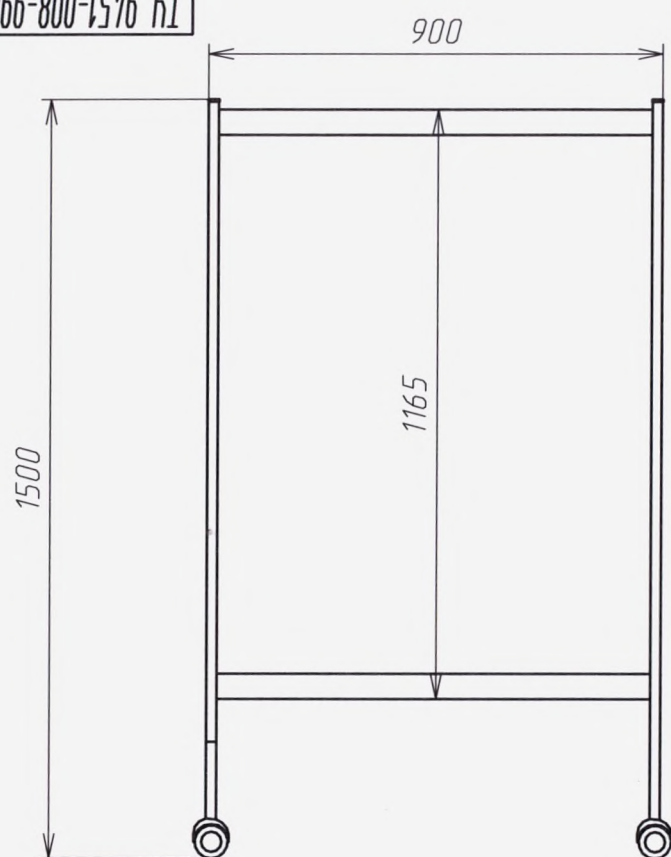


Рис. 61

ТУ 9451-008-99653782-2015

Изм.	Лист	И. докум.	Подп.	Дата	Ширма медицинская "БТ-Медель"	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Ефанова				БТ-Ш-1		9 кг	
Пров.								

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инд. № инд. № дубл.	Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015

1800

1500

1165

460

230

ТУ 9451-008-99653782-2015

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ефанова		
Пров.				

Ширма медицинская "БТ-Мебель"
БТ-Ш-2

Лит.	Масса	Масштаб
	12 кг	
Лист 2.3	Лист 2.3	

Рис. 62

ТУ 9451-008-99653782-2015

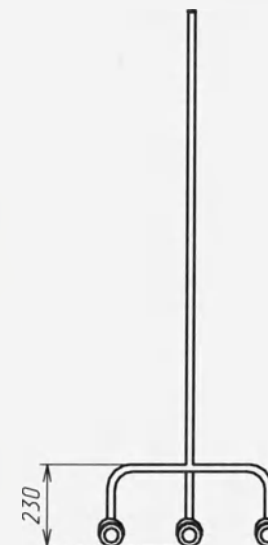
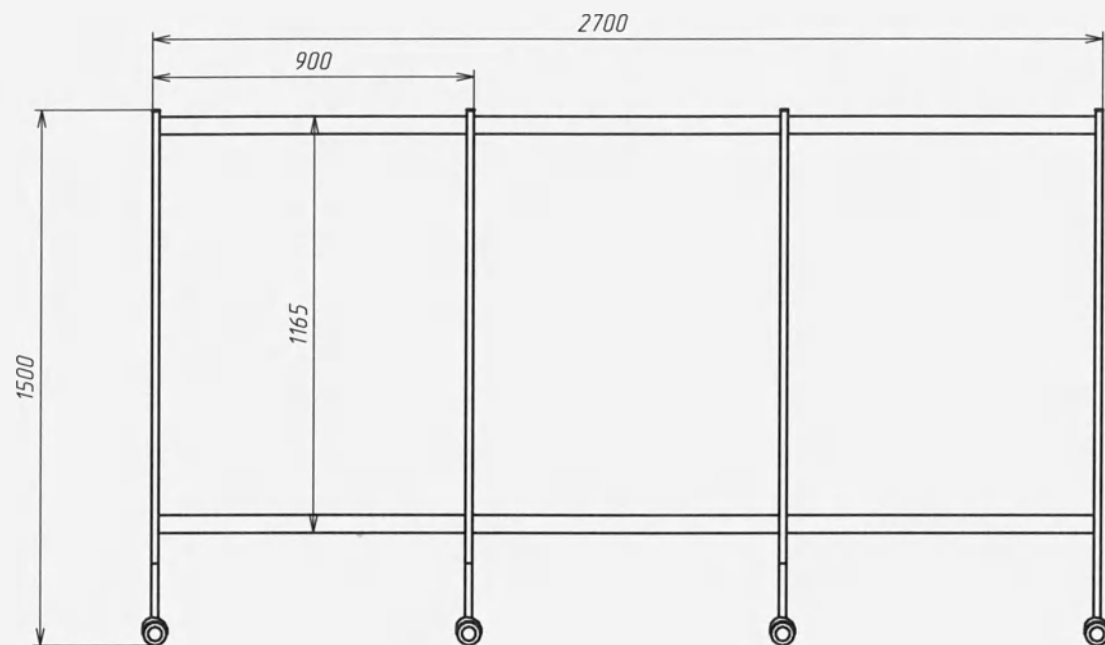


Рис. 63

				ТУ 9451-008-99653782-2015			
Изм.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Ширма медицинская "БТ-Медель"	Лист	Масса
Разраб.	Ефимова					15	кг
Проб.							

ТУ 9451-008-99653782-2015


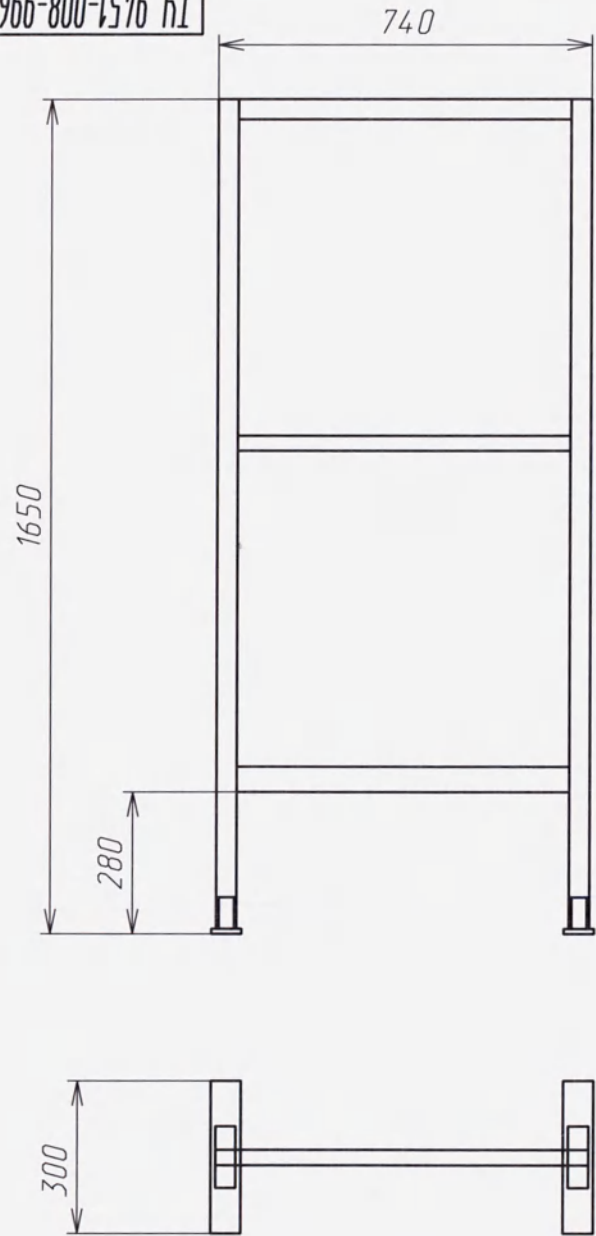


Рис. 64

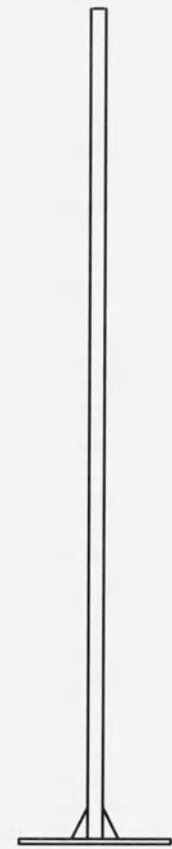

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инд.	№ инд.	№ дудл	Подп. и дата

ТУ 9451-008-99653782-2015					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ширма медицинская "БТ-Мебель"
Разраб.	Ефанова				для физиотерапии
Проб.					БТ-Ш-4
		Лит.	Масса	Масштаб	
			8 кг		
		Лист 25	Листов		

ТУ 9451-008-99653782-2015

1500

1650

280

300

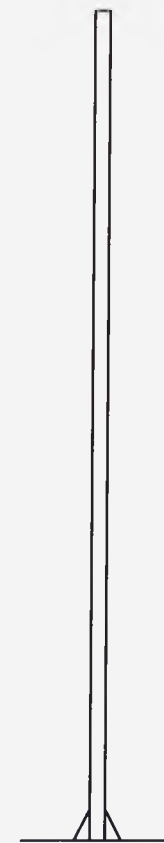
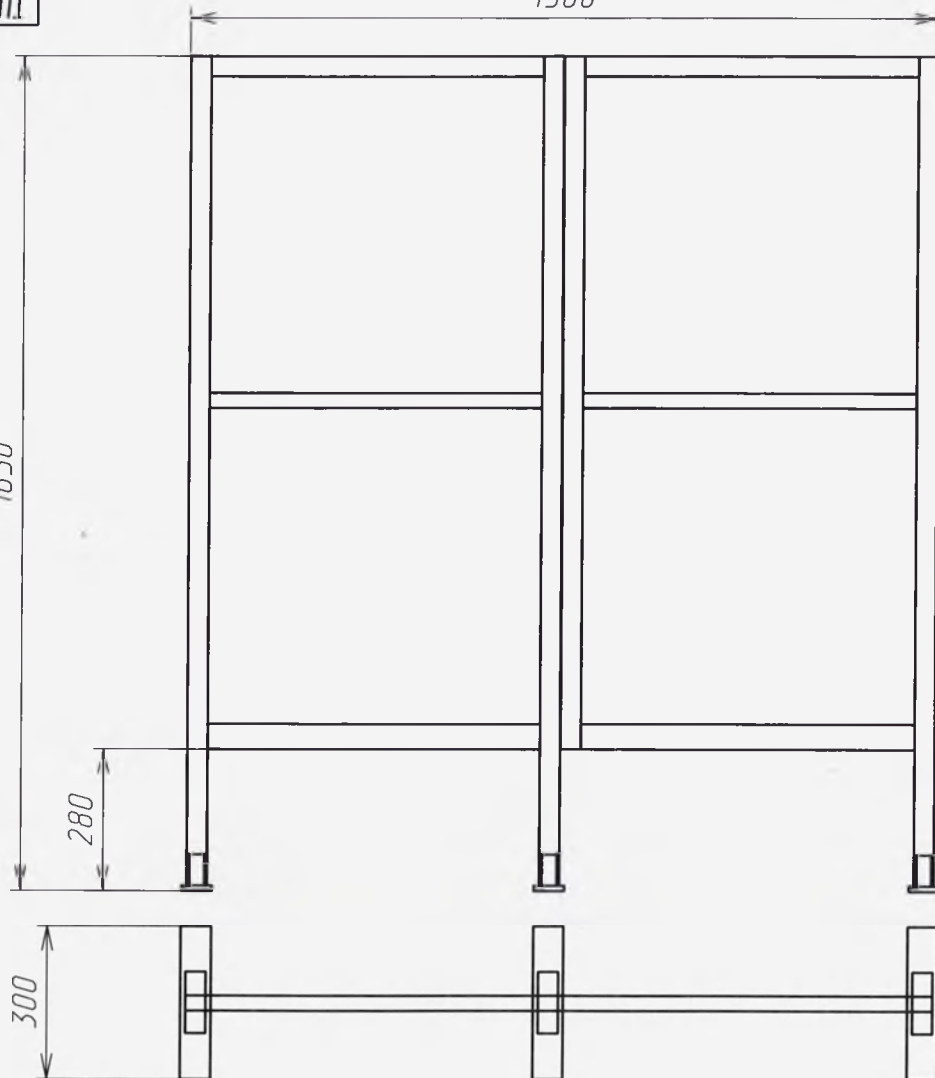


Рис. 65

Изм.	Лист	И. док.м.	Подп.	Дата
Разраб.	Ефанова			
Пров.				

ТУ 9451-008-99653782-2015

Ширма медицинская "БТ-Медель"
для физиотерапии
БТ-Ш-5

Лит.	Масса	Масштаб
	16 кг	
Лист 84	Листов	

ТУ 9451-008-99653782-2015

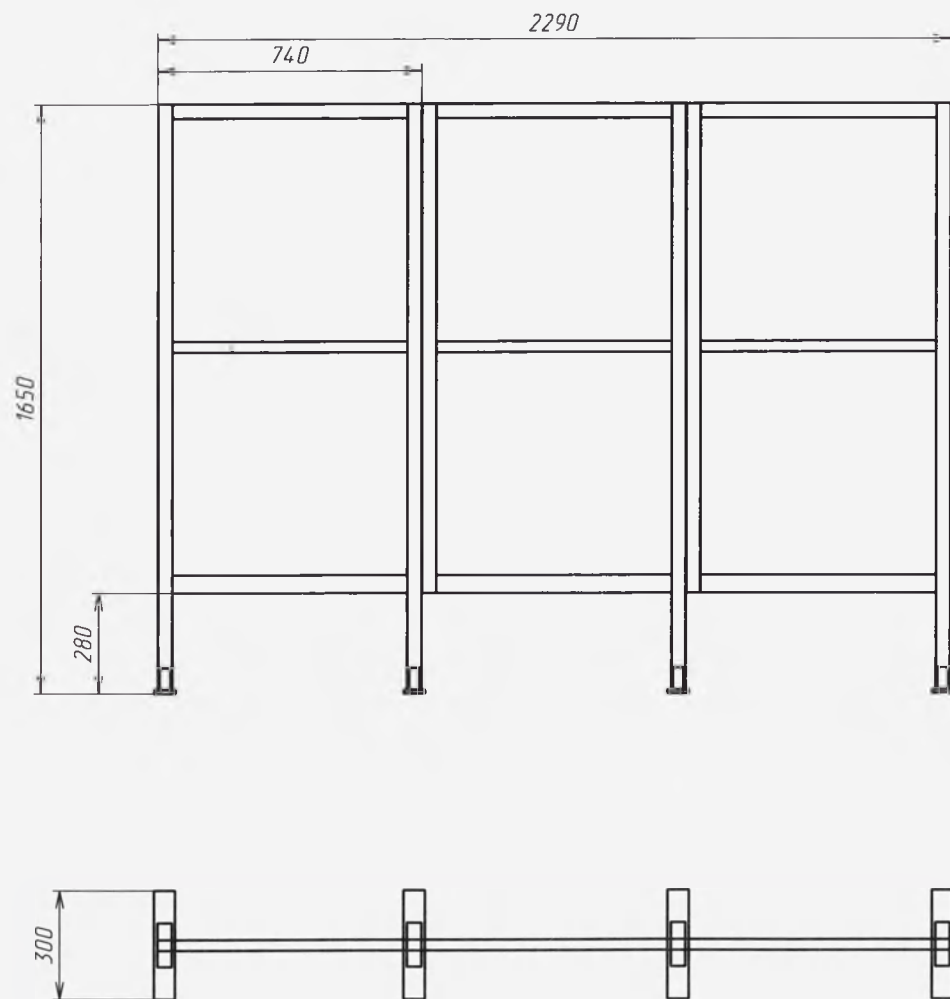


Рис. 66

ТУ 9451-008-99653782-2015					
Иж.	Лист	И докум.	Подп.	Дата	Ширма медицинская "БТ-Медель"
Разраб.	Ефимова				для физиотерапии
Проб.					БТ-Ш-6
Лит.	Масса	Масштаб			
	24 кг				

ТУ 9451-008-99653782-2015

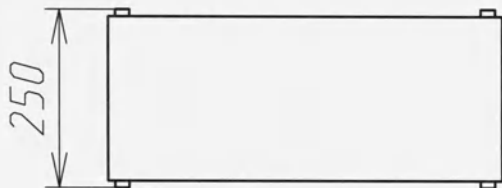
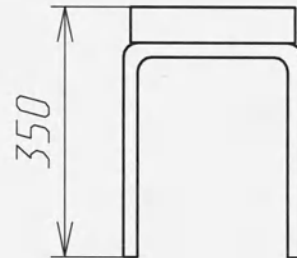
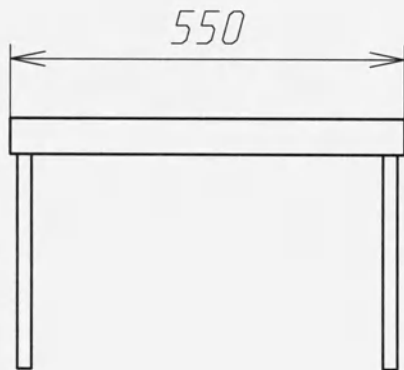


Рис. 67

ТУ 9451-008-99653782-2015

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ефанова		
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

Ступенька медицинская "БТ-Мебель"
БТ-СТ-1

Лит.	Масса	Масштаб
	6 кг	
Лист 28	Листов	

ООО ПТК "Белва"

ТУ 9451-008-99653782-2015

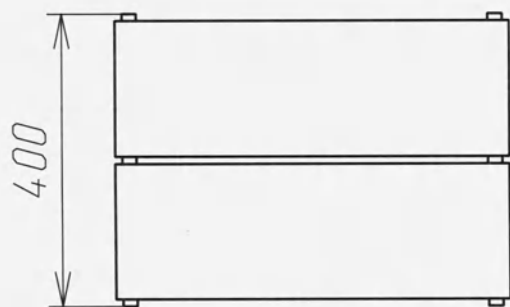
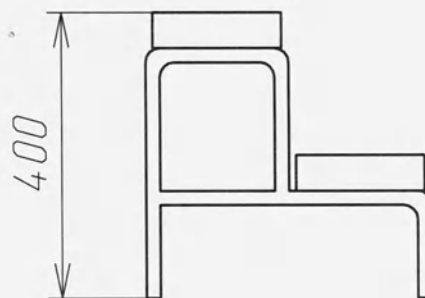
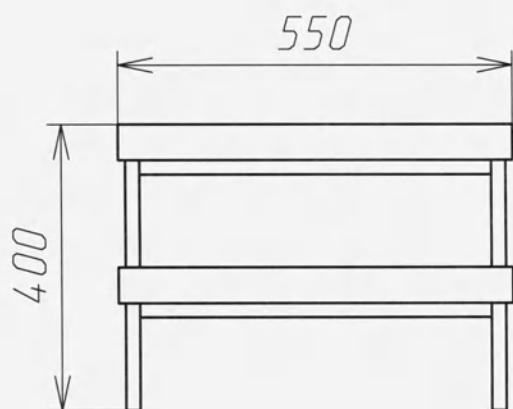


Рис. 68

ТУ 9451-008-99653782-2015

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ефанова		
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

Ступенька медицинская "БТ-Медель"
БТ-СТ-2

Лит.	Масса	Масштаб
	8 кг	
Лист 89	Листов	

ООО ПТК "Белва"

Копировал

Формат А4

ТУ 9451-008-99653782-2015

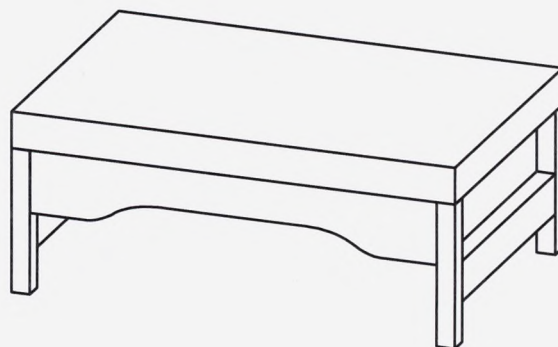
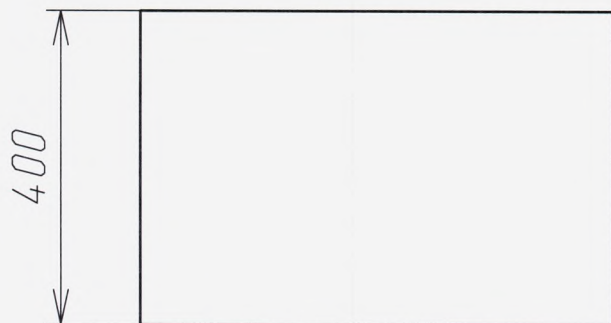
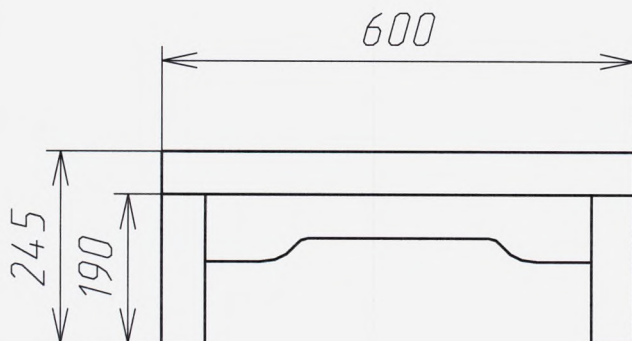


Рис. 69

ТУ 9451-008-99653782-2015

Ступенька медицинская "БТ-Медель"
для физиотерапии
БТ-СТ-3

Лит. Масса Масштаб

7кг

Лист 90 Листов

ООО ПТК "Белва"

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

Разраб. Ефанова

Пров.

Н.контр.

Утв.

Копировал

Формат А4

90

ТУ 9451-008-99653782-2015

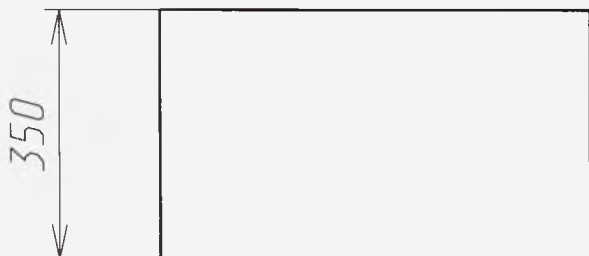
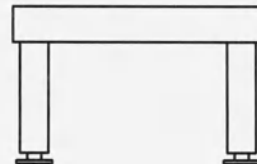
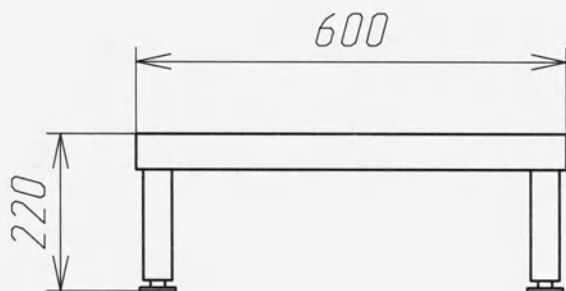


рис. 70

Изм. № подл. Дата Изм. № подл. Дата Изм. № подл. Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Ефанова			
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

ТУ 9451-008-99653782-2015

Ступенька медицинская "БТ-Медель"
БТ-СТ-4

Лит.	Масса	Масштаб
	6 кг	
Лист 91 Листов		
000 ПТК "Белва"		

Копировал

Формат А4

ТУ 9451-008-99653782-2015

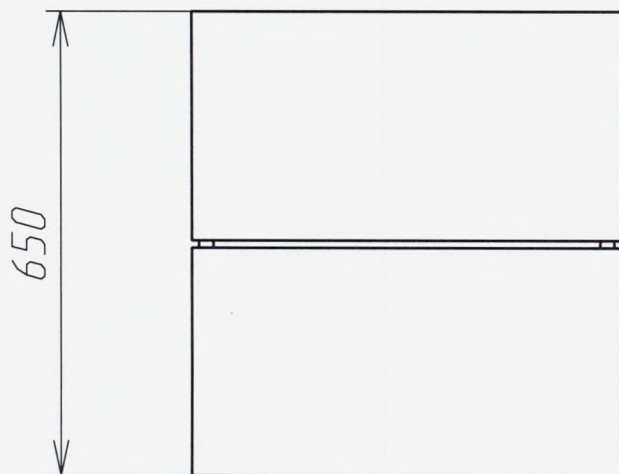
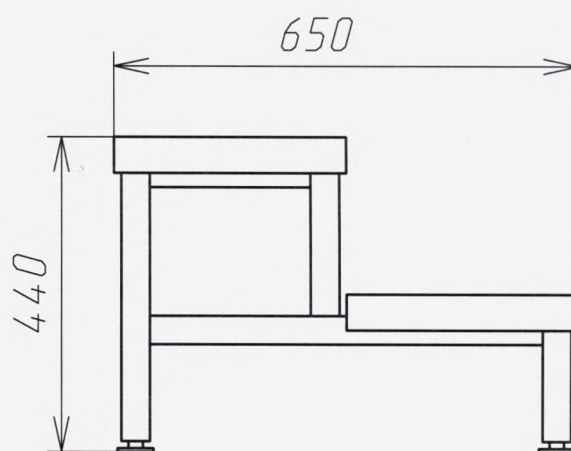
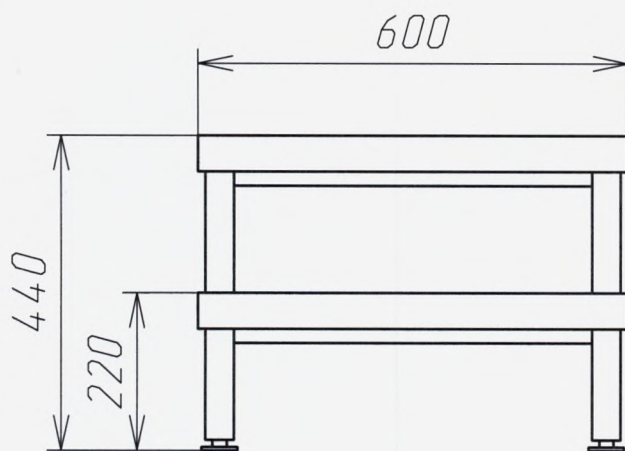


Рис. 71

Изм. № подл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ефанова		
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

ТУ 9451-008-99653782-2015

Ступенька медицинская "БТ-Мебель"
БТ-СТ-5

Лит.	Масса	Масштаб
	9 кг	
Лист 92		Листов
000 ПТК "Белва"		

Лист регистрации изменений

[illegible]

Прошнуровано,
пронумеровано, скреплено
печатью

46 листов

Мазанов А.В.

