




94 3710

УТВЕРЖДАЮ

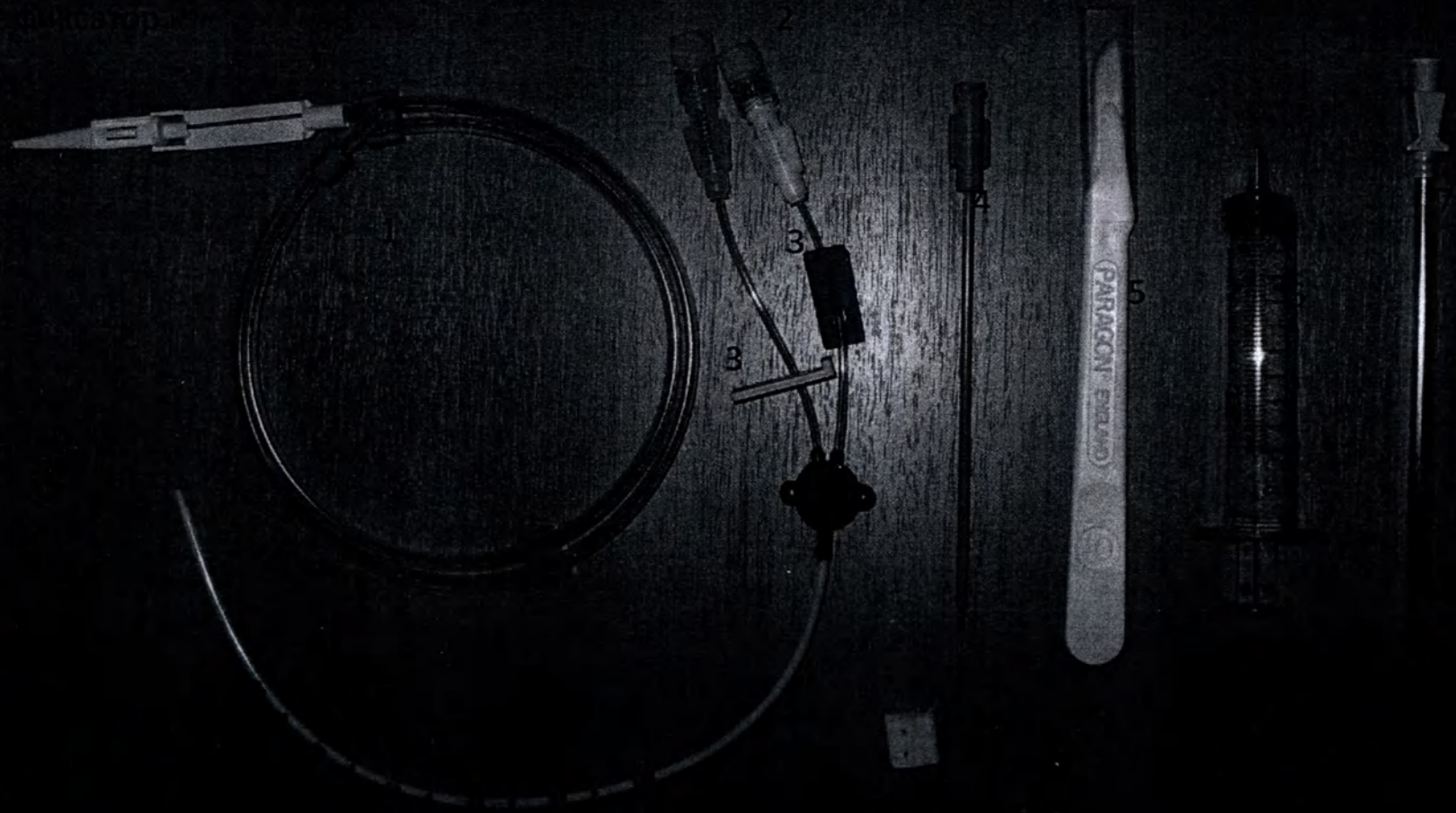

Генеральный директор
ЗАО «МедСил»
Д.Ю.Зиненко

11 2016 г.

НАБОР ДЛЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН С
МНОГОКАНАЛЬНЫМ КАТЕТРОМ,ИМЕЮЩИМ
АНТИМИКРОБНОЕ ПОКРЫТИЕ

Этикетка

2016

Набор для катетеризации центральных вен с многоканальным катетером, имеющим антимикробное покрытие предназначен для однократного применения и введения в вены медикаментозных и инфузионных растворов посредством катетера.

В набор входит:

катетер диаметром 2,4 мм – 1 шт;
дилататор диаметром 2,6 мм – 1 шт;
проводник диаметром 0,9 мм – 1 шт;
игла интродьюсерная диаметром 1,6 мм – 1 шт;
шприц объемом 10 мл с иглой инъекционной – 1 шт;
зажим – 2 шт;
фиксатор – 1 шт;
скальпель – 1 шт;

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Набор выпускается стерильным. Стерилизация производится газовым (окисью этилена) методом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация набора должна проводиться по СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование производится при температуре от минус 10 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 50 %.

Набор должен храниться в отопляемом и проветриваемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 50 %.

Набор должен храниться в первичной упаковке и защищен от прямого ультрафиолетового излучения.

Не допускается хранить изделие вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и другими органическими растворителями

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Должны быть приняты меры защиты от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.
2. При работе с катетером не следует подвергать его кручениям и изгибам, приводящим к остаточной деформации.

3. Не допускается извлечение катетера через иглу для введения катетера.

4. Не допускается повторное частичное или полное введение полностью извлеченной интродьюсерной иглы.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Набор соответствует требованиям ТУ 9437-085-18037666-2016 и признан годным для эксплуатации.

Номер партии.

Штамп ОТК

Дата изготовления

Использовать до

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности набора не менее 1 года с даты стерилизации.

Изготовитель: Россия, ЗАО «МедСил, г. Мытищи, Моск. обл.
ул. Ядреевская д. 4 т. 495-583-36-62.