



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АДАПТИВНО-
РЕЦЕПТОРНОЙ ТЕРАПИИ»**
(ООО «РЦ АРТ»)

620146, г. Екатеринбург,
ул. Академика Постовского, 15
тел./факс: (343) 216-60-26; (343) 267-23-30
www.denascorp.ru
e-mail: corp@denascorp.ru

ИНН 6661060144 КПП 666101001
БИК 046551942
И/с 30101810300000000942
р/с 40702810065510000750
в ЗАО КБ «Драгоценности Урала»
г. Екатеринбург

СПРАВКА НА ИЗДЕЛИЕ

Электростимулятор чрескожный противоболевой «Ладос» ТУ-9444-010-44148620-2008

Габариты электростимулятора не более 130x50x55 мм.

Комплектность

Наименование изделия, составной части, документа	Коли- чество	Примечание
1 Аппарат	1	
2 Комплект выносных электродов	1	*
3 Кабель для подключения выносных электродов	1	*
4 Элемент питания (типа АА)	2	**
5 Руководство по эксплуатации	1	
6 Пользовательская тара	1	

* По отдельной заявке

** Гарантия не распространяется

Описание принципа действия изделия

Способ воздействия - динамическая электронейростимуляция
(регистрационное удостоверение №ФС-2005/2004)

Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) – способ чрескожной электронейростимуляции, заключающийся в воздействии на рефлексогенные зоны и акупунктурные точки импульсами электрического тока, форма которых зависит от значений полного электрического сопротивления (импеданса) поверхности кожи в подэлектродном участке. Во время ДЭНС осуществляется локальное воздействие на ограниченный участок, акупунктурную точку или обрабатываются обширные рефлексогенные зоны посредством встроенных и выносных электродов.

Показания: Профилактика и симптоматическое лечение различных заболеваний и синдромов с целью достижения обезболивающего, спазмолитического, противовоспалительного, иммуномодулирующего и общеукрепляющего эффектов.

Противопоказания: Непереносимость эл.тока, наличие имплантированного кардиостимулятора, эпилептический статус, новообразования любой этиологии и локализации, лихорадка неясного генеза, тромбоз вен, состояние острого психического, алкогольного или наркотического возбуждения.

Рекомендации для использования:

Электростимулятор чрескожный противоболевой «Ладос», предназначен для воздействия на области боли и очаги повреждений (ушибы, переломы, заболевания опорно-двигательного аппарата, синдром хронической боли) в лечебно-профилактических учреждениях и в бытовых условиях.


МП  **Иванов В.В. /**
19.08.2008