

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Здоровье-М»

 О.А. Молодцова

« 11 » 23 2009 г.



Инструкция по применению

JNB Валики медицинские стоматологические хлопковые

**Соответствует требованиям
и технической документации изготовителя**

2009

Инструкция по применению «валиков стоматологических».

1. Назначение:

Валики применяются в стоматологической практике для формирования удобной «рабочей зоны» вокруг оперируемого зуба и перекрытия протоков слюнных желёз.

2. Свойства:

За счет высокого влагопоглощения (гигроскопичности) обеспечивают абсорбцию крови и слюны в полости рта.

3. Способ применения:

Валики стоматологические достать из коробки, поместить в ёмкость с закрывающейся крышкой или в контейнер для валиков. С помощью стоматологического пинцета извлечь валик из контейнера и ввести в полость рта для формирования удобной «рабочей зоны» вокруг оперируемого зуба и перекрытия протоков слюнных желёз.

4. Комплектность:

Картонная коробка упаковка 280х200х140 содержит 2000 шт. Или целлофановая упаковка 250г. Цвет белый.

5. Условия хранения:

Хранение валиков стоматологических должно производиться в закрытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при комнатной температуре.

Гарантийный срок хранения 2 года.

