

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «КИТ»

 И.В. Спичаков

« 02 »  2013г.



Инструкция по применению

Презервативы натуральные латексные мужские по ТУ 2514-001-65578626-2013

производства Общество с ограниченной ответственность «КИТ» (ООО «КИТ»),
юридический адрес/ фактический адрес: Российская Федерация, 600009, Владимирская
область, город Владимир, улица Полины Осипенко д.69.

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель Руководителя

Испытательного

лабораторного центра

ФГБУН НИИ ФХМ ФМБА России

Кандидат медицинских наук

 А.К. Мартынов

2013 г.



НАИМЕНОВАНИЕ:

Презервативы натуральные латексные мужские по ТУ 2514-001-65578626-2013, варианты исполнения:

1. Презервативы классические гладкие.
2. Презервативы ультратонкие гладкие.
3. Презервативы ребристые.
4. Презервативы увеличенного размера гладкие.
5. Презервативы продлевающие с бензокаином гладкие.
6. Презервативы плотнооблегающие анатомические гладкие.
7. Презервативы с точками.
8. Презервативы светящиеся зеленые гладкие.
9. Презервативы специальной формы с расширением гладкие.
10. Презервативы сладкая любовь со вкусом клубники гладкие.
11. Презервативы зеленые со вкусом мяты гладкие.
12. Презервативы желтые со вкусом банана гладкие.
13. Презервативы розовые со вкусом клубники гладкие.
14. Презервативы черные гладкие.
15. Презервативы цветные с вкусами (зеленые со вкусом мяты, желтые со вкусом банана, розовые со вкусом клубники) гладкие.
16. Презервативы особо прочные гладкие.
17. Презервативы с ребрами и точками.
18. Презервативы стимулирующие с усиками.
19. Презервативы стимулирующие с шариками.
20. Презервативы стимулирующие с усиками и шариками.

производства Общество с ограниченной ответственность «КИТ» (ООО «КИТ»), юридический адрес/ фактический адрес: Российская Федерация, 600009, Владимирская область, город Владимир, улица Полины Осипенко д.69.

НАЗНАЧЕНИЕ

Презервативы натуральные латексные мужские предназначены для индивидуальной контрацепции (средства контрацепции барьерного типа).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изделия представляют собой непроницаемый для спермы чехол, изготовленный из натурального латекса, который надевается на эрегированный половой член;
- Изделия герметично упакованы в первичную (индивидуальную) упаковку и содержат не менее 20мг силиконового масла.
- Состав силиконового масла – 100% диметил силиконовое масло.
- Для производства презервативов со вкусом и ароматом добавляется соответствующая вкусу и аромату пищевая эссенция. Содержание пищевой эссенции в силиконовом масле 0,07%.
- Для производства презервативов продлевающих половой акт в силиконовое масло добавляется бензокоин. Содержание бензокаина в силиконовом масле 37,5%.
- Для производства презервативов светящихся добавляется сульфид цинка (ZnS) с медью (CU). Сульфид цинка (ZnS) с медью (CU) наносится на накопитель (резервуар) презерватива с внешней стороны. Содержание сульфид цинка с медью в силиконовом масле с внешней стороны презерватива 9-11%.
- Для производства цветных презервативов добавляется соответствующий цвету краситель на водной основе. Содержание красителя 15% к 100%.
- Каждое изделие имеет резервуар для спермы.

– Изделия имеют следующий состав:

<i>Состав (наименование)</i>	<i>Содержание (%)</i>
<i>Натуральный латекс</i>	<i>96,69%</i>
<i>Гидроксид калия</i>	<i>0,15%</i>
<i>Казеин</i>	<i>0,28%</i>
<i>Сера</i>	<i>0,95%</i>
<i>Карбонат цинка</i>	<i>1,15%</i>
<i>Ускоритель Рх</i>	<i>0,78%</i>
<i>Итого</i>	<i>100%</i>

Презервативы и упаковка наборов презервативов имеют следующие характеристики:

- **Диаметр:** 52мм (±2мм) и 54мм (±2мм);
- **Формы цилиндра:** прямая (стандартная форма), анатомическая, с расширением;
- **Текстуры поверхности:** гладкая, точечная, ребристая, точечно-ребристая; с усиками; с шариками; с усиками и шариками;
- **Цвета:** натуральный, розовый, зеленый, желтый, черный;
- **Вкусы:** мятный, банановый, клубничный;
- **Ароматы:** мятный, банановый, клубничный;
- **Смазка:** силиконовое масло;
- **Формы первичной (индивидуальной) упаковки:** квадратная, прямоугольная, круглая;
- **Типы первичной (индивидуальной) упаковки:** алюминиевая фольга, полимерная пленка, полимерная пленка с алюминиевой фольгой, алюминиевая фольга с пластиковым ламинированием;
- **Специальные подвиды:** ультратонкие, ребристые, с точками, увеличенного размера, продлевающие с бензокаином, плотнооблегающие анатомические, светящиеся (сульфид цинка с медью), специальной формы с расширением, сладкая любовь со вкусом клубники, зеленые со вкусом мяты, желтые со вкусом банана, розовые со вкусом клубники, черные, цветные с вкусами (зеленые со вкусом мяты, желтые со вкусом банана, розовые со вкусом клубники), особо прочные, с ребрами и точками, стимулирующие с усиками, стимулирующие с шариками, стимулирующие с усиками и шариками.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость материала.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. Пользуйтесь новым презервативом каждый раз, когда занимаетесь сексом.
2. При вскрытии упаковки не применяйте острые предметы.
3. Надевайте презерватив на половой член до начала полового акта.
Расположите свернутый презерватив на головке эрегированного полового члена.
Сожмите двумя пальцами резервуар презерватива, чтобы вытеснить воздух. Сделайте это обязательно, так как оставшийся воздух в резервуаре может стать причиной разрыва презерватива.
Расправьте презерватив вниз до основания полового члена.
4. Сразу после эякуляции извлеките половой член, прижав к нему кромку презерватива, чтобы он не соскользнул. Аккуратно снимите презерватив.
5. Сверните используемый презерватив и поместите в емкость для отходов.

Никогда не бросайте презерватив в унитаз.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Презервативы транспортируют крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при температуре от минус 50°C до плюс 50°C (относительная влажность воздуха 80 % при температуре 25 °C).
2. При транспортировании презервативов при минусовых температурах их следует распаковывать после выдержки в течение 1 суток с момента получения при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.
3. Презервативы следует хранить в упакованном виде, в закрытом складском помещении при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

При хранении презервативы должны быть защищены от действия прямых лучей и не подвергаться действию вазелина, масел, органических растворителей, нефтяных продуктов, фенолов, кислот и щелочей.

МАРКИРОВКА

Маркировку наносят печатным способом или в виде наклейки на каждую единицу потребительской упаковки. Надписи, содержащие данные о месяце, годе изготовления, сроке годности, номера партии, допускается выполнять штемпелеванием.

Маркировка потребительской упаковки должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- дату изготовления (месяц, год);
- гарантийный срок хранения или указание «годен до»;
- номер партии;
- условия хранения;
- обозначение настоящих технических условий;
- количество презервативов.

Инструкция по эксплуатации (применению) должна быть нанесена непосредственно на потребительскую упаковку или вложена в виде вкладыша в потребительскую упаковку. Содержание инструкции приведено в Приложении В.

Маркировка транспортной тары должна соответствовать ГОСТ 14192 и включать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя изделий;
- наименование изделия;
- условия транспортирования и хранения;
- количество потребительских упаковок с изделиями;
- гарантийный срок хранения или указание «годен до».

Допускается наносить другие манипуляционные знаки и информационные надписи, обеспечивающие сохранность изделий при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

УПАКОВКА

1. Упаковка изделий должна обеспечивать их защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
2. Каждый презерватив упаковывается в индивидуальную (первичную) упаковку.

3. Первичная (индивидуальная) упаковка имеет следующие виды исполнения: алюминиевая фольга, полимерная пленка, полимерная пленка с алюминиевой фольгой, алюминиевая фольга с пластиковым ламинированием.
4. Первичная (индивидуальная) упаковка может иметь следующие формы: квадратная, прямоугольная, круглая. Могут изготавливаться упаковки и других форм по заказу Покупателей.
5. Каждая первичная (индивидуальная) упаковка с изделием должна быть упакована во вторичную (потребительскую) упаковку.
6. Вторичная (потребительская) упаковка имеет следующие виды исполнения: картонные коробки; металлические коробки с крышкой; пластиковые коробки с крышкой, полимерная пленка.
7. Первичная (индивидуальная) упаковка размещается во вторичной по 3 штуки или по 12 штук. Допускается размещение первичной (индивидуальной) упаковки во вторичную (потребительскую) в любом количестве в диапазоне от 1 до 150 штук по заказу Покупателя.
8. Дополнительно, вторичная (потребительская) упаковка может быть запечатана в полиэтиленовую пленку с отрывной лентой методом «конверт».
9. Для транспортировки изделия одного вида в потребительской упаковке укладывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142.
Ящики из гофрированного картона с изделиями оклеивают клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251, полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477 или пропиленовой лентой по действующей нормативной и технической документации.
10. Масса брутто транспортной тары не должна превышать 20 кг.
11. Упакованные изделия могут поставляться в виде транспортных пакетов в соответствии с ГОСТ 24597, ГОСТ 26663, ГОСТ 21650.
12. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании и хранении.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие презервативов требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий хранения и транспортирования.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения презервативов — 5 лет со дня изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ

1. Презервативы являются нетоксичными.
2. Утилизация изделий потребителями при самостоятельном использовании осуществляется обычным путём совместно с твёрдыми бытовыми отходами.
3. Презервативы после использования подлежат уничтожению путем захоронения (как нетоксичные промышленные отходы).
4. Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате:
 - неорганизованного захоронения или сжигания отходов материалов при производстве и хранении продукции;
 - произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах.
5. Презервативы и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, как в процессе эксплуатации, так и после её окончания.

6. Утилизация отходов в конце производственного цикла осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, СанПиН 2.1.7.1322-03.
7. При утилизации отходов материалов и химикатов, а также при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции рабочих помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.
8. Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772.
9. Допускается утилизация отходов материалов на договорной основе с фирмой, имеющей лицензию на утилизацию отходов.
10. Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, сбросах в водоемы и загрязнения почвы контролируются в соответствии с «Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий», МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.5.1315-03.

Производитель:

ООО «КИТ», Россия, 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко 69, телефон 8 (4922) 46-22-99. www.latio.ru.com

Генеральный директор
ООО «КИТ»



П.В.Слиचाков

