

## СПРАВКА

об изделии медицинского назначения

### Бинты медицинские нестерильные эластичные фиксирующие трубчатые сетчатые по ГОСТ 51219-98

#### 1. Описание изделия

Бинты медицинские нестерильные эластичные фиксирующие трубчатые сетчатые выпускаются в нестерильном исполнении. Предназначены для фиксации перевязочных средств.

Типоразмеры эластичных трубчатых медицинских бинтов представлены в таблице:

| Вид | Линейные размеры, см | Ширина бинта в свободном состоянии, см |
|-----|----------------------|----------------------------------------|
| № 1 | 20 см $\pm$ 1 см     | 1,0см $\pm$ 0,2 см                     |
| №2  | 15 см $\pm$ 1 см     | 1,7 см $\pm$ 0,2 см                    |
| №3  | 21 см $\pm$ 1 см     | 2,2см $\pm$ 0,2 см                     |
| №4  | 20 см $\pm$ 1 см     | 2,5см $\pm$ 0,3 см                     |
| №5  | 16 см $\pm$ 0,5 см   | 3,0см $\pm$ 0,3 см                     |
| №6  | 14 см $\pm$ 1 см     | 3,3см $\pm$ 0,3 см                     |

#### Область применения бинтов медицинских эластичных фиксирующих трубчатых сетчатых

№ 1 - применяется для фиксации повязок на пальцах взрослых, а также на кисти и стопе детей

№2 - применяется для фиксации повязок на кисти, предплечье, стопе, локтевом, лучезапястном суставе взрослых и детей, а также на голеностопном и коленном суставе детей

№ 3 - применяется для фиксации повязок на предплечье, плече, голеностопном и коленном суставе взрослых, а также на бедре и голове детей

№4 - применяется для фиксации повязок на коленном суставе взрослых и голове, грудной клетке и тазобедренном суставе детей

№5 - применяется для фиксации повязок на голове и бедре взрослых, а также на груди, животе и тазе детей

№6 - применяется для фиксации повязок на бедре, груди, животе, тазе взрослых

## Основные параметры нестерильных эластичных фиксирующих трубчатых сетчатых бинтов

| № п/п | Наименование показателя      | Параметр                        |
|-------|------------------------------|---------------------------------|
| 1     | Растяжимость, %              | Не менее 500, но не более 1 000 |
| 2     | Рабочая растяжимость, %      | Не менее 450, но не более 900   |
| 3     | Поверхностная плотность, г/м | Не менее 40, но не более 120    |
| 4     | Разрывная нагрузка, Н (кгс)  | Не менее 49,0 (5)               |
| 5     | Класс компрессии             | нет                             |
| 6     | Назначение изделия           | Фиксация перевязочных средств   |

Бинты эластичные трубчатые медицинские нестерильные упаковывают в пленочную оболочку, края которой сваривают термическим способом или упаковывают в один слой оберточной бумаги.

Бинты медицинские нестерильные эластичные фиксирующие трубчатые сетчатые микробиологически безопасны. Гигроскопичны, воздухопроницаемы. С лекарственными средствами не взаимодействуют. Аллергических реакций не вызывают.

### 2. Описание принципа действия изделия, либо ссылку на научно-обоснованный механизм его действия

Бинты медицинские нестерильные эластичные фиксирующие трубчатые сетчатые фиксируют повязки или марлевые салфетки на ранах. Бинты имеет круговую структуру и не бинтуется, а надевается на определенную часть тела с целью зафиксировать повязку или марлевую салфетку.

### 3. Сведения обо всех имеющих отношение к принципу действия (или механизму действия) функциональных характеристиках изделия, таких как его дизайн, используемые материалы и физические свойства

Бинт медицинский нестерильный эластичный фиксирующий трубчатый сетчатый - это специальный медицинский бинт, в ткань которого вплетены резиновые нити, что позволяет производить прочно фиксацию.

4. Информацию о сферах применения изделия, включая краткое описание заболеваний или состояний человека, при которых данное изделие может использоваться для диагностики, лечения, профилактики

или улучшения состояния, включая, по возможности, определение частоты встречаемости таких заболеваний или состояний

Бинты медицинские нестерильные эластичные фиксирующие трубчатые сетчатые могут использоваться в системе скорой помощи, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях, на дому, для оказания первой помощи.

Гарантированный срок хранения стерильных бинтов – 5 лет.

Генеральный директор  
(должность)

(подпись и печать Заявителя)

В.А. Савченко  
(И.О.Фамилия)