

«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Целит»



М.В. Блажко

« 9 » 04 2018 г.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

ГЕЛЬ С СОДЕРЖАНИЕМ ЙОНОГО СЕРЕБРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ
КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ

«ДИЛАТОН-ГЕЛЬ»

ТУ 9391-038-10614163-2001

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГЕЛЬ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ
"ДИЛАТОН-ГЕЛЬ"**

гель с содержанием ионного серебра для химического расширения корневых каналов зубов
ТУ 9391-038-10614163-2001

Рег. Уд. № ФСР 2011/10713 от 25 ноября 2011г

НАЗНАЧЕНИЕ

«Дилатон-гель» является медицинским изделием кратковременного применения, выпускается в нестерильной форме, для профессионального использования врачами-стоматологами, предназначен для химического расширения корневых каналов зубов верхнего и нижнего ряда и выявления устья каналов, обладает антисептическим действием.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Дилатон-гель» представляет собой гель зелёного цвета, содержит в своём составе 17 % трилона Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), активное серебро, в ионной форме и водорастворимый гелеобразователь.

Трилон Б обеспечивает размягчение дентина корневого канала и растворение смазанного слоя, увеличивает дентинную проницаемость, что улучшает адаптацию силера к стенкам канала.

Гелеобразная форма удобна в применении, служит хорошей смазкой для эндодонтического инструмента, водорастворимая основа позволяет легко вымывать гель из канала.

Активное серебро, в ионной форме обеспечивает бактерицидный эффект материала «Дилатон-гель».

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний не выявлено.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полость зуба вскрыть обычным способом, очистить от содержимого пульповую камеру. Ввести небольшое количество «Дилатон-геля» в корневой канал при помощи эндодонтического инструмента. Оставить на 1-2 минуты. Произвести механическое расширение канала. Чередовать механическое и химическое воздействие до получения необходимого результата. Обработать канал 3% раствором гипохлорита натрия, который растворяет органическую основу дентина. После расширения, корневой канал тщательно промыть водой.

ФОРМА ВЫПУСКА

Шприц с гелем массой 5 г закрытый колпачком — 1 шт

Рекомендация по применению — 1 шт

Насадка на шприц (игла) — 5 шт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от + 4°C до + 25°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие «Дилатон-геля» требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Отходы после использования «Дилатон-геля» в виде остатков геля, пустой тары утилизируются согласно СанПин 2.1.7.2790-10 класс А.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и
тел. (473) 279-76-82, (473) 279-78-87, факс (473) 237-61-06 www.celit.ru

Подготовил:

Инженер-технолог  /Е.В. Попова/

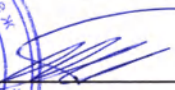
Всего прошито и скреплено печатью
3 (три) листа(ов)
Должность Генеральный директор ООО «Целит»
Подпись М.В. Блажко/





«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Целит»

 М.В. Блажко

« 19 » 04 2018 г.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ

ГЕЛЬ С СОДЕРЖАНИЕМ ПЕРОКСИДА КАРБАМИДА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО
РАСШИРЕНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ

«ДИЛАТОН – ГЕЛЬ+»

ТУ 9391-038-10614163-2001

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ГЕЛЬ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ
«ДИЛАТОН – ГЕЛЬ+»**

гель с содержанием пероксида карбамида для химического расширения корневых каналов зубов

ТУ 9391-038-10614163-2001

Рег. Уд. № ФСР 2011/10713 от 25 ноября 2011 г

НАЗНАЧЕНИЕ

«Дилатон-гель+» является медицинским изделием кратковременного применения, выпускается в нестерильной форме, для профессионального использования врачами-стоматологами, предназначен для химического расширения корневых каналов зубов верхнего и нижнего ряда и выявления устья каналов, обладает антисептическим действием.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Дилатон-гель+» представляет собой гель белого цвета, содержит в своём составе 19 % трилона Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), пероксид карбамида, водорастворимый гелеобразователь.

Основным действующим веществом является трилон Б, который обеспечивает размягчение дентина корневого канала и растворение смазанного слоя, увеличивает дентинную проницаемость, что улучшает адаптацию силера к стенкам канала. Содержание пероксида карбамида способствует пенообразованию в канале, что облегчает удаление дентинных опилок.

Гелеобразная форма удобна в применении, служит хорошей смазкой для эндодонтического инструмента, водорастворимая основа позволяет легко вымывать гель из канала.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний не выявлено.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Полость зуба вскрыть обычным способом, очистить от содержимого пульповую камеру. Ввести небольшое количество «Дилатон-геля+» в корневой канал. Оставить на 1-2 минуты. Произвести механическое расширение канала при помощи эндодонтических инструментов. Чередовать механическое и химическое воздействие до получения необходимого результата. Обработать канал 3% раствором гипохлорита натрия, который растворяет органическую основу дентина. После расширения, корневой канал промыть водой.

ФОРМА ВЫПУСКА

Шприц с гелем массой 5 г закрытый колпачком — 1 шт

Рекомендация по применению — 1 шт

Насадка на шприц (игла) — 5 шт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от + 4°C до + 25°C. Не допускается хранение вблизи источников тепла и попадание прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие «Дилатон-гель+» требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Изделие не подлежит ремонту и техническому обслуживанию.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Отходы после использования «Дилатон-геля+» в виде остатков геля, пустой тары утилизируются согласно СанПин 2.1.7.2790-10 класс А.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Целит», г. Воронеж, ул. Димитрова 124и
тел. (473) 279-76-82, (473) 279-78-87, факс (473) 237-61-06 www.celit.ru

Подготовил:

Инженер-технолог  /Е.В. Попова/

Всего прошито и скреплено печатью

3 (три) листа(ов)

Должность Генеральный директор ООО «Целит»

Подпись  /М.В. Блажко/

