



Установка для анализа кишечных паразитов FE5 предназначена для анализа кишечных паразитов методом визуального микроскопирования в проточной кювете. На этапе предварительной подготовки пробы используются одноразовые пробирки Paraser, для отбора и предварительной фильтрации проб. В основе системы предварительной обработки проб лежит модифицированный эфир-формалиновый метод.

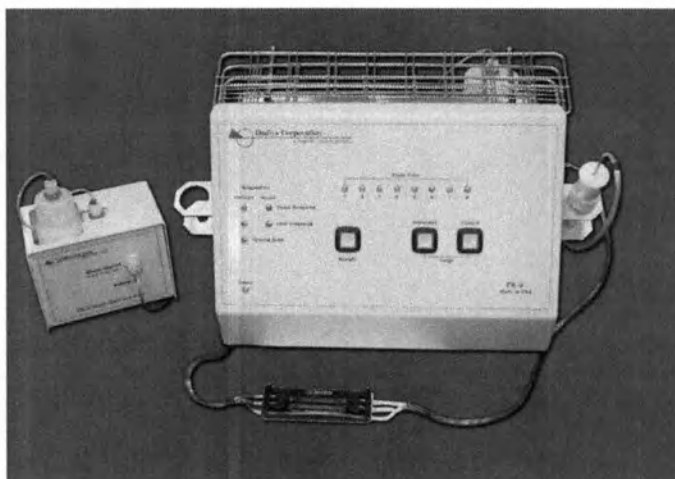


Использование систем предварительной подготовки и фильтрации проб Paraserp позволяет повысить выявляемость паразитов и значительно снизить риск заражения персонала лаборатории за счет исключения контакта с пробой.


Кювета устанавливается на штатный предметный столик микроскопа.

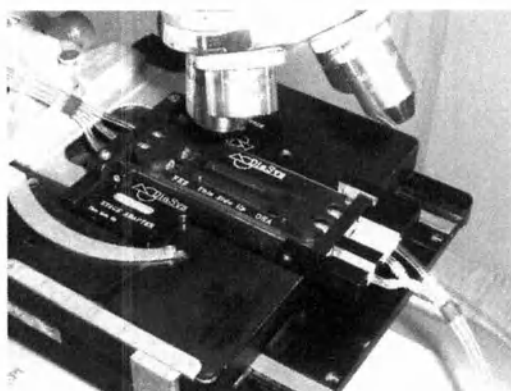

Через один отсек кюветы прокачивается нативная проба, через другой – окрашенная. Размеры отсеков проточной кюветы подобраны так, чтобы позволить паразитам, находящимся в пробе, свободно проходить между стенками кюветы.

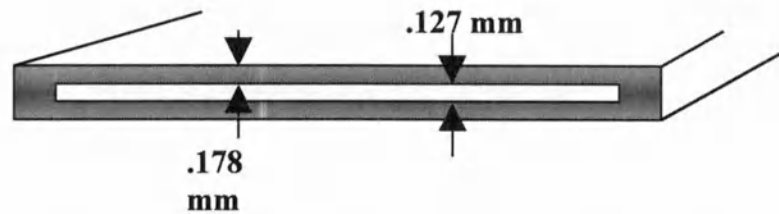

Таким образом, не искажается морфология паразитов и получается практически 3х мерное отображение паразитов в окуляре микроскопа, что облегчает идентификацию, повышает достоверность анализа, т.к. появляется возможность многократно прокачивать одну и ту же пробу через кювету. Ширина каждого отсека проточной кюветы соответствует ширине поля зрения микроскопа при 10 кратном увеличении, это ускоряет и упрощает процесс анализа.

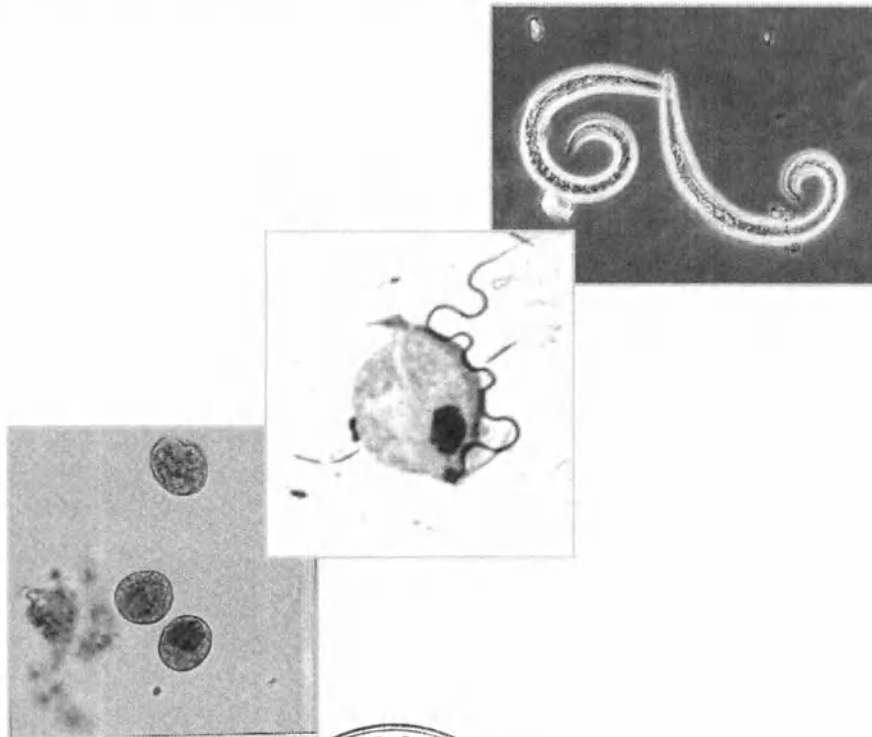

Генеральный директор
ЗАО «Кормей Русланд»



Слабунова Л. А.