


УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора
от _____ 2010г. № _____

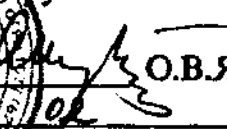

Генеральный директор
ООО «Группа Компаний Пальма»

О.В.Якубович
2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению "Покровитс на раны и ожоги Альгипор-М"

Альгипор-М оказывает стимулирующее действие на развитие грануляционной ткани и процессы регенерации, способствует эпителизации, ускоряет очищение ран, снижает их инфицированность и способствует благоприятному течению раневого процесса.

Альгипор-М представляет собой стерильный пористый материал в виде листов различных размеров и предназначен для применения в практике стационарных и амбулаторных медицинских учреждений и в домашних условиях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Альгипор-М накладывают на раневую поверхность после ее туалета и фиксируют бинтом или марлевой повязкой. Смену Альгипора-М производят по мере промокания или рассасывания (в среднем 1-3 суток).

При небольшой экссудации и начале эпителизации под Альгипором-М его оставляют на ране до отторжения вместе со струпом.

Возможно сочетание лечения Альгипором-М с общепринятой лекарственной и инфузионной терапией, а также сочетание (чередование) с антибактериальными средствами для местного применения.

Альгипор-М в упаковке предприятия-изготовителя должен быть защищен от влаги и храниться при комнатной температуре.

Зам. генерального директора
ООО «Группы Компаний Пальма»



Заместитель главного врача по хирургии,
проф. кафедры госпитальной хирургии № 1


Т.К.Выдрина


И.С.Абрамов