

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Ковидиен Евразия»
М.Л. Бокова



ИНСТРУКЦИЯ по применению:

Изделия медицинские для сбора мочи

Производства Covidien Llc , USA; 15 Hampshire Street, Mansfield MA 02048, USA.

Москва 2012

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию. Соблюдайте все предупреждения и меры предосторожности

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МОЧЕПРИЕМНИК

С закрытым дренажным устройством для мочи и отверстием для отбора проб

СОСТАВ: (одноразовый) мешок для сбора мочи емкостью 2000 мл

УКАЗАНИЯ:

1. **ПОДВЕШИВАНИЕ МЕШКА** – Чтобы повесить мешок на раме кровати, поворачивайте крючок до тех пор, пока он не будет зафиксирован. При использовании нити сделайте следующее: оберните нить вокруг рамы кровати; переведя ось и клин вниз, надежно зафиксируйте их в нижней выемке, а затем, туго натянув нить, оберните ее вокруг верхней выемки.

2. Подсоедините катетер. Прикрепите трубку к подстилке зажимом так, чтобы она спускалась вниз, не образуя петель.

3 **ОПОРОЖНЕНИЕ МЕШКА ДЛЯ СБОРА МОЧИ** – Откройте дренажный клапан, нажав на его фланцы. Опорожнив мешок, закройте клапан со щелчком.

6. **ОТБОР ПРОБ ИЗ СОЕДИНИТЕЛЯ КАТЕТЕРА** – Обработайте место для отбора проб дезинфектантом. Сделайте прокол иглой 21 размера или меньшей и извлеките пробу.

7. **ОТБОР ПРОБ ИЗ БЮРЕТОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ** – Чтобы **ОТКРЫТЬ** отверстие, поверните носик вниз. Чтобы **ЗАКРЫТЬ** отверстие, поверните носик вверх.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. В этом изделии содержится натуральный каучуковый латекс, который может вызвать аллергическую реакцию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Уринометр MESURIT™ большой емкости

С закрытым дренажным устройством для мочи и отверстием для отбора проб

СОСТАВ:

1 (одноразовый) мешок для сбора мочи емкостью 1800 мл

Предварительно соединяется с уринометром емкостью 400 мл и дренажной линией диаметром 0,310 дюйма

УКАЗАНИЯ:

1. **ПОДВЕШИВАНИЕ МЕШКА** – Чтобы повесить мешок на раме кровати, поворачивайте крючок до тех пор, пока он не будет зафиксирован. Подвесьте мешок на каркасе кровати или на боковой стенке. При использовании нити сделайте следующее: оберните нить вокруг рамы кровати; переведя ось и клин вниз, надежно зафиксируйте их в нижней выемке, а затем, туго натянув нить, оберните ее вокруг верхней выемки

2. Снимите защитный колпачок с отверстия для отбора проб. Подсоедините катетер. Прикрепите трубку к подстилке зажимом так, чтобы она спускалась вниз, не образуя петель.

3. **ОТСЧЕТ ПОКАЗАНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА** – Сначала наполняется центральная бюреточная камера емкостью 30 мл. Дополнительный объем жидкости попадает в главную камеру емкостью 400 мл. **ПРИМЕЧАНИЕ.** На шкале 400 мл учитывается 30 мл бюреточной камеры. Чтобы обеспечить точность показаний, всегда опорожняйте измерительный прибор после каждого отсчета.

4. **ОПОРОЖНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА** – Слейте мочу в мешок для ее сбора, слегка приподняв измерительный прибор (если измерительный прибор переполнен, моча будет перетекать в мешок для ее сбора).

5. **ОПОРОЖНЕНИЕ МЕШКА ДЛЯ СБОРА МОЧИ** – Откройте дренажный клапан, нажав на его фланцы. Опорожнив мешок, закройте клапан со щелчком.

6. **ОТБОР ПРОБ ИЗ СОЕДИНИТЕЛЯ КАТЕТЕРА** – Обработайте место для отбора проб дезинфектантом. Сделайте прокол иглой 21 размера или меньшей и извлеките пробу.

7. **ОТБОР ПРОБ ИЗ БЮРЕТОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ** – Чтобы **ОТКРЫТЬ** отверстие, поверните носик вниз. Чтобы **ЗАКРЫТЬ** отверстие, поверните носик вверх.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. В этом изделии содержится натуральный каучуковый латекс, который может вызвать аллергическую реакцию.