



ООО «МЕДБИЗНЕССЕРВИС»

105187, Москва, Окружной проезд 30А, стр.1.

ИНН 7719773309 КПП 771901001

Тел/ факс +7 495 366 54 84/82

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Голубничая Г.Н.

«10» декабря 2012 г.



Инструкция по применению перчаток медицинских

производства: «Cardinal Health»

1. Назначение
2. Основные технические характеристики
3. Противопоказания к применению
4. Подготовка к работе изделия
5. Порядок работы изделия
6. Правило хранения и использования

Назначение

Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные с нитрилом и со смягчающим покрытием: Protexis Latex Blue with Neu-Thera, далее (Перчатки) предназначены для работы в хирургических отделениях: для проведения общей хирургии, для хирургических операций, требующих повышенной тактильной чувствительности (нейрохирургия, кардиохирургия, микрохирургия онкология, сосудистая хирургия, детская хирургия) и для операции в травматологических отделениях, а также как цветовая индикация прокола - синего цвета

Основные технические характеристики

Перчатки производства «Cardinal Health» производятся как из натурального латекса с добавлением синтетического материала (нитрил). Перчатки с 3-х уровневой технологией (трехслойные), что объединяет преимущество натурального латекса и синтетического нитрила, обеспечивает высокую защиту и легкость одевания.

Состав: нитрил (обеспечивает повышенную молекулярную защиту, устойчивость к химическим веществам, подходит для персонала с проблемной кожей рук), латекс (обеспечивает эластичность и мягкость перчаток). Структура трехслойные перчатки «Cardinal Health»: Наружный слой - латекс, средний - латекс / нитрил, внутренний - нитрил.

Форма перчаток: улучшенная анатомическая форма на правую и левую руки. Манжета: "армированная" - повышенной прочности и эластичности, чередование продольных уплотненных /уто́ньше́нных слоев латекса с валиком. Внешняя поверхность: модифицированная с противоскользящим эффектом. Неопудренные.

В перчатке Protexis Latex Blue with Neu-Thera, содержит смягчающая покрытие: внутренняя поверхность обработана 3-х компонентным составом (глицерин, провитамин B5, глюконолактон), снижает риск кожных реакций и защита кожного покрова рук.

Упаковка термоформованный квадратный пакет из 100% полиэтилена - защищает перчатки от разрушения при воздействии озона, легко открывается, исключая разрывы при открывании.

Противопоказание к применению

На каждой коробке из натурального латекса существуют предупредительная надпись: Продукт содержит натуральный латекс, который может вызывать в некоторых случаях, аллергическую реакцию.

Подготовка к работе изделия

Перед приобретением Перчаток необходимо проконсультироваться у официального дилера относительно размеров и типов предлагаемых перчаток

Порядок работы изделия

Надевать Перчатки необходимо на сухие чистые руки, но допускается и влажные руки. При этом их необходимо равномерно подтягивать с разных сторон для избегания разрыва или перекоса перчаток на руке. При правильном подборе размера Перчаток и правильном надевании пальцы рук должны быть плотно обтянуты материалом перчаток, между кончиками пальцев рук и пальчиков Перчаток не должно быть воздушных полостей.

После работы Перчатки необходимо снять с рук путем выворачивания наизнанку от конечной части Перчаток со стороны кисти руки.

Правило хранения и использования

Хранить перчатки медицинские рекомендуется в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей и озоновых источников. Следует избегать повышенной влажности.

Срок годности перчаток 3 лет

Перчатки – одноразовые и после применения их необходимо выкинуть в контейнеры для мусора. Не допускается использование Перчаток повторно, а также использование одной пары перчаток при работе с разными пациентами!

Менеджер



Т.В. Макарова