

Эксплуатационная документация МИ:

Инструмент медицинский металлический стоматологический

**Производитель: Закрытое акционерное общество «СТРУМ»
(ЗАО «СТРУМ»), Республика Беларусь, 222304, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, д.8**

Директор
ЗАО «СТРУМ»



подпись

И.С. Сальников

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИЮ
НЕСТЕРИЛЬНО. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕРИЛИЗОВАТЬ

1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Инструмент медицинский металлический стоматологический (далее - инструмент) предназначен для манипуляций при диагностике, профилактике и лечении стоматологических заболеваний. Инструменты предназначены для многократного использования.

Инструмент изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19126 из коррозионностойкой стали по ГОСТ 5632. Он устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки в растворе с применением препаратов, разрешенных в медицине, и стерилизации. Инструмент, имеющий деревянные накладки, устойчив к предстерилизационной очистке.

Все изделия являются коррозионностойкими в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения.

△ При использовании инструмента, необходимо, обязательно, принять все меры для обеспечения безопасности пациента.

Технические характеристики инструмента медицинского металлического конкретного варианта исполнения приведены в соответствующем Приложении к данной инструкции.

2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

△ Инструмент поставляется производителем в нестерильном виде.

Перед первым использованием инструмента, необходимо провести его дезинфекцию и стерилизацию.

△ Дезинфекция и предстерилизационная очистка инструмента возможны только с применением средств и методик, рекомендованных для проведения данных процедур для стоматологического инструмента и в строгом соответствии с инструкциями производителей! Использование средств и методик, в инструкции по применению которых прямо не указана возможность использования в отношении стоматологического инструмента, НЕДОПУСТИМО!

Перед применением изделия подвергаются следующим методам обработки:

- Автоматическая очистка может быть не эффективной.
- Рекомендуются полный ручной процесс очистки
- Где применимо, демонтируйте инструмент до очистки
- Чистящие вещества, содержащие в качестве активного ингредиента хлор (хлорид) применять ЗАПРЕЩЕНО.
- Рекомендуются к применению вещества с нейтральным pH.

Подготовка инструмента	1. После использования инструмента, удалите с него остатки жидкости, тканей, рабочего материала и протрите его влажной салфеткой. 2. Не допускайте высыхания остатков на инструменте до очистки!
Дезинфекция	1. Дезинфекция приемлема только как дополнение и может быть совмещена с процедурой предстерилизационной очистки. Дезинфекцию инструментов проводят сухим горячим воздухом при температуре $(120 \pm 3)^\circ\text{C}$ в течение (45 ± 5) мин.
Предстерилизационная очистка	Предстерилизационную очистку проводят предварительно, ополаскивая инструмент в проточной воде, затем погружают на 15 – 16 мин начальной температурой $(40 \pm 5)^\circ\text{C}$ в раствор моюще-дезинфицирующего средства с нейтральным pH, разрешенного к применению Минздравом РФ, повторно ополаскивают в течение 3 мин в проточной, а затем в дистиллированной воде. Перед стерилизацией инструменты должны быть просушены горячим воздухом при температуре $(85 \pm 5)^\circ\text{C}$ до полного исчезновения влаги.
Стерилизация	1. Тщательно осмотрите каждый инструмент, чтобы гарантировать, что все остатки загрязняющих веществ удалены. 2. Осмотрите инструмент на наличие повреждений и признаков изнашивания. 3. Стерилизацию инструментов проводят в воздушном стерилизаторе ГОСТ 22649 сухим горячим воздухом при температуре $(180 \pm 3)^\circ\text{C}$ в течение (60 ± 5) мин.
Дополнительная информация	1. Стерильный упакованный инструмент должен храниться в определенном месте, которое хорошо проветривается и обеспечивает защиту от пыли, насекомых, паразитов и предельных отклонений температуры и влажности. 2. Перед использованием стерильного инструмента, необходимо проверить упаковку на наличие повреждений и нарушений целостности.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки:

- инструмент (одного наименования) в потребительской упаковке – в количестве, не более установленного для одной потребительской упаковки;
- эксплуатационная документация (этикетка по ГОСТ 2.601) – на каждой потребительской упаковке или внутри нее;
- эксплуатационная документация (инструкция по эксплуатации) – 1 шт.

Перед упаковыванием инструменты очищены от загрязнений и обезжирены.

4. ПРИМЕНЕНИЕ

△ Инструмент надлежит применять согласно его функционального применения. Стоматолог должен владеть навыками работы со всем имеющимся в его распоряжении стоматологическим инструментом.

3
Запрещено внесение изменений в конструкцию изделия потребителем. Изношенный инструмент и инструмент, имеющий повреждения рабочей части, ремонту и дальнейшему применению не подлежит.

Условия эксплуатации инструмента – медицинские организации.

Противопоказаний, связанных с применением инструмента – не имеется.

Побочных эффектов, связанных с применением инструмента по назначению, не имеется.

5. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Транспортирование инструмента допускается всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 19126, в том числе в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Условия хранения инструментов – по группе 1 (Л) ГОСТ 15150. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

После транспортирования в условиях отрицательных температур перед распаковкой инструменты должны быть выдержаны в нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150 (температура – плюс (25 ± 10) °С при относительной влажности воздуха от 45 до 80 %) в течение 4 ч.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Непригодность инструмента к дальнейшей эксплуатации определяется его изнашиванием (предельным состоянием) или повреждением рабочих частей инструмента. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление работоспособности инструмента невозможно или экономически нецелесообразно.

Утилизацию использованного, а также непригодного к использованию инструмента, элементов его упаковки проводить по СанПиН 2.1.7.2790 в зависимости от типа биологического загрязнения.

7. ГАРАНТИИ

Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления

Гарантийный срок эксплуатации – 1,5 года (исчисляется с момента передачи изделия потребителю)

Изготовитель не несёт ответственности за выход из строя инструментов в результате их неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

-  - внимание
-  - производитель
-  - номер по каталогу
-  - код партии
-  - дата изготовления
-  - обратитесь к инструкции по применению
-  - соответствие национальной системе сертификации
-  - соответствие международному отраслевому стандарту ISO 13485
-  - соответствие требованиям европейских регламентов



Закрытое акционерное общество «СТРУМ», 8, ул. Металлистов,
г. Молодечно, 222304, Республика Беларусь, Тел./Факс: +375 176 541676, +375 176 581616
E-mail: strum@tut.by; www.strum.by

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «СТРУМ Северо-Запад»
198329, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 12, оф. 36
Тел./факс: (7812) 336-24-54, 730-17-17
E-mail: megastrum@mail.ru www.megastrum.ru

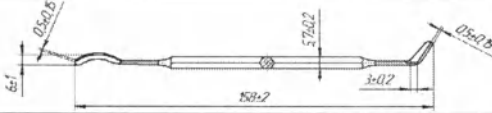
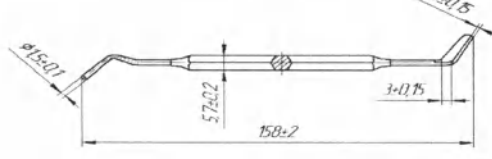
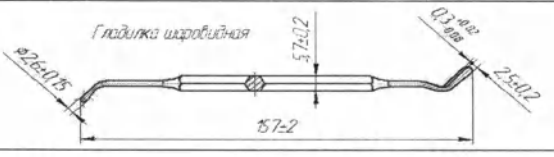
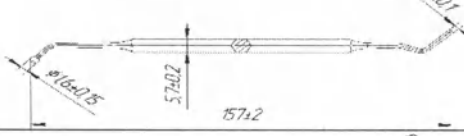
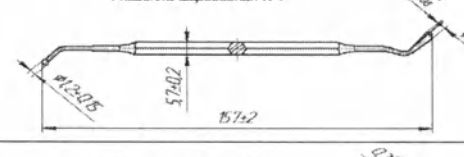
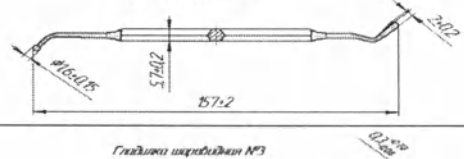
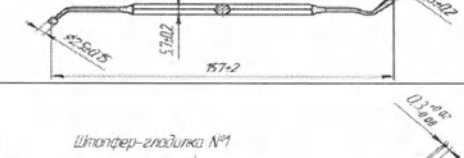
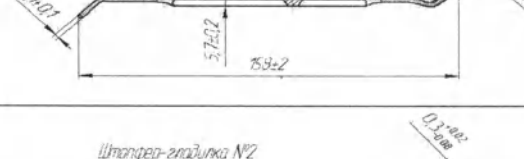
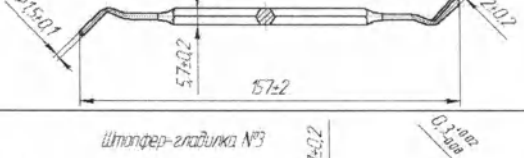
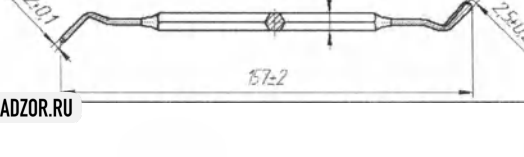
Последнее изменение: 01.03.2018/3

4

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к инструкции по эксплуатации
ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вариантов исполнения

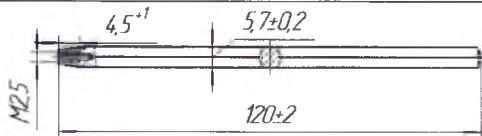
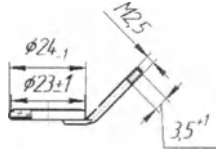
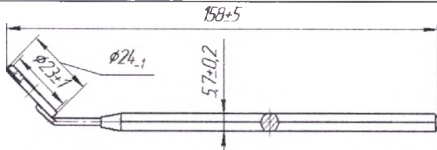
ГЛАДИЛКИ И ШТОПФЕРЫ

№ п/п	Наименование инструмента	Основные технические характеристики	Масса инструмента, г.
1	Гладилка серповидная		21,0
2	Гладилка дистальная - штопфер		21,0
3	Гладилка шаровидная		21,5
4	Гладилка шаровидная - штопфер		21,0
5	Гладилка шаровидная №1		21,0
6	Гладилка шаровидная №2		21,0
7	Гладилка шаровидная №3		21,5
8	Штопфер- гладилка №1		21,0
9	Штопфер- гладилка №2		21,0
10	Штопфер- гладилка №3		21,5

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к инструкции по эксплуатации
ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вариантов исполнения

ЗЕРКАЛО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ

№ п/п	Наименование инструмента	Основные технические характеристики	Масса инструмента, г.
1	Ручка для зеркала стоматологического		24,5
2	Зеркало стоматологическое		4,0
3	Зеркало стоматологическое с ручкой		29,0

В соответствии с ГОСТ ISO 9873

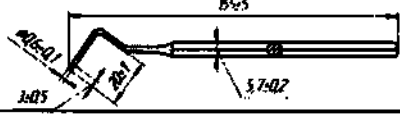
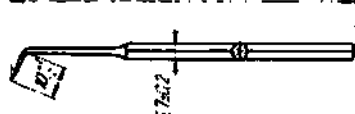
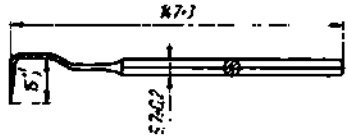
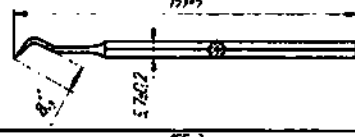
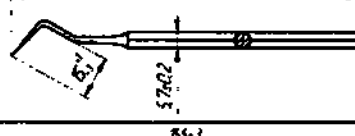
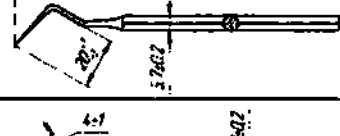
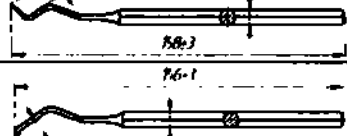
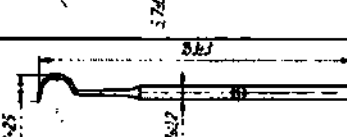
Зеркало стоматологическое - «увеличивающее», с номинальным увеличением оптического элемента от 2,8 до 3,3.
Угол головки зеркала – 42°.

6

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к инструкции по эксплуатации
ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вариантов исполнения

ЗОНДЫ

№ п/п	Наименование инструмента	Основные технические характеристики	Масса инструмента, г.
1	Зонд зубной штыковидный		26,0
2	Зонд зубной периодонтальный		29,5
3	Зонд зубной угловой L=10 мм.		26,0
4	Зонд зубной угловой L=15 мм.		26,0
5	Зонд зубной изогнутый L=8 мм.		26,0
6	Зонд зубной изогнутый L=15 мм.		26,0
7	Зонд зубной изогнутый L=20 мм.		26,0
8	Зонд зубной изогнутый с подсечкой левый		26,0
9	Зонд зубной изогнутый с подсечкой правый		26,0
10	Зонд зубной серповидный		26,0

В соответствии с ГОСТ ISO 7492

7

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к инструкции по эксплуатации
ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вариантов исполнения

ЭКСКАВАТОРЫ; КЮРЕТКИ; ОЧИСТИТЕЛИ

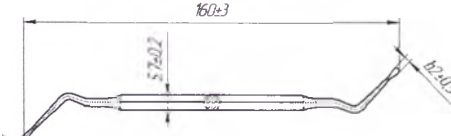
№ п/п	Наименование инструмента	Основные технические характеристики	Масса инструмента, г.
1	Экскаватор №1		21,0
2	Экскаватор №2		21,5
3	Экскаватор №3		21,5
4	Кюретка прямая		22,0
5	Кюретка изогнутая		22,0
6	Кюретка дистальная		22,0
7	Очиститель С-образный		22,0
8	Долото эмаливое двустороннее		21,5
9	Очиститель клювовидный		22,0
10	Очиститель типа "крючок"		22,0
11	Очиститель серповидный		22,0

8

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к инструкции по эксплуатации
ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вариантов исполнения

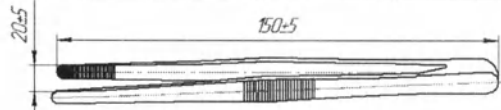
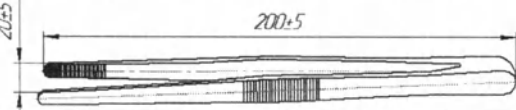
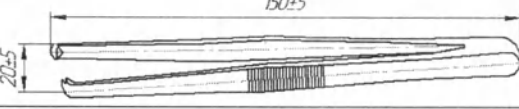
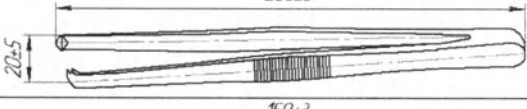
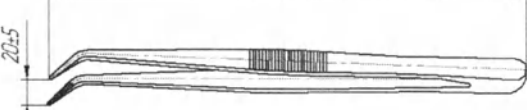
ЛОЖКИ КЮРЕТАЖНЫЕ

№ п/п	Наименование инструмента	Основные технические характеристики	Масса инструмента, г.																
1	Ложка кюретажная №1	 <table><tr><th>Наименование</th><th>b1 мм</th><th>b2 мм</th><th>L, мм</th></tr><tr><td>Ложка кюретажная №1</td><td>3</td><td>4</td><td>160</td></tr><tr><td>Ложка кюретажная №2</td><td>4</td><td>6</td><td>200</td></tr><tr><td>Ложка кюретажная №3</td><td>6</td><td>8</td><td>200</td></tr></table>	Наименование	b1 мм	b2 мм	L, мм	Ложка кюретажная №1	3	4	160	Ложка кюретажная №2	4	6	200	Ложка кюретажная №3	6	8	200	19,5
Наименование	b1 мм	b2 мм	L, мм																
Ложка кюретажная №1	3	4	160																
Ложка кюретажная №2	4	6	200																
Ложка кюретажная №3	6	8	200																
2	Ложка кюретажная №2		24,0																
3	Ложка кюретажная №3		24,5																
4	Ложка кюретажная изогнутая №1	 <table><tr><th>Наименование</th><th>b1 мм</th><th>b2 мм</th></tr><tr><td>Ложка кюретажная изогнутая №1</td><td>25</td><td>3</td></tr><tr><td>Ложка кюретажная изогнутая №2</td><td>3</td><td>35</td></tr><tr><td>Ложка кюретажная изогнутая №3</td><td>35</td><td>4</td></tr></table>	Наименование	b1 мм	b2 мм	Ложка кюретажная изогнутая №1	25	3	Ложка кюретажная изогнутая №2	3	35	Ложка кюретажная изогнутая №3	35	4	20,0				
Наименование	b1 мм	b2 мм																	
Ложка кюретажная изогнутая №1	25	3																	
Ложка кюретажная изогнутая №2	3	35																	
Ложка кюретажная изогнутая №3	35	4																	
5	Ложка кюретажная изогнутая №2		21,0																
6	Ложка кюретажная изогнутая №3		21,0																
7	Ложка кюретажная изогнутая плоская №1	 <table><tr><th>Наименование</th><th>b1 мм</th><th>b2 мм</th></tr><tr><td>Ложка кюретажная изогнутая плоская №1</td><td>2</td><td>25</td></tr><tr><td>Ложка кюретажная изогнутая плоская №2</td><td>25</td><td>3</td></tr><tr><td>Ложка кюретажная изогнутая плоская №3</td><td>3</td><td>35</td></tr></table>	Наименование	b1 мм	b2 мм	Ложка кюретажная изогнутая плоская №1	2	25	Ложка кюретажная изогнутая плоская №2	25	3	Ложка кюретажная изогнутая плоская №3	3	35	20,0				
Наименование	b1 мм	b2 мм																	
Ложка кюретажная изогнутая плоская №1	2	25																	
Ложка кюретажная изогнутая плоская №2	25	3																	
Ложка кюретажная изогнутая плоская №3	3	35																	
8	Ложка кюретажная изогнутая плоская №2		21,0																
9	Ложка кюретажная изогнутая плоская №3		21,0																

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к инструкции по эксплуатации
ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вариантов исполнения

ПИНЦЕТЫ

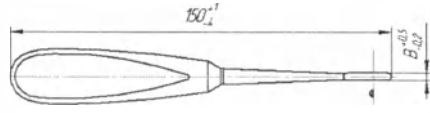
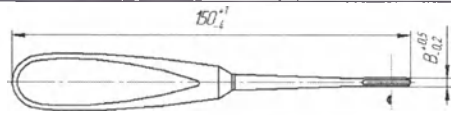
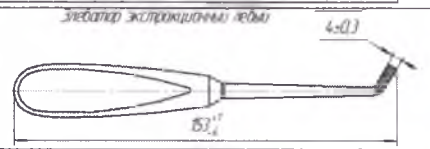
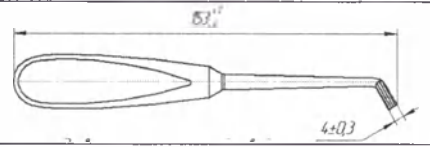
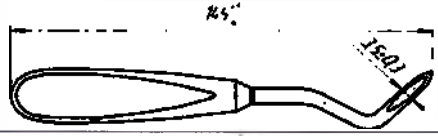
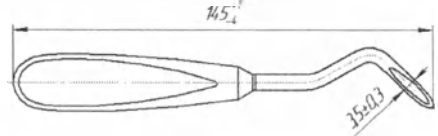
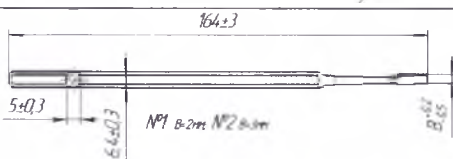
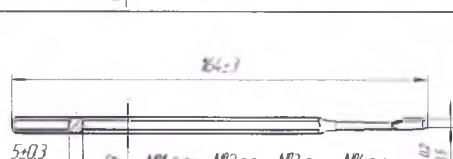
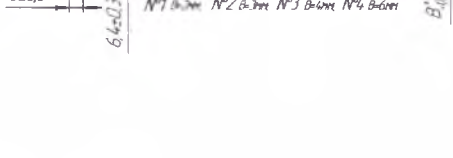
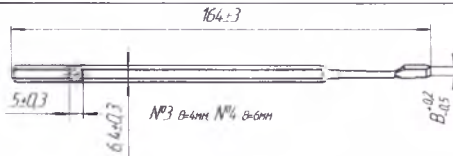
№ п/п	Наименование инструмента	Основные технические характеристики	Масса инструмента, г.
1	Пинцет анатомический L=150мм		23,0
2	Пинцет анатомический L=200мм		40,5
3	Пинцет хирургический L=150мм		22,0
4	Пинцет хирургический L=200мм		40,5
5	Пинцет зубной изогнутый, с насечкой		19,5

В соответствии с ГОСТ 21241

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к инструкции по эксплуатации
ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вариантов исполнения

ЭЛЕВАТОРЫ; ДОЛОТА

№ п/п	Наименование инструмента	Основные технические характеристики	Масса инструмента, г.						
1	Элеватор экстракционный прямой №1		162,0						
2	Элеватор экстракционный прямой №3	<table border="1" data-bbox="662 621 1064 700"><tr><td>Наименование</td><td>В, мм</td></tr><tr><td>Элеватор экстракционный прямой №1</td><td>25</td></tr><tr><td>Элеватор экстракционный прямой №3</td><td>4</td></tr></table>	Наименование	В, мм	Элеватор экстракционный прямой №1	25	Элеватор экстракционный прямой №3	4	166,0
Наименование	В, мм								
Элеватор экстракционный прямой №1	25								
Элеватор экстракционный прямой №3	4								
3	Элеватор экстракционный штыковидный №1		166,0						
4	Элеватор экстракционный штыковидный №3	<table border="1" data-bbox="641 814 1064 893"><tr><td>Наименование</td><td>В, мм</td></tr><tr><td>Элеватор экстракционный штыковидный №1</td><td>25</td></tr><tr><td>Элеватор экстракционный штыковидный №3</td><td>4</td></tr></table>	Наименование	В, мм	Элеватор экстракционный штыковидный №1	25	Элеватор экстракционный штыковидный №3	4	170,0
Наименование	В, мм								
Элеватор экстракционный штыковидный №1	25								
Элеватор экстракционный штыковидный №3	4								
5	Элеватор экстракционный левый		172,0						
6	Элеватор экстракционный правый		172,0						
7	Элеватор экстракционный левый с двойным изгибом		163,0						
8	Элеватор экстракционный правый с двойным изгибом		163,0						
9	Долото плоское №1		27,5						
10	Долото плоское №2		27,5						
11	Долото полуклиновое №1		27,0						
12	Долото полуклиновое №2		27,5						
13	Долото полуклиновое №3		27,5						
14	Долото полуклиновое №4		29,5						
15	Долото клиновое №3		27,0						
16	Долото клиновое №4		29,5						

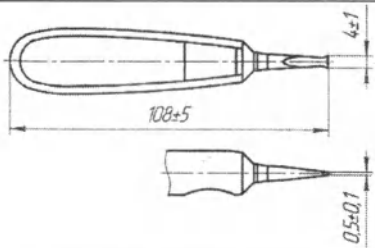
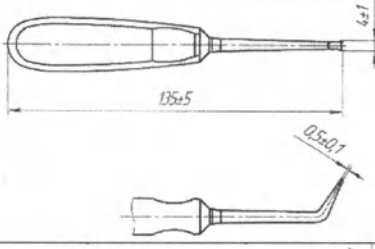
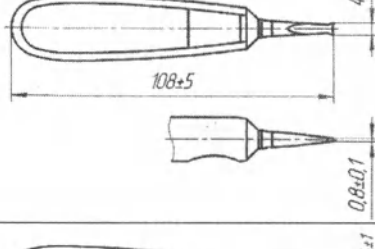
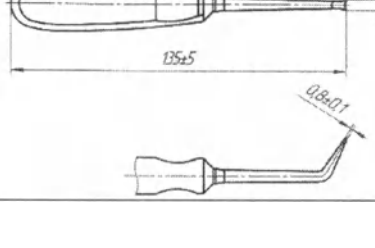
Долота в соответствии с ГОСТ 31519

11

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к инструкции по эксплуатации
ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вариантов исполнения

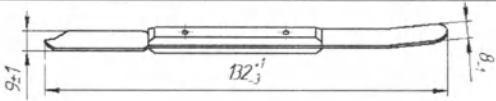
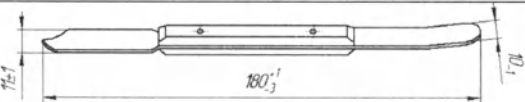
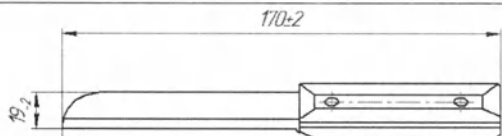
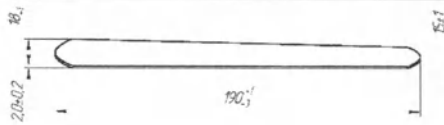
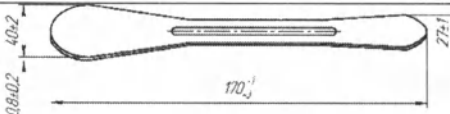
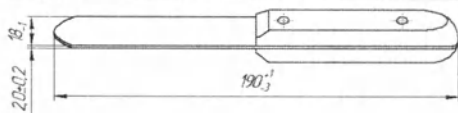
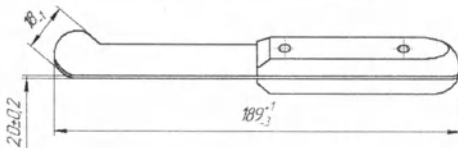
КОРОНКΟΣНИМАТЕЛИ РЫЧАЖНОГО ТИПА

№ п/п	Наименование инструмента	Основные технические характеристики	Масса инструмента, г.
1	Коронкосниматель рычажного типа прямой для штампованных коронок		165,0
2	Коронкосниматель рычажного типа угловой для штампованных коронок		165,0
3	Коронкосниматель рычажного типа прямой для цельнолитых коронок и металлокерамики		165,0
4	Коронкосниматель рычажного типа угловой для цельнолитых коронок и металлокерамики		165,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к инструкции по эксплуатации
ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вариантов исполнения

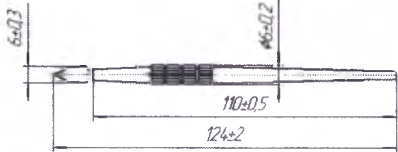
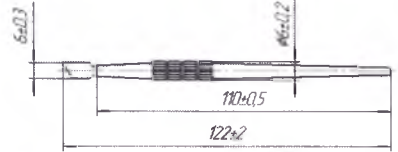
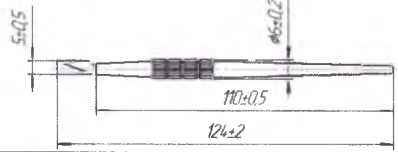
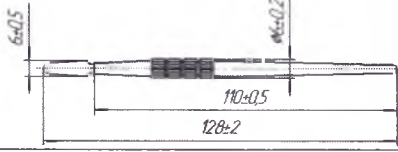
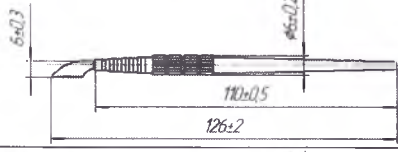
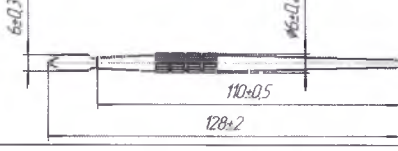
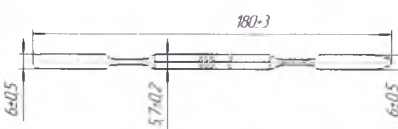
НОЖИ-ШПАТЕЛЯ; НОЖ ДЛЯ ГИПСА; ШПАТЕЛЯ

№ п/п	Наименование инструмента	Основные технические характеристики	Масса инструмента, г.
1	Нож – шпатель зуботехнический малый		12,0
2	Нож – шпатель зуботехнический большой		21,0
3	Нож для гипса		37,5
4	Шпатель для гипса		43,0
5	Шпатель для гипса широкий		28,0
6	Шпатель прямой с ручкой		57,0
7	Шпатель изогнутый с ручкой		57,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к инструкции по эксплуатации
ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вариантов исполнения

ШПАТЕЛЯ;
ШПАТЕЛЬ для цемента

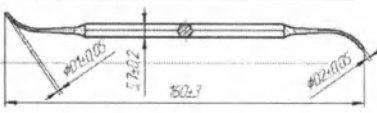
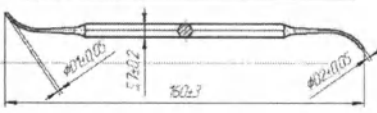
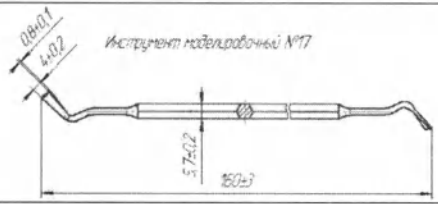
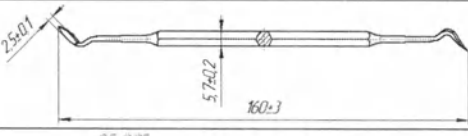
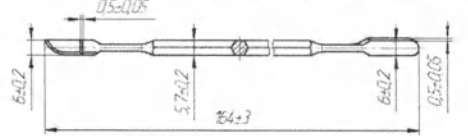
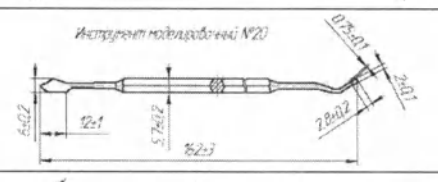
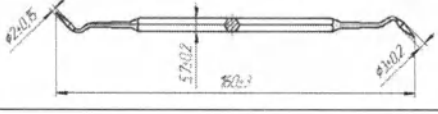
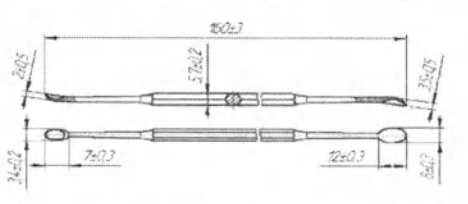
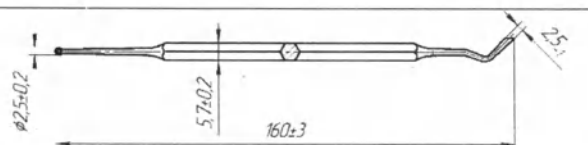
№ п/п	Наименование инструмента	Основные технические характеристики	Масса инструмента, г.
1	Шпатель треугольный		14,5
2	Шпатель трапецидальный		14,5
3	Шпатель косоугольный		14,5
4	Шпатель овалный		14,5
5	Шпатель с зазубринами		14,5
6	Шпатель ромбовидный		14,5
7	Шпатель для цемента		20,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к инструкции по эксплуатации
ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

вариантов исполнения

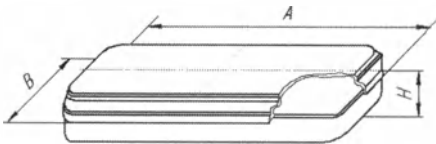
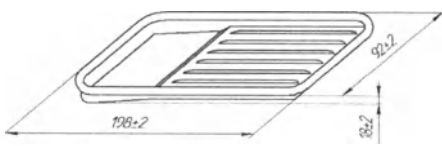
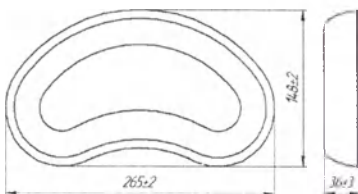
ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВОЧНЫЙ;
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГРАВИРОВКИ ОТТИСКА

№ п/п	Наименование инструмента	Основные технические характеристики	Масса инструмента, г.									
1	Инструмент моделировочный №15	<table><tr><td>Назначение</td><td>Ø, мм</td><td>l2, мм</td></tr><tr><td>Инструмент моделировочный №15</td><td>0,6</td><td>0,8</td></tr><tr><td>Инструмент моделировочный №16</td><td>1,0</td><td>1,2</td></tr></table> 	Назначение	Ø, мм	l2, мм	Инструмент моделировочный №15	0,6	0,8	Инструмент моделировочный №16	1,0	1,2	20,0
Назначение	Ø, мм	l2, мм										
Инструмент моделировочный №15	0,6	0,8										
Инструмент моделировочный №16	1,0	1,2										
2	Инструмент моделировочный №16		20,5									
3	Инструмент моделировочный №17		21,5									
4	Инструмент моделировочный №18		21,0									
5	Инструмент моделировочный №19		19,5									
6	Инструмент моделировочный №20		21,0									
7	Инструмент моделировочный №21		21,0									
8	Инструмент моделировочный №22		21,0									
9	Инструмент для гравировки оттиска		21,0									

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к инструкции по эксплуатации
ИНСТРУМЕНТ МЕДИЦИНСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МНОГОРАЗОВЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
вариантов исполнения

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

№ п/п	Наименование инструмента	Основные технические характеристики	Масса инструмента, г.																			
1	Бокс для хранения инструментов	 <table><tr><th></th><th>большой</th><th>средний</th><th>малый</th></tr><tr><td>A мм</td><td>203±3</td><td>190±3</td><td>92±2</td><td>192±3</td></tr><tr><td>B мм</td><td>148±3</td><td>97±3</td><td>44±2</td><td>75±3</td></tr><tr><td>H мм</td><td>32±2</td><td>31±2</td><td>17±2</td><td>27±2</td></tr></table>		большой	средний	малый	A мм	203±3	190±3	92±2	192±3	B мм	148±3	97±3	44±2	75±3	H мм	32±2	31±2	17±2	27±2	215,0
	большой		средний	малый																		
A мм	203±3		190±3	92±2	192±3																	
B мм	148±3		97±3	44±2	75±3																	
H мм	32±2	31±2	17±2	27±2																		
2	Бокс для хранения инструментов малый	51,5																				
3	Бокс для хранения инструментов средний	253,0																				
4	Бокс для хранения инструментов большой		502,0																			
5	Лоток		105,0																			
6	Лоток №1		198,0																			

Проект маркировки упаковки инструмента медицинского металлического стоматологического

Все варианты исполнения кроме:

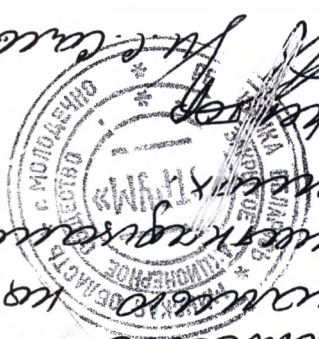
- Зеркало стоматологическое;
- Зеркало стоматологическое с ручкой.

Вариант исполнения:

- Зеркало стоматологическое;
- Зеркало стоматологическое с ручкой.

 ЗАО "СТРУМ"  Наименование инструмента «нержавеющая сталь» REF LOT  Колич. Штамп ОТК  ЗАО "СТРУМ" 222304, Республика Беларусь, Минская область г. Молодечно, ул. Металлистов, 8 Тел./факс: +375 176 541676, +375 176 581616 e-mail: strum@tut.by www.strum.by Уполномоченный представитель в РФ: ООО «СТРУМ Северо-Запад» 198329, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 12, оф. 36 Тел./факс: +7 812 3362454, 7301717; E-mail: megastrum@mail.ru; www.megastrum.ru Гарантийный срок эксплуатации – 1,5 года Гарантийный срок хранения – 5 лет РУ № от г.	 ЗАО "СТРУМ"  Наименование инструмента «увеличивающее» «нержавеющая сталь» REF LOT  Колич. размер угол Штамп ОТК  ЗАО "СТРУМ" 222304, Республика Беларусь, Минская область г. Молодечно, ул. Металлистов, 8 Тел./факс: +375 176 541676, +375 176 581616 e-mail: strum@tut.by www.strum.by Уполномоченный представитель в РФ: ООО «СТРУМ Северо-Запад» 198329, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 12, оф. 36 Тел./факс: +7 812 3362454, 7301717; E-mail: megastrum@mail.ru; www.megastrum.ru Гарантийный срок эксплуатации – 1,5 года Гарантийный срок хранения – 5 лет РУ № от г.
---	---

Всего произведено
поручено и
списано на
независимую
16 (шестнадцать)
универсальных
Душевых
А. С. Савицкий



Город Молодечно, Минской области, Республика Беларусь. Двадцать пятое апреля две тысячи восемнадцатого года.

Я, Харитон Дарья Николаевна, нотариус Минского областного нотариального округа (свидетельство на осуществление нотариальной деятельности № 653, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь 19 мая 2014 г.), свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не имеется.

Зарегистрировано в реестре за № 3-309.

Взыскано нотариального тарифа 29 рублей 40 копеек.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 17 (семнадцати) листах
Нотариус:

