

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Пластырь на тканевой основе Cloth Adhesive Tape, IV dressing (для фиксации канюль)

1. Введение

Пластырь на тканевой основе Cloth Adhesive Tape, IV dressing (для фиксации канюль) – это пластырь на тканевой основе. Является гипоаллергенным.

2. Описание изделия

Пластырь на тканевой основе Cloth Adhesive Tape, IV dressing (для фиксации канюль) применяется для фиксации повязок, закрепления катетеров, зондов, различных устройств на теле пациента. Кроме того, для иммобилизации пальцев стоп и кистей, фиксации шин на пальцах. Применяется также для профилактики повреждений капсульно-связочного аппарата суставов в спортивной медицине (при тейпировании наряду с эластичными бинтами 3M™ Coban™)

Показан для пациентов, имеющих аллергию или с высоким риском развития гиперчувствительности на натуральный латекс.

3. Использование по назначению

Наклеивание:

1. Выберите пластырь соответствующей ширины.
2. Удалите волосы на коже, если в этом есть необходимость.
3. Для защиты легко ранимой кожи используйте **Нераздражающую барьерную пленку 3M™ Cavilon™**. В этом случае, дождитесь ее высыхания и затем наклеивайте пластырь.
4. Старайтесь меньше прикасаться к адгезиву пластыря перед наложением.
5. Наклейте пластырь на чистую сухую кожу, не создавая натяжения.
6. Разгладьте пластырь на коже по направлению от центра к периферии с мягким, но достаточным давлением. (См рис 1).


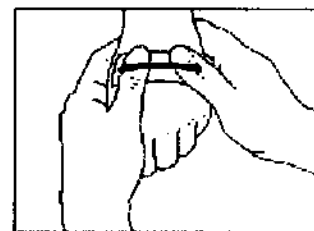


Рис. 1

Удаление:

1. Отклейте край пластыря
2. Удерживая кожу с противоположной стороны, медленно отклеивайте пластырь по направлению роста волос. (См. рис. 2) Тяните отклеиваемый конец пластыря параллельно коже. При отклеивании пластыря в вертикальном направлении увеличивает риск повреждения эпидермиса.

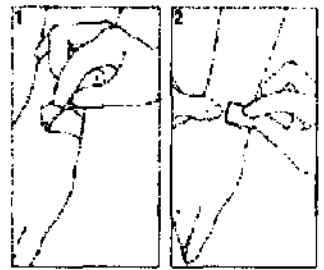

По мере отклеивания продолжайте поддерживать кожу в противоположном направлении.

Рис. 2

4. Техническое обслуживание

Пластырь Cloth Adhesive Tape, IV dressing не предполагают технического обслуживания.

5. Текущий ремонт

Компания 3М гарантирует высокое качество производимой продукции.

В случае непригодности пластыря рекомендуется его замена.

6. Хранение

1. Хранить при комнатной температуре.
2. Избегать влажности, осадков и нагревания.

7. Транспортирование

Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта, упакованные изделия помещаются в транспортную тару – картонные коробки. На транспортной таре должен быть нанесен логотип 3М и название продукта.

8. Утилизация

Утилизируйте использованные пластыри, соблюдая правила местные правила утилизации отходов.

9. Гарантийные обязательства производителя

Компания 3М гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом.

Фирма-производитель не несет ответственности за потерю или порчу своей продукции (прямую или косвенную), вызванную ее неправильным использованием или хранением. Перед применением пользователь должен определить пригодность продукции для его конкретных нужд и взять на себя всю ответственность и риск, связанные с применением данного материала.

Руководитель технической группы
сертификации/ регистрации
отдела Здравоохранение
ЗАО «3М Россия»

«23» апреля 2009 г.



Е.Н.Постовая