



медицинский инструментарий

НПКЦ МИЗ

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «НПКЦ «МИЗ»

А.А. Листкова



2017 г.

Стол пеленальный по ТУ 32.50.30-005-58588802-2017

Руководство по эксплуатации

2017 г.

Содержание

Раздел	стр.
1. Введение	3
2. Технические характеристики	3
3. Требования к персоналу	4
4. Назначение	4
5. Противопоказания	4
6. Комплект поставки	4
7. Сборка мебели	4
8. Предупреждения и предосторожности	4
9. Правила эксплуатации	4
10. Уход за столом	5
11. Техническое обслуживание и текущий ремонт	5
12. Транспортирование и хранение	5
13. Порядок утилизации	6
14. Гарантийные обязательства	6
Приложение 1	7
Приложение 2	8

1. Введение.

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на Стол пеленальный по ТУ 32.50.30-005-58588802-2017.

2. Технические характеристики.

2.1 Несущие конструкции стола (рамы, каркасы, основания) должны изготавливаться замкнутого сечения. Накладные, декоративные элементы стола закреплены неподвижно.

2.2 Стол должен характеризоваться жесткой и прочной конструкцией, удобной для эксплуатации в соответствии с его предназначением, и должен отвечать необходимым декоративным и эстетическим требованиям.

Конструкция стола с отделениями для хранения бытовых и других принадлежностей должна обеспечивать свободный доступ к ним.

2.3 Все сварные швы должны быть непрерывными и сплошными, на видимой поверхности стола не допускаются дефекты сварных соединений.

2.4 Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, должна быть без заусенцев.

2.5 Наружная поверхность стола не должна иметь вмятин, царапин, трещин, потертостей.

2.6 При изготовлении стола и его элементов должна обеспечиваться точность, позволяющая осуществить сборку без дополнительных подгонок.

Габаритные размеры стола должны быть:

№ п/п	Наименование	Длина, ±2 мм	Ширина, ±2 мм	Высота общая, ±2 мм	Высота бортика, ±2 мм
1	Стол пеленальный ГР-СПл-01	885	790	915	110

2.6.1 Толщина полки должна быть: 16 ± 1 мм.

2.7 Масса стола должна быть: не более 25,5 кг.

2.8 Стол в состоянии эксплуатации должен стоять на горизонтальной плоскости пола устойчиво, без раскачивания, при этом зазор между полом и ножками-опорами должен быть не более 3 мм.

2.9 Стол должен выдерживать полуторакратную номинальную равномерно распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой 30 ± 1 кг.

2.10 Металлические ножки должны иметь пластмассовые насадки-заглушки.

2.11 Не должно быть обнаружено какой-либо остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства стола и его составных частей, после падения.

2.12 Толщина настила должна быть: 20 ± 1 мм.

2.13 В изделиях, имеющих основание из древесных материалов, покровный и облицовочный материал, рекомендуется крепить скобами.

2.14 Для изделий в мягких элементах высотой до 50 мм облицовочный материал может быть плотно затянут по углам без прошивки.

Не допускаются швы на лицевой поверхности мягких элементов, кроме случаев, когда наличие швов обусловлено художественным решением изделия, что должно быть предусмотрено в технической документации.

2.15 Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия в условиях эксплуатации (при влажности воздуха помещения 30%-60%) не должен превышать 15,0 кВ/м.

2.16 Допустимая удельная активность радионуклида цезия-137 в древесносодержащих материалах, используемых для изготовления столов, не должна превышать 300 Бк/кг.

2.17 Для изготовления мягких элементов столов не должны применяться легко воспламеняемые и относящиеся к группе Т4 по токсичности продуктов горения обивочные кожаные материалы.

2.18 Прочностные показатели столов.

2.18.1 Устойчивость в направлении вперед и назад должна быть, не менее 15 даН.

2.18.2 Прочность ножек в поперечном и продольном направлениях должна быть, не менее 40 даН.

2.18.3 Ударная прочность стола должна быть не менее 40 даН при высоте падения груза 140 мм.

2.18.4 Статическая прочность боковин в боковом направлении должна быть, не менее 15 даН.

3. Требования к персоналу.

3.1. Персонал лечебно – профилактических учреждений широкого профиля.

4. Назначение.

Стол пеленальный предназначен для пеленания детей, проведения медицинского осмотра и врачебных манипуляций.

5. Противопоказания.

5.1. Противопоказания отсутствуют.

6. Комплект поставки.

6.1. Стол поставляется в разобранном виде. Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице.

Таблица 1

№ п.п.	Наименование	Кол-во, шт
I	Стол пеленальный по ТУ 32.50.30-005-58588802-2017	1
1	Стол пеленальный ГР-СПл-01, в составе:	1
1.1	Короб стола	1
1.2	Ножка	2
1.3	Распорка	2
1.4	Полка	1
1.5	Болт мебельный М6х45	4
1.6	Гайка М6	4
1.7	Болт мебельный М8х50	4
1.8	Гайка М8	4
1.9	Заглушка декоративная винта-конфирмата	8
1.10	Саморез 3,5х35	9
II	Руководство по эксплуатации	1

7. Сборка стола

Прежде, чем приступить к сборке изделия, необходимо освободить все детали набора от упаковки, проверить комплектность пакетов и ознакомиться с инструкцией по сборке. Сборку производить на ровном полу. Пол можно застелить тканью, пленкой или картоном во избежание повреждений и загрязнения изделия.

7.1 Инструкции по сборке мебели приведены в Приложении 1.

8. Предупреждения и предосторожности.

8.1. Используйте стол только в соответствии с его функциональным назначением. Сохранность и долговечность столов зависит не только от её качества, но и от условий эксплуатации. При транспортировке и хранении столов в упаковке они должны быть надежно защищены от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты.

9. Правила эксплуатации (порядок использования по назначению).

9.1. Не допускайте в помещении высоких или низких температур, а также резких перепадов температур.

9.2. Поверхности столов должна быть всегда сухой. При попадании влаги на поверхность, её следует протереть впитывающим влагу материалом.

9.3. Не допускайте воздействия на столы горячих, раскалённых предметов, а также продолжительного воздействия излучений, вызывающих перегревание (мощных ламп, ламп накаливания, микроволнового излучения).

9.4. Не допускайте воздействия на столы агрессивных жидкостей (кислот, щелочей).

9.5. Не проводите по поверхности и не ударяйте столы острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами.

9.6. При заполнении полки равномерно распределяйте нагрузку.

9.7. В процессе эксплуатации, при необходимости, подтяните ослабленные узлы резьбовых соединений.

10. Уход за столом.

10.1. Поверхность столов рекомендуется протирать слегка увлажненной водой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль).

10.2. Очистка лакокрасочных покрытий производится увлажненной махровой или замшевой микроволокнистой салфеткой с использованием специальных полиролей для лакокрасочных покрытий. Допускается использование моющих средств (слабые мыльные растворы), а также слабого раствора этилового спирта. После протирки поверхности моющим средством, необходимо сразу протереть ее мягкой сухой салфеткой.

10.3. Для очистки декоративного пластика применяются специальные средства, рекомендованные для чистки этого материала. При необходимости обезжиривания рекомендуется пользоваться водным раствором денатурированного спирта. Протирка осуществляется салфеткой из микроволокна.

10.4. Очистка кожзаменителя производится поролоновой губкой либо мягкой тканью с применением слабого мыльного раствора. Для удаления грязи и жирных пятен рекомендуется применять специальные средства по уходу.

10.5. Поверхности, облицованные декоративной пленкой ПВХ – это влаго- и износостойкие материалы, поэтому для содержания в чистоте достаточно протирать их влажной тканью, поролоновой губкой или специальными щетками. Для придания блеска рекомендуется применять мебельные полироли для пластиков.

10.6. Категорически недопустимо при чистке столов применение твердых приспособлений (скребков, губок) с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала, а также агрессивных, абразивных материалов и моющих средств на кислотной и щелочной основе.

10.7. Поверхность столов следует предохранять от попадания агрессивных жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (ацетон, бензин, спирт и др.). Случайно попавшую на поверхность стола жидкость следует немедленно снять сухой тканью.

10.8. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.

10.9. Рекомендуется как можно скорее очищать любую часть столов от загрязнения. Если загрязнение остается на поверхности столов на некоторое время, то это заметно повышает опасность образования разводов, пятен и повреждения предметов столов.

10.10. Вода не наносит вреда поверхностям столов, но может отрицательно повлиять на материал полки. Во избежание набухания и отклейки кромочного пластика необходимо сразу вытирать попавшую на поверхность столов воду, чтобы она не проникла в основание полки, например, через швы.

11. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

11.1. Обслуживание и гарантийный, а также постгарантийный ремонт осуществляет производитель или уполномоченный (аккредитованный) представитель.

12. Транспортирование и хранение.

12.1 Транспортирование столов осуществляется всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

В пределах одного населенного пункта столы допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Размещение и крепление упакованных транспортируемых изделий должно осуществляться в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств.

12.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

12.3 Готовую продукцию хранят в крытых помещениях, соответствующих в части воздействия климатических факторов условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150. Условия хранения должны исключать воздействие на продукцию влаги и агрессивных сред.

13. Порядок утилизации.

13.1 Утилизация изделия должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также СанПиН 2.1.7.2790. Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.

13.2 Согласно СанПиН 2.1.7.2790 изделие относится к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.

14. Гарантийные обязательства.

14.1. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.


Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи.

14.2 Проект гарантийного талона представлен в Приложении 2.

Приложение 1 Инструкции по сборке

1. Стол палатный

1.1 Стол палатный ГР-СПл-01

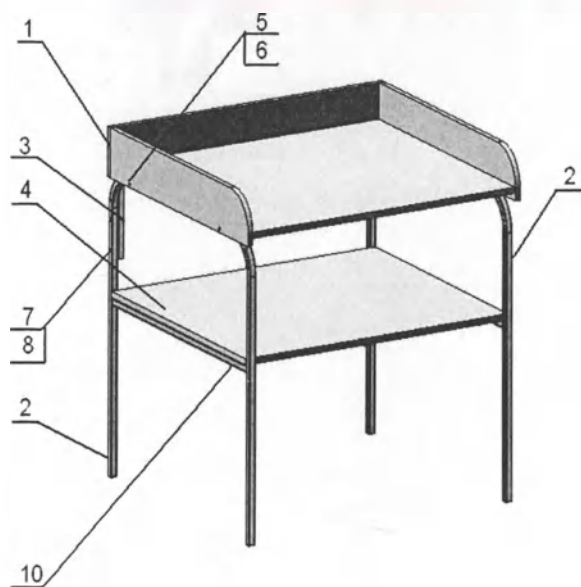

1. Собрать металлокаркас стола, привернув к ножкам (поз.2) распорку (поз.3) при помощи болтов М8х50 (поз.7) и гаек М8 (поз.8) с затяжкой от руки. Болты устанавливаются шляпкой с внешней стороны металлокаркаса.

2. Положить металлокаркас на чистую горизонтальную поверхность боком и привернуть к ножкам (поз.2) полку (поз.4) при помощи 6-и саморезов 3,5х35 (поз.10) крестообразной отверткой.

3. Установить полученную конструкцию в вертикальное положение и установив на нее короб (поз.1) закрепить его к металлокаркасу при помощи болтов М6х45 (поз.5) и гаек М6 (поз.6), затянув их при помощи ключа на «10».

4. Протянуть все соединения ножек (поз.2) и распорки (поз.3) при помощи ключа на «13».

5. Привернуть заднюю стенку короба (поз.1) к распорке (поз.3) при помощи 3-х саморезов 3,5х35 (поз.10)



медицинский инструментарий

НПКЦ МИЗ

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «НПКЦ «МИЗ»

А.А. Листкова

«__» _____ 2017 г.

Гарантийный талон
(проект)

Медицинское изделие
«Стол пеленальный по ТУ 32.50.30-005-58588802-2017»

Регистрационное удостоверение № _____

Модель _____

Адрес/Тел. Покупателя _____

Номер партии _____

Производитель: ООО «НПКЦ «МИЗ»

Официальный представитель _____

Дата изготовления _____

печать

Дата продажи _____

Покупатель _____

Представитель продавца _____

Подпись

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 18 месяцев со дня продажи при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Продавец обязуется провести бесплатную замену изделия в период гарантийного срока при условии соблюдения Покупателем условий хранения, транспортировки.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества: ООО «НПКЦ «МИЗ», 603087, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Слобода Александровская, д. 241, телефон: +7 (831) 212-44-33.

ООО «НПКЦ «МИЗ»
Итого в настоящем документе
_____ листа (ов)
Директор
Листкова А. А.

