


Общество с ограниченной ответственностью  
«Аметист фуд»

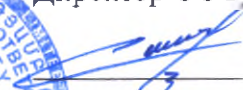

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Аметист фуд»

 Карапетян С.

«29» 06 2018 г.

Вата медицинская гигроскопическая хлопковая АМЕТИСТ, нестерильная по ГОСТ  
5556-81, в рулоне и зигзагообразной ленте

Инструкция по эксплуатации

2017 г.

## Назначение

Вата медицинская гигроскопическая хлопковая АМЕТИСТ, нестерильная по ГОСТ 5556-81, в рулоне и зигзагообразной ленте используется в качестве абсорбента, нестерильной ваты с универсальным применением.

## Область применения

Используется в медицинских учреждениях или в быту и доступно в свободной форме (без рецепта). Широко применяется в медицинской практике с другими медицинскими перевязочными средствами. Вата универсального применения, используется в лечебно-профилактических учреждениях, а также в быту, в аптечках первой помощи.

## Показания к применению

Неоткрытые раны, порезы, ссадины

## Порядок и условия применения

Оторвать необходимое количество ваты и обработать кожу.

## Побочное действие

Нет

## Противопоказания

Раздражающее и аллергическое воздействие на кожу пациента отсутствует. Во избежание риска удушья не давать детям играть с ватой нестерильной.

## Основные характеристики

| Наименование показателя                                                       | Хлопковая      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков, %, не более | 2,4            |
| 2. Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли, %, не более  | 0,15           |
| 3. Засоренность, %, не более                                                  | 0,30           |
| 4. Содержание посторонних примесей: иголок, щепочек и др.                     | Не допускается |
| 5. Зольность, %, не более                                                     | 0,30           |
| 6. Массовая доля жировых и воскообразных веществ, %, не более                 | 0,35           |
| 7. Влажность, %, не более                                                     | 8,0            |
| 8. Поглощительная способность, г, не менее                                    | 20             |
| 9. Капиллярность, мм, не менее                                                | 70             |
| 10. Реакция водной вытяжки                                                    | Нейтральная    |
| 11. Массовая доля хлористых солей, %, не более                                | 0,04           |
| 12. Массовая доля сернокислых солей, %, не более                              | 0,02           |
| 13. Массовая доля кальциевых солей, %, не более                               | 0,06           |
| 14. Содержание восстанавливающих веществ                                      | Следы          |
| 15. Степень белизны, %, не менее:                                             | 72             |
| 16. Запах                                                                     | Не допускается |

## Цвет

Белый

## Состав

Вата медицинская выпускается из 100%-го хлопкового волокна 3-го сорта по ГОСТ 5556.

## Стерильность

Нестерильно.

## Описание

Отбеливание ваты производится без применения хлора. Вата состоит из мягких, чистых гидрофильных хлопковых волокон высокого качества. При контакте с кожей и слизистой раздражающего действия не вызывает. Имеет равномерную структуру, без посторонних включений, мягкий гриф. Легко распределяется на параллельные слои. Вата обладает высокой сорбционной способностью, достаточно эффективно впитывает и удерживает раневое отделяемое, хорошо смачивается как раневым экссудатом, так и растворами лекарственных препаратов.

## Меры предосторожности

Запрещено повторное использование. Запрещено использование не по назначению.

Не прошедшая стерилизацию вата может использоваться во всех случаях, когда применение подобного материала не несет риска инфицирования.

## Хранение и транспортирование

Вату транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, установленными для каждого вида транспорта.

Вата должна храниться и транспортироваться в недоступном для детей чистом, сухом, темном месте в упаковке производителя при температуре от 2 °С до 25 °С и влажности 50-70%, избегая сдавливания изделий.

Запрещено хранить и транспортировать вату рядом с нагревательными приборами, в местах с повышенной температурой и рядом с предметами, обладающими сильным запахом (бытовая химия).

Упакованная вата должна храниться в складских помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги. Вата нестерильная должна храниться в индивидуальной упаковке без повреждений

Допускается хранить вату под навесами с брезентовым укрытием.

## Утилизация

Упаковку ваты утилизируют согласно СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» как отходы класса А или вместе с бытовым мусором.

После использования утилизацию ваты осуществляют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы), Б (эпидемиологически опасные отходы) или В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы), в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания.

## Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие ваты заявленным свойствам в течение срока годности, при условии соблюдения правил хранения, применения и транспортирования. Гарантийный срок хранения ваты (срок годности) – 5 лет с момента изготовления, указанного на упаковке. Не использовать по истечении гарантийного срока.

Изделие одноразового применения. Не требуется сервисное, техническое обслуживание и ремонт.

## Уполномоченный представитель

ООО «Сиафарм Русь»

ИНН 7751511097, КПП 775101001, ОГРН 1137746368649,

142784, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, стр.2

Тел.: +7 (495) 727-00-70

## Производитель

ООО «Аметист фуд»

Адрес: Улица Цатуряна, дом 34, Ереван 0018, Армения



Всего прошито и скреплено

Печатью

листов

4

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «Сиафарм Русь»



29 » 06


А.А. Балян  
2018 г.


## ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ

медицинского изделия

«Вата медицинская гигроскопическая хлопковая АМЕТИСТ,  
нестерильная по ГОСТ 5556-81, в рулоне и зигзагообразной ленте»

производства ООО «Аметист фуд», Армения

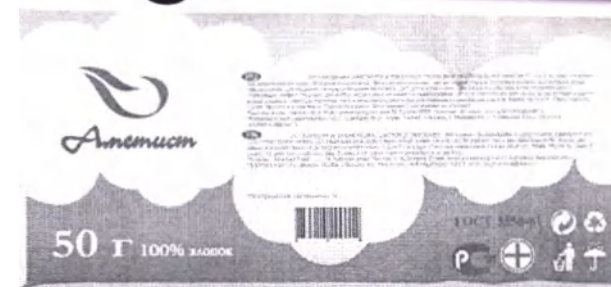

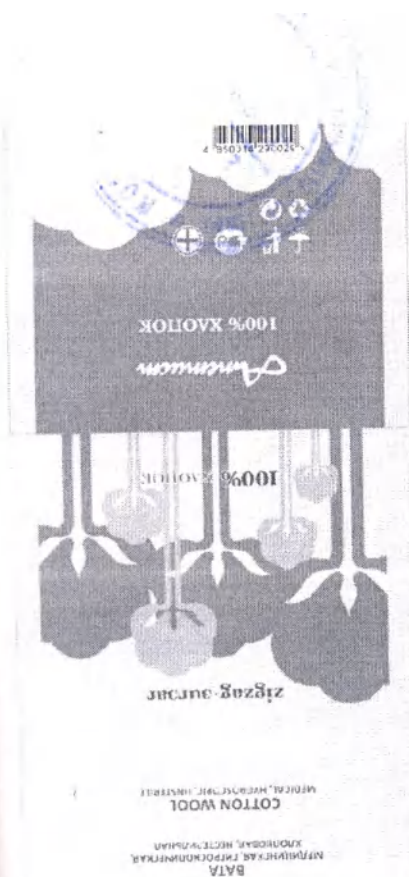

Всего прошито и скреплено

Печатью

(под)

листов

