


Общество с ограниченной ответственностью «Юникорн Медикал»
Российская Федерация, г. Чита, ул. Богомякова, дом № 41, 672038

Руководство пользователя

Одноразовая игла

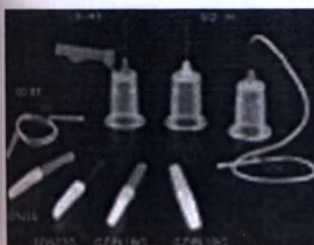

Данная продукция относится к предметам одноразового пользования. Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Описание:

Одноразовая игла (игла-бабочка, катетер), предназначена для проведения венепункции, а также используется со шприцами, держателями, вакуумными системами забора крови.

Способ применения:

1. Выберите место венепункции. В случае необходимости, наложите жгут (не более, чем на 1 минуту). Прозеинфицируйте область венепункции.
2. Снимите защитный колпачок с иглы-бабочки или другой одноразовой иглы.
3. Вставьте иглу в шприц, держатель или катетер.
4. Введите иглу в вену.
5. После проведения необходимой процедуры, освободите жгут и осторожно извлеките иглу из вены, одновременно прижимая к месту венепункции сухой стерильный ватный тампон до прекращения кровотечения. После образования сгустка наложите на место венепункции повязку либо бактерицидный пластырь.
6. После окончания процедуры, утилизируйте иглу в специальный контейнер для утилизации игл и других отходов.

Меры предосторожности:

- Не используйте поврежденную иглу.
- Проводите любые процедуры только в специальных перчатках.
- После использования, утилизируйте иглу в специальный контейнер для утилизации игл и других отходов в соответствии с правилами медицинского учреждения.

Общество с ограниченной ответственностью «Юникорн Медикал»
Российская Федерация, г. Чита, ул. Богомягкова, дом № 41, 672038


Условия хранения:

Храните держатели при температуре 4-250С (влажность 40-77%).

Гарантия:

Компания гарантирует качество и надежность данной продукции.

Держатель игл

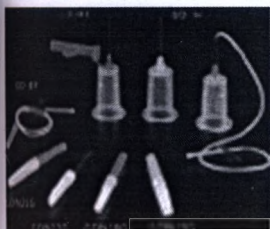

Держатель предназначен для использования с иглами, иглами-бабочками или катетерами. Вместе с вакуумными пробирками они применяются как система для взятия венозной крови у людей с «проблемными» венами. Перед использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Описание:

Стерильный, изготовленный из полимерного материала держатель игл.

С внутренней стороны держателя в центре приклеена эпоксидной смолой игла из нержавеющей стали, закрытая резиновым клапаном.

Способ применения:

1. Держа держатель игл в одной руке, другой рукой наденьте иглу-бабочку или другую иглу на коннектор для игл.

Убедитесь, что игла сидит крепко, во избежание выпадения иглы из держателя во время проведения венепункции.

2. Выберите место венепункции. Наложите жгут (не более, чем на 1 минуту). Прозеинфицируйте область венепункции.

3. Снимите защитный колпачок с иглы-бабочки или другой одноразовой иглы.

4. Введите иглу в вену.

5. Вставьте пробирку в одноразовый держатель и надавите, чтобы его игла проколола резиновую часть крышки. Вводите пробирку ровно в центр держателя, во избежание неправильного прокалывания крышки, что может способствовать потери вакуума.

6. Снимите жгут, как только кровь начнет поступать в пробирку. Крепко удерживайте пробирку в держателе, не допуская ее переворачивания.

ВНИМАНИЕ: Кровь может изредка протекать из муфты иглы. Примите обычные меры предосторожности для снижения риска заражения.

7. Поместите в держатель следующую пробирку. Во время процедуры убедитесь, что содержимое пробирки не контактирует с крышкой или клапанной иглой.



Общество с ограниченной ответственностью «Юникорн Медикал»
Российская Федерация, г. Чита, ул. Богомяглова, дом № 41, 672038

8. После забора последнего образца крови, осторожно извлеките иглу из вены, одновременно прижимая к месту венепункции сухой стерильный ватный тампон до прекращения кровотечения. После образования сгустка наложите на место венепункции пластырь либо бактерицидный пластырь.

9. После окончания процедуры взятия крови, утилизируйте держатель и иглу в специальный контейнер.

Меры предосторожности:

- Не используйте поврежденный держатель.
- Проводите процедуру взятия крови только в специальных перчатках.
- После окончания процедуры взятия крови, специальный контейнер для утилизации иглы и других отходов в соответствии с правилами медицинского учреждения.

Условия хранения:

Храните держатели при температуре $4-25^{\circ}\text{C}$ (влажность 40-77%).

ВНИМАНИЕ!

Избегайте воздействия прямого солнечного света. Превышение максимально допустимой температуры хранения может привести к деформации и повреждению держателя.

Пронумеровано, прошито и скреплено

3 (три)



и
и
О
та
П
Д
В
кр
ру
Ст
С в
нер

При

Игль

боле

извле
ватны
место

утилиз

Держат

другую

у
время п