



www.vitalfarm.ru

media@vitalfarm.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
Андросов В.В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Аптечка мамы и малыша «Виталфарм»

по ТУ 9398-042-85535470-2016, в вариантах исполнения

производства ЗАО «Виталфарм»

Исполнения: Аптечка мамы и малыша «Виталфарм», Состав №2:

- Тип 02, Тип 03, Тип 09, Тип 10/2, Тип 12, Тип 13, Тип 14/2, Тип 20

ВЛТС.939.350-002И

Назначение медицинского изделия: для оказания первой помощи малышу при легких травмах и недомоганиях и ухода за ним с первых дней жизни.

Область применения медицинского изделия: для оказания первой помощи ребенку.

Потенциальные потребители: лица, ухаживающие за малышом с первых дней жизни и оказывающие ему первую помощь при легких травмах и недомоганиях.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая инструкция):

Аптечка мамы и малыша «Виталфарм», Состав №2

Инструкция по применению

Бинт марлевый медицинский стерильный	перевязывающее средство
Бриллиантового зеленого раствор для наружного применения, спиртовой 1%	бактерицидное средство
Вата медицинская нестерильная	гигиеническое средство
Лейкопластырь бактерицидный	фиксирующее и дезинфицирующее средство
Клеенка подкладная	гигиеническое средство
Крем детский в тубе	косметическое средство
Вазелиновое масло, масло для приема внутрь и наружного применения	слабительное средство
Мыло детское	гигиеническое средство
Перекись водорода 3%	антисептическое средство
Прысыпка детская	адсорбирующее, подсушивающее средство
Пипетка глазная в футляре	для дозирования и закапывания лекарственных средств
Спринцовка с мягким наконечником	для орошения и отсоса жидкостей из полости организма
Стаканчик для приема лекарств	для точного дозирования лекарственных средств
Термометр медицинский	для измерения температуры тела

Имеются противопоказания. Перед употреблением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции по применению в индивидуальных упаковках комплектующих.

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

ВЛТС.939.350-002И

Противопоказания:

Перед применением изделий из состава вложения необходима консультация специалиста. Подробные инструкции вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Характеристики:

Габаритные размеры футляра должны соответствовать:

Для исполнения Тип 02 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 195 ± 20
- Ширина, мм - 160 ± 16
- Высота, глубина, мм - 90 ± 9

Для исполнения Тип 03 Футляр полистирольный

- Длина, мм - 275 ± 28
- Ширина, мм - 190 ± 19
- Высота, глубина, мм - 80 ± 8

Для исполнения Тип 09 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 235 ± 24
- Ширина, мм - 190 ± 19
- Высота, глубина, мм - 75 ± 8

Для исполнения Тип 10/2 Футляр полистирольный

- Длина, мм - 221 ± 22
- Ширина, мм - 221 ± 22
- Высота, глубина, мм - 68 ± 7

Для исполнения Тип 12 Футляр текстильный

- Длина, мм - 210 ± 32
- Ширина, мм - 170 ± 26
- Высота, глубина, мм - 80 ± 12

Для исполнения Тип 13 Футляр текстильный

- Длина, мм - 230 ± 35
- Ширина, мм - 185 ± 28
- Высота, глубина, мм - 105 ± 16

Для исполнения Тип 14/2 Футляр текстильный

- Длина, мм - 175 ± 27
- Ширина, мм - 125 ± 19
- Высота, глубина, мм - 70 ± 11

Для исполнения Тип 20 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 240 ± 24
- Ширина, мм - 185 ± 19
- Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Масса пустого футляра должна соответствовать, г.:

- Для исполнения Тип 02 (145 ± 30);
- Для исполнения Тип 03 (260 ± 50);
- Для исполнения Тип 09 (260 ± 50);
- Для исполнения Тип 10/2 (170 ± 30);
- Для исполнения Тип 12 (90 ± 20);

ВЛТС.939.350-002И

Для исполнения Тип 13 (120 ± 20);
Для исполнения Тип 14/2 (45 ± 15);
Для исполнения Тип 20 (160 ± 30).

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$.
Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 (рабочее значение температур воздуха при эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$; крайнее рабочее значение температур воздуха при эксплуатации от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$)

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Отходы лекарственных средств, непригодных к использованию, собирают в маркированные емкости («Отходы. Класс Г») и сдают для вывоза в специализированную организацию, имеющую лицензию в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

18 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев с даты продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая д. 2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

ВЛТС.939.350-002И

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью

4 листа (ов)

Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андр

11.05.2018г.

