

ИНСТРУКЦИЯ

по применению "Средства перевязочного порошкообразного Статин-Пальма"

Статин оказывает защитное, ранозаживляющее и гемостатическое действие. Статин представляет собой смесь порошковых материалов и предназначен для применения в практике стационарных и амбулаторных медицинских учреждений и в домашних условиях.

Выпускается в стерильном виде.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Вскрыть потребительскую тару.
2. Обработать рану и кожу вокруг раны согласно принятой методике.
3. Чистыми ножницами вскрыть индивидуальную тару.
4. Наносить Статин на влажную раневую поверхность до тех пор, пока верхний слой не перестанет промокать.
5. Оставлять образующийся гель на коже или раневой поверхности можно до полного заживления.
6. Удалять гель и остатки Статина следует раствором антисептика.

Генеральный директор
ООО "ГК Пальма"



О.В. Якубович