



141983 Московская обл., г. Дубна, ул.
Программистов, д. 4, стр. 2, пом. 29 тел.: (495)
734-91-31 (многоканальный), факс: 229-91-31
e-mail: office@unimeda.ru,
сайт: <http://www.unimeda.ru>

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБРАЗЦОВ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ in vitro**

**«Микропробирка с антикоагулянтом для капиллярной крови «ЮНИВЕТ-I»
по ТУ 9398-001-59879815-2008**

000-00000000

Ф005-03

ПАСПОРТ
на медицинское изделие
"Микропробирка с антикоагулянтном
для капиллярной крови "ЮНИВЕТ-1"
производства ООО "ЮНИМЕТ"

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02729 от ...

Партия: _____

Дата изготовления: _____

Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления.

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты контроля
1. Масса индивидуального антикоагулянта K ₂ ЭДТА в микропробирке, мг	0,04 ± 0,16	Соответствует
2. Объем микропробирки, см ³	1,5 ± 3,0	Соответствует
3. Геометрические размеры микропробирки:		
3.1. внутренний диаметр, мм	9 ± 12	Соответствует
3.2. длина, мм	38 ± 44	Соответствует
4. Масса микропробирки, г	0,9 ± 1,3	Соответствует
5. Количество изделий в упаковке, шт.	100	Соответствует

Условия применения: температурный диапазон хранения 86 ± 106 °

Условия хранения: температура -

Заключение:

Медицинское изделие соответствует:

ООО «ЮНИМЕТ»
141983, с. Дубна, ул. Прогрессивная, д. 4
СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Для контроля качества
«ПРОБЕРЕН»

ИНСТРУКЦИИ

по применению медицинского изделия
Микропробирка с антикоагулянтном для капиллярной крови «ЮНИВЕТ-1»
№ 13 9398-001-59879815-2008

Регистрационное удостоверение ФСР 2 № 2008/02729 от ...

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Микропробирка «ЮНИВЕТ-1» предназначена для взятия и хранения образцов капиллярной крови объемом 100 мкл с целью проведения исследований на гемостатическом анализаторе.

ПРИНЦИП МЕТОДА


После взятия крови помещенная в микропробирку с антикоагулянтном кровь перемешивается до полного растворения K₂ЭДТА. Антикоагулянт «замораживает» кровь, предотвращая процесс свертывания крови.

МЕТЫ И ПРИНЦИПЫ ТЕСТА

При взятии биологического материала следует строго соблюдать правила, указанные в Методическом РД № 120/У-01.001.001.001.

1.1. Подготовка к работе.


2. При взятии крови с помощью:

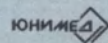

«ЮНИВЕТ-1»
МИКРОПРОБИРКА С АНТИКОАГУЛЯНТОМ
для капиллярной крови

Антикоагулянт K₂ЭДТА

Недопустимо применять при нарушении целостности упаковки.

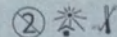

100 штук в упаковке

Хранить при температуре -25...+25 °С,
в относительной влажности не более 60%.ТУ 9398-001-59879815-2008
РУ № ФСР 2008/02729 от ...

Партия №
Изготовлено:
Смена №
Первичная упаковка №
Срок годности 18 месяцев



По заказу
ЗАО «АЮ Юнимед»

Производитель ООО «Юнимет»
141983, Московская обл., г. Дубна,
пр-т 1-й, д. 10, к. 1
Тел: +7 (495) 754-80-15
e-mail: info@yunimeta.ru
Сделано в России

Всего прошнуровано,
пропечатавано и скреплено
печатью _____ лист.
Генеральный директор УК
_____ А.Н. Шибанов

