

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ»

«В.О. Кантемиров
2018 г.

ПРИМЕРЫ МАРКИРОВКИ
медицинского изделия

«Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel
по ТУ 32.50.30-001-15482246-2017 в вариантах исполнения»

производства ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ», Россия

Изготовитель: ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ» www.czdor.ru (495) 620-58-59	Россия, 215710, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д.18, офис 1
Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel по ТУ 32.50.30-001-15482246-2017 в вариантах исполнения Вариант исполнения: Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №25	
ТУ 32.50.30-001-15482246-2017	
РЗН	Серийный № 25/1
Дата выпуска: 20 / мая / 2017 ОТК	

Изготовитель: ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ" www.czdor.ru (495) 620-58-59	Россия, 215710, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д.18, офис 1
Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel по ТУ 32.50.30-001-15482246-2017 в вариантах исполнения Вариант исполнения: Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №14 ТУ 32.50.30-001-15482246-2017	
РЗН _____	Серийный № 14/1
Дата выпуска: 20 / мая / 2017 ОТК	

Изготовитель: ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ" www.czdor.ru (495) 620-58-59	Россия, 215710, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д.18, офис 1
Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel по ТУ 32.50.30-001-15482246-2017 в вариантах исполнения Вариант исполнения: Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №13 ТУ 32.50.30-001-15482246-2017	
РЗН	Серийный № 13/1
Дата выпуска: 20 / мая / 2017 ОТК	

Изготовитель: ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ» www.czdor.ru (495) 620-58-59	Россия, 215710, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д.18, офис 1
Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel по ТУ 32.50.30-001-15482246-2017 в вариантах исполнения Вариант исполнения: Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №12 ТУ 32.50.30-001-15482246-2017	
РЗН _____	Сер.  2/1
Дата выпуска: 20 / мая / 2017 ОТК	

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

2 два) листа(ов)

Кантемиров В.О.

Ф.И.О.

 личная подпись



**Инструкция по эксплуатации
ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ»
2018 г.**

**Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel по ТУ 32.50.30-001-15482246-2017 в вариантах исполнения
Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №13**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1. Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №13 (далее по тексту — кресло) предназначено для расположения пациента в сидячем, горизонтальном или наклонном положениях с целью обеспечения доступа медицинского персонала к пациенту во время проведения осмотров и процедур в кабинетах и лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.

1.2. Кресло изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

2.1. Противопоказания отсутствуют

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры кресла указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров, ±20 мм
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	120 ± 5
Допустимая нагрузка на элементы трансформации:	
Секция ноги, не более, кг	50
Длина не более, мм	1780
Высота кресла нижняя точка ложе/верхняя точка ложе, не более, мм	580-920
Ширина сидения, не более, мм	710
Ширина (по креплениям для подлокотников), не более, мм	730
Угол наклона/трансформации секции «Ноги», не менее	-30° ... + 45°
Шаги регулировки углов наклона секции «Ноги»	
1	-30°
2	+ 45°
Размеры подлокотника (длина x ширина x высота), мм	420x140x60
Угол наклона (для подлокотников съемных с регулировкой высоты, поворота и угла наклона), не менее	-80° ... +80° *
Вращение подлокотников	360°
Регулировка высоты подлокотников от сидения, не более, мм	100 - 260
Шаги регулировки высоты подлокотников, мм	
1	100
2	140
3	180
4	220
5	260
Размеры подушки для забора крови, не более, мм	200x250x50
Масса кресла, не более, кг	30
Масса кресла с упаковкой, не более, кг	35
Температура поверхности кресла	Не превышает температуры окружающей среды

* - плавная регулировка

3.2. Характеристики

3.2.1. Кресло выдерживает равномерно распределенную по секциям нагрузку массой не более 120 ± 5кг

3.2.2. Металлические детали кресла имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной «Element».

3.2.3. Наружные поверхности кресла устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки кресла соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование изделия	Количество, шт.
1	Мягкое основание (ложе)	1
2	Основание/каркас (сборная конструкция)	1
3	Подлокотники съемные с регулировкой высоты и поворота или подлокотники съемные с регулировкой высоты, поворота и угла наклона*	2
4	Опора резбовая М8 (ножка)	4
5	Фиксатор с резьбой М8 и пластиковой рукояткой	4**(6***)
6	Инструкция по эксплуатации	1
7	Упаковка	1
1	Принадлежности: Подушка для забора крови *	1

* комплектуется по желанию заказчика

**кол-во фиксаторов для регулировки подлокотников съемных с регулировкой высоты и поворота

***кол-во фиксаторов для регулировки подлокотников съемных с регулировкой высоты, поворота и угла наклона

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Кресло состоит из:

- основания/каркаса (конструкция из металлических труб прямоугольного сечения), установленного на 4 регулируемые ножки-опоры;

- съемных подлокотников

5.2. Секции «Ложке», «Ноги», а также подлокотники облицованы искусственной кожей с поролоновой (пенополиуретановой) прослойкой на основании из фанеры (8 мм)

5.3. Регулирование угла подъема секций «Ноги» производится при помощи механизма «Растомат». Механизмы «Растомат» позволяют осуществлять ступенчатый подъем с разблокировкой в верхнем положении и последующим опусканием до нижнего положения.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. К сборке и эксплуатации кресла допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию кресла и правила эксплуатации

6.2. Перед использованием изделия необходимо убедиться в его устойчивости.

6.3. Запрещается использовать неисправное изделие.

6.4. Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия

7. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

7.1. После транспортирования кресла в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

7.2. Распаковать кресло, проверить целостность покрытия. Проверить комплектность.

7.3. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

8. ПОРЯДОК СБОРКИ

8.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего Инструкции по эксплуатации.

8.2. Осуществить сборку согласно схеме, используя комплектующие.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кресла и проверку работы исполнительных механизмов.

9.2. Не реже чем 1 раз в неделю необходимо проверять надежность затяжки резьбовых соединений. В случае ослабления затяжки резьбовых соединений необходимо затянуть их специальным инструментом.

9.3. Загрязненные поверхности изделия можно чистить, при необходимости, моющими средствами, не содержащими в своем составе абразивных элементов и растворителей.

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1. Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

10.2. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.

10.3. Температурный режим эксплуатации от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

10.4. Изделие не должно подвергаться ударным воздействиям.

10.5. Нагрузка на трансформируемые элементы изделия не должна превышать 50 кг.

11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

11.1. Для предотвращения загрязненности окружающей среды изделия и упаковку утилизировать, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с отметкой магазина о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи

12.2. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений изделия
- при не соблюдении пунктов 6.4.; 9.1.; 9.2.; 9.3.; 10.1.; 10.2.; 10.3; 10.4.
- при отсутствии Инструкции по эксплуатации изделия или при его неправильном заполнении.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отображенные в информационных носителях, но не ухудшающие надежность и качество изделия.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №13

Дата выпуска ____ / ____ /20 ____ г.

Соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники наименование и тип изделия **Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №13**

Серийный номер _____

Производитель: ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ» www.medmebel.com, www.czdr.ru

215710, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д.18, офис 1

Претензии и предложения принимаются по тел. (495) 620-58-59, (812) 424-37-97

Электронная почта: Москва: mnsk@czdr.ru, Санкт-Петербург: spb@czdr.ru, Общие вопросы: info@czdr.ru

Дата выпуска ____ / ____ /20 ____ г.

М.П. _____

Дата продажи ____ / ____ /20 ____ г.

М.П. _____

_____ подпись, штамп торгующей организации


СХЕМА СБОРКИ **«Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №13»**

1. Произвести сборку каркаса используя сборочный крепеж (для удобства сборки крепеж установлен в местах скрепления частей конструкции). Инструмент для сборки не входит в комплект поставки.
2. Установить регулировочные опоры.
3. Установить мягкое основание, на металлический каркас,
4. Установить подлокотники и зафиксировать их фиксаторами с пластиковой рукояткой.
5. Проверить работоспособность исполнительных механизмов.
6. При использовании кресла следует отрегулировать подлокотники.

Спецификация к схеме сборки для Кресла пациента процедурно-смотровое MedMebel №13
 Таблица №3

№	Наименование изделия	Количество, шт.
1	Мягкое основание (ложе)	1
2	Основание/каркас (сборная конструкция)	1
3	Подлокотники съемные с регулировкой высоты и поворота или подлокотники съемные с регулировкой высоты, поворота и угла наклона*	2
4	Опора резьбовая М8 (ножка)	4
5	Фиксатор с резьбой М8 и пластиковой рукояткой	4**(6***)
Крепеж:		
6	Болт М8х40	8
7	Гайка М8	4
8	Шайба М8	18
9	Болт М8х45	2
* комплектуется по желанию заказчика		
**кол-во фиксаторов для регулировки подлокотников съемных с регулировкой высоты и поворота		
***кол-во фиксаторов для регулировки подлокотников съемных с регулировкой высоты, поворота и угла наклона		

Шаг 1

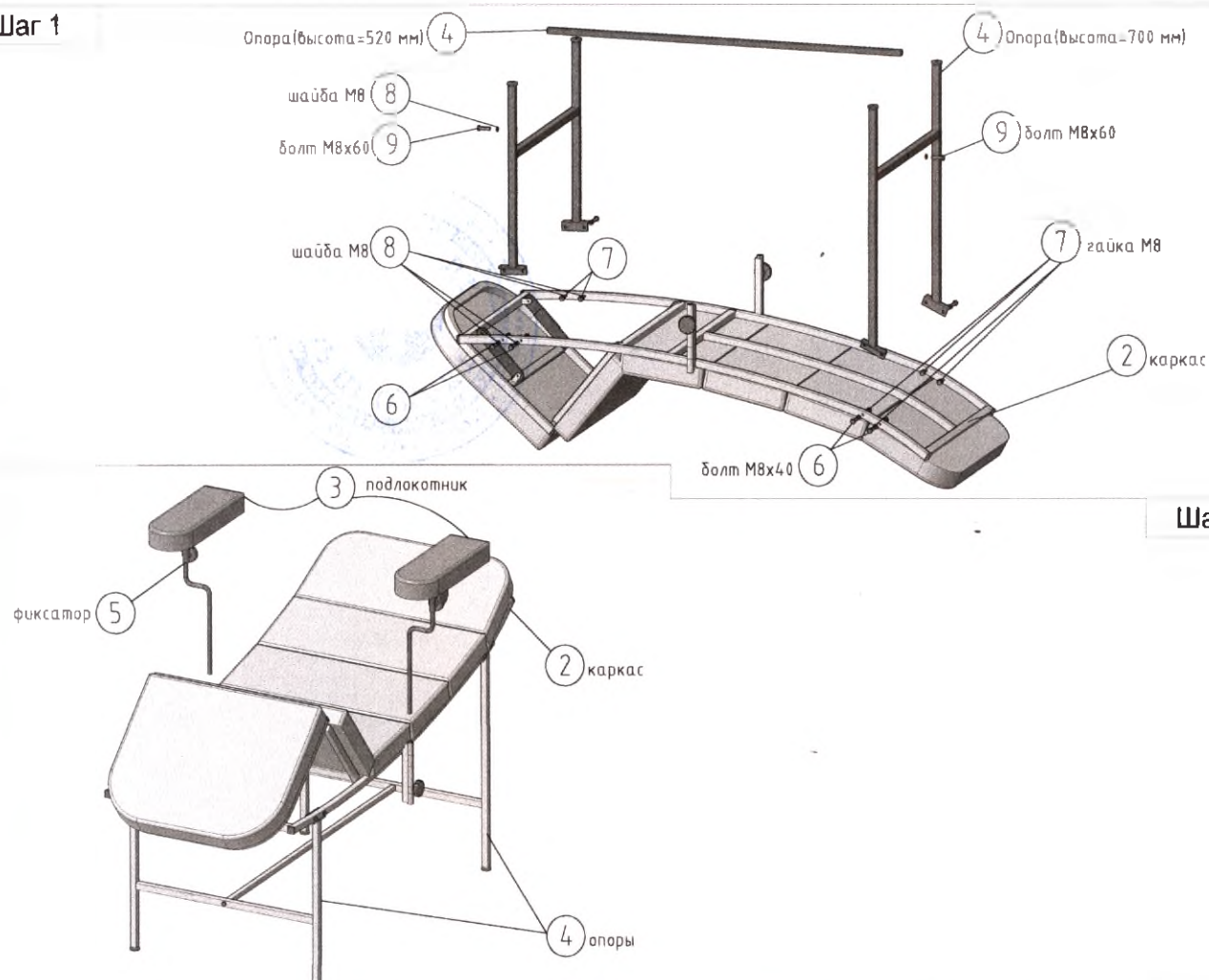

Шаг 2

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (три) листа(ов)

Катамаров В.О.



личная подпись



**Инструкция по эксплуатации
ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ»
2018 г.**

**Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel по ТУ 32.50.30-001-15482246-2017 в вариантах исполнения
Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №14**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

- 1.1. Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №14 (далее по тексту — кресло) предназначено для расположения пациента в сидячем, горизонтальном или наклонном положениях с целью обеспечения доступа медицинского персонала к пациенту во время проведения осмотров и процедур в кабинетах и лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.
- 1.2. Кресло изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

2.1. Противопоказания отсутствуют

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры кресла указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров, ±20 мм
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	120 ± 5
Допустимая нагрузка на элементы трансформации:	
Секция спина, не более, кг	50
Секция ноги, не более, кг	50
Длина (сидя - лежа), положение кресло/стол, не более, мм	1150-1750
Высота до сидения-ложа в положении стол, не более, мм	570
Высота в положении кресло, не более, мм	1240
Ширина сидения-ложа (без подлокотников), не более, мм	600
Ширина кресла (по креплениям для подлокотников), не более	640
Угол наклона секции «Спина», не менее	0...+75°
Шаги регулировки углов наклона секции «Спина»	
1	0°
2	+20°
3	+40°
4	+50°
5	+60°
6	+75°
Угол наклона секции «Ноги», не менее	-40°...+20°
Шаги регулировки углов наклона секции «Ноги»	
1	-40°
2	-20°
3	-10°
4	0°
5	+10°
6	+20°
Размеры подлокотника (длина х ширина х высота), мм	420x140x60
Угол наклона (для подлокотников съемных с регулировкой высоты, поворота и угла наклона), не менее	-80°...+80° *
Вращение подлокотников	360°
Регулировка высоты подлокотника в вертикальной плоскости, ход мм	160
Высота подлокотника от секции «Таз» (сидение-ложе), не более, мм	190-350
Шаги регулировки высоты подлокотников, мм	
1	190
2	230
3	270
4	310
5	350
Размеры подушки для забора крови, не более, мм	200x250x50
Масса кресла, не более, кг	30
Масса кресла с упаковкой, не более, кг	35
Температура поверхности кресла	Не превышает температуры окружающей среды

* - плавная регулировка

3.2. Характеристики

- 3.2.1. Кресло выдерживает равномерно распределенную по секциям нагрузку массой не более 120 ± 5кг
- 3.2.2. Металлические детали кресла имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной «Element».
- 3.2.3. Наружные поверхности кресла устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки кресла соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование изделия	Количество, шт.
1	Мягкое основание (ложе)	1
2	Основание/каркас (сборная конструкция)	1
3	Подлокотники съемные с регулировкой высоты и поворота или подлокотники съемные с регулировкой высоты, поворота и угла наклона*	2
4	Опора резьбовая М8 (ножка)	4
5	Фиксатор с резьбой М8 и пластиковой ручкой	4**(6***)

6	Инструкция по эксплуатации	1
7	Упаковка	1
Принадлежности:		
1	Подушка для забора крови*	1

* комплектуется по желанию заказчика

** кол-во фиксаторов для регулировки подлокотников съемных с регулировкой высоты и поворота

*** кол-во фиксаторов для регулировки подлокотников съемных с регулировкой высоты, поворота и угла наклона

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Кресло состоит из:

- основания/каркаса (конструкция из металлических труб прямоугольного сечения), установленного на 4 регулируемые ножки-опоры;

- секций «Спина», «Таз», «Ноги», съемных подлокотников

5.2. Секции «Таз», «Спина», «Ноги», подлокотники облицованы искусственной кожей с поролоновой (пенополиуретановой) прослойкой на основании из фанеры (8 мм)

5.3. Регулирование угла подъема секций «Спина», «Ноги» производится при помощи механизма «Растомат». Механизмы «Растомат» позволяют осуществлять ступенчатый подъем с разблокировкой в верхнем положении и последующим опусканием до нижнего положения.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. К сборке и эксплуатации кресла допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию кресла и правила эксплуатации

6.2. Перед использованием изделия необходимо убедиться в его устойчивости.

6.3. Запрещается использовать неисправное изделие.

6.4. Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия

7. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

7.1 После транспортирования кресла в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов.

7.2. Распаковать кресло, проверить целостность покрытия. Проверить комплектность.

7.3. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

8. ПОРЯДОК СБОРКИ

8.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего Инструкции по эксплуатации.

8.2. Осуществить сборку согласно схеме, используя комплектующие.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кресла и проверку работы исполнительных механизмов.

9.2 Не реже чем 1 раз в неделю необходимо проверять надежность затяжки резьбовых соединений. В случае ослабления затяжки резьбовых соединений необходимо затянуть их специальным инструментом.

9.3. Загрязненные поверхности изделия можно чистить, при необходимости, моющими средствами, не содержащими в своем составе абразивных элементов и растворителей.

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1. Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

10.2. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги

10.3 Температурный режим эксплуатации от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

10.3. Изделие не должно подвергаться ударным воздействиям.

10.4. Нагрузка на трансформируемые элементы изделия не должна превышать 50 кг.

11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

11.1 Для предотвращения загрязненности окружающей среды изделия и упаковку утилизировать, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с отметкой магазина о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи

12.2. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии

- при наличии механических повреждений изделия

- при не соблюдении пунктов 6.4.; 9.1.; 9.2; 9.3.; 10.1.; 10.2.; 10.3; 10.4.

- при отсутствии Инструкции по эксплуатации изделия или при его неправильном заполнении.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отображенные в информационных носителях, но не ухудшающие надежность и качество изделия.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №14

Дата выпуска ____ / ____ /20 ____ г.

Соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку. _____

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники наименование и тип изделия **Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №14**

Серийный номер _____

Производитель: ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ» www.medmebel.com, www.czdr.ru

215710, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д 18, офис 1

Претензии и предложения принимаются по тел. (495) 620-58-59, (812) 424-37-97

Электронная почта: Москва: mshk@czdr.ru, Санкт-Петербург: spb@czdr.ru, Общие вопросы: info@czdr.ru

Дата выпуска ____ / ____ /20 ____ г.

М.П. _____

Дата продажи ____ / ____ /20 ____ г.

М.П. _____

_____ подпись, штамп торгующей организации


СХЕМА СБОРКИ **«Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №14»**

1. Произвести сборку каркаса используя сборочный крепеж (для удобства сборки крепеж установлен в местах скрепления частей конструкции). Инструмент для сборки не входит в комплект поставки.
2. Установить регулировочные опоры.
3. Установить подлокотники и зафиксировать их фиксаторами с пластиковой рукояткой.
4. Проверить работоспособность исполнительных механизмов.
5. При использовании кресла следует отрегулировать подлокотники.


Спецификация к схеме сборки для Кресла пациента процедурно-смотровое MedMebel №14
 Таблица №3

№	Наименование изделия	Количество, шт.
1	Мягкое основание (ложе)	1
2	Основание/каркас (сборная конструкция)	1
3	Подлокотники съемные с регулировкой высоты и поворота или подлокотники съемные с регулировкой высоты, поворота и угла наклона*	2
4	Опора резьбовая М8 (ножка)	4
5	Фиксатор с резьбой М8 и пластиковой рукояткой	4**(6***)
Крепеж:		
6	Болт М8х40	8
7	Гайка М8	4
8	Шайба М8	18
9	Болт М8х60	2
* комплектуется по желанию заказчика		
**кол-во фиксаторов для регулировки подлокотников съемных с регулировкой высоты и поворота		
***кол-во фиксаторов для регулировки подлокотников съемных с регулировкой высоты, поворота и угла наклона		

Шаг 1

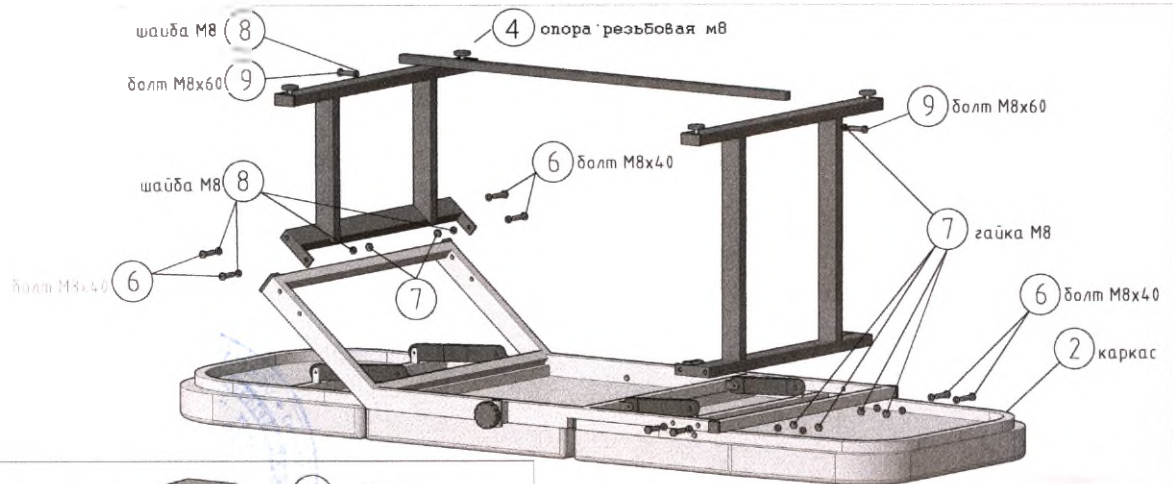

Шаг 2

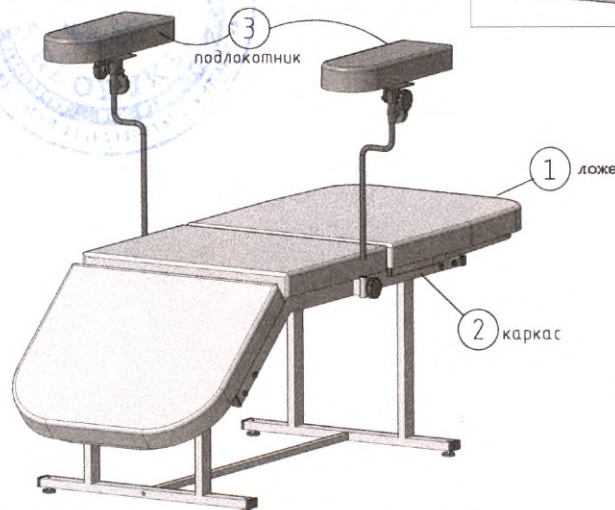

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (три) листа(ов)

3 (три) листа(ов)

Канташуров В.О. Ф.И.О.

Канташуров В.О. Ф.И.О.

личная подпись



**Инструкция по эксплуатации
ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ»
2018 г.**

**Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel по ТУ 32.50.30-001-15482246-2017 в вариантах исполнения
Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №25**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1. Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №25 (далее по тексту — кресло) предназначено для расположения пациента в сидячем, горизонтальном или наклонном положениях с целью обеспечения доступа медицинского персонала к пациенту во время проведения осмотров и процедур в кабинетах и лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.

1.2. Кресло изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ПРОТИВПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

2.1. Противопоказания отсутствуют.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Основные параметры и размеры кресла указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров, ±20 мм
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	100 ± 5
Габариты в стационарном положении:	
Длина / ширина (по крестовине), не более, мм	570
Ширина спинки, не более, мм	400
Ширина сиденья, не более, мм	450
Высота сиденья (от пола), не более, мм	450-580
Высота кресла, не более, мм	790-920
Угол наклона (для съемного подлокотника с регулировкой высоты, поворота и угла наклона), не менее	-80°...+80° *
Регулировка высоты подлокотника (высота от сиденья), не более, мм	210-370
Шаги регулировки высоты подлокотников, мм	
1	210
2	250
3	290
4	330
5	370
Размеры подлокотника (длина х ширина х высота), мм	320x150x60
Масса кресла, не более, кг	15
Масса кресла с упаковкой, не более, кг	20
Вращение кресла	360°
Температура поверхности кресла	Не превышает температуры окружающей среды

* - плавная регулировка

3.2. Характеристики

3.2.1. Кресло выдерживает равномерно распределенную по секциям нагрузку массой не более 100 ± 5 кг.

3.2.2. Металлические детали кресла имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной «Element».

3.2.3. Наружные поверхности кресла устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплект поставки кресла соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование изделия	Количество, шт.
1	Кресло (секция «сиденье» с пиастрой, секция «спина»)	1
2	Подлокотники съемные с регулировкой высоты и поворота или подлокотники съемные с регулировкой высоты, поворота и угла наклона*	2
3	Крестовина (пятилучье)	1
4	Опора-ножка цилиндрическая	5
5	Газлифт (пневмопружина)	1
6	Декоративный пластиковый чехол на крестовину (пятилучье)	1
7	Фиксатор с резьбой М8 и пластиковой рукояткой	4**(6***)
8	Инструкция по эксплуатации	1
9	Упаковка	1

* комплектуется по желанию заказчика

**кол-во фиксаторов для регулировки подлокотников съемных с регулировкой высоты и поворота

***кол-во фиксаторов для регулировки подлокотников съемных с регулировкой высоты, поворота и угла наклона

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Кресло состоит из:

- основания/крестовины установленного на 5 ножек опор;

- секций «Спина», «Сиденье», съемных подлокотников

- основание/крестовина соединяется с секцией «Сиденье» пневматическим устройством - газлифт

5.2. Секции «Спина», «Сиденье», подлокотники облицованы искусственной кожей с поролоновой (пенополиуретановой) прослойкой на основании из фанеры (8 мм)

5.3. Регулировка высоты сиденья обеспечивает газлифт, с помощью рычага/рукоятки под сиденьем.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. К сборке и эксплуатации кресла допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию кресла и правила эксплуатации.

6.2. Перед использованием изделия необходимо убедиться в его устойчивости.

6.3. Запрещается использовать неисправное изделие.

6.4. Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.

7.1. После транспортирования кресла в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

7.2. Распаковать кресло, проверить целостность покрытия. Проверить комплектность.

7.3. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

8. ПОРЯДОК СБОРКИ

8.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящей Инструкции по эксплуатации.

8.2. Осуществить сборку согласно схеме, используя комплектующие

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кресла и проверку работы исполнительных механизмов.

9.2. Не реже чем 1 раз в неделю необходимо проверять надежность затяжки резьбовых соединений. В случае ослабления затяжки резьбовых соединений необходимо затянуть их специальным инструментом.

9.3. Загрязненные поверхности изделия можно чистить, при необходимости, моющими средствами, не содержащими в своем составе абразивных элементов и растворителей.

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1. Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

10.2. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.

10.3. Температурный режим эксплуатации от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

10.3. Изделие не должно подвергаться ударным воздействиям.

11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

11.1. Для предотвращения загрязненности окружающей среды изделия и упаковку утилизировать, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с отметкой магазина о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

12.2. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии
- при наличии механических повреждений изделия
- при не соблюдении пунктов 6.4.; 9.1.; 9.2.; 9.3.; 10.1.; 10.2.; 10.3.; 10.4.
- при отсутствии Инструкции по эксплуатации изделия или при его неправильном заполнении.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отображенные в информационных носителях, но не ухудшающие надежность и качество изделия.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №25

Дата выпуска ____/____/20 ____ г.

Соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники наименование и тип изделия

Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №25

Серийный номер _____

Производитель: ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ» www.medmebel.com, www.czdr.ru

Россия, 215710, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д.18, офис 1

Претензии и предложения принимаются по тел. (495) 620-58-59, (812) 424-37-97

Электронная почта: Москва: msk@czdr.ru, Санкт-Петербург: spb@czdr.ru, Общие вопросы: info@czdr.ru

Дата выпуска ____/____/20 ____ г.

М.П. _____

Дата продажи ____/____/20 ____ г.

М.П. _____

_____, подпись, штамп торгующей организации

СХЕМА СБОРКИ
«Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №25»

1. Вставить ножки/опоры в отверстия крестовины.
2. Установить декоративный пластиковый чехол на крестовину.
3. Вставить газлифт широкой частью в крестовину через отверстие декоративного пластикового чехла.
4. Установить собранное сидение на газлифт.
5. Вставить газлифт в отверстие на piaстрe (piaстра - это площадка под сидением с рычагом)
6. Установить подлокотники и зафиксировать их рукоятками.
7. Проверить работоспособность исполнительных механизмов.

Спецификация к схеме сборки для Кресла пациента процедурно-смотровое MedMebel №13
 Таблица №3

№	Наименование изделия	Количество, шт.
1	Кресло (секция «сиденье» с piaстрой, секция «спина»)	1
2	Подлокотники съемные с регулировкой высоты и поворота или подлокотники съемные с регулировкой высоты, поворота и угла наклона*	2
3	Крестовина (пятилучье)	1
4	Опора-ножка цилиндрическая	5
5	Газлифт (пневмопружина)	1
6	Декоративный пластиковый чехол на крестовину (пятилучье)	1
7	Фиксатор с резьбой М8 и пластиковой рукояткой	4**(6***)

* комплектуется по желанию заказчика
 **кол-во фиксаторов для регулировки подлокотников съемных с регулировкой высоты и поворота
 ***кол-во фиксаторов для регулировки подлокотников съемных с регулировкой высоты, поворота и угла наклона



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 (шри) листа(ов)

Капитан 6 В0

Ф.И.О.

[подпись] личная подпись



**Инструкция по эксплуатации
ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ»
2018 г.**

**Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel по ТУ 32.50.30-001-15482246-2017 в вариантах исполнения
Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №12**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1.1. Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №12 (далее по тексту — кресло) предназначено для расположения пациента в сидячем, горизонтальном или наклонном положениях с целью обеспечения доступа медицинского персонала к пациенту во время проведения осмотров и процедур в кабинетах и лабораториях клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.

1.2. Кресло изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

2.1. Противопоказания отсутствуют

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Основные параметры и размеры кресла указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров, ±20 мм
Максимально допустимая нагрузка, не более, кг	120 ± 5
Допустимая нагрузка на элементы трансформации:	
Секция спина, не более, кг	50
Секция ноги, не более, кг	50
Габариты в стационарном положении:	
Длина (сидя - лежа), положение кресло/стол, не более, мм	1150-1750
Высота до сидения-ложа в положении стол, не более, мм	570
Высота в положении кресло, не более, мм	1240
Ширина сидения-ложа (без подлокотников), не более, мм	600
Ширина с подлокотниками, не более, мм	940
Угол наклона секции «Спина» не менее, мм	0...+75°
Шаги регулировки углов наклона секции «Спина»	
1	0°
2	+20°
3	+40°
4	+50°
5	+60°
6	+75°
Угол наклона секции «Ноги» не менее, мм	-40°...+20°
Шаги регулировки углов наклона секции «Ноги»	
1	-40°
2	-20°
3	-10°
4	0°
5	+10°
6	+20°
Высота подлокотника от секции «Таз» (сидение-ложе), не более, мм	340
Размеры подлокотника (длина х ширина х высота), мм	500х160х40
Размеры подушки для забора крови, не более, мм	200х250х50
Масса кресла, не более, кг	30
Масса кресла с упаковкой, не более, кг	35
Температура поверхности кресла	Не превышает температуры окружающей среды

3.2. Характеристики

3.2.1. Кресло выдерживает равномерно распределенную по секциям нагрузку массой не более 120 ± 5кг

3.2.2. Металлические детали кресла имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной «Element».

3.2.3. Наружные поверхности кресла устойчивы к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей согласно МУ 287-113 утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки кресла соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование изделия	Количество, шт.
1	Мягкое основание (ложе)	1
2	Основание/каркас (сборная конструкция)	1
3	Подлокотники (несъемные)	2
4	Опора резбовая м8 (ножка регулировочная)	4
5	Инструкция по эксплуатации	1
6	Упаковка	1
1	Принадлежности:	
	Подушка для взятия крови*	1
	* комплектуется по желанию заказчика	

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 Кресло состоит из:

- основания/каркаса (конструкция из металлических труб прямоугольного сечения), установленного на 4 регулируемые ножки-опоры;
- секций «Спина», «Ноги», подлокотников на основании из фанеры (8 мм)

5.2 Секции «Таз», «Спина», подлокотники облицованы искусственной кожей с поролоновой (пенополиуретановой) прослойкой.

5.4. Регулирование угла подъема секций «Спина», «Ноги» производится при помощи механизма «Растомат». Механизмы «Растомат» позволяют осуществлять ступенчатый подъем с разблокировкой в верхнем положении и последующим опусканием до нижнего положения.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. К сборке и эксплуатации кресла допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию кресла и правила эксплуатации.

6.2. Перед использованием изделия необходимо убедиться в его устойчивости.

6.3. Запрещается использовать неисправное изделие.

6.4. Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.

При несоблюдении вышеперечисленных требований фирма производитель не несет ответственности за возможные последствия.

7. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

7.1. После транспортирования кресла в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

7.2. Распаковать кресло, проверить целостность покрытия. Проверить комплектность.

7.3. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

8. ПОРЯДОК СБОРКИ

8.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего Инструкции по эксплуатации.

8.2. Осуществить сборку согласно схеме, используя комплектующие.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кресла и проверку работы исполнительных механизмов.

9.2. Не реже чем 1 раз в неделю необходимо проверять надежность затяжки резьбовых соединений. В случае ослабления затяжки резьбовых соединений необходимо затянуть их специальным инструментом.

9.3. Загрязненные поверхности изделия можно чистить, при необходимости, моющими средствами, не содержащими в своем составе абразивных элементов и растворителей.

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1. Хранение должно обеспечиваться в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

10.2. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.

10.3. Температурный режим эксплуатации от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

10.4. Изделие не должно подвергаться ударным воздействиям.

10.5. Нагрузка на трансформируемые элементы изделия не должна превышать 50 кг.

11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

11.1. Для предотвращения загрязненности окружающей среды изделия и упаковку утилизировать, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А.

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении потребителем условий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии гарантийного талона с отметкой магазина о дате продажи. Гарантийный срок эксплуатации — 1 год со дня продажи.

12.2. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии

- при наличии механических повреждений изделия

- при не соблюдении пунктов 6.4.; 9.1.; 9.2.; 9.3.; 10.1.; 10.2.; 10.3.; 10.4.

- при отсутствии Инструкции по эксплуатации изделия или при его неправильном заполнении.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отображенные в информационных носителях, но не ухудшающие надежность и качество изделия.

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №12

Дата выпуска ____/____/20 ____ г.

Соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку _____

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники наименование и тип изделия Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №12

Серийный номер _____

Производитель: ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ» www.medmebel.com, www.czdr.ru

215710, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, ул. Лермонтова, д.18, офис 1

Претензии и предложения принимаются по тел. (495) 620-58-59, (812) 424-37-97

Электронная почта: Москва: msk@czdr.ru, Санкт-Петербург: spb@czdr.ru, Общие вопросы: info@czdr.ru

Дата выпуска ____/____/20 ____ г.

М.П. _____

Дата продажи ____/____/20 ____ г.

М.П. _____

подпись, штамп торгующей организации

СХЕМА СБОРКИ

«Кресло пациента процедурно-смотровое MedMebel №12»


1. Произвести сборку каркаса используя сборочный крепеж (для удобства сборки крепеж установлен в местах скрепления частей конструкции). Инструмент для сборки не входит в комплект поставки.
2. Установить регулировочные опоры.
3. Установить мягкое основание, на металлический каркас.
4. Проверить работоспособность исполнительных механизмов.

Спецификация к схеме сборки для Кресла пациента процедурно-смотровое MedMebel №12


Таблица №3

№	Наименование изделия	Количество, шт.
1	Мягкое основание (ложе)	1
2	Основание/каркас (сборная конструкция)	1
3	Подлокотники (несъемные)	2
4	Опора резьбовая м8 (ножка регулировочная)	4
Крепеж:		
5	Болт М8х40	8
6	Гайка М8	4
7	Шайба М8	18
8	Болт М8х60	2
9	Болт М12х130	2
10	Болт М12х110	2
11	Шайба М12	12
12	Гайка М12	4
* комплектуется по желанию заказчика		
**кол-во фиксаторов для регулировки подлокотников съемных с регулировкой высоты и поворота		
***кол-во фиксаторов для регулировки подлокотников съемных с регулировкой высоты, поворота и угла наклона		

Шаг 1

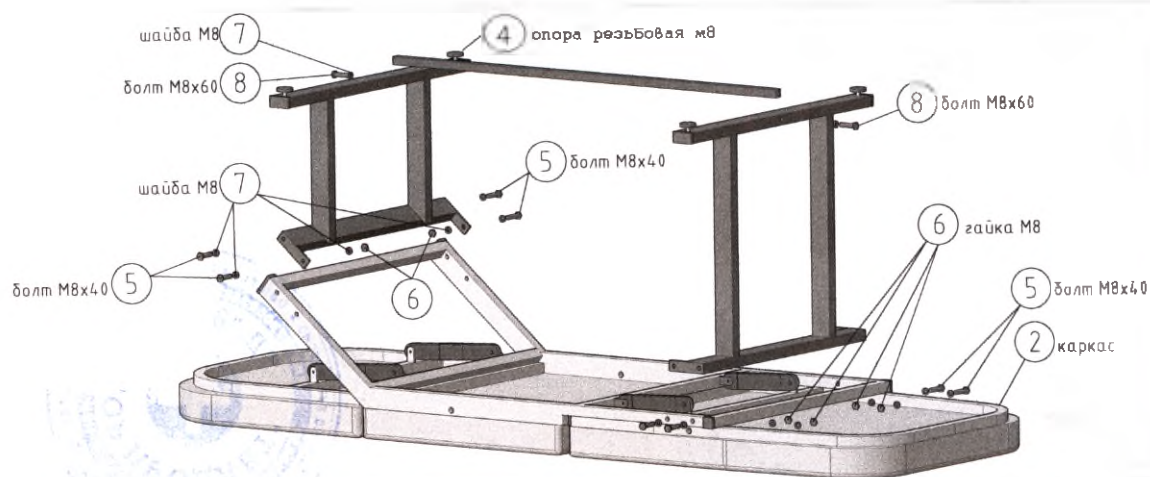

Шаг 2

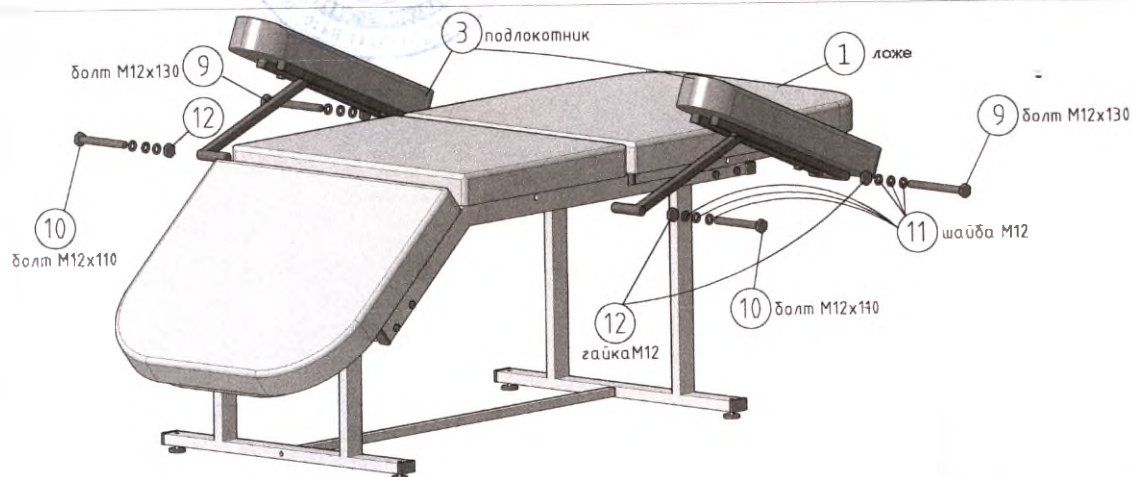

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (три) листа(ов)

Катанов 6 80 Ф.И.О.

личная подпись

