


Главный инженер

В.В.Мазов

2004r.

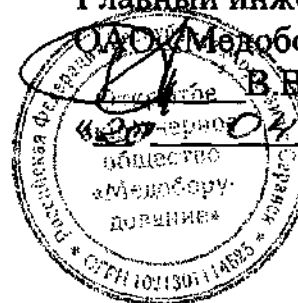

**со съёмными носилками с подголовником,
регулируемым под углом подъёма,
ТСН-«СЗМО»**

ПАСПОРТ

mC 107.00.000ПС

1 Назначение

Тележка со съемными носилками с подголовником, регулируемым под углом подъема ТСН-«СЗМО» (в дальнейшем тележка), предназначена для перемещения и переноски тяжелобольных внутри корпуса лечебного учреждения.

Условия эксплуатации:

Температура воздуха от +5° до +40°С, относительная влажность не более 80% при 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.

2 Технические характеристики

Номинальная нагрузка, кг	80
Угол наклона подголовником, панели	15°, 30°, 45°
Основные размеры, мм, длина панели	2100±5
ширина панели	505±3
высота	820±5
Масса тележки с панелью, кг, не более	40

3 Состав изделия и комплект поставки

Тележка без панели	1 шт.
Панель съемная	1 шт.

				ТС 107.00.000ПС			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат			
Разраб.		Уртенков			Тележка со съемными носилками с подголовником, регулируемым под углом подъема, ТСН-«СЗМО»		
Провер.		Завьялов					
Н. Контр.		Кимяева			Лит.	Лист	Листов
Утверд.		Шиндин				2	6
					ОАО «Медоборудование»		

4 Устройство и принцип работы

Тележка представляет собой сварной каркас, установленный на 4 самоориентирующихся колеса, обеспечивающих легкость хода тележки. Каркас тележки выполнен из стальных труб и представляет собой две П-образные боковины, соединенные поперечинами. Сверху к боковинам каркаса приварены четыре опорные лапки с резиновыми окантовками для установки панелей. На стойках тележки приварены кронштейны на которые устанавливаются предохранительные (отбойные) колеса.

Панель представляет собой трубчатую сварную раму, опирающуюся на четыре ножки. На концах продольных брусьев рамы надеты резиновые ручки. Рама носилок обшита металлическим листом и является панелью носилок, в ней шарнирно крепится подголовник, который можно устанавливать в наклонные положения под углом 15, 30 и 45 градусов.

Фиксация наклонного положения осуществляется при помощи скобы, боковые зубчатые рейки которой входят в зацепление со стержнем, укрепленным на ножках носилок.

5 Правила эксплуатации

Перед эксплуатацией очистите тележку и насухо протрите. Изделие следует содержать в чистоте и периодически обрабатывать дезинфицирующими растворами. Чтобы не допускать поломки ходовой части тележки, не следует свозить ее по лестницам, переезжать с резкими толчками через высокие пороги и другие препятствия. Раз в год снимите и заполните ступицы консистентной смазкой.

					<i>mC 107.00.000ПС</i>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат		3

6 Правила хранения

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в закрытых помещениях при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98% при 25°C и при более низких температурах без конденсации влаги.

7 Свидетельство о приемке

Тележка со съемной панелью заводской № _____
Соответствует ТУ 9451-031-07614018-2004 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

ОТК _____

Представитель заказчика _____

8 Гарантийные обязательства

Предприятие гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев при соблюдении условий хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня получения изделия потребителем.

Предприятие систематически ведет работы по улучшению конструкции изделия, поэтому возможны некоторые ее изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Россия, Республика Мордовия, 430904, г. Саранск, р.п. Ялга,
ул. Пионерская, 10
ОАО «Медоборудование»

МС 107.00.000ПС

Лист

5

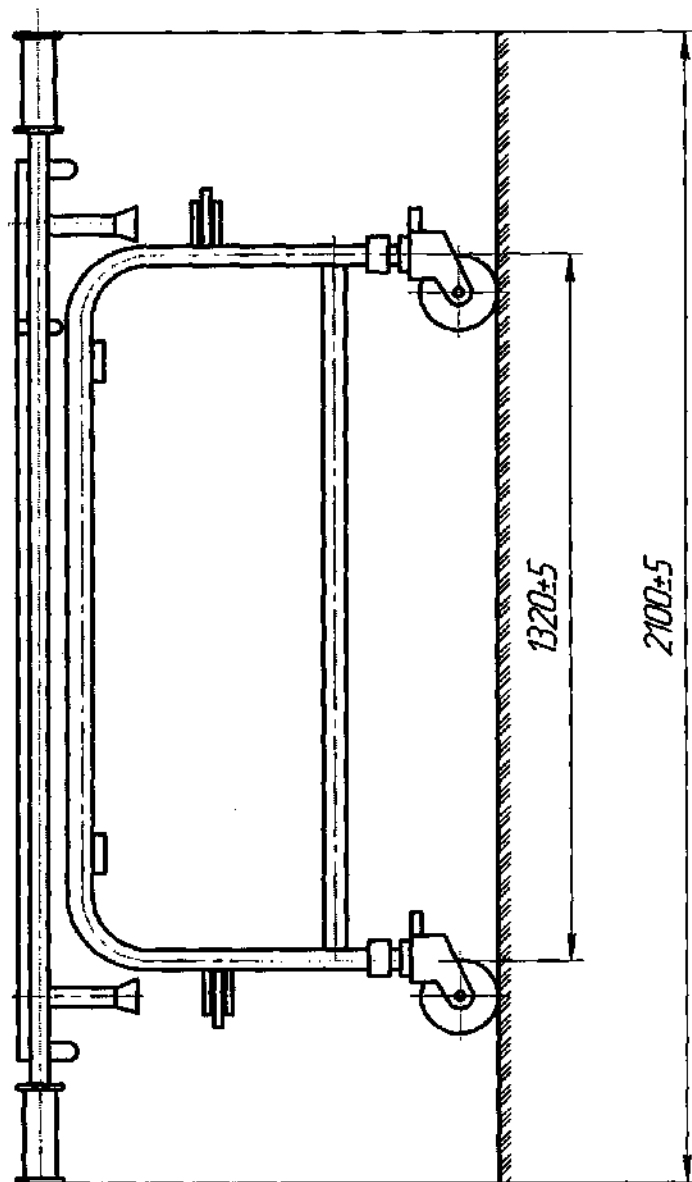
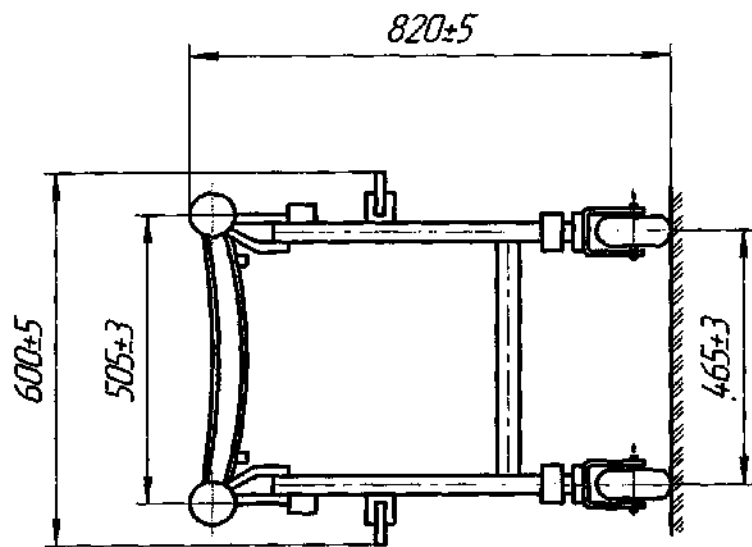


Рис. 1

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

МС 107.00.000ПС

Лист
6

[illegible]

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью на 7 листах

Главный инженер
ОАО «Медоборудование» В.А.Маньчев

