

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ОАО «Медоборудование»

Открытое акционерное общество

«Медоборудование»

г. Саранск 008 г.

ОГРН 1021301114625

С Т О Л

**ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
СППГ-01 «СЗМО»**

**Руководство по эксплуатации
ТС 516.00.000 РЭ**

г. Саранск

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение изделия
2. Технические характеристики
3. Комплектность
4. Устройство и порядок работы
5. Техническое обслуживание
6. Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя
7. Правила хранения и транспортирования
8. Свидетельство об упаковывании
9. Свидетельство о приемке

					mC 516.00.000 PЭ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	С Т О Л ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СППГ-01 «СЗМО» Руководство по эксплуатации				Лит.	Лист	Листов	
Разраб.	Смирнов										2	8
Провер.	Дементьева											
Реценз.												
Н. Контр.	Кимяева											
									ОАО «Медоборудование»			
ИНФО@СРМ РИ									WWW.GOSDRAVNAZOR.RU			

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Стол перевязочный передвижной гидравлический СППГ-01 «СЗМО» (в дальнейшем стол) предназначен для проведения перевязок и несложных хирургических операций. Применяется в хирургических отделениях лечебных учреждений. Привод подъема гидравлический.

1.2 Стол должен эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35°C и относительной влажности до 80% при температуре плюс 25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Габаритные размеры стола, мм:

Длина – 2000

Ширина - 600

2.2 Масса стола, кг $62 \pm 1,0$

2.3 Максимальная нагрузка на стол 160 кг.

2.4 Угол наклона подголовника относительно горизонтальной оси 0 – 45°.

2.5 Высота подъема: $H_{\max} - 960 \pm 10$ мм
 $H_{\min} - 400 \pm 10$ мм

2.6 Усилие на педаль при подъеме и опускании панели стола нагрузкой 160 кг не более 300Н (30 кгс), на тормоза колес не более 150Н (15кгс).

2.7 Усилие передвижения стола с нагрузкой 160 кг не более 100Н (10 кгс).

2.8 Усилие перемещения стола с включенным тормозным механизмом и нагрузкой 160 кг. не менее 300Н (30кгс)

2.9 Высота подъема (опускания) панели за один ход педали должна быть не менее 15 мм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки стола входят изделия и документы, указанные в таблице 1

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Кол-во, шт.
Стол перевязочный передвижной гидравлический СППГ-01 «СЗМО»	ТС 516.00.000 СБ	1
Комплект съемных частей:		
- подлокотники	ТС 516.40.000 СБ	2
- колеса поворотные	HJA.G5B	2
- колеса поворотные с тормозом	HLA.G5B	2
Эксплуатационная документация		
Паспорт	ТС 516.00.000 ПС	1
Паспорт на гидроцилиндр	MEDIJACK	1

4. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Стол состоит из следующих составных частей (см. рис. 1): панель подголовника – 1; спинная панель – 2; фиксатор подголовника «Multiflex» - 3; опорной рамы – 4; подвижных рам – 5; подъемного устройства (гидроцилиндр HOLLAND-S-300) – 6.

Опорная рама установлена на четыре поворотных колеса, два из которых с тормозом – 7,8. Стол оснащен регулируемыми подлокотниками – 9; педалями подъема и опускания – 10.

4.2 Порядок работы:

«Подъем».

Педалью (10), которая находится внизу стола, нужно путем накачивания нажимать вниз и тем самым поднять панель на нужный уровень высоты.

«Опускание»

Медленно приподнять педаль (10) и держать. При отпуске педали панель останавливается на нужной высоте.

Панель имеет подголовник, угол которого регулируется вручную.

Для фиксации положения стола следует поставить на тормоз оба колеса с тормозным устройством.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Стол периодически обрабатывается дезинфицирующими растворами.

5.2 Стол подвергается регулярному внешнему осмотру.

5.3 В случае обнаружения неисправности, устранение неисправности должно проводиться представителями специализированной организации.

5.4. Раз в год ступицы колес заполняются консистентной смазкой.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие стола требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения, указанных в данном паспорте.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации стола – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации;
- при наличии механических повреждений.

6.4 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

6.5 Средний срок службы стола до списания – 10 лет

6.6 Адрес предприятия –изготовителя:

430904, Российская Федерация, Республика Мордовия,

г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, д.10,

ОАО «Медоборудовие»

6.7 Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ 10.В00903, срок действия по 28 августа 2011 г.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Стол в упаковке предприятия изготовителя должен храниться при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности 80 % при температуре плюс 25 °С.

7.2 Стол может транспортироваться при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 40 °С и относительной влажности 100% при температуре плюс 25 °С.

7.3 Стол не должен подвергаться ударным воздействиям, а также воздействию атмосферных осадков.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Стол перевязочный передвижной гидравлический СППГ-01 «СЗМО» зав.№ _____ подвергнут на ОАО "Медоборудование" согласно требованиям, предусмотренным ТУ 9452.043.07614018-2006.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол перевязочный передвижной гидравлический СППГ-0,1, зав.№ _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 9452.043.07614018-2006 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОКК

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М П

(год, месяц, число)

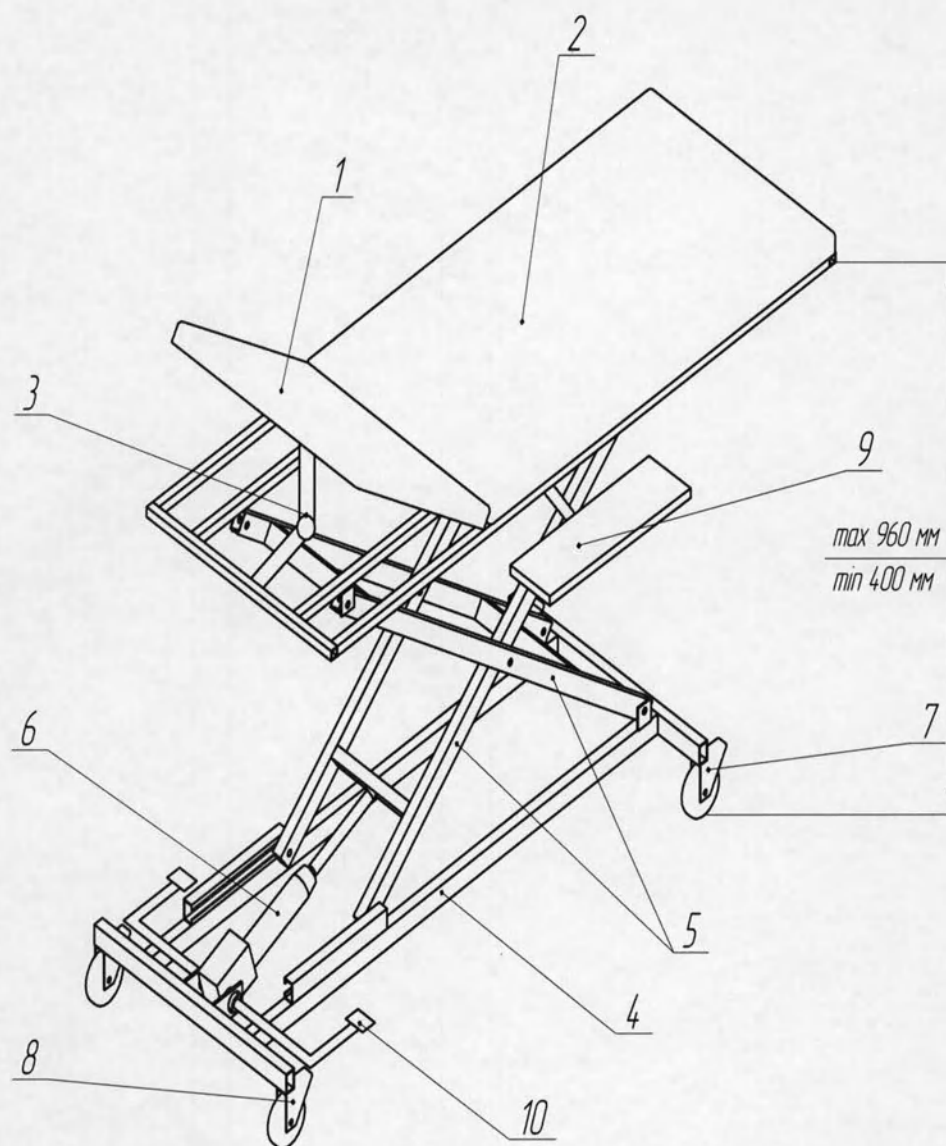


Рис. 1

Лист регистрационных изменений

[illegible]

Проставить
печатью на _

Главный инженер
ОАО «Медобор»

и скреплено

