

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН»



Ю.В. Калабин

2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пеленки впитывающие одноразовые «МолиНеа» по ТУ 9398-001-47580861-2013, варианты исполнения: МолиНеа нормал, МолиНеа плюс, МолиНеа, МолиНеа супер, МолиНеа плюс D (далее – Пеленки).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пеленки предназначены для использования при уходе за лежачими, послеоперационными больными, людьми с ограниченными возможностями передвижения, при проведении медицинских исследований, манипуляций и процедур в условиях лечебных учреждений, а также в качестве дополнительной защиты при использовании подгузников в процессе ухода за больными, страдающими недержанием мочи и кала.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пеленки представляют собой комбинированные изделия, включающие покровный слой из нетканого материала, сорбционный слой из распушенной целлюлозы и защитный слой из водонепроницаемой пленки.

Пеленки выпускаются пяти видов:

- МолиНеа нормал, трех типоразмеров: 40х60см, 60х60 см, 60х90 см.
- МолиНеа плюс, четырех типоразмеров: 40х60см, 60х60 см, 60х90 см, 180х90 см.
- МолиНеа, четырех типоразмеров: 40х60см, 60х60 см, 60х90 см, 180х90 см.
- МолиНеа супер, трех типоразмеров: 40х60см, 60х60 см, 60х90 см.
- МолиНеа плюс D, двух типоразмеров: 60х60 см, 60х90 см.

Основные размеры пеленок, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

№	Типоразмер изделия, см	Длина изделия, мм	Ширина изделия, мм	Длина сорбционного слоя, мм	Ширина сорбционного слоя, мм
1	2	3	4	5	6
1	пеленка 40х60	600±20	400±20	520±20	340±20
2	пеленка 60х60	600±20	570±20	520±20	520±20
3	пеленка 60х90	895±20	570±20	810±20	520±20
4	пеленка 180х90	895±20	1800±100	810±20	520±20

Физико-механические показатели пеленок приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Величина
Сорбционная способность изделия, г/г, не менее	11,0
Разрывная нагрузка покровного слоя в сухом состоянии в продольном направлении, кгс, не менее	2,0
Разрывная нагрузка покровного слоя во влажном состоянии, в продольном направлении, кгс, не менее	2,0
Масса пеленки, г *	
пеленки МолиНеа нормал:	
- МолиНеа нормал 40х60 см	20,8
- МолиНеа нормал 60х60 см	31,3
- МолиНеа нормал 60х90 см	48,3
пеленки МолиНеа плюс:	
- МолиНеа плюс 40х60 см	26,1
- МолиНеа плюс 60х60 см	39,4
- МолиНеа плюс 60х90 см	60,9
- МолиНеа плюс 180х90 см	98,1
пеленки МолиНеа:	
- МолиНеа 40х60 см	29,7
- МолиНеа 60х60 см	44,8
- МолиНеа 60х90 см	69,3
- МолиНеа 180х90 см	106,6
пеленки МолиНеа супер:	
- МолиНеа супер 40х60 см	36,7
- МолиНеа супер 60х60 см	55,6
- МолиНеа супер 60х90 см	86,2
пеленки МолиНеа Плюс Д:	
- МолиНеа плюс D 60х60 см	71,8
- МолиНеа плюс D 60х90 см	111,5
Водоупорность защитного слоя, мм вод.ст.	не менее 500,0

Допустимые отклонения по массе не превышают $\pm 10\%$.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлена пеленка.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ

Пеленка используется в качестве подстилочного материала, защищающего элементы одежды, белья, мебели от попадания жидкостей, используемых при осуществлении различных гигиенических процедур, а также и от различных выделений (моча и т.п.).

Непосредственно перед использованием пеленки, ее вынимают из упаковки, расправляют и осматривают на предмет целостности и отсутствия дефектов.

После попадания влаги – пеленка подлежит замене.

После использования пеленка утилизируется вместе с другими бытовыми отходами. Не выбрасывать в канализацию.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Пеленки должны храниться в упаковке изготовителя по условиям хранения по группе 5 по ГОСТ 15150.

