

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ХИТЭК-ГРУП»

И. Г. Зайцев

«14» августа 2018 г.



Инструкция по применению

Мебель медицинская по ТУ 32.50.50-002-18732063-2017:

Кресло-каталка гериатрическое

"ККГ-01"

ИНСТРУКЦИЯ

по применению "ККГ-01"

1. НАЗНАЧЕНИЕ, ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Мебель медицинская по ТУ 32.50.50-002-18732063-2017: Кресло-каталка гериатрическое "ККГ-01" (далее - изделие) предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов, а также для перемещения пациентов в учреждениях здравоохранения, реабилитационных центрах, домах престарелых. Изделие используется для оснащения кабинетов, в том числе косметологических и массажных, палат и лабораторий клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.

Противопоказаний нет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯ

Габаритные размеры, мм:

Кресла: высота - 1230 ± 4 , ширина 730 ± 4 , длина - 770 ± 4

Спинной секции: длина - 700 ± 4 , ширина - 520 ± 4 , высота - 70 ± 4

Сидения: длина - 460 ± 4 , ширина - 520 ± 4 , высота - 70 ± 4 , высота над уровнем пола - 605 ± 4

Подлокотник: длина - 390 ± 4 , ширина - 135 ± 4 , высота - 50 ± 4

Упор для ног: длина - 305 ± 4 , ширина - 490 ± 4 , высота - 20 ± 4

Угол наклона спинной секции: $60^\circ - 90^\circ$, механизм регулировки секции - газовая пружина. Для изменения положения - следует нажать на рычаг регулировки пружины и выставить необходимое положение секции.

Угол поворота подлокотников - 270° , высота поверхности подлокотника от пола минимальная - 590 мм, максимальная - 800 мм. Механизм регулировки высоты и угла поворота - механический, бесступенчатый. Закрепление положения ручкой-фиксатором. Для изменения положения подлокотника - необходимо повернуть ручку-фиксатор против часовой стрелки (т.е. ослабить фиксацию), выставить нужную высоту и закрутить ручку-фиксатор по часовой стрелке (т.е. зафиксировать новое положение элемента).

Упор для ног - откидной. Для того, что бы его сложить, необходимо повернуть его против часовой стрелки вокруг оси. Он, пройдя вертикаль, зафиксируется под собственным весом.

Допустимая равномерно распределённая нагрузка на ложе - не более 160 кг, на спинную секцию - не более 50 кг, на подлокотники - не более 15 кг, на упор для ног - в разложенном состоянии 190 кг, в сложенном состоянии нагрузка не предусмотрена.

Масса изделия $37 \text{ кг} \pm 3 \text{ кг}$.

Изделие поставляется в собранном виде.

3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стальные профильные трубы, фанера, пенополиуретан, спанбонд, кожа искусственная Skaden. Возможные варианты цветов: бежевый 1044, голубой 5154, бирюза 6100.

Материалы соответствуют требованиям биологической безопасности.

4. МАРКИРОВКА

На каждом изделии должен быть прикреплен бумажный ярлык, на котором содержится:

- наименование, юридический адрес и товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и вариант исполнения изделия;
- артикул и характеристика изделия;
- заводской номер;
- дата производства;
- гарантийный срок;
- срок службы;
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;
- обозначение настоящих технических условий;
- символ «температурный диапазон»;
- символ «диапазон влажности»;
- знак соответствия (при наличии);
- товарный знак (при наличии).

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

- кресло поставляется в собранном виде, готовом к использованию.
- очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в 3% растворе перекиси водорода с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства или 1% раствором монохлорамина ХБ. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- изделия должны храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях;
- использовать изделия строго по назначению.

7. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

изделия не предназначены для применения вне помещений.

Эксплуатировать при температуре +10 - +35°C

8. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

не превышать допустимых нагрузок на изделие и его элементы.

9. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

побочных действий при применении нет.

10. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ ВЛИЯНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ

нет данных.

11. СТЕРИЛЬНОСТЬ

нестерильно.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ

- техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий с периодичностью полгода и проверку надёжности резьбовых соединений; В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.
- ремонт производится изготовителем в период гарантийного срока в случае выявления дефектов производственного характера.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

14. ТРАНСПОРТИРОВКА и ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, по условиям хранения 2(С) по

ГОСТ 15150 но при температурах от минус 20 до плюс 40 °С, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.

Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 С и относительной влажности до 80%. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Перед длительным хранением металлические поверхности частей изделия без лакокрасочных покрытий обезжирить и законсервировать по ГОСТ 9.014 для условий хранения ВЗ-0, ВУ-4 для условий хранения по группе ОЖО4 по ГОСТ 15150. Предельный срок защиты без переконсервации-5 лет.

15. УТИЛИЗАЦИЯ

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790, как отходы класса А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



7. Гарантийные обязательства.

- 7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.
- 7.2. На механические повреждения мягких элементов кресел, полученные в процессе эксплуатации (порезы, царапины, потёртости, пятна от воздействия агрессивных химических веществ) данная гарантия не распространяется.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи.
- 7.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с подписью продавца, печатью торгующей организации или настоящий паспорт и товарно-транспортную накладную.
- 7.5. Гарантийное обслуживание производится по адресу:
г. Москва, ул. Электrozаводская д.29 стр 2, офис 407Г инд:107076, тел (495) 642-86-62, (495) 988-76-60 email: service@med-engineering.ru

8. Свидетельство о приемке

Мебель медицинская по ТУ 32.50.50-002-18732063-2017: Кресло-каталка гериатрическое «ККГ-01», № _____ изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических условий ТУ 32.50.50-002-18732063-2017 и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

дата производства

Изготовлено в России ООО «ХИТЭК-ГРУП»
107076, г. Москва, ул. Электrozаводская, дом 29, стр.2
Телефон: +7 (495) 995-99-59
www.med-engineering.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ХИТЭК-ГРУП»


И. Г. Зайцев

«14» августа 2018г



ПАСПОРТ

Мебель медицинская по ТУ 32.50.50-002-18732063-2017
Кресло-каталка гериатрическое «ККГ-01»

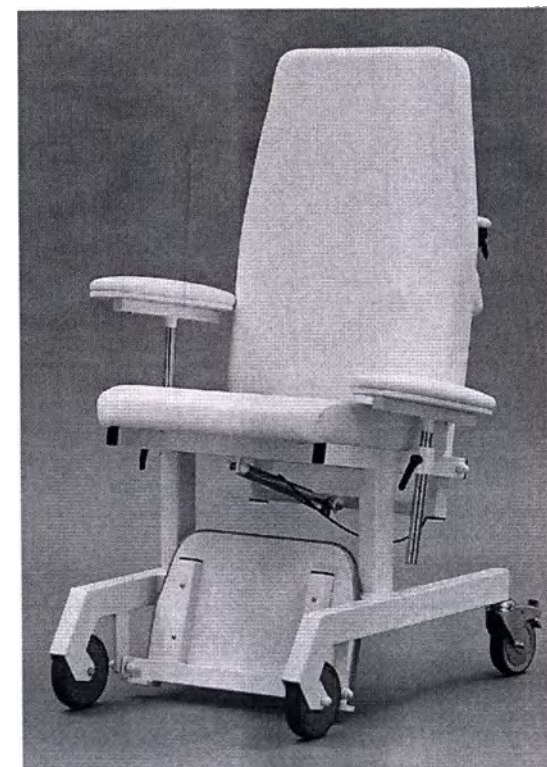

Арт. ККГ-01

Мебель медицинская по ТУ 32.50.50-002-18732063-2017
Кресло-каталка гериатрическое ККГ-01

1. Назначение, показания и противопоказания к применению

Мебель медицинская по ТУ 32.50.50-002-18732063-2017: Кресло-каталка гериатрическое ККГ-01 (далее – изделие) предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов, а также для перемещения пациентов в учреждениях здравоохранения, реабилитационных центрах, домах престарелых. Изделие используется для оснащения кабинетов, в том числе косметологических и массажных, палат и лабораторий клиник, больниц и лечебно-профилактических учреждений.
Противопоказаний нет.

2. Описание

- 2.1 Кресло изготовлено в соответствии с требованиями ТУ 32.50.50-002-18732063-2017, ГОСТ Р 50444.
- 2.2 Кресло состоит из основания с мягким элементом на 4-х колесных опорах (задние колёса поворотные и имеют фиксаторы (стопоры) диаметр 125 мм; передние диаметром 150мм), откидного упора для ног, съёмных подлокотников с бесступенчатой регулировкой высоты и съёмной подушки на спинной секции.
- 2.3 Рама кресла изготовлена из стальных профильных труб с нанесением защитного антикоррозионного покрытия.
- 2.4 Мягкие элементы обтянуты искусственной кожей. Основание мягкого элемента выполнено из водостойкой фанеры, на которую уложен слой пенополиуретана толщиной 50 мм, толщина пенополиуретана на подлокотниках 40мм.
- 2.5 Угол наклона спинной секции регулируется газовой пружиной. Для изменения положения – следует нажать на рычаг регулировки пружины и выставить необходимое положение секции.
- 2.6 Упор для ног – откидной. Для того, что бы его сложить, необходимо повернуть его против часовой стрелки вокруг оси. Он, пройдя вертикаль, зафиксируется под собственным весом.
- 2.7 Кресло поставляется в собранном виде, готовом к использованию.

3. Технические характеристики

- 3.1 Габаритные размеры, мм
Кресла: высота - 1230 ± 4 , ширина 730 ± 4 , длина - 770 ± 4
Спинной секции: длина - 700 ± 4 , ширина - 520 ± 4 , высота – 70 ± 4
Сидения: длина - 460 ± 4 , ширина - 520 ± 4 , высота – 70 ± 4 , высота поверхности над уровнем пола – 605 ± 4
Подлокотник: длина - 390 ± 4 , ширина - 135 ± 4 , высота – 50 ± 4
Упор для ног: длина - 305 ± 4 , ширина - 490 ± 4 , высота – 20 ± 4
3.2 Угол наклона спинной секции от 60 до 90 градусов.

3.3 Угол поворота подлокотников 270° , высота поверхности подлокотника от пола минимальная – 590 мм, максимальная – 800мм.

3.4 Допустимая равномерно распределённая нагрузка на ложе не более 160 кг:

- на спинную секцию - 50кг

- на упор для ног – в разложенном состоянии 190кг, в сложенном состоянии нагрузка не предусмотрена

- на подлокотник - 15кг

3.5 Масса изделия $37 \text{ кг} \pm 3 \text{ кг}$.

3.6 Материалы, входящие в состав изделия: сталь, фанера, пенополиуретан, спанбонд, кожа искусственная Skaden. Возможные варианты цветов: бежевый 1044, голубой 5154, бирюза 6100

3.7 Срок службы изделия – не менее 6 лет.

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- изделие в собранном виде - 1 шт.

- паспорт - 1 шт.

- гарантийный талон – 1шт.

5. Правила эксплуатации и меры безопасности.

5.1 Использовать изделие только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок.

5.2 Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой, смоченными в 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства или 1% раствором монохлорамина ХБ. Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей.

5.3 Изделие не предназначено для эксплуатации вне помещения.

5.4 Изделия при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов, соответствующих климатическому исполнению УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

5.5 Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр (раз в полгода) целостности покрытий и проверку надежности резьбовых соединений. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их ключом.

6. Хранение и транспортировка

6.1 Транспортирование изделия осуществляется в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом (в крытых транспортных средствах) в порядке, установленном действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:

-упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°C до $+40^\circ\text{C}$.

6.2 Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых отапливаемых и вентилируемых помещениях при соблюдении следующих требований:

- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от $+5^\circ\text{C}$ до $+40^\circ\text{C}$. - относительная влажность при температуре окружающей среды $+25^\circ\text{C}$ не более 80%.

- отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.