

Трости металлические опорные и тактильные по ГОСТ Р 51632-2014

Варианты исполнения	Артикул	Вес, шт/кг	Длина, мм
Трость металлическая тактильная	14(527)Т	0,2	1100
Трость металлическая тактильная с ручкой типа «Клюка»	14(527)ТК	0,2	1100

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Трости металлические опорные и тактильные по ГОСТ Р 51632-2014

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

Дата выпуска
ОТК
Партия

На наконечник гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2,
кабинет 2В

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2
стр. 3.

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

info@aversus.ru www.aversus.ru

Руководство по эксплуатации

Трость металлическая тактильная предназначена для передвижения и ориентирования на местности людей с патологией зрения. Трости облегчают получение информации об окружении и позволяют незрячим и слабовидящим людям самостоятельно оценивать свое местонахождение и ориентироваться в пространстве. Трость металлическая тактильная предназначена для применения в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях, в быту.

Показания к применению: Медицинские показания для использования тактильных тростей: стойкие нарушения зрительных функций единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень славовидения: острота зрения 0,05 - 0,1 или/и концентрическое сужение поля зрения до 20°) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0 - 0,04 или/и концентрическое сужение поля зрения до 10°).

Относительные медицинские противопоказания для использования тактильных тростей: выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей.

Побочных действий при эксплуатации не выявлено.

Не допустимо пользоваться тростью с износившимся наконечником.

Транспортировать трости следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования от плюс 40 до минус 40 °С при влажности не более 100% при температуре 25 °С.

По окончании эксплуатации или срока хранения трости утилизируются как общебытовые отходы. Металлические и пластиковые части тростей пригодны для вторичной переработки. Хранить трости в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +5°С, не выше +40°С, относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения не более 3 лет. Срок службы не менее 2 лет. Условия эксплуатации от плюс 40 до минус 40 °С при влажности не более 100% при температуре 25 °С.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Перед применением для уточнения индивидуальных рекомендаций при использовании проконсультируйтесь с врачом.

Трости тактильные, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113): раствором 3 % перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос».

Техническое обслуживание (ремонт) включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности соединения наконечника.

Наименование частей:

1. Веревка ручки трости (300x5) – (1 шт.)
2. Ручка трости (Ø14 тактильная) – (1 шт.)
3. Средняя секция (Ø14) – (1 шт.)
4. Наконечник трости (Ø14) – (1 шт.)
5. Заглушка трости внутренняя (Ø14) – (1 шт.)
6. Средняя секция (Ø14 «клюка») – (1 шт.)

арт.14(527)Т арт.14(527)ТК

№ детали	Наименование детали	Материал
1	Веревка ручки трости (300x5)	Полиэфир марки DTY 150D/48F, производства фирмы "Sun-King Knitted Belt Product Ltd" (Китай)
2	Ручка трости (Ø14 тактильная)	Полипропилен марки PP H030 GP (ТУ 2211-001-76332549- 2012) с красителем марки "Суперконцентрат Черный 525" (ТУ 2243-001-79683189-2015)
3	Средняя секция (Ø14)	Алюминий марки АД31Т1 (ГОСТ 4784) с покрытием полиэфирной краской марки П-ПЛ-1010 С (ТУ 2329-002-21707421-2004) или Алюминий марки АД31Т1 (ГОСТ 4784) с покрытием методом анодное окисление (ГОСТ 9.305-84)
4	Наконечник трости (Ø14)	Полипропилен марки PP H030 GP (ТУ 2211-001-76332549- 2012) с красителем марки "Суперконцентрат Черный 525" (ТУ 2243-001-79683189-2015)
5	Закрутка трости внутренняя (Ø14)	Полипропилен марки PP H030 GP (ТУ 2211-001-76332549- 2012) с красителем марки "Суперконцентрат Черный 525" (ТУ 2243-001-79683189-2015)
6	Средняя секция (Ø14 «клюка»)	Алюминий марки АД31Т1 (ГОСТ 4784) с покрытием полиэфирной краской марки П-ПЛ-1010 С (ТУ 2329-002-21707421-2004) или Алюминий марки АД31Т1 (ГОСТ 4784) с покрытием методом анодное окисление (ГОСТ 9.305-84)

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, кабинет 2В

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2 стр. 3

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

info@aversus.ru: www.aversus.ru

Трости металлические опорные и тактильные по ГОСТ Р 51632-2014

Варианты исполнения	Артикул	Вес, шт/кг	Длина , мм	Длина в сложенном состоянии, мм
Трость металлическая тактильная складная	14(527)ТС	0,2	1100	315
Трость металлическая тактильная складная с ручкой типа «Клюка»	14(527)ТС/К	0,2	1100	315

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Трости металлические опорные и тактильные по ГОСТ Р 51632-2014

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

Дата выпуска
ОТК
Партия

На наконечник гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2
Кабинет В

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2
стр 3

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

Руководство по эксплуатации

Трость металлическая тактильная складная предназначена для передвижения и ориентирования на местности людей с патологией зрения. Трости облегчают получение информации об окружении и позволяют незрячим и слабовидящим людям самостоятельно оценивать свое местонахождение и ориентироваться в пространстве. Трость металлическая тактильная складная предназначена для применения в лечебных и лечебно-профилактических учреждениях, в быту.

Трости имеют функцию складывания, для складывания трости необходимо раздвинуть секции и сложить трость, для приведения её в рабочее положение необходимо вставить все секции друг в друга.

Показания к применению: Медицинские показания для использования тактильных складных тростей: стойкие нарушения зрительных функций единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень слабовидения: острота зрения 0,05 - 0,1 или/и концентрическое сужение поля зрения до 20°) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0 - 0,04 или/и концентрическое сужение поля зрения до 10°).

Относительные медицинские противопоказания для использования тактильных складных тростей: выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей.

Побочных действий при эксплуатации не выявлено.

Не допустимо пользоваться тростью с износившимся наконечником.

Транспортировать трости следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Условия транспортирования от плюс 40 до минус 40 °С при влажности не более 100% при температуре 25 °С.


По окончании эксплуатации или срока хранения трости утилизируются как общебытовые отходы. Металлические и пластиковые части тростей пригодны для вторичной переработки. Хранить трости в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +5°С, не выше +40°С, относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения не более 3 лет. Срок службы не менее 2 лет. Условия эксплуатации от плюс 40 до минус 40 °С при влажности не более 100% при температуре 25 °С.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Перед применением для уточнения индивидуальных рекомендаций при использовании проконсультируйтесь с врачом.

Трости тактильные складные, в случае необходимости, дезинфицируют растворами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113): раствором 3 % перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос»

Техническое обслуживание (ремонт) включает в себя периодический осмотр целостности покрытий и проверку надежности соединения наконечника и секций трости тактильной складной.

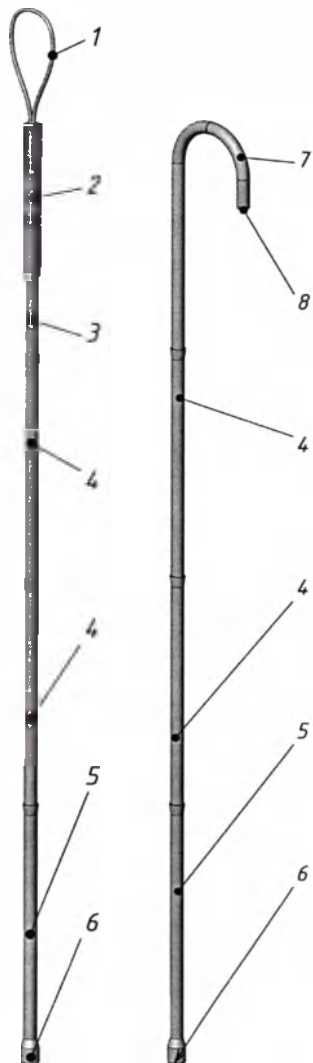

Наименование частей:

1. Веревка ручки трости (300x5) – (1 шт.)
2. Ручка трости (Ø14 тактильная) – (1 шт.)
3. Верхняя секция (Ø14) – (1 шт.)
4. Средняя секция (Ø14) – (2 шт.)
5. Нижняя секция (Ø14) – (1 шт.)
6. Наконечник трости (Ø14) – (1 шт.)
7. Верхняя секция (Ø14 «клюка») – (1 шт.)
8. Заглушка трости внутренняя (Ø14) – (1 шт.)

№ детали	Наименование детали	Материал
1	Веревка ручки трости (300x5)	Полиэфир марки DTY 150D/48F, производства фирмы "Sun-King Knitted Belt Product Ltd" (Китай)
2	Ручка трости (Ф14 тактильная)	Полипропилен марки PP H030 GP (ТУ 2211-001-76332549- 2012) с красителем марки "Суперконцентрат Черный 525" (ТУ 2243-001-79683189-2015)
3	Верхняя секция (Ø14)	Алюминий марки АД31Т1 (ГОСТ 4784) с покрытием полиэфирной краской марки П-ПЛ-1010 С (ТУ 2329-002-21707421-2004) или Алюминий марки АД31Т1 (ГОСТ 4784) с покрытием методом анодное окисление (ГОСТ 9.305-84)
4	Средняя секция (Ø14)	Алюминий марки АД31Т1 (ГОСТ 4784) с покрытием полиэфирной краской марки П-ПЛ-1010 С (ТУ 2329-002-21707421-2004) или Алюминий марки АД31Т1 (ГОСТ 4784) с покрытием методом анодное окисление (ГОСТ 9.305-84)
5	Нижняя секция (Ø14)	Алюминий марки АД31Т1 (ГОСТ 4784) с покрытием полиэфирной краской марки П-ПЛ-1010 С (ТУ 2329-002-21707421-2004) или Алюминий марки АД31Т1 (ГОСТ 4784) с покрытием методом анодное окисление (ГОСТ 9.305-84)
6	Наконечник трости (Ø14)	Полипропилен марки PP H030 GP (ТУ 2211-001-76332549- 2012) с красителем марки "Суперконцентрат Черный 525" (ТУ 2243-001-79683189-2015)
7	Верхняя секция (Ø14 «клюка»)	Алюминий марки АД31Т1 (ГОСТ 4784) с покрытием полиэфирной краской марки П-ПЛ-1010 С (ТУ 2329-002-21707421-2004) или Алюминий марки АД31Т1 (ГОСТ 4784) с покрытием методом анодное окисление (ГОСТ 9.305-84)
8	Закрутка трости внутренняя (Ø14)	Полипропилен марки PP H030 GP (ТУ 2211-001-76332549- 2012) с красителем марки "Суперконцентрат Черный 525" (ТУ 2243-001-79683189-2015)

Изготовитель: ООО «Аверсус»

Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, кабинет «В»

Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2 стр 3

тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83

info@aversus.ru; www.aversus.ru

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью

на 4 листах

Генеральный
директор
ООО «Аверсус»

С.Н. Савельев

