

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ЭсСиЭй Хайgiene Продактс Раша»

Сокоренко Т.Г.

«25» марта 2010 г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ **по применению изделия медицинского назначения**

Подгузники воздухопроницаемые («дышащие») для больных, страдающих недержанием

TENA Slip Super: small, medium, large и TENA Slip Plus: small, medium, large

Производства: «SCA Hygiene Products Genneer B.V.», Нидерланды

НАЗНАЧЕНИЕ.

Подгузники воздухопроницаемые («дышащие») для больных, страдающих недержанием ТЕНА – универсальный тип подгузников, предназначены как для лежачих, так и для сохраняющих подвижность пациентов со средней и тяжелой степенью недержания мочи.

1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА.

- Двойной впитывающий слой целлюлозно-волоконной основы с абсорбирующим полимером.
- Специальный трансфер слой (инновационная технология FeelDry™) с системой воронок-клапанов и оптимальное использование суперабсорбента обеспечивает высокую скорость впитывания и сухость.
- Тщательно выверенное расположение впитывающей прокладки внутри подгузника позволяет получить максимальную впитываемость влаги в рабочей зоне.
- Суперабсорбент и распушенная целлюлоза позволяют влаге равномерно распределяться внутри подгузника, не скапливаясь в одном месте.
- Внутренняя поверхность подгузника, соприкасающаяся с кожей, остается сухой на протяжении всего периода использования.
- Высокие влагонепроницаемые барьерчики по бокам предотвращают подтекание мочи и фекалий в покое и при движении.
- Наличие 3-х мягких изогнутых эластичных резинок в зоне анатомических выемок обеспечивают более плотное прилегание в области промежности.
- Анатомические выемки в области промежности обеспечивают максимальный комфорт.
- Многоразовые расширенные застёжки-липучки.

- Эластичные боковинки подгузника обеспечивают плотное прилегание и защищают от подтекания при нахождении пациента в горизонтальном положении.
- Общая площадь подгузника минимальна с тем, чтобы не покрывать "лишние" участки кожи, максимально освобождать наружную часть бедра, обеспечивая тем самым лучшую аэрацию.
- Анатомическая форма подгузников адаптирована под любые конституционные особенности, не зависимо от пола, возраста, комплекции.
- Хорошо заметный индикатор (3 желтые полосы на внешней поверхности подгузника), окрашивающийся в синий цвет при необходимости замены подгузника.
- Система нейтрализации запаха (Odour neutralizer) надежно нейтрализует запах посредством абсорбирующих гранул с низким уровнем pH, уменьшающих действие бактерий, вызывающих появление запаха.
- Наружный слой состоит из материалов, пропускающих воздух.
- Изготовлен из экологически чистых материалов в соответствии с требованиями ЕЕС.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказаний не выявлено.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Необходимо проверить срок годности изделия и целостность упаковки.


4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Раскрыть полиэтиленовую упаковку, надеть надеть подгузник, зафиксировать застежками – липучками многоразового крепления. Пояс возможно закреплять как на поясице, так и на передней брюшной стенке.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Рекомендуется хранить в прохладном месте, при комнатной температуре. Срок годности 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Генеральный директор _____

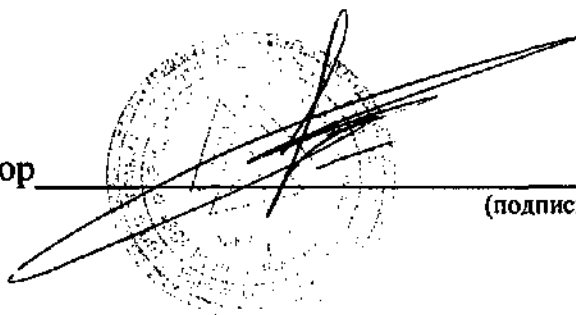

(подпись)

Соколенко Т.Г.