


«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель организации-заявителя
Соколенко Т.Г.
«1» февраля 2008 г.
М.п.

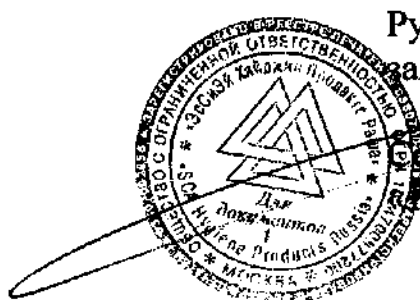

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Подгузники для страдающих недержанием
«TENA Pants Plus small, mediul, large»

(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Поясной дышащий подгузник ТЕНА Пентс– универсальный тип подгузника, предназначен как для лежачих, так и для сохраняющих подвижность пациентов со средней и тяжелой степенью недержания мочи. Изготовлены по принципу обычных трусов, из гипоаллергенного материала, похожего на мягкую ткань

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- «дышащий» материал обеспечивает особый комфорт для кожи пациента и исключает развитие «парникового» эффекта;
- мягкий, пропускающий воздух пояс упрощает процедуру замены подгузника;
- благодаря гофрированной резинке на поясе, подгузник плотно прилегает к телу и тем самым препятствует протеканию ;
- двойные барьеры по бокам подгузника обеспечивают дополнительную защиту от протекания;
- индикатор жидкости, расположенный на передней поверхности подгузника, окрашивается в синий цвет. Это указывает на необходимость замены подгузника.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказаний не выявлено.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Необходимо проверить срок годности изделия и целостность упаковки.


5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Раскрыть полиэтиленовую упаковку, надеть подгузник как обычное нижнее белье. Чтобы снять подгузник, разорвите по боковым швам.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Рекомендуется хранить в прохладном месте, при комнатной температуре. Срок годности 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Координатор по сертификации

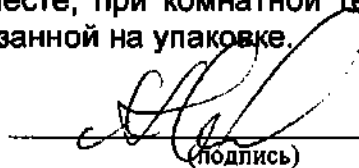

(подпись)

Тюлюпин М.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель
организации-
заявителя
Соколенко Т.Г.
1 февраля 2008 г.
М.п.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению «ТЕНА Слип Супер смол, медиум, ланж (TENA Slip Super small, medium, large)»; ТЕНА Слип Плюс смол, медиум, ланж (TENA Slip Plus small, medium, large)

(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Подгузники Тена Слип предназначены для гигиенического ухода за больными, страдающими различными формами недержания мочи и/или кала – от средней до очень тяжелой.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Twin core-DRY soft technology – технология двойного впитывающего слоя для максимальной защиты от протеканий и сохранения кожи сухой.
- Изогнутые резиночки вокруг ног – плотно облегают и обеспечивают еще больший комфорт и защиту от протеканий.
- Уникальная зона для застежек SuperFit – позволяет фиксировать из столько раз, сколько необходимо.
- Цветовой код Easy-Select – облегчает выбор продукции нужной степени впитываемости.
- Индикатор наполнения – помогает точно определить время, когда подгузник нужно заменить
- Эластичный пояс FlexFit – для плотного и комфортного облегания тела.
- Вертикальные барьерчики - для максимальной защиты от протекания.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказаний не выявлено.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Необходимо проверить срок годности изделия и целостность упаковки.


5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Раскрыть полиэтиленовую упаковку, надеть надеть подгузник, зафиксировать застежками – липучками многоразового крепления. Пояс возможно закреплять как на поясице, так и на передней брюшной стенке.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Рекомендуется хранить в прохладном месте, при комнатной температуре. Срок годности 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Координатор по сертификации

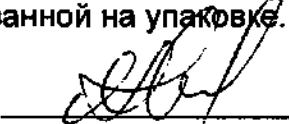
(подпись)

Тюлюпин М.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель организации
Заместитель
Сокорнико Т.Г.
11 февраля 2008 г.
М.п.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению ТЕНА Флекс Плюс медиум, ланж (TENA Flex Plus medium, large); ТЕНА Флекс Супер медиум, ланж (TENA Flex Super medium, large)
(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Поясной дышащий подгузник ТЕНА Флекс – универсальный тип подгузника, предназначен как для лежачих, так и для сохраняющих подвижность пациентов со средней и тяжелой степенью недержания мочи.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- «дышащий» материал обеспечивает особый комфорт для кожи пациента и исключает развитие «парникового» эффекта;
- мягкий, пропускающий воздух пояс упрощает процедуру замены подгузника;
- благодаря гофрированной резинке на поясе, подгузник плотно прилегает к телу и тем самым препятствует протеканию;
- двойные барьеры по бокам подгузника обеспечивают дополнительную защиту от протекания;
- индикатор жидкости, расположенный на передней поверхности подгузника, окрашивается в синий цвет. Это указывает на необходимость замены подгузника.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказаний не выявлено.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Необходимо проверить срок годности изделия и целостность упаковки.


5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Раскрыть полиэтиленовую упаковку, надеть подгузник, зафиксировать застежками – липучками многоразового крепления. Пояс возможно закреплять как на поясице, так и на передней брюшной стенке.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Рекомендуется хранить в прохладном месте, при комнатной температуре. Срок годности 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Координатор по сертификации

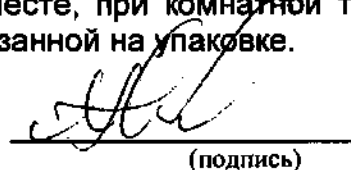
(подпись) Тюлюпин М.В.