



ЗАО "ПРОМСИНТЕКС"
ЗАО " PROMSINTEX "

**ПОЯС ЭЛАСТИЧНЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ,
СОГРЕВАЮЩИЙ**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оренбург 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

	Введение	3
1	Описание, основные свойства и характеристики	4
2	Назначение	5
3	Рекомендации по уходу	5
4	Транспортирование и хранение	6
5	Гарантии изготовителя	6

ВВЕДЕНИЕ

1 Настоящее руководство по эксплуатации является документом, удостоверяющим основные параметры и технические характеристики пояса эластичного согревающего, компрессионного (далее – пояс).

2 Настоящее руководство по эксплуатации позволяет ознакомиться с основными характеристиками и свойствами пояса и устанавливает правила его эксплуатации и рекомендации по уходу, соблюдение которых обеспечивает сохранение основных лечебно-профилактических свойств пояса.

3 Пояс изготовлен на предприятии ЗАО «ПРОМСИНТЕКС», 460052 г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1, тел./факс: (3532) 36-15-38; 36-04-82; тел.: (3532) 36-12-20; 36-69-38, e-mail: promsintex@mail.ru и соответствует требованиям ТУ 9398-019-46745403-2009 «Изделия эластичные компрессионные, согревающие».

4 В конструкцию модели пояса могут быть внесены изменения, не ухудшающие его технические характеристики и лечебно-профилактические свойства.

5 Благодарим за приобретение нашего изделия. Перед его использованием, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство.

1 ОПИСАНИЕ, ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Пояс представляет собой разъемное контурное изделие с контактными застёжками типа «велькро», на пластмассовых ребрах жёсткости.

1.2 Пояс изготовлен из искусственного трикотажного меха с ворсом из шерстяных волокон.

1.2.1 В состав ворса искусственного трикотажного меха входят шерстяные волокна лучших сортов натуральной овечьей шерсти ценных пород овец, выращиваемых в особенных климатических условиях Австралии и Новой Зеландии.

1.2.2 Уникальным свойством овечьей шерсти является содержание в ней ланолина (шерстный жир), который обладает противовоспалительными, противоотечными и противоаллергическими свойствами. Ланолин, растворяясь при температуре человеческого тела, легко проникает через кожу и благотворно действует на мышцы, суставы, позвоночник, дыхательную систему, стимулирует кровообращение и способствует снятию мускульного напряжения. Другим уникальным свойством овечьей шерсти является свойство поглощать влагу, равную 33 % её собственного веса, и свободно её рассеивать. В обмен на поглощение влаги шерсть выделяет тепло, улучшая тем самым циркуляцию крови.

1.3 Искусственный трикотажный мех, используемый для изготовления пояса, содержит эластановую нить в грунте, за счет чего пояс обладает компрессионно-поддерживающим эффектом и относится к 1-му классу компрессии по ГОСТ Р 51219.

1.4 Технические характеристики пояса

Наименование показателя	Значение
1 Поверхностная плотность, г/м ² , не менее	550,0
2 Разрывная нагрузка до и после стирки, кгс, не менее	15,0
3 Растяжимость (по длине) до и после стирки, %, не менее	120,0
4 Изменение линейных размеров (усадка) после первой стирки, %, не более	20,0
5 Остаточная деформация до и после стирки, %, не более	10,0

1.5 Пояс устойчив к санитарно-гигиенической обработке по ГОСТ Р 51219 (стиркам в воде температурой до 30°C с добавлением моющих средств для шерстяных изделий) и выдерживает не менее 5-ти стирок.

1.6 Пояс в транспортной упаковке устойчив к воздействию климатических факторов для группы условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

1.7 Пояс нетоксичен, не оказывает местнораздражающего или аллергического воздействия при непосредственном контакте с неповрежденной кожей человека.

1.8 В процессе эксплуатации и хранения пояс не выделяет вредных веществ и не оказывает вредное воздействие на организм человека и окружающую среду.

1.9 Пояс невзрывоопасен и несамовозгораем.

1.10 Комплектация изделия:

1.10.1 В комплект поставки пояса входит:

- Изделие (пояс) одного исполнения, одного артикула, одного размера – 1 шт.
- Навесной товарный ярлык – 1 шт.
- Инструкция по применению изделия – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

2 НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Пояс предназначен для прогрева сухим теплом, защиты от воздействия холода и сквозняков, поддержки пояснично-крестцового отдела позвоночника, за счет мягкой фиксации, в состоянии покоя.

2.2. Пояс применяется в лечебно-профилактических целях при остеохондрозе, профилактике обострения радикулита, ревматизме, невралгиях различного происхождения, миозитах, ишиалгии, люмбаго, при хроническом заболевании почек, в период посттравматического восстановления суставов позвоночника, в целях усиления эффекта после массажа, лечебной физкультуры, мануальной терапии.

2.2 Пояс может быть использован в клинических, поликлинических условиях и в быту.

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

2.1 Пояс из натуральной овечьей шерсти очень практичен в использовании и не требует особого ухода.

2.2 В процессе эксплуатации пояса советуем воспользоваться следующими рекомендациями по уходу:

■ ХИМЧИСТКА

Химчистка – наиболее эффективный способ ухода за шерстяными изделиями. Современные технологии позволяют качественно привести пояс из натуральной овечьей шерсти в соответствующий вид и максимально сохранить потребительские свойства изделия.

■ СУХАЯ ЧИСТКА (Проветривание)

Рекомендуется встряхнуть пояс на свежем воздухе. Можно оставить пояс на 2-3 часа на свежем воздухе, после чего достаточно почистить его щеткой с жесткой щетиной или пылесосом.

■ СТИРКА

Допускается ручная или щадящая машинная стирка и полоскание (без смены температурного режима) при температуре не более 30°C. Обязательно использо-

вать только моющие средства для шерстяных изделий.

При стирке изделий из натуральной овечьей шерсти не следует:

- применять отбеливатели;
- замачивать;
- сушить в центрифуге;
- выкручивать при отжиме;
- сушить на солнце;
- гладить;
- использовать холодную воду;
- менять температурный режим.

В процессе эксплуатации пояса допускается:

- усадка изделия на 2-3 см;
- естественная деформация шерстяного ворса за счет взаимодействия с телом, что не влияет на полезные потребительские свойства изделия.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Хранить пояс следует в индивидуальной картонной упаковке в сухих помещениях, на расстоянии не менее 1м от действующих отопительных и обогревательных приборов.

4.2 Транспортирование пояса должно производиться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и обеспечивать его сохранность от загрязнений, защиту от атмосферных осадков и механических повреждений.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества пояса требованиям настоящего «Руководства по эксплуатации» при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок годности пояса – не менее 3-х лет с даты изготовления.

ЗАО «ПРОМСИНТЕКС»
460052 г. Оренбург Шарлыкское шоссе, 1
Тел./факс: (3532) 36-15-38; 36-04-82
Тел.: (3532) 36-12-20; 36-69-38
E-mail: promsintex@mail.ru

скреплено печатью, 6 (Шесть)
листов.

Генеральный директор
ООО «Цирми»

З.П. Худалеев

