

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»

Акопян К.А.

«07» ноября 2011 г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

Впитывающие простыни (пелёнки) для людей, страдающих недержанием «TENA Bed Underpad Normal», «TENA Bed Underpad Plus», «TENA Basic Bed Underpad».

Производства: «SCA Hygiene Products Sp. z o.o.», Польша

НАЗНАЧЕНИЕ.

Впитывающие простыни (пеленки) ТЕНА предназначены для защиты постели, сиденья от промокания, для манипуляций различной степени сложности и длительности, для проведения процедур, в качестве подкладного материала. Применяется в период подбора необходимого по размеру и впитываемости подгузника.

1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА.

- быстро впитывают;
- подходят для дня и ночи;
- не имеют систему крепления к постельному белью, однако материал наружной поверхности, полученный из полиэтиленовой пленки, не скользит на постельном белье;
- состоят из гипоаллергенного нетканого мягкого верхнего слоя, затем нескольких слоев распушенной целлюлозы, и непромокаемый нижний слой.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказаний не выявлено.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Необходимо проверить срок годности изделия и целостность упаковки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

- 1) Раскрыть упаковку, развернуть простынь.
- 2) Расположите простынь так, чтобы верхний слой соприкасался с пациентом, а нижний полиэтиленовый слой не скользил по постельному белью.
- 3) Использованную простынь следует утилизировать в соответствии с общими рекомендациями.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Рекомендуется хранить в прохладном месте при комнатной температуре. Срок годности 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Генеральный директор _____

Акопян К.А.

(подпись)

TENA

Bed

Underpad | 60 x 60 cm
Normal

x5

Упаковка: 5 упаковок по 1 шт. каждая. В упаковке 5 упаковок по 1 шт. каждая. В упаковке 5 упаковок по 1 шт. каждая.

SCA Hygiene Products AB, Box 1600, SE-201 21, Sweden. Tel: +46 (0)8 733 8000. Fax: +46 (0)8 733 8001. Email: tena@tena.se

SCA Hygiene Products Inc., 2001 Sunnyside Blvd., Box 1600, St. Louis, MO 63103, USA. Tel: +1 (314) 291-1000. Fax: +1 (314) 291-1001. Email: tena@tena.com

SCA Hygiene Products Ltd., 2001 Sunnyside Blvd., Box 1600, St. Louis, MO 63103, USA. Tel: +1 (314) 291-1000. Fax: +1 (314) 291-1001. Email: tena@tena.com

SCA Hygiene Products AB, Box 1600, SE-201 21, Sweden. Tel: +46 (0)8 733 8000. Fax: +46 (0)8 733 8001. Email: tena@tena.se

SCA Hygiene Products Inc., 2001 Sunnyside Blvd., Box 1600, St. Louis, MO 63103, USA. Tel: +1 (314) 291-1000. Fax: +1 (314) 291-1001. Email: tena@tena.com

SCA Hygiene Products Ltd., 2001 Sunnyside Blvd., Box 1600, St. Louis, MO 63103, USA. Tel: +1 (314) 291-1000. Fax: +1 (314) 291-1001. Email: tena@tena.com

SCA Hygiene Products Ltd., 2001 Sunnyside Blvd., Box 1600, St. Louis, MO 63103, USA. Tel: +1 (314) 291-1000. Fax: +1 (314) 291-1001. Email: tena@tena.com

