

РЭ-ЮВІм



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор УК
ООО «ЭЙЛИТОН» -
ООО «ЮНИМЕД-МЕНЕДЖМЕНТ»

А.Н.Шибанов

16 апреля 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению микропробирки с антикоагулянтом, лопаткой и крышкой
для капиллярной крови «ЮНИВЕТ-Ім»

Регистрационное удостоверение №

НАЗНАЧЕНИЕ. Микропробирка с антикоагулянтом, лопаткой и крышкой «ЮНИВЕТ-Ім» представляет собой систему для взятия капиллярной крови с целью проведения исследований на гематологических анализаторах. В качестве антикоагулянта используется K_2EDTA , согласно рекомендациям Международного Совета по стандартизации в гематологии [1]. «ЮНИВЕТ-Ім» – изделие однократного применения; класс потенциального риска 2а.

УСТРОЙСТВО «ЮНИВЕТ-Ім». Микропробирка «ЮНИВЕТ-Ім» состоит из корпуса 1 (рис. 1) с лопаткой 2 и крышки 3.

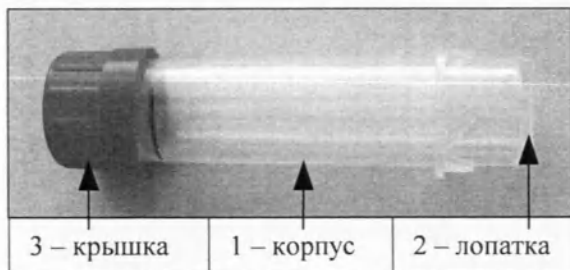


Рис. 1.

ПРИНЦИП МЕТОДА.

После прокола кожи пациента капиллярную кровь собирают в микропробирку при помощи лопатки. На дно пробирки нанесен антикоагулянт K_2EDTA . Антикоагулянт связывает ионы кальция и, тем самым, препятствует процессу свертывания крови. Количество нанесенного антикоагулянта таково, что в объеме взятой крови достигается оптимальная концентрация 10,2 – 17,0 ммоль/л.