

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Ковидиен Евразия»


М.Л. Бокова
2012 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Иглы медицинские Monoject, Magellan, Goldenberg Snarecoil с принадлежностями

ПРИМЕНЕНИЕ ИГЛЫ (Биопсия костного мозга обычно проводится после операции аспирации.) Это устройство предназначено для общего применения при выполнении биопсии/аспирации костного мозга.

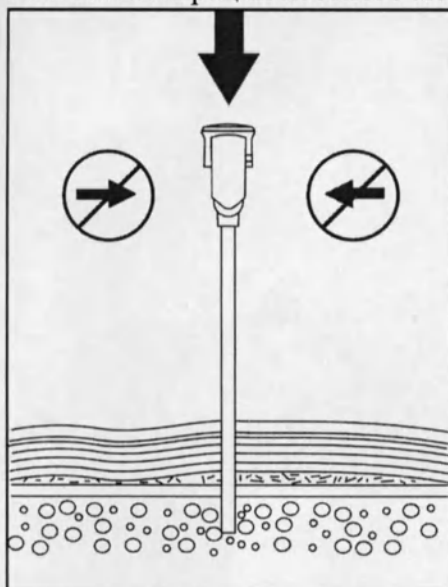

1. Введите блок биопсийной иглы через кожу до контакта с костью.
2. Надавливая на устройство, вращайте его попеременно по/против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАДАВЛИВАТЬ ПОД УГЛОМ. ОБЕСПЕЧЬТЕ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НАЖИМ. (См. рисунок)

3. Снижение сопротивления свидетельствует о проникновении иглы в костномозговую полость. Поверните рукоятку стилета против часовой стрелки и извлеките его из канюли.
4. Чтобы получить соответствующий образец костного мозга, игла вводится медленным поступательным движением с одновременными поворотами по/против часовой стрелки.
5. После того, как получено необходимое количество костного мозга, проверните иглу несколько раз и осторожно извлеките, не прекращая попеременного вращения по/против часовой стрелки.
6. Извлеките образец костного мозга из канюли. Не прилагайте усилий при выдавливании биоптата через дистальный конец иглы, так как это может привести к разрушению биоптата.
7. Наложите повязку на область пункции.

Данные инструкции предназначены для врача и носят рекомендательный характер. Врач самостоятельно принимает решение о необходимости следования данным инструкциям, основываясь на собственном опыте.

ОСЛОЖНЕНИЯ:

- На данном участке выполнялась рентгенотерапия
- Кожные инфекции на данном участке
- При прочих противопоказаниях для биопсии/аспирации костного мозга

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

• ИГЛЫ ДЛЯ БИОПСИИ/АСПИРАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРОЦЕДУР ГРУДИННОЙ АСПИРАЦИИ.

- Биопсию костного мозга должен выполнять только специалист, имеющий необходимую подготовку. Перед началом работы прочтите инструкцию.
- При использовании иглы для биопсии/аспирации костного мозга с инструментами или аксессуарами других производителей, необходимо заранее проверить их совместимость.

Всего прошито
и скреплено
2 листа

