

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «МедИнформ-Инновации»



Макарова О. Е.

_____ 2012.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Тест на беременность "Клиаблу Компакт" (Clearblue Compact).

2012

Clearblue Compact простой и легко выполнимый тест на беременность, который дает четкий точный ответ **всего через 1 минуту**. Тест Clearblue Compact можно проводить за 4 дня до дня ожидаемой менструации.

1. Выполнение теста:

Если Вы проводите тест с первого дня ожидаемых месячных, Вы можете провести тест в любое время суток. Если Вы выполняете тест ранее первого дня задержки, используйте лишь утреннюю мочу.

- Когда Вы готовы выполнить тест, извлеките тест-палочку из индивидуальной упаковки и снимите синий колпачок. Сразу проведите тестирование.
- Держа тест прободоотборником вниз, поместить пробозаборник под струю мочи или в собранную пробу мочи **всего на 5 секунд**.
- Пробозаборник быстро изменит свой тест на розовый, показывая, что поступило достаточное количество мочи. Вы должны удерживать пробозаборник в моче полные 5 секунд.
- Удерживайте пробозаборник направленным вниз или положите на горизонтальную поверхность пока появится линия в окне контроля.
- Теперь, если хотите, Вы можете закрыть пробозаборник колпачком.

2. Подождите...

Голубая линия в окошке контроля указывает на то, что тест был проведен правильно и результат можно считывать. Результат появится примерно через 1 минуту.

Не считывайте результат до того, как появится эта линия.

3. Считывание результата.

Через 2 минуты Вы можете считать результат в окошке результата.



Внимание: Считывайте результат не позже, чем через 10 минут после проведения теста. После этого времени любые изменения не имеют никакого значения!