

№ от 16.11.2016
№ 43249 от 16.11.2016



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Древмасс»



Кутянина Т.С.


«16» февраля 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**«Тренажёр-массажёр медицинский «DREVMASS» по ТУ
9398-001-0195498780-2016 в вариантах исполнения»**

Модель: Массажёр «Универсальный»

Производства ООО «Древмасс», Россия

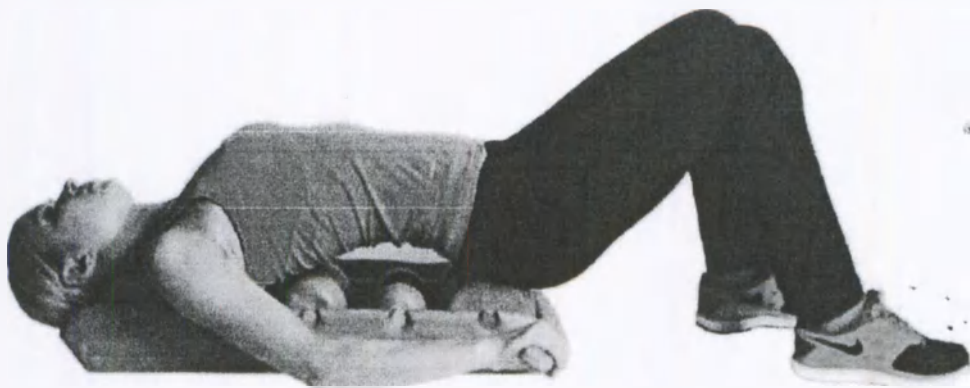

2017 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Тренажёр-массажёр медицинский «DREVMASS» по ТУ 9398-001-0195498780-2016 в вариантах исполнения»

2. ПРОИЗВОДСТВО

2.1. Разработчик

ООО «Древмасс», 603087, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 8, корп. 2, кв. 81, Тел.: 8 800-700-37-79, E-mail: drevmass@gmail.com

2.2. Производитель

ООО «Древмасс», 603087, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 8, корп. 2, кв. 81, Тел.: 8 800-700-37-79, E-mail: drevmass@gmail.com

2.3. Место производства

607680, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пос. Афоново, ул. Зеленая, д. 5.

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Тренажёр-массажёр медицинский «Drevmass» (далее тренажёр-массажёр, тренажёр, массажёр) представляет собой опорный элемент в виде двух, параллельно установленных друг против друга досок, скрепленных между собой планками, по верхней части досок попарно выполнены углубления, в которых установлены несущие оси, с размещенными на них массажными активными и вспомогательными роликами различного размера, диаметра и формы. Для удобного применения на массажёр устанавливается поперечная планка (ручка для упора). См. рис. А, Б.

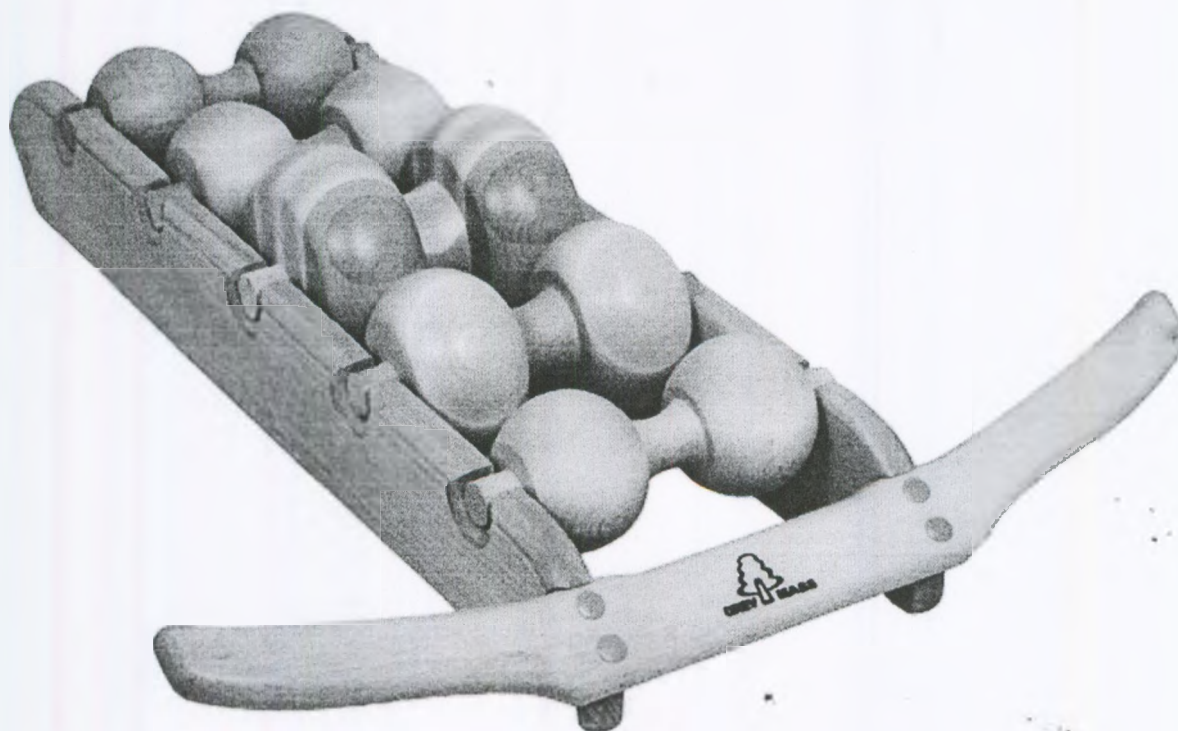


Рис. А.

Общий вид тренажёра-массажёра «DREVMASS»

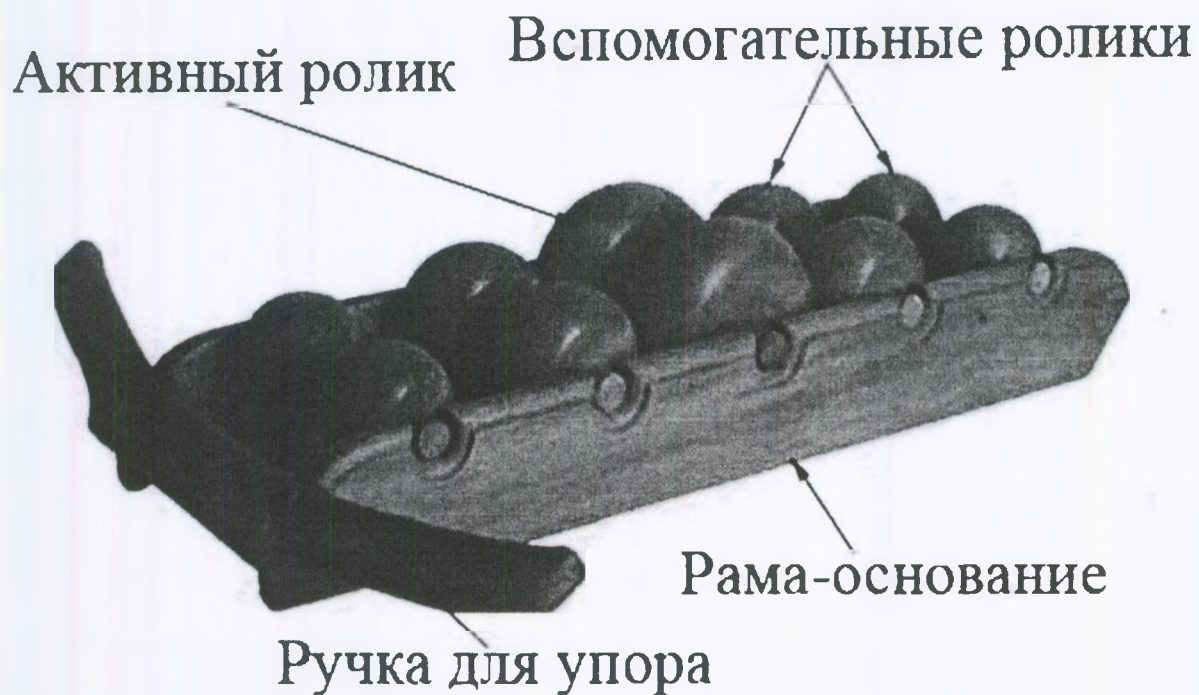


Рис. Б.

Устройство тренажёра-массажёра «DREVMASS»

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 1

№ п/п	Наименование деталей и элементов	Количество, шт
1	Массажер «Универсальный»:	1
	Варианты:	
	- Массажер 5-ти роликовый	
	- Массажер 6-ти роликовый	
	- Массажер 7-ми роликовый	
	Дополнительно по заказу:	
	- Шипованный ролик (ролик с «пирамидками»)*	1
	- Ролик средний переменный**	1
2	Паспорт изделия	1
3	Инструкция по применению	1
4	Индивидуальная упаковка	1
5	Одноэлементная стяжка (евровинт)	4
6	Ключ шестигранный Z образный для евовинтов	1
7	Мебельные заглушки	4
8	Мебельные наклейки («подпяточники»)	4

Примечание:

* - Активный ролик массажера «Универсальный» при необходимости заменяется на шипованный ролик (ролик с «пирамидками») во время массажа.

** - Вспомогательный средний ролик при необходимости заменяется на ролик средний переменный во время массажа.

Основные параметры и характеристики

Основные технические характеристики массажера приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Характеристика показателя		
	Универсальный	Ручной с шипами	Коврик с шипами
Основные размеры, мм	Должны соответствовать размерам, указанным в таблице 2.		
Масса массажера, не более, кг	10	0,2	1
Внешний вид, цвет	Внешний вид и цвет должны соответствовать техническому описанию образца-эталона, утвержденному руководителем предприятия-изготовителя по ГОСТ 15.009		

Таблица 3

№ п/п	Наименование деталей и элементов		Габариты, мм
1	Массажер «Универсальный»	Массажер 5-ти роликовый	Длина – 690-707,5 Ширина - 217 Ширина по рукоятке - 600 Высота - 150,5-158,5
		Массажер 6-ти роликовый	Длина - 885,5-900 Ширина - 217 Ширина по рукоятке – 675 Высота - 150,5-158,5
		Массажер 7-ми роликовый	Длина – 1005,5-1020 Ширина – 217 Ширина по рукоятке - 675 Высота - 150,5-158,5
	Шипованный ролик (ролик с «пирамидками»)		Длина – 125 Ширина – 205 Высота – 125
	Ролик большой (активный)		Длина – 142 Ширина – 205 Высота – 142
	Ролик средний (вспомогательный)		Длина – 100 Ширина – 205 Высота - 100
	Ролик малый (вспомогательный)		Длина – 82 Ширина – 205 Высота - 82
	Ролик средний переменный (вспомогательный)		Длина – 205 Ширина 1 – 142 Ширина 2 - 100
2	Одноэлементная стяжка (евровинт)		Длина - 48,5-50 Ø 6,7-7,0 Вес - 8,05 г., Материал – Сталь (С1006- С1008) Покрытие – цинк
3	Ключ шестигранный Z образный для евовинтов		Длина L1: 44 Длина L2: 20 Ø 4 мм

		Материал: Сталь марки С1008
4	Мебельные заглушки	Ø 15 Материал - полипропилен марки PP1300
5	Мебельные наклейки («подпятничники»)	Ø 15 Материал - войлок

Поверхность массажера должна быть чистой без загрязнений.

Поверхность массажера должна быть гладкой, без зазубрин, острых кромок и необработанных поверхностей.

Механические повреждения в виде задигов, разрывов, трещин, следов расслоения не допускаются.

Не должно быть острых выступающих концов самонарезающих винтов (шурупов) или других крепёжных деталей, с которыми может контактировать потребитель при нормальной эксплуатации или во время обслуживания потребителем.

В соответствии с ГОСТ 2789 параметры гладкости поверхностей упорных ручек и массажных роликов должны быть не более $R_z 63$ мкм.

Класс покрытий поверхности массажера должен быть не ниже IV согласно ГОСТ 9.032.

Массажные ролики должны свободно, без усилий перекатываться в полостях.

Массажер «Универсальный» в рабочем состоянии должен быть достаточно устойчивым.

Массажер должен иметь достаточную механическую прочность и быть сконструирован так, чтобы выдерживать грубое обращение с ним, которое возможно при нормальной эксплуатации.

Ручки должны быть закреплены так, чтобы они не ослаблялись при нормальной эксплуатации, если это ослабление может привести к возникновению опасности. Должна быть исключена возможность установки ручек в неправильное положение.

Покрытия поверхностей деталей массажера должны быть стойкими к воздействиям туалетного мыла, производимого по ГОСТ 28546 или по другой действующей нормативной документации. Запрещается использовать для обработки поверхности другие поверхностно-активные материалы.

Массажер должен выдерживать равномерно распределённые статические нагрузки на протяжении не менее одного часа – не менее 150 кг;

Требования к материалам и комплектующим

Для производства массажеров применяют следующие материалы и комплектующие:

- хвойные породы древесины по ГОСТ 8486 (сосна, кедр);
- твердолиственные породы древесины по ГОСТ 2695 (бук, ясень, дуб, береза);
- полимерные материалы отечественного производства по технической документации или поставляемые по импорту марки АБС 0809М.
- воск масляный для дерева «Мартьянов» производства компании ООО «Натуральные краски», Россия выпускаемый по ТУ 2318-001-10169846-2013;

- винты по ГОСТ 1144, ГОСТ 1145, ГОСТ 1147;
- ключи для шурупов отечественного производства по технической документации или поставляемые по импорту;
- мебельные заглушки, наклейки отечественного производства по технической документации или поставляемые по импорту.

Используемые материалы и комплектующие изделия должны сопровождаться документацией, удостоверяющей их качество и безопасность, и соответствовать требованиям нормативно-технической документации и нормативно-правовых актов.

5. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тренажёр-массажер медицинский «DREVMASS» используется в качестве спортивного, реабилитационного или лечебного инвентаря и предназначен для профилактики и оздоровления позвоночника, укрепления мышц спины, ягодиц, улучшения кровообращения верхних и нижних конечностей, а так же предназначен как для лечения всех спинных заболеваний, таких как остеохондроз, протрузии, межпозвоночные грыжи, спондилез, ишиас, кифоз, сколиоз, так и для их профилактики.

6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тренажёр-массажер медицинский «DREVMASS» может применяться как в клинических (реабилитационные центры, стационары), так и в бытовых условиях и предназначен для использования сертифицированными специалистами, а так же пациентами самостоятельно в домашних условиях.

Не рекомендуется применение данного медицинского изделия вне предназначенных для этого помещений.

7. ПОКАЗАНИЯ

Показаниями к применению тренажёра-массажа являются:

- сколиозы (дисплазические, идеспатические, статические)
- протрузии,
- межпозвоночные грыжи,
- спондилез,
- ишиас,
- кифоз,
- остеохондрозы,
- кифолордозы,
- грыжи Шморля 3-5 мм,
- артрозы и артриты суставных отростков тел позвонков,
- начальные формы болезни Бехтерева (анкилозирующий спондилоартроз),
- рефлекторные синдромы, в виде мышечно – тонических, вегетативно сосудистых и нейротрофических проявлений в острых и хронических стадиях течения болезни,
- люмбаго с наличием стойкой миофиксации,
- корешковые синдромы с симптомами раздражения и выпадения без сосудистого компонента.

8. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаниями к применению тренажёра-массажа являются:

- неясный диагноз;
- усиление боли после первого занятия;
- выраженные болевые синдромы с психомоторным возбуждением;
- легочная, сердечно-сосудистая, почечная или печёночная недостаточность;
- травмы позвоночника,
- лихорадочные состояния в стадии обострения;
- инфекционные заболевания;
- обострения соматических и хронических заболеваний;
- наличие злокачественных и доброкачественных образований;
- состояние декомпенсации при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, лёгких, печени, почек;
- болезни крови и кроветворных органов в стадии декомпенсации;
- беременность;
- гипертония в 3-4 стадии;
- острые воспалительные процессы, гнойные процессы любой локализации (кожа, подкожная клетчатка, лимфатические узлы, мышцы, кости): экземы, импетиго, лимфадениты, флегмоны, остеомиелиты, артриты, туберкулёз костей и суставов и пр.;
- повышенная температура, повышенное кровяное давление, вирусные инфекции;
- острые нефриты, острые гепатиты;
- тяжёлые формы гипотрофии (атрофия);
- активная форма туберкулёза лёгких;
- сифилис;
- хронический остеомиелит;
- ломкость и болезненность костей;
- большие пупочные, паховые, мошоночные грыжи со значительным выпадением органов брюшной полости или при выраженной склонности к ущемлению;
- сильные посттравматические боли (каузалгический синдром);
- боли невыясненного характера при пальпации живота;
- тошнота, рвота;
- тяжёлые психические заболевания.

9. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

При применении массажера-тренажёра могут возникнуть общие и местные реакции, такие как:

- гиперемии (покраснения) на массируемой поверхности;
- в случае хрупкости стенок кровеносных сосудов возможно появление подкожных кровоизлияний на массируемой поверхности;
- болезненность мышц и тканей после первых процедур;
- сонливость или, напротив, возбуждение после первых процедур;
- усиление деятельности выделительных систем в течение всего курса массажа и после его окончания.
- подкожные гематомы
- усиление боли после первого занятия;

При неправильном применении массажера-тренажёра может возникнуть повышение артериального давления.

10. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Массажёр «Универсальный» сочетает в себе несколько оздоровительных принципов воздействия на весь организм человека и дополняет ряд современных тренажёров и массажёров одновременно:

- эффективно воздействует на околопозвоночные зоны, ягодицы, бёдра и стопы;
- улучшает капиллярное кровообращение, состояние кожного покрова;
- тонизирует и укрепляет мышцы и связки опорно-двигательного аппарата;
- усиливает общий тонус и иммунитет организма;
- сочетает в себе возможность спортивной тренировки и целебного воздействия на организм;
- стимулирует выработку природных лекарств внутри организма в необходимых физиологических дозировках;
- компенсирует недостаток двигательной активности;
- повышает работоспособность и жизненный тонус, нормализует сон и обмен веществ, улучшает настроение;
- помогает в лечении и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем;
- устраняет половые расстройства с последующей нормализацией половых функций у мужчин и женщин;
- способствует лечению простатита и аденомы предстательной железы, устранению воспалительных явлений при лечении гинекологических заболеваний;
- сокращает время полноценного восстановления после переломов, операций, инсультов;
- купирует боли в позвоночнике, суставах и мышцах, головные боли;
- способствует нормализации гормонального баланса, обменных процессов при эндокринных заболеваниях («тучные» теряют вес, «истощённые» набирают необходимые килограммы);

Массажер «Универсальный» весьма полезен людям среднего и пожилого возраста, ведущих малоподвижный образ жизни.

11. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Поверхности изделия являются устойчивыми ко всем обычным дезинфицирующим средствам. Все части тренажёра-массажёра не стерильны.

Для очистки загрязнённых поверхностей элементов тренажёра - массажера используйте влажную ткань и или обычные очищающие спреи. Допускается применение любых дезинфицирующих средств.

При наличии стойких пятен не используйте абразивные или агрессивные средства, которые отличаются от обычных чистящих или моющих средств. Не используйте эфир, ацетон или концентрированные кислоты.

Перед началом эксплуатации, должно пройти время достаточное для высыхания изделия.

12. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед началом эксплуатации тренажёра-массажёра рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что все элементы тренажёра-массажёра надёжно скреплены и установлены на раме.

Не допускается эксплуатация тренажёра-массажёра на неровной поверхности, так как это может вызвать повреждение изделия, а так же возможность получения травмы.

Проводите занятия на тренажёре-массажёре под контролем врача или компетентного специалиста, если это необходимо.

В случае возникновения плохого самочувствия во время тренировки, следует немедленно прекратить занятие и при необходимости обратиться к врачу.

Рекомендации:

Для устранения скрипа деревянных трущихся поверхностей, в случае его возникновения в процессе эксплуатации тренажёра-массажёра, и улучшения вращения роликов, рекомендуется натереть пазы в раме-основании и оси роликов парафином или мылом.

В случае повреждения изделия или его комплектующих дальнейшая эксплуатация изделия запрещается!

13. СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЁРА-МАССАЖЁРА

Если тренажёр-массажёр применяется в лечебных и/или реабилитационных целях под контролем специалиста, то врач должен быть знаком с техникой проведения тренировок. Так же он должен быть знаком с показаниями и случаями, в которых использование тренажёра-массажёра строго противопоказано.

Массаж на тренажёре-массажёре

- Массаж является самым эффективным способом лечения без лекарств.
- Самомассаж спины снимает спазмы в мышцах и сосудах.
- Происходит растяжение (тракция) позвоночника с одновременным укреплением мышц и связок.
- Усиление кровообращения способствует заживлению микротравм позвоночника, уменьшению болей.
- Происходит улучшение работы желудка, печени, почек, кишечника и других органов.
- Способствует усилению обмена веществ для похудения.

Остеомассаж на тренажёре-массажёре


- *Остеомассаж* является отличительной особенностью самомассажа спины при помощи экотренажёра.
- Ролики создают умеренное раздражение надкостницы позвонков, мышц и связок.

- Происходит усиление кровообращения и укрепление мышечного корсета по всей длине позвоночника. Подобный эффект «набивания мозолей» используется в восточных единоборствах для увеличения выносливости и укрепления тела бойцов.

- *Остеомассаж* - является самым эффективным способом профилактики остеопороза для людей старшего возраста, потому что умеренное раздражение надкостницы препятствует уменьшению кальция в костных тканях.

Воздействие на позвоночник

- Тренируются и укрепляются мышцы позвоночника;
- Снимается нагрузка с межпозвоночных дисков, позвонков и суставов, позвоночник принимает свою анатомическую форму. Устраняются причины, а не симптомы заболевания.

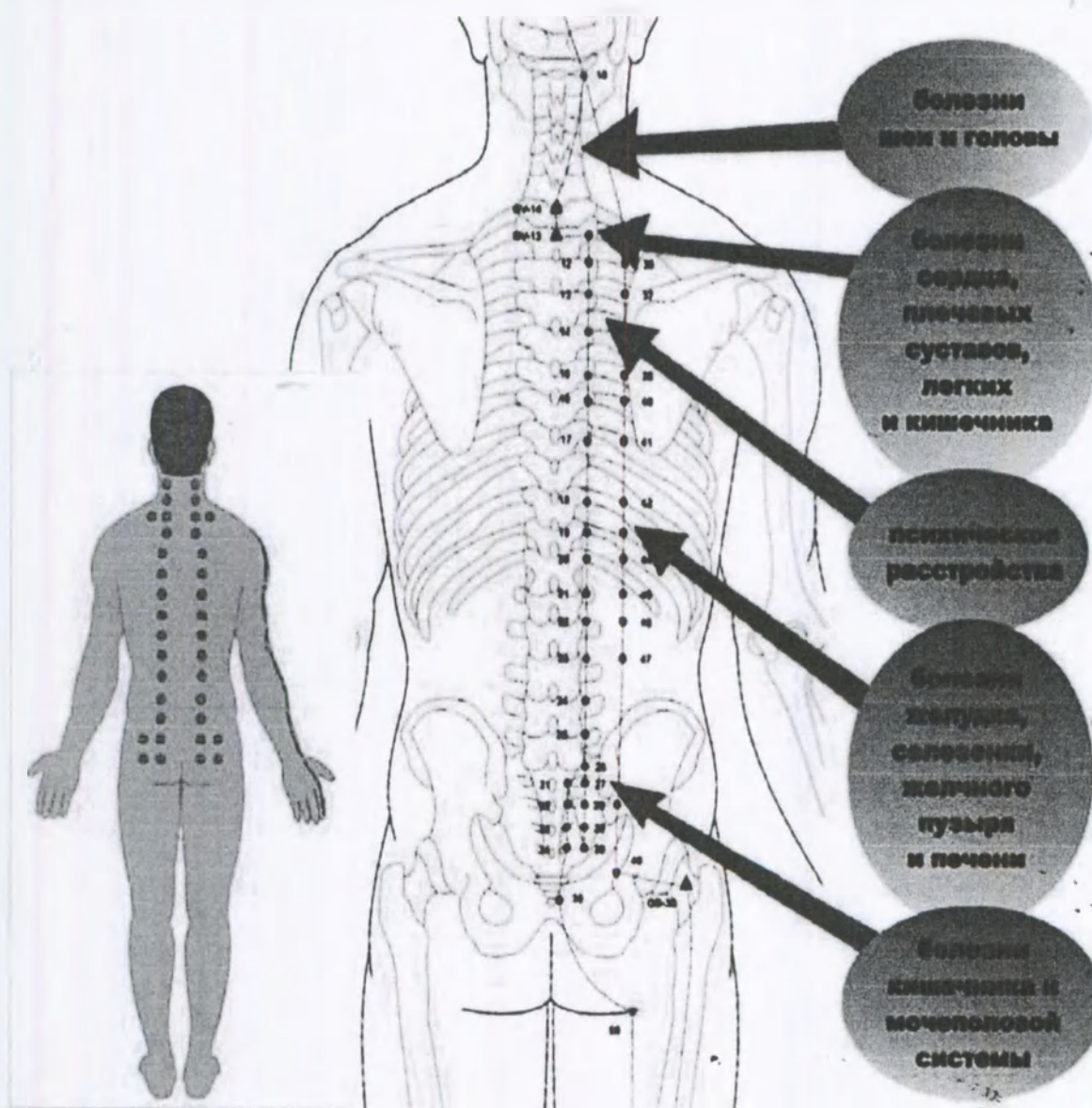

Как пользоваться тренажёром



- Основной (большой, активный) ролик становится на область необходимую для массирования
- Ролики взаимозаменяются последовательно
- Когда человек ложится спиной на ролики и плавно по ним двигается, то они активно воздействуют на мышцы спины и ягодиц, тренируют и массируют их.
- Занятия проводятся один раз в день утром или вечером. После 3-х месяцев занятий можно добавить вторую тренировку в день. Через 6 месяцев активный ролик можно переставлять в каждую ячейку.

Массаж ягодиц (седалищный нерв)



Рис. 1

1. Установить тренажёр-массажёр на твердой ровной поверхности;
2. Принять положение на тренажёре согласно рисунку 1;
3. Держась за ручку для упора, согнутыми в коленях ногами, помогаем туловищу плавно совершать короткие возвратно-поступательные движения по направлению движения активного и вспомогательных роликов. Количество повторов – 5-10 раз при первых занятиях. Довести до 30-50 повторов.

Внимание! Во время тренировки задействуется только активный (большой) ролик.

Данное упражнение улучшает кровообращение, положительно воздействует на седалищный нерв, мочеполовые органы, является профилактикой тромбозов, заболеваний нижних конечностей.

Упражнение «Антицеллюлит»



Рис. 2

1. Установить тренажёр-массажёр на твердой ровной поверхности;
2. Принять положение на тренажёре согласно рисунку 2;
3. Держась за ручку для упора, согнутыми в коленях ногами, помогаем туловищу плавно совершать короткие возвратно-поступательные движения по направлению движения активного и вспомогательных роликов. Количество повторов – 5-10 раз при первых занятиях. Довести до 15-30 повторений.

Внимание! Во время тренировки задействуются все ролики.

Данное упражнение улучшает кровообращение, положительно воздействует на седалищный нерв, мочеполовые органы, снимает усталость ног, тонизирует мышцы и кожу нижних конечностей, является профилактикой тромбозов, заболеваний нижних конечностей.

Массаж поясничного отдела позвоночника

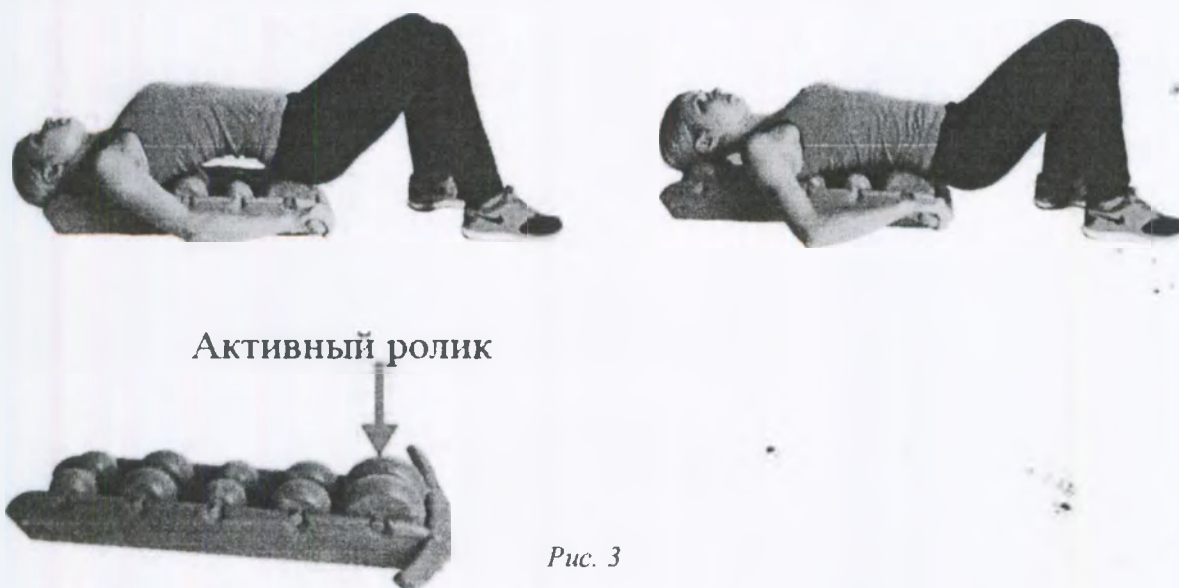


Рис. 3

1. Установить тренажёр-массажёр на твердой ровной поверхности;
2. Принять положение на тренажёре согласно рисунку 3;
3. Держась за ручку для упора, согнутыми в коленях ногами, помогаем туловищу плавно совершать короткие возвратно-поступательные движения по направлению движения активного и вспомогательных роликов. Количество повторов – 5-10 раз при первых занятиях. Довести до 15-30 повторений.

• **Внимание!** Во время тренировки задействуются все ролики. При сильном воздействии можно подложить полотенце для снижения давления роликов на массируемые участки.

Данное упражнение оказывает лечебное воздействие при заболеваниях пояснично-крестцового отдела позвоночника, улучшает кровообращение органов брюшной полости, а так же органов малого таза, положительно воздействует на седалищный нерв, мочеполовые органы, происходит глубокое воздействие на прямые мышцы спины, остистые отростки, снимается мышечное напряжение, так же упражнение является профилактикой заболеваний и патологических состояний пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Массаж грудного отдела позвоночника

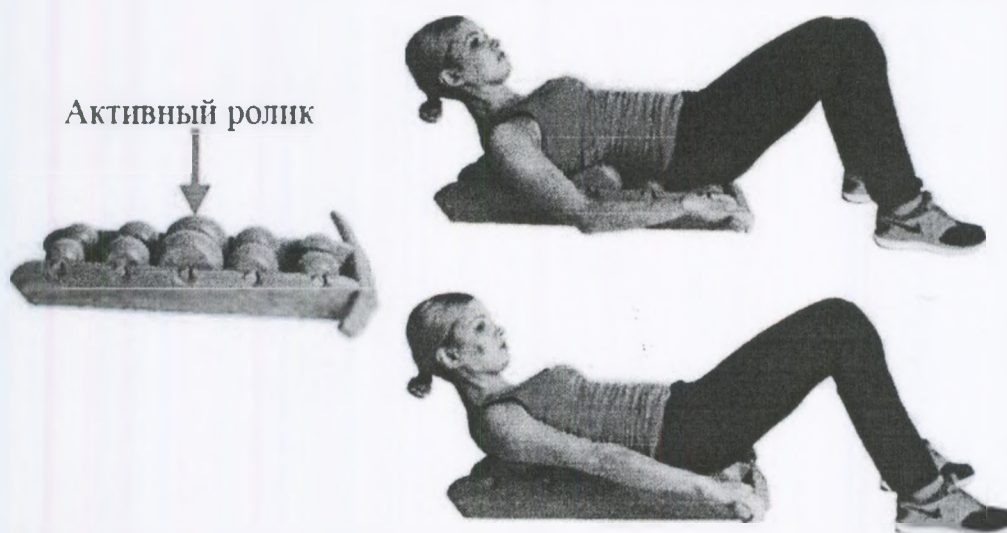


Рис. 4

1. Установить тренажёр-массажёр на твердой ровной поверхности;
2. Принять положение на тренажёре согласно рисунку 4;
3. Держась за ручку для упора, согнутыми в коленях ногами, помогаем туловищу плавно совершать короткие возвратно-поступательные движения по направлению движения активного и вспомогательных роликов. Количество повторов – 5-10 раз при первых занятиях. Довести до 15-30 повторений.

• **Внимание!** Во время тренировки задействуются все ролики. При сильном воздействии можно подложить полотенце для снижения давления роликов на массируемые участки.

Данное упражнение оказывает лечебное воздействие при заболеваниях грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника, улучшает кровообращение органов грудной, брюшной полости, а так же органов малого таза, положительно воздействует на седалищный нерв, мочеполовые органы, происходит глубокое воздействие на прямые мышцы спины, остистые отростки, снимается мышечное напряжение, так же упражнение является профилактикой

заболеваний и патологических состояний грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника.

Массаж шейного отдела позвоночника (воротниковая зона)

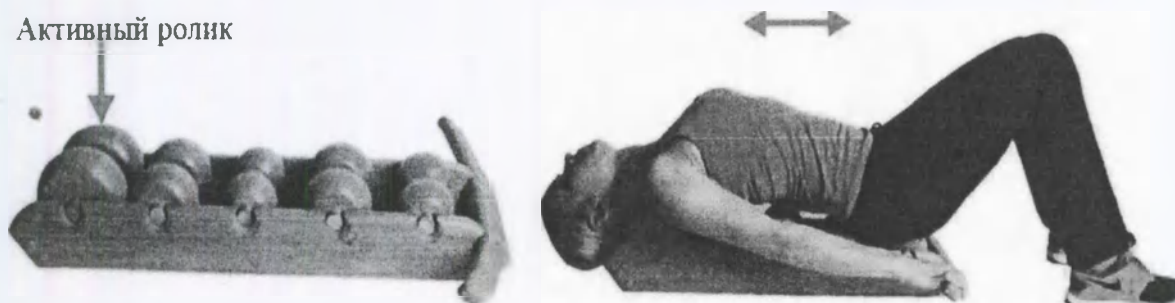


Рис. 5

1. Установить тренажёр-массажёр на твердой ровной поверхности;
2. Принять положение на тренажёре согласно рисунку 5;
3. Держась за ручку для упора, согнутыми в коленях ногами, помогаем туловищу плавно совершать короткие возвратно-поступательные движения по направлению движения активного и вспомогательных роликов. Количество повторов – 5-10 раз при первых занятиях. Довести до 15-30 повторений.

- При сильном воздействии можно подложить полотенце для снижения давления роликов на массируемые участки.

- **Внимание!** При неправильном выполнении упражнения возможно повышение артериального давления! При возникновении плохого самочувствия, следует немедленно прекратить упражнение и при необходимости обратиться к врачу.

Данное упражнение оказывает лечебное воздействие при заболеваниях шейно-грудного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, улучшает кровообращение органов грудной, брюшной полости, а так же органов малого таза, положительно воздействует на седалищный нерв, мочеполовые органы, происходит глубокое воздействие на прямые мышцы спины, остистые отростки, снимается мышечное напряжение, так же упражнение является профилактикой заболеваний и патологических состояний шейно-грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника.

Упражнение «Мостик» (шея, затылок)



Рис. 6

1. Установить тренажёр-массажёр на твердой ровной поверхности;
2. Принять положение на тренажёре согласно рисунку 6;
3. Обхватить тренажёр руками за головой, поднять таз.
4. Держась за ручку для упора, отталкиваться ногами и плавно совершать возвратно-поступательные движения по направлению движения активного и вспомогательных роликов. Количество повторов – 5-10 раз при первых занятиях. Довести до 15-30 повторов.

- Во время тренировки задействуется только активный (большой) ролик.
- При сильном воздействии можно подложить полотенце для снижения давления роликов на массируемые участки.
- **Внимание!** При неправильном выполнении упражнения возможно повышение артериального давления! При возникновении плохого самочувствия, следует немедленно прекратить упражнение и при необходимости обратиться к врачу.

Данное упражнение оказывает лечебное воздействие при заболеваниях шейного отдела позвоночника, происходит глубокое воздействие на мышцы шеи и воротниковой зоны, снимается мышечное напряжение, так же упражнение является профилактикой заболеваний и патологических состояний шейно-грудного отдела позвоночника.

Укрепление мышц живота

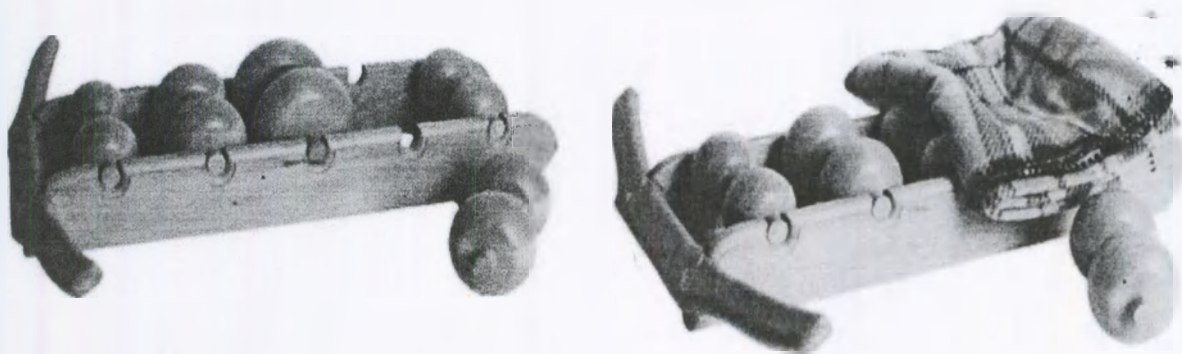


Рис. 7

Для выполнения упражнений следует использовать прокладку (коврик, полотенце, покрывало) как показано на рисунке 7.



1. Большой ролик массирует крестец, смягчает «перегиб» поясницы.
2. Упор руками за рукоятку тренажёра-массажёра облегчает выполнение упражнения для людей старшего возраста.
3. Упор руками помогает увеличить количество повторений для усиления похудения (30-60 раз).

Укрепление мышц живота

Вариант 1

Упор для ног и фиксация крестца большим роликом позволяют эффективно «закачивать пресс» в домашних условиях, без громоздких скамеек, тяжелых и неудобных металлических тренажёров (См. рисунок 8).

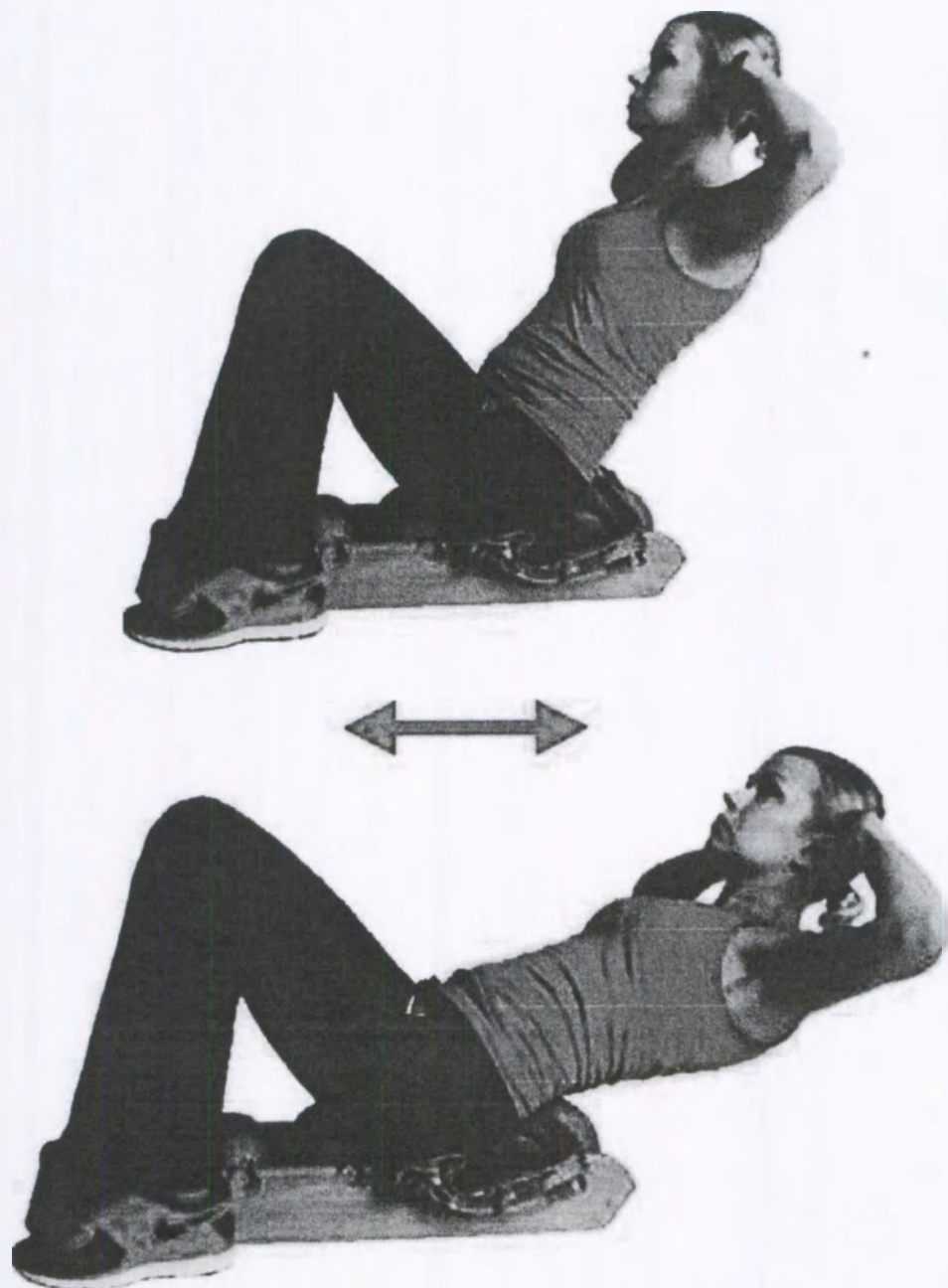


Рис. 8

- Выполнять 15 - 20 раз.
- Одновременно массируется крестцовая и поясничная области.

Вариант 2

Упор руками за рукоятку тренажёра-массажёра облегчает упражнение для людей старшего возраста.

Позволяет увеличить количество повторений для усиления эффективности похудения (См. рисунок 9).



Рис. 9

- Выполнять 20-50 раз.
- Одновременно растягивается, продавливается и массируется позвоночник.

Внимание! При занятии на тренажёре-массажёре «DREVMASS» нужно ориентироваться на личные ощущения и контроль!

Применение шипованного ролика (ролика с «пирамидками»)

Шипованный ролик (ролик с «пирамидками») применяется в составе тренажёра-массажёра «DREVMASS» вместо основного активного ролика для более глубокого акупунктурного воздействия на околопозвоночные мышцы в качестве профилактики, лечения заболеваний позвоночника и существенного улучшения кровообращения в околопозвоночных зонах.

Описание ролика с шипами (ролика с «пирамидками»)

Ролик по диаметру соответствует основному активному ролику, но в отличие от его гладкой поверхности имеет поверхность с несколькими рядами насечек в виде пирамидальных шипов. (См. рисунок 11).

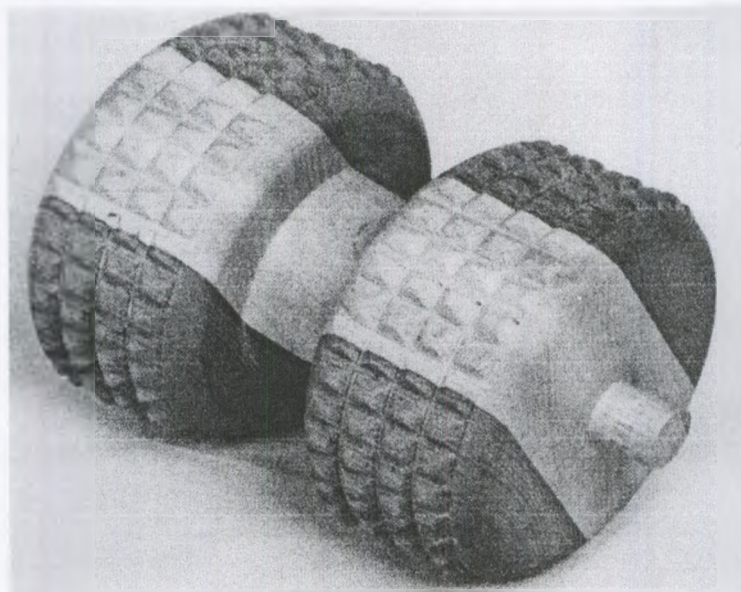


Рис. 11

Ролик подходит ко всем модификациям тренажёра-массажёра «DREVMASS», взаимозаменяем с основным активным роликом и изготовлен из цельного клееного бруса.

Порядок и правила пользования роликом с шипами

Ролик с шипами (ролик с «пирамидками») устанавливается на область необходимую для массажа (поясничный, грудной, шейный отделы)

Ролик с шипами (ролик с «пирамидками») меняется последовательно местами со вспомогательными роликами в пазах тренажёра-массажёра «DREVMASS» от поясницы к шее.

При плавном прокатывании тела пациента по ролику, шипы активно воздействуют на мышцы спины и ягодиц, и, за счёт акупунктурного принципа, происходит более глубокая тренировка и массаж.

Рекомендуется заниматься один раз в день до или после основного комплекса занятий на тренажёре-массажёре «DREVMASS» по 5-7 прокатываний на каждый отдел позвоночника.

14. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Специальный температурный режим для применения изделия не требуется. Температура в помещении должна быть комфортной для пациента и специалиста - $+10^{\circ}$ - $+35^{\circ}\text{C}$, при относительной влажности не более 90%.


15. МАРКИРОВКА

Маркировка потребительской упаковки

Маркировку, характеризующую массажер, наносят непосредственно на упаковочный материал потребительской упаковки, или на этикетку, которую наклеивают на потребительскую упаковку, или на листок-вкладыш, вкладываемый в каждую единицу потребительской упаковки.

Маркировка потребительской упаковки массажеров должна содержать следующие сведения:

- наименование массажера с указанием типоконструкции;
- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)] и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии);
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- дата изготовления (месяц и год);
- условия хранения;
- рекомендации по эксплуатации;
- гарантийный срок;
- срок службы (эксплуатации), установленный изготовителем;
- символ упаковки, не предназначенной для контакта с пищевой продукцией;
- символ возможности утилизации использованной упаковки;
- номер Регистрационного удостоверения (РУ);
- обозначение настоящих технических условий.

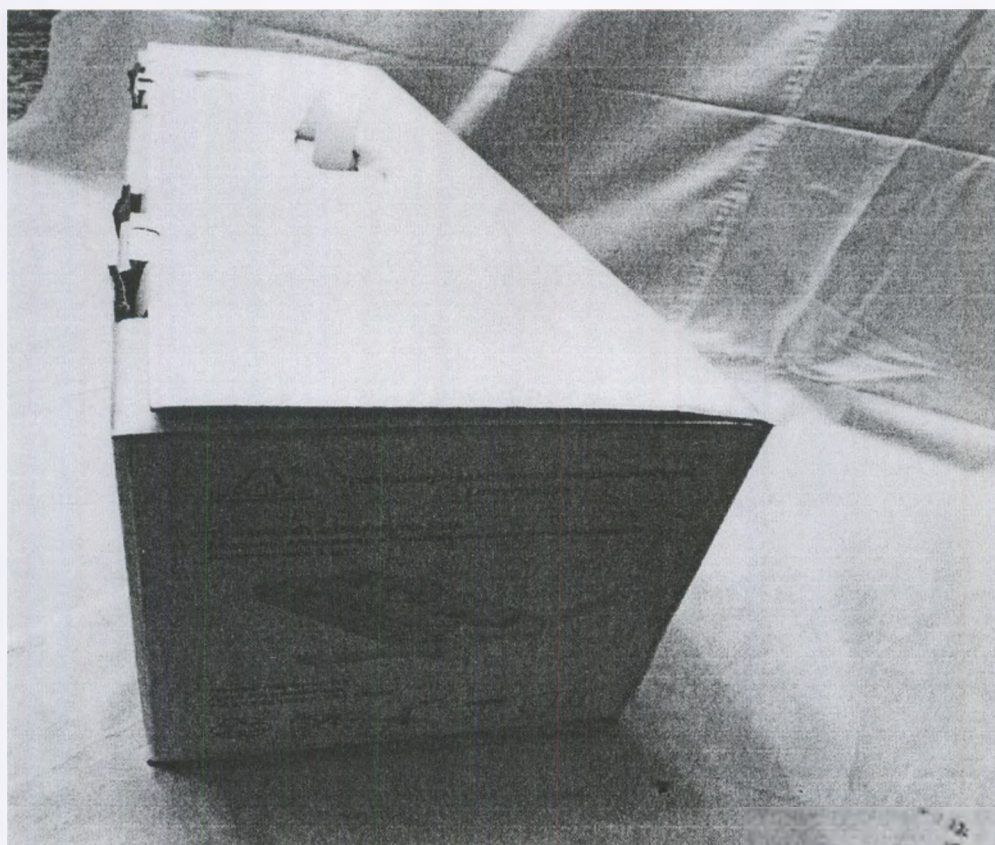

Маркировка транспортной упаковки

Транспортная маркировка массажеров должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и ГОСТ 14292 с нанесением манипуляционных знаков «Вверх» и «Осторожно», «Беречь от влаги».

Маркировка транспортной упаковки должна содержать следующие сведения:


- наименование массажера с указанием типоконструкции;
- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер партии и дата изготовления;
- условия хранения;
- количество массажеров;
- символ упаковки, не предназначенной для контакта с пищевой продукцией;
- символ возможности утилизации использованной упаковки;
- номер Регистрационного удостоверения (РУ);
- обозначение настоящих технических условий.



16. УПАКОВКА

Потребительская упаковка

Массажеры упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 с последующей упаковкой в картонные коробки (ящики) по ГОСТ 13514, ГОСТ 12301.

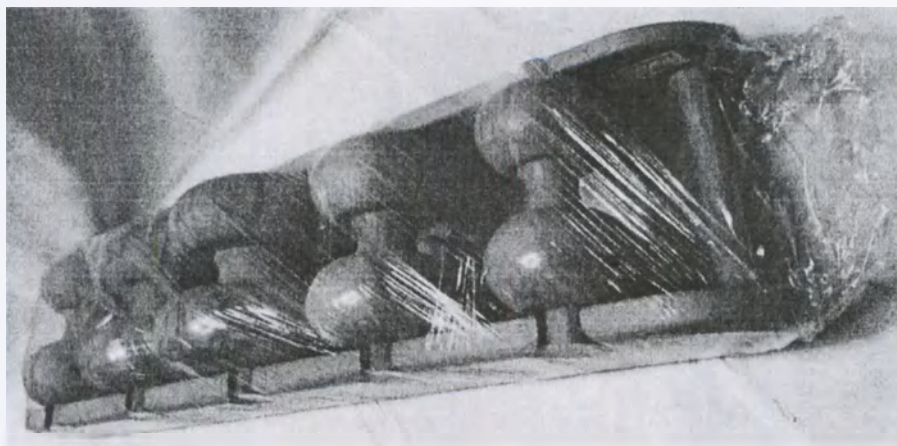

Коробки (ящики) при необходимости оклеивают полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477.

Транспортная упаковка

Потребительскую тару с массажерами упаковывают в транспортные пакеты по ГОСТ 26663.



Упаковка массажера должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011, настоящих технических условий и обеспечивать сохранность массажеров при транспортировании и хранении.

Допускается упаковывать массажеры в другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011.

17. ТРАНСПОРТИРОВКА

Тренажёры-массажеры транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительной влажности от 10% до 90% и при атмосферном давлении 500 ~ 1060 гПа.

Особых климатических условий для транспортировки и хранения не требуется.

При транспортировке необходимо беречь изделие от повреждений упаковки и механических воздействий на само изделие.

После транспортировки тренажёра-массажёра в холодное время года, рекомендуется перед применением передержать тренажёр при комнатной температуре в течение 30-60 минут и только потом приступить к использованию.

18. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Готовые изделия должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом, чистом помещении в заводской упаковке при температуре воздуха от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха не более 70% и при атмосферном давлении 500 ~ 1060 гПа.

Запрещается хранение изделий вместе с загрязняющими или токсичными химическими веществами.

Избегать прямого попадания солнечных лучей.

Избегать длительного прямого контакта с водой во избежание размокания и растрескивания дерева.

Не хранить рядом с отопительными приборами во избежание рассыхания и растрескивания дерева.

Избегать резких перепадов температур.

19. СРОК СЛУЖБЫ

Предприятие-изготовитель гарантирует срок эксплуатации изделия в течение 15-ти (пятнадцати) лет со дня ввода тренажёра-массажёра в эксплуатацию, при соблюдении всех правил эксплуатации установленных производителем.

Тренажёр-массажёр предназначен для многократного использования.

20. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ)

После использования данное изделие не может представлять собой потенциальную биологическую опасность. Поэтому переработку и утилизацию использованных изделий необходимо производить в соответствии с нормами надлежащей медицинской практики, а также применимыми законодательными и нормативными актами.

Утилизацию отходов осуществляют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 - для отходов класса А. Материалы не пригодны для переработки.

21. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует:

Отсутствие дефектов и соответствие заявленным характеристикам в течение 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении потребителем условий, указанных в инструкции по применению.

Безвозмездную замену деталей, вышедших из строя, до истечения гарантийного срока по причине производственного брака.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня ввода тренажёра-массажёра в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Претензии по качеству и комплектности продукции в период гарантийного срока предъявляются предприятию-изготовителю.

Претензии по некомплектности и дефекту изделий принимаются только от организаций или частных лиц, в адрес которых продукция поступила непосредственно от предприятия-изготовителя.

Претензии по качеству и скрытым дефектам изделия, обнаруженным в процессе эксплуатации, предъявляются частными пользователями или организациями-потребителями, в которых выявлены эти дефекты.

При предъявлении претензий гарантийный талон высылается в адрес предприятия-изготовителя или частного потребителя.

Адрес для приема рекламаций:

Адрес: 603087, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская д. 8, корп. 2, кв. 81, Тел.: 8 800-700-37-79 (звонок со всех телефонов по России - бесплатный), E-mail: drevmass@gmail.com

По всем вопросам связанным с применением данного изделия, обращаться в службу клиентской поддержки компании-производителя по телефону: 8 (800) 700-37-79 (звонок со всех телефонов по России - бесплатный), E-mail: drevmass@gmail.com.

ООО «Древмасс» обеспечивает обращение и надзор за медицинскими изделиями, принятие, рассмотрение и решение претензий клиентов относительно качества продукции компании.

Всю ответственность за выпущенную продукцию, применяемую на территории Российской Федерации, несет ООО «Древмасс».

Прочито, пронумеровано и
сверждено печатью

24 лист/а (ов)





ку откорректировано
N-73879 от 16.11.2016

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Древмасс»

Кутянина Т.С.

«26» февраля 2017 г.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Тренажёр-массажёр медицинский «DREVMASS» по ТУ 9398-001-0195498780-2016 в вариантах исполнения»

Модель: Массажер «Коврик с шипами»

Производство ООО «Древмасс», Россия

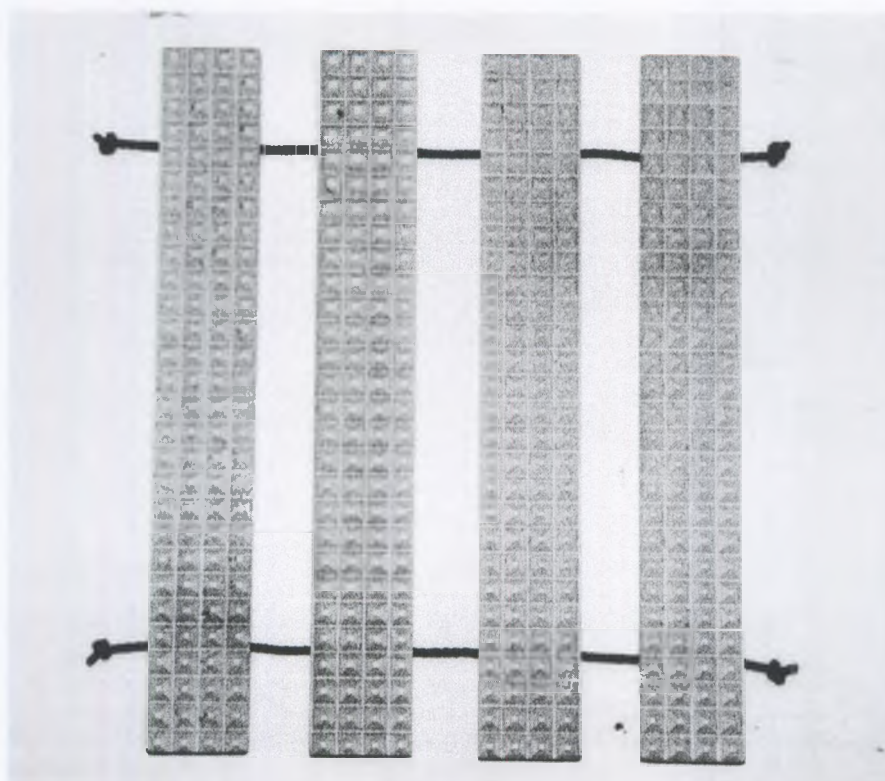

2017 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Тренажёр-массажёр медицинский «DREVMASS» по ТУ 9398-001-0195498780-2016 в вариантах исполнения».

Модель: Массажер «Коврик с шипами».

2. ПРОИЗВОДСТВО

2.1. Разработчик

ООО «Древмасс», 603087, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 8, корп. 2, кв. 81,
Тел.: 8 800-700-37-79, E-mail: drevmass@gmail.com

2.2. Производитель

ООО «Древмасс», 603087, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 8, корп. 2, кв. 81,
Тел.: 8 800-700-37-79, E-mail: drevmass@gmail.com

2.3. Место производства

607680, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пос. Афонино, ул. Зеленая, д. 5.

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Массажер медицинский «Коврик с шипами» Drevmass, далее массажёр «Коврик с шипами», состоит из 4-х деревянных планок шириной 45-50 мм и длиной 345-350 мм с несколькими рядами насечек в форме пирамидальных шипов. Конструкция соединена двумя шнурами через отверстия в планках. См. рис. А и Б.



Рис. А.

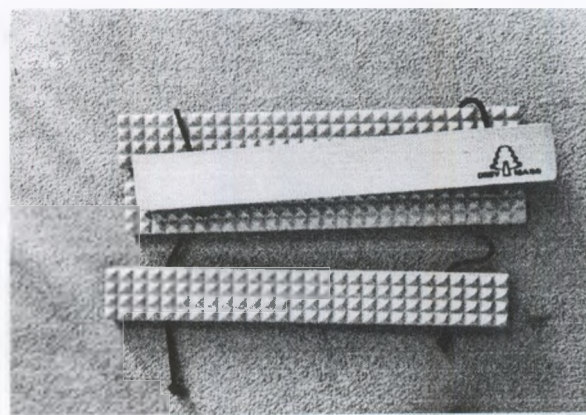


Рис. Б.

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 1

№ п/п	Наименование деталей и элементов	Количество, шт
1	Массажер «Коврик с шипами» (в составе брус с шипами («пирамидками») и шнур плетеный черный)	1
2	Паспорт изделия	1
3	Инструкция по применению	1
4	Индивидуальная упаковка	1

Основные параметры и характеристики

Основные технические характеристики массажера приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование деталей и элементов		Габариты, мм
1	Массажер «Коврик с шипами»	Брус с шипами (пирамидками)	Длина – 345-350 Ширина - 50 Толщина - 20 Толщина в сложенном состоянии – 70 мм
		Шнур плетеный черный	Длина - 375 Ø 4 мм Материал – полипропилен. Марки: 01250, TPPF79FB, TPPD30S.

Поверхность массажера должна быть чистой без загрязнений.

Поверхность массажера должна быть гладкой, без зазубрин, острых кромок и необработанных поверхностей.

Механические повреждения в виде задигов, разрывов, трещин, следов расслоения не допускаются.

Класс покрытий поверхности массажера должен быть не ниже IV согласно ГОСТ 9.032.

Массажер должен иметь достаточную механическую прочность и быть сконструирован так, чтобы выдерживать грубое обращение с ним, которое возможно при нормальной эксплуатации.

Покрытия поверхностей деталей массажера должны быть стойкими к воздействиям туалетного мыла, производимого по ГОСТ 28546 или по другой действующей нормативной документации.

Запрещается использовать для обработки поверхности другие поверхностно-активные материалы.

Массажер должен выдерживать равномерно распределённые статические нагрузки на протяжении не менее одного часа – не менее 150 кг;

Требования к материалам и комплектующим

Для производства массажеров применяют следующие материалы и комплектующие:

- хвойные породы древесины по ГОСТ 8486 (сосна, кедр);
- твердолиственные породы древесины по ГОСТ 2695 (бук, ясень, дуб, береза);
- полимерные материалы отечественного производства по технической документации или поставляемые по импорту марок 01250, TPPF79FB, TPPD30S.
- воск масляный для дерева «Мартьянов» производства компании ООО «Натуральные краски», Россия выпускаемый по ТУ 2318-001-10169846-2013;

5. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Массажер «Коврик с шипами» используется в качестве спортивного, реабилитационного или лечебного инвентаря и предназначен для профилактики и оздоровления позвоночника, укрепления мышц спины, ягодиц, улучшения кровообращения верхних и нижних конечностей, а так же предназначен как для лечения всех спинных заболеваний, таких как остеохонроз, протрузии, межпозвоночные грыжи, спондилез, ишиас, кифоз, сколиоз, так и для их профилактики.

При его использовании массаж ёр:

- улучшает кровообращение в околопозвоночных зонах, стопах, ягодицах и бедрах;
- активизирует обменные процессы;
- оказывает нормализующее влияние на нервную систему;
- снижает перенапряжение в мышцах;
- оказывает рефлекторное влияние на соответствующие органы;
- подготавливает тело к более качественным и глубоким занятиям на медицинском тренажёре-массажёре «DREVMASS» модель «Универсальный».

Основное преимущество - возможность воздействия на многочисленные точки организма одновременно. Надавливание происходит под весом тела человека.

6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Массажер «Коврик с шипами» может применяться как в клинических (реабилитационные центры, стационары), так и в бытовых условиях и предназначен для использования сертифицированными специалистами, а также пациентами самостоятельно в домашних условиях.

Применяется как в составе комплекса упражнений на медицинском тренажёре-массажёре «DREVMASS» модель «Универсальный», так и самостоятельно.

**Не рекомендуется применение данного медицинского изделия вне предназначенных для этого помещений!*

7. ПОКАЗАНИЯ

Массажер «Коврик с шипами» применяется при следующих заболеваниях и состояниях:

- сколиозы (диспластические, идиопатические, статические)
- протрузии,
- межпозвоночные грыжи,
- спондилез,
- ишиас,
- кифоз,
- остеохондрозы,
- кифолордозы,
- грыжи Шморля 3-5 мм,
- артрозы и артриты суставных отростков тел позвонков,
- начальные формы болезни Бехтерева (анкилозирующий спондилоартроз),
- рефлекторные синдромы, в виде мышечно — тонических, вегетативно сосудистых и нейротрофических проявлений в острых и хронических стадиях течения болезни,
- люмбаго с наличием стойкой миофиксации,
- корешковые синдромы с симптомами раздражения и выпадения без сосудистого компонента.

8. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаниями к применению массажера являются:

- неясный диагноз;
- усиление боли после первого занятия;
- выраженные болевые синдромы с психомоторным возбуждением;
- легочная, сердечно-сосудистая, почечная или печёночная недостаточность;
- травмы позвоночника,

- лихорадочные состояния в стадии обострения;
- инфекционные заболевания;
- обострения соматических и хронических заболеваний;
- наличие злокачественных и доброкачественных образований;
- состояние декомпенсации при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, лёгких, печени, почек;
- болезни крови и кроветворных органов в стадии декомпенсации;
- беременность;
- гипертония в 3-4 стадии;
- острые воспалительные процессы, гнойные процессы любой локализации (кожа, подкожная клетчатка, лимфатические узлы, мышцы, кости): экземы, импетиго, лимфадениты, флегмоны, остеомиелиты, артриты, туберкулёз костей и суставов и пр.;
- повышенная температура, повышенное кровяное давление, вирусные инфекции;
- острые нефриты, острые гепатиты;
- тяжёлые формы гипотрофии (атрофия);
- активная форма туберкулёза лёгких;
- сифилис;
- хронический остеомиелит;
- ломкость и болезненность костей;
- большие пупочные, паховые, мошоночные грыжи со значительным выпадением органов брюшной полости или при выраженной склонности к ущемлению;
- сильные посттравматические боли (каузалгический синдром);
- боли невыясненного характера при пальпации живота;
- тошнота, рвота;
- тяжёлые психические заболевания.

9. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

При применении массажёра могут возникнуть общие и местные реакции, такие как:

- гиперемии (покраснения) на массируемой поверхности;
- в случае хрупкости стенок кровеносных сосудов возможно появление подкожных кровоизлияний на массируемой поверхности;
- болезненность мышц и тканей после первых процедур;
- сонливость или, напротив, возбуждение после первых процедур;
- усиление деятельности выделительных систем в течение всего курса массажа и после его окончания;
- подкожные гематомы;
- усиление боли после первого занятия;

При неправильном применении массажера может возникнуть повышение артериального давления!

10. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Массажёр «Коврик с шипами» сочетает в себе несколько оздоровительных принципов воздействия на весь организм человека и дополняет ряд современных тренажёров и массажёров одновременно:

- эффективно воздействует на околопозвоночные зоны, ягодицы, бёдра и стопы;

- улучшает капиллярное кровообращение, состояние кожного покрова;
- тонизирует и укрепляет мышцы и связки опорно-двигательного аппарата;
- усиливает общий тонус и иммунитет организма;
- сочетает в себе возможность спортивной тренировки и целебного воздействия на организм;
- стимулирует выработку природных лекарств внутри организма в необходимых физиологических дозировках;
- компенсирует недостаток двигательной активности;
- повышает работоспособность и жизненный тонус, нормализует сон и обмен веществ, улучшает настроение;
- помогает в лечении и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем;
- устраняет половые расстройства с последующей нормализацией половых функций у мужчин и женщин;
- способствует лечению простатита и аденомы предстательной железы, устранению воспалительных явлений при лечении гинекологических заболеваний;
- сокращает время полноценного восстановления после переломов, операций, инсультов;
- купирует боли в позвоночнике, суставах и мышцах, головные боли;
- способствует нормализации гормонального баланса, обменных процессов при эндокринных заболеваниях («тучные» теряют вес, «истощённые» набирают необходимые килограммы);

Массажер «Коврик с шипами» весьма полезен людям среднего и пожилого возраста, ведущих малоподвижный образ жизни.

11. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Поверхности изделия являются устойчивыми ко всем обычным дезинфицирующим средствам. Все части массажёра не стерильны.

Для очистки загрязнённых поверхностей элементов массажера используйте хорошо отжатую влажную ткань, предварительно смоченную в тёплом ($t=30-40^{\circ}$) водно-мыльном растворе. Допускается добавление в раствор дезинфицирующих средств с низким содержанием хлора.

При наличии стойких пятен не используйте абразивные или агрессивные средства, которые отличаются от обычных чистящих или моющих средств. Не используйте эфир, ацетон, бензин, концентрированные кислоты, чистящие средства с содержанием хлора высокой концентрации.

Перед началом эксплуатации, должно пройти время достаточное для высыхания изделия.

12. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что все узлы веревок массажёра не развязаны, а планки свободно перемещаются.

Простота и надёжность конструкции позволяет применять массажёр как на открытом воздухе, так и в помещении.

Проводите занятия на массажёре строго по инструкции, при возможности под контролем врача или компетентного специалиста.

В случае возникновения плохого самочувствия во время тренировки, следует немедленно прекратить занятие и при необходимости обратиться к врачу.

Рекомендации:

В случае повреждения изделия или его комплектующих дальнейшая эксплуатация изделия запрещается!

13. СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЁРА-МАССАЖЁРА

Если массажёр применяется в лечебных и/или реабилитационных целях под контролем специалиста, то врач должен быть знаком с техникой проведения тренировок. Так же он должен быть знаком с показаниями и случаями, в которых использование массажёра строго противопоказано.



Массажёр выдерживает нагрузку до 200 кг.

Массаж на массажёре:

- Массаж является самым эффективным способом лечения без лекарств.
- Самомассаж спины снимает спазмы в мышцах и сосудах.
- Самомассаж стоп улучшает кровообращение. Массаж ступней успокаивает нервную систему и активизирует иммунитет.
- Усиление кровообращения способствует заживлению микротравм позвоночника, уменьшению болей.
- Происходит улучшение работы желудка, печени, почек, кишечника и других органов.
- Способствует усилению обмена веществ для похудения.

Воздействие на организм человека:

- Тренируются и укрепляются мышцы позвоночника.
- Снимаются спазмы и зажимы в области спины, ягодиц, стоп, бедер.
- Улучшается кровообращение.

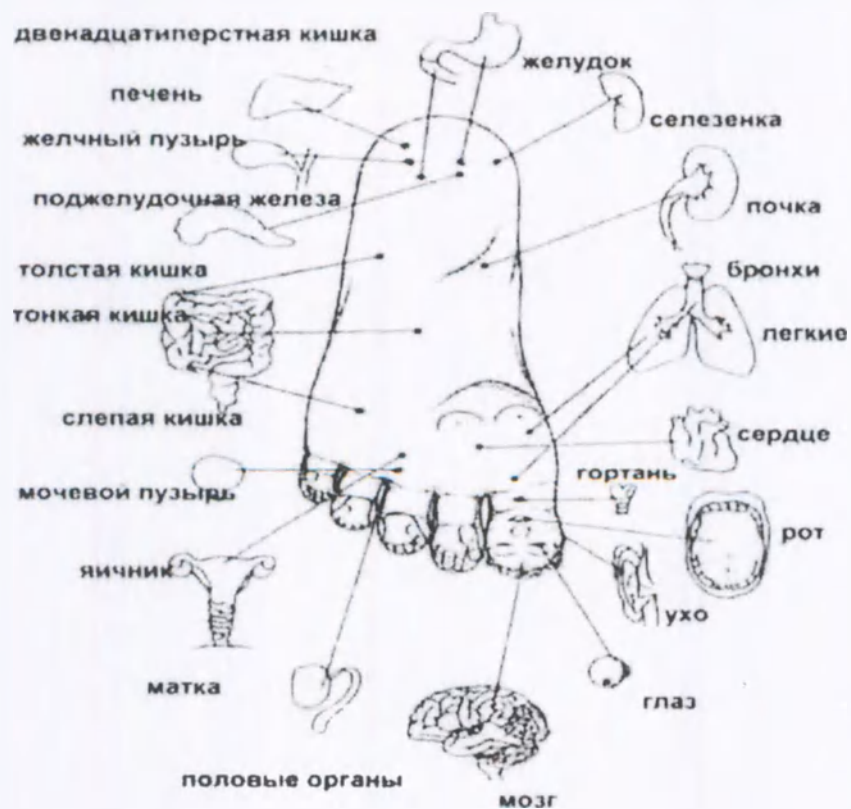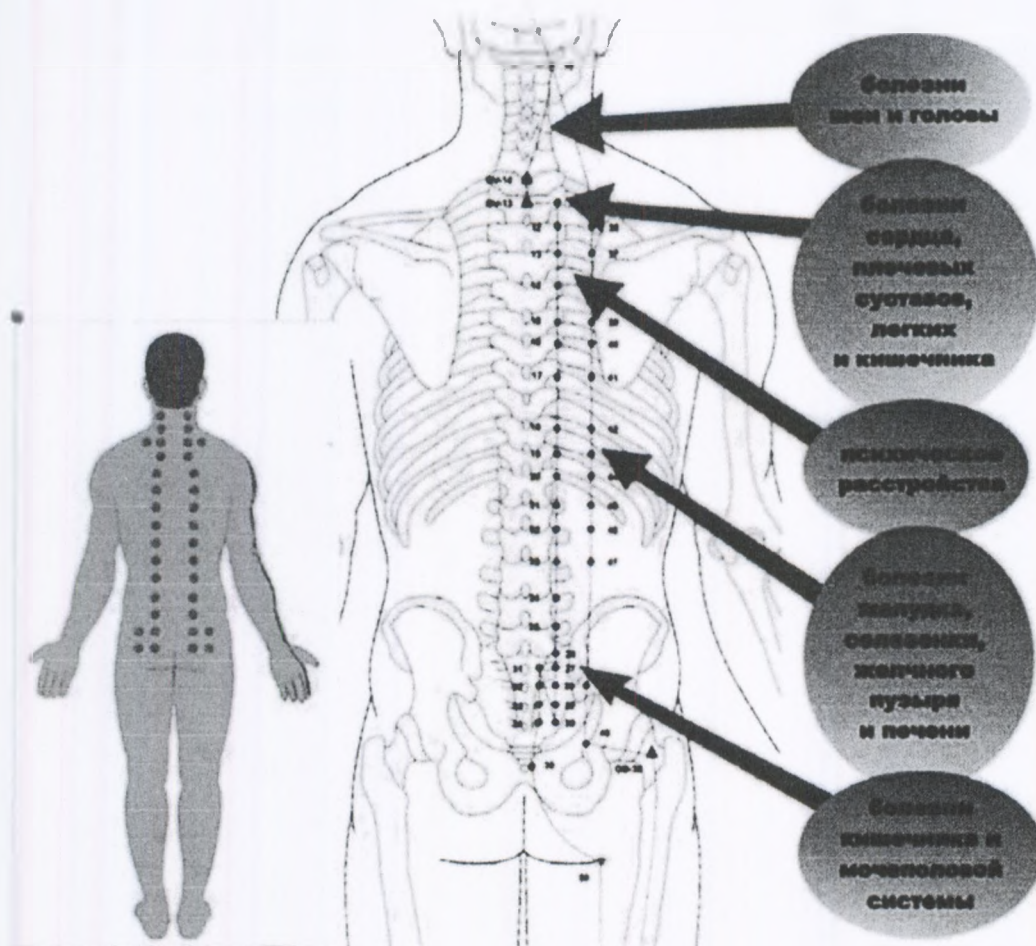

Внутренние органы в основной система соответствия стопы.

Как пользоваться массажером:

- Планки с шипами ставятся на область необходимую для массажа
- Планки раздвигаются и сдвигаются последовательно, согласно инструкции
- Когда человек лежит, стоит или сидит на планках массажера, то они активно воздействуют на мышцы спины и ягодиц, бедер, стоп массируют их и улучшают кровообращение.
- Заниматься 1 - 3 раза в день утром или вечером не более 20 минут на каждую область воздействия массажера.

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1. Самомассаж стоп.

Соединить две планки с одной стороны и с другой, раздвинуть их на длину шнуров, встать полной стопой на поверхность. Стоять на массажере полным весом в течении 5-15 минут. Допускается перенос тела вперед, назад, мелкие шаги, перенос тела с ноги на ногу – для более сильного эффекта. См. рис. А, Б, В.

Положите массажёр на твердую поверхность и установите планки, как показано на рисунке.



Встаньте на планки массажера. Стойте не двигаясь 5 минут.

Рис. А.



Переместите вес тела вперед.

Рис. Б.



Рис В. Переместите вес тела назад. Делайте поочередно перемещения веса тело вперед, назад, влево, вправо в течение 5-10 минут.

Упражнение 2. Самомассаж ягодиц и бедер.



Подложить массаж ёр под ягодицы и бедра. Сидеть на массажере до приобретения характерного тепла в ягодицах и бедрах, примерно 10-20 минут. См. рис А.

Рис. А.

Упражнение 3. Самомассаж поясницы.

Расположить планки массажера так, чтобы воздействие было только на околопозвоночные зоны, позвоночник при этом не задевается. Сесть на стул или кресло со спинкой, облокотиться на массаж ёр, воздействовать на область поясницы 15-20 минут (См. рис. А). Упражнение можно делать лежа (См. рис. Б, В, Г).



Рис. А

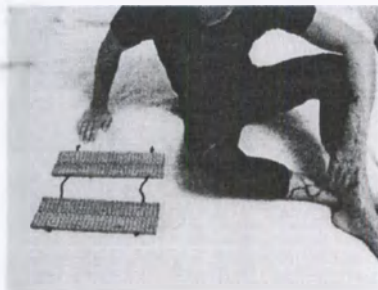


Рис. Б



Рис. В




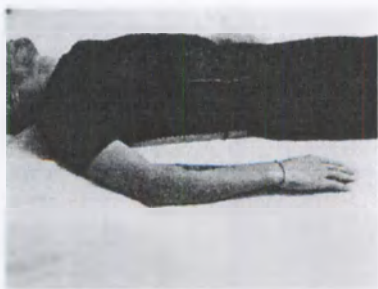


Рис. Г

Упражнение 4. Самомассаж грудного отдела и воротниковой-зоны.

Лечь на спину, расположить массаж ёр, чтобы планки не задевали позвоночник, для чего их надо равномерно раздвинуть на длину шнуров. Воздействовать на нужные области 15-20 минут. См. рис. ниже.

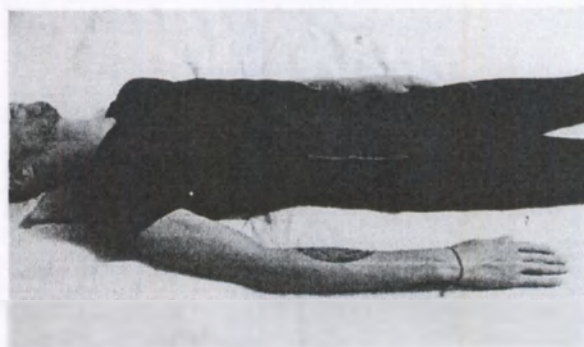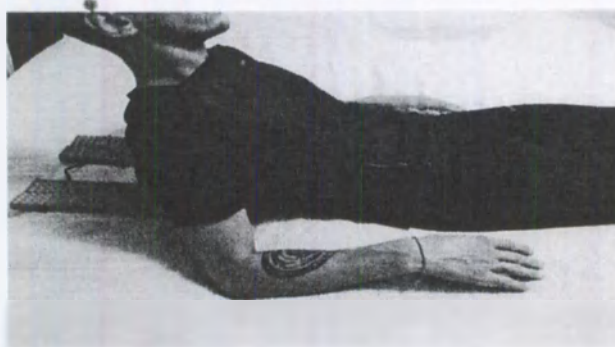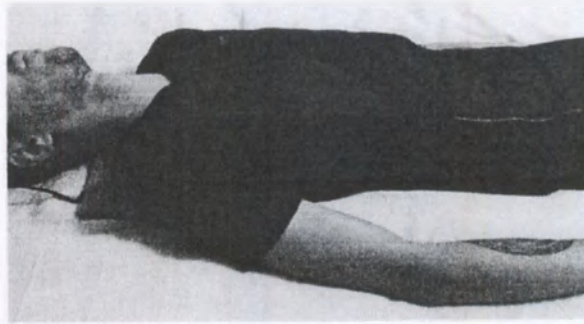

После выполнения всех упражнений на коврике рекомендуется проделать полный комплекс упражнений на тренажере-массажёре «Drevmass». Занятия желательно проводить утром, после пробуждения организма.

Внимание! При занятиях на массажёре «Коврик с шипами» нужно ориентироваться на личные ощущения и контроль!

14. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Специальный температурный режим для применения изделия не требуется. Температура в помещении должна быть комфортной для пациента и специалиста - $+10^{\circ}$ - $+35^{\circ}\text{C}$, при относительной влажности не более 90%.

15. МАРКИРОВКА


Маркировка потребительской упаковки

Маркировку, характеризующую массажёр, наносят непосредственно на упаковочный материал потребительской упаковки, или на этикетку, которую наклеивают на потребительскую упаковку, или на листок-вкладыш, вкладываемый в каждую единицу потребительской упаковки.

Маркировка потребительской упаковки массажёров должна содержать следующие сведения:

- наименование массажера с указанием типоконструкции;
- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)] и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии);
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- дата изготовления (месяц и год);
- условия хранения;
- рекомендации по эксплуатации;

- гарантийный срок;
- срок службы (эксплуатации), установленный изготовителем;
- символ упаковки, не предназначенной для контакта с пищевой продукцией;
- символ возможности утилизации использованной упаковки;
- номер Регистрационного удостоверения (РУ);
- обозначение настоящих технических условий.

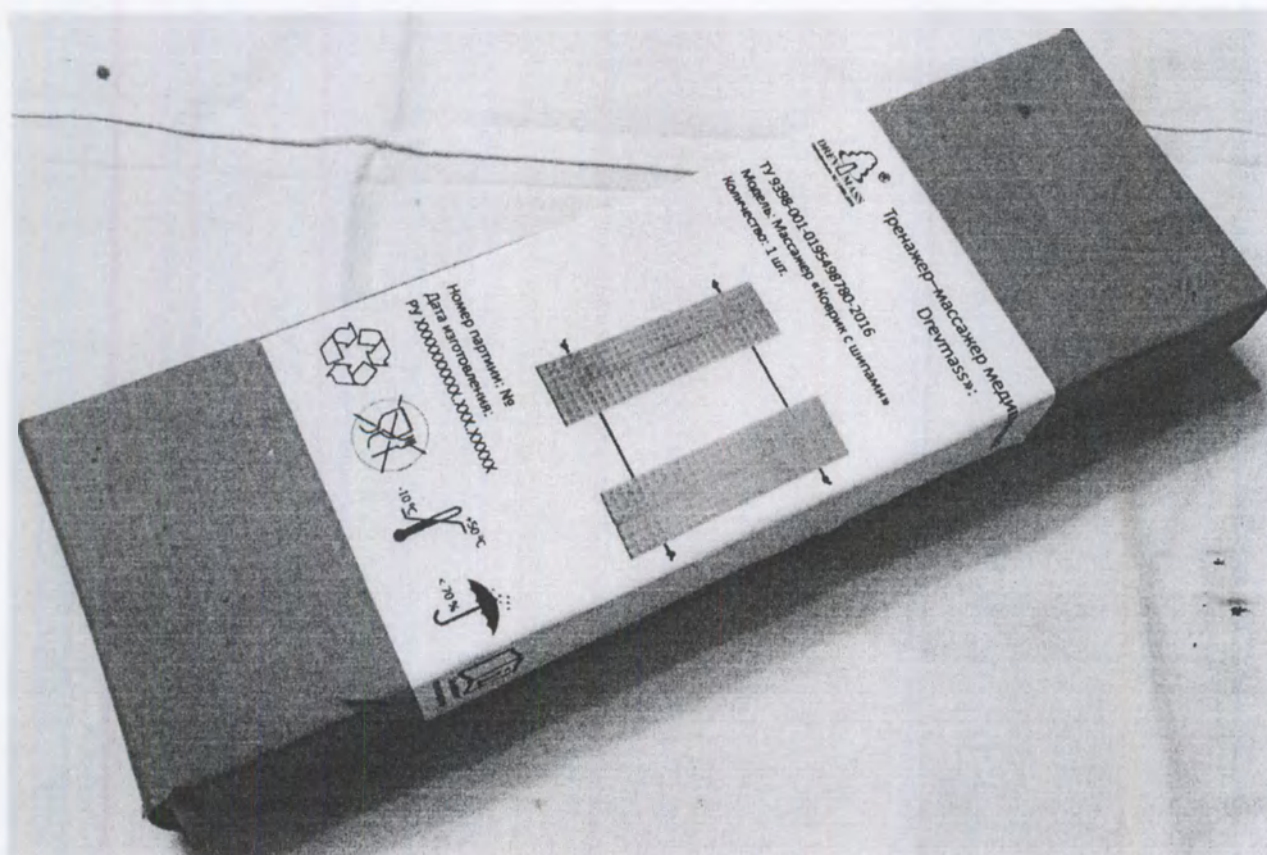


Маркировка транспортной упаковки

Транспортная маркировка массажеров должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и ГОСТ 14292 с нанесением манипуляционных знаков «Верх» и «Осторожно», «Беречь от влаги».

Маркировка транспортной упаковки должна содержать следующие сведения:


- наименование массажера с указанием типоконструкции;
- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер партии и дата изготовления;
- условия хранения;
- количество массажеров;
- символ упаковки, не предназначенной для контакта с пищевой продукцией;
- символ возможности утилизации использованной упаковки;
- номер Регистрационного удостоверения (РУ);
- обозначение настоящих технических условий.

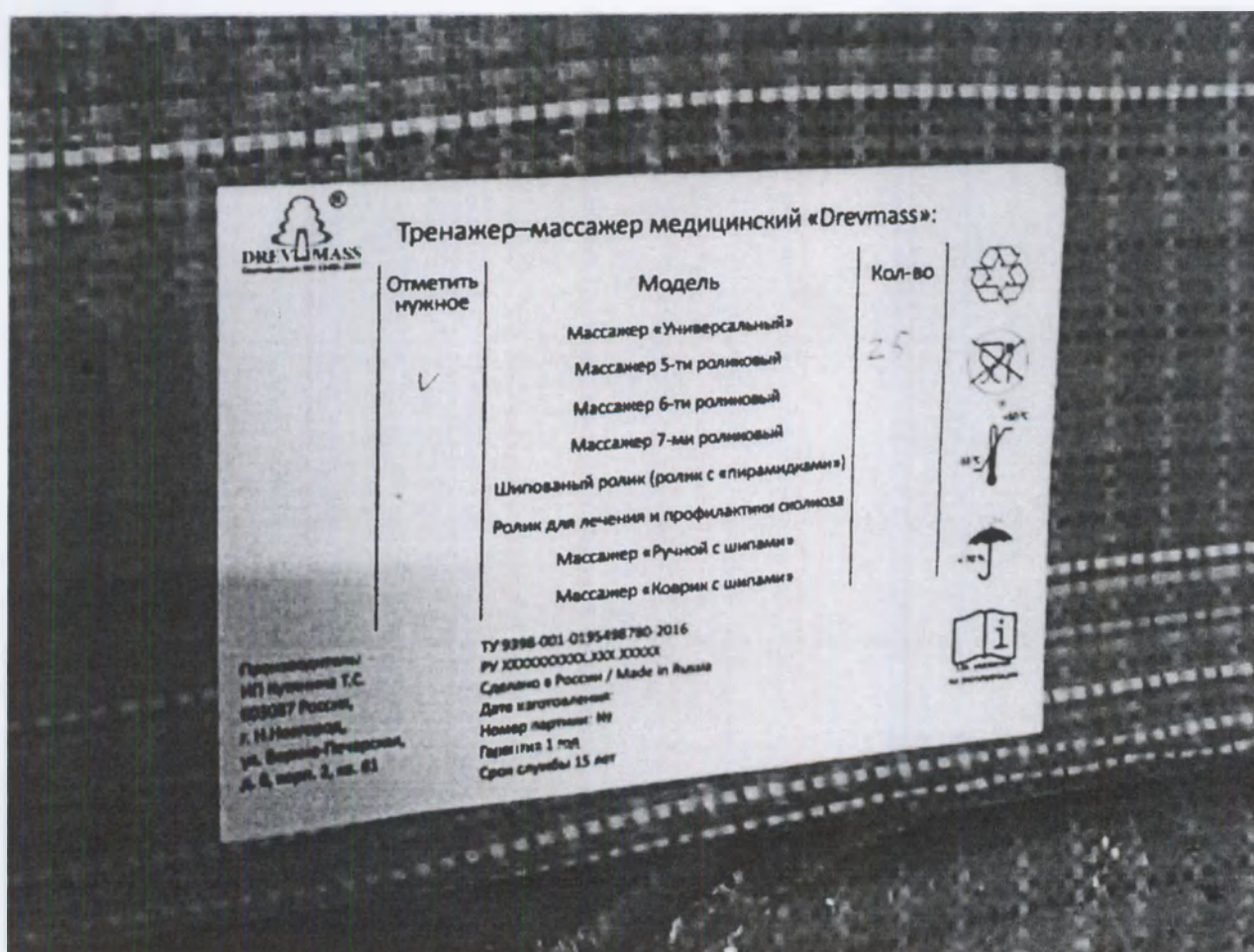


16. УПАКОВКА

Потребительская упаковка

Массажеры упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 с последующей упаковкой в картонные коробки (ящики) по ГОСТ 13514, ГОСТ 12301.

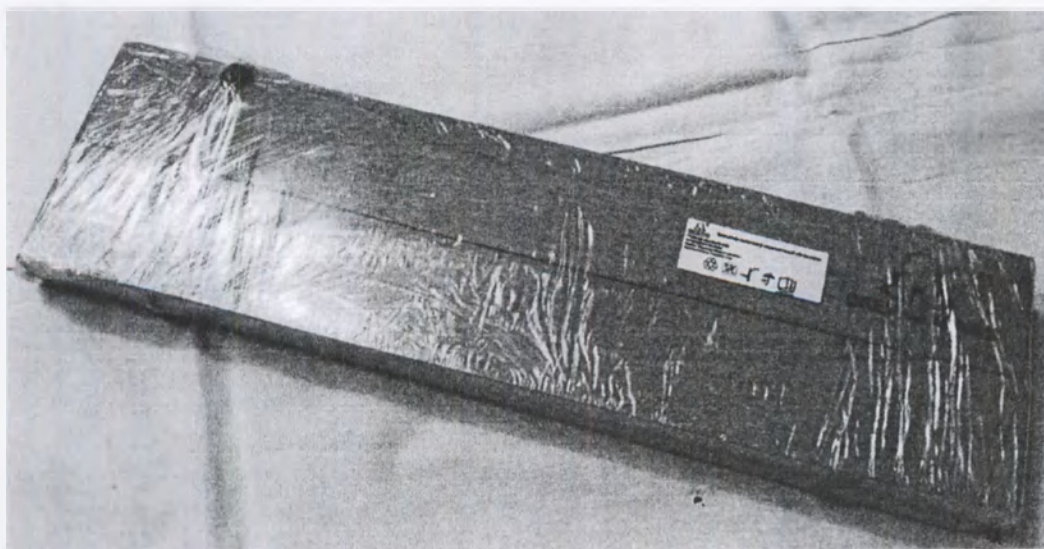

Коробки (ящики) при необходимости оклеивают полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477.

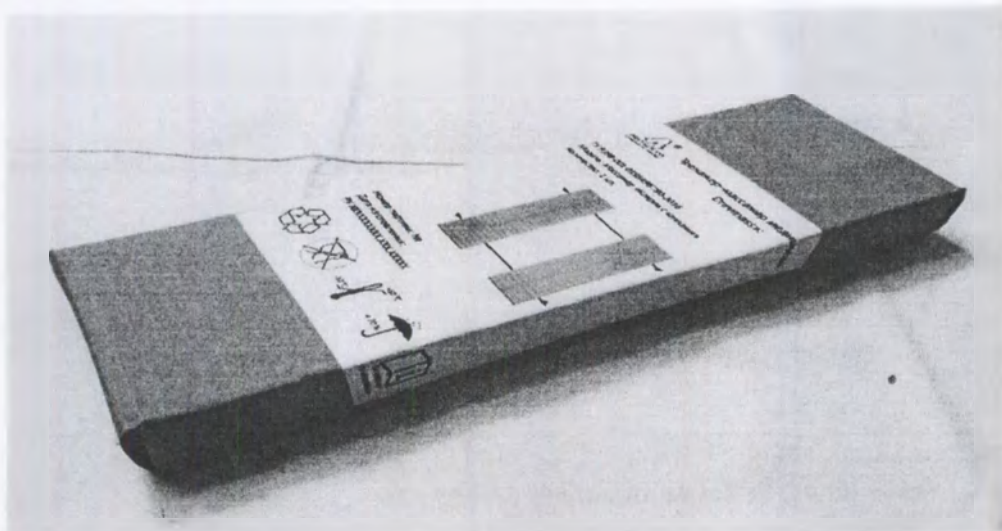

Транспортная упаковка

Потребительскую тару с массажерами упаковывают в транспортные пакеты по ГОСТ 26663.



Упаковка массажера должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011, настоящих технических условий и обеспечивать сохранность массажеров при транспортировании и хранении.

Допускается упаковывать массажеры в другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011.

17. ТРАНСПОРТИРОВКА

Массажеры транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -50° до $+50^{\circ}\text{C}$, относительной влажности от 10% до 90% и при атмосферном давлении 500 ~ 1060 гПа.

Особых климатических условий для транспортировки и хранения не требуется.

При транспортировке необходимо беречь изделие от повреждений упаковки и механических воздействий на само изделие.

После транспортировки массажёра в холодное время года, рекомендуется перед применением передержать тренажёр при комнатной температуре в течение 30-60 минут и только потом приступить к использованию.

18. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Готовые изделия должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом, чистом помещении в заводской упаковке при температуре воздуха от -50° до +50° С, относительной влажности воздуха не более 70% и при атмосферном давлении 500 ~ 1060 гПа.

Запрещается хранение изделий вместе с загрязняющими или токсичными химическими веществами.

Избегать прямого попадания солнечных лучей.

Избегать длительного прямого контакта с водой во избежание размокания и растрескивания дерева.

Не хранить рядом с отопительными приборами во избежание рассыхания и растрескивания дерева.

Избегать резких перепадов температур.

19. СРОК СЛУЖБЫ

Предприятие-изготовитель гарантирует срок эксплуатации изделия в течение 15-ти (пятнадцати) лет со дня ввода массажёра в эксплуатацию, при соблюдении всех правил эксплуатации установленных производителем.

Массажёр предназначен для многократного использования.

20. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ)

После использования данное изделие не может представлять собой потенциальную биологическую опасность. Поэтому переработку и утилизацию использованных изделий необходимо производить в соответствии с нормами надлежащей медицинской практики, а также применимыми законодательными и нормативными актами.

Утилизацию отходов осуществляют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 - для отходов класса А.

Материалы не пригодны для переработки.

21. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует:

Отсутствие дефектов и соответствие заявленным характеристикам в течение 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении потребителем условий, указанных в инструкции по применению.

Безвозмездную замену деталей, вышедших из строя, до истечения гарантийного срока по причине производственного брака.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня ввода массажёра в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Претензии по качеству и комплектности продукции в период гарантийного срока предъявляются предприятию-изготовителю.

Претензии по комплектности и дефекту изделий принимаются только от организаций или частных лиц, в адрес которых продукция поступила непосредственно от предприятия-изготовителя.

Претензии по качеству и скрытым дефектам изделия, обнаруженным в процессе эксплуатации, предъявляются частными пользователями или организациями-потребителями, в которых выявлены эти дефекты.

При предъявлении претензий гарантийный талон высылается в адрес предприятия-изготовителя или частного потребителя.

Адрес для приема рекламаций:

Адрес: 603087, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская д. 8, корп. 2, кв. 81, Тел.: 8 800-700-37-79 (звонок со всех телефонов по России - бесплатный), E-mail: drevmass@gmail.com

По всем вопросам связанным с применением данного изделия, обращаться в службу клиентской поддержки компании-производителя по телефону: 8 (800) 700-37-79 (звонок со всех телефонов по России - бесплатный), E-mail: drevmass@gmail.com

ООО «Древмасс» обеспечивает обращение и надзор за медицинскими изделиями, принятие, рассмотрение и решение претензий клиентов относительно качества продукции компании.

Всю ответственность за выпущенную продукцию, применяемую на территории Российской Федерации, несет ООО «Древмасс».

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

лист/а (ов)



173279 or 16.11.2016



Сертификация ISO 13485:2003

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Древмасс»



Кутянина Т.С.


февраля 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Тренажёр-массажёр медицинский «DREVMASS» по ТУ 9398-001-0195498780-2016 в вариантах исполнения»

Модель: Массажер «Ручной с шипами».

Производство ООО «Древмасс», Россия

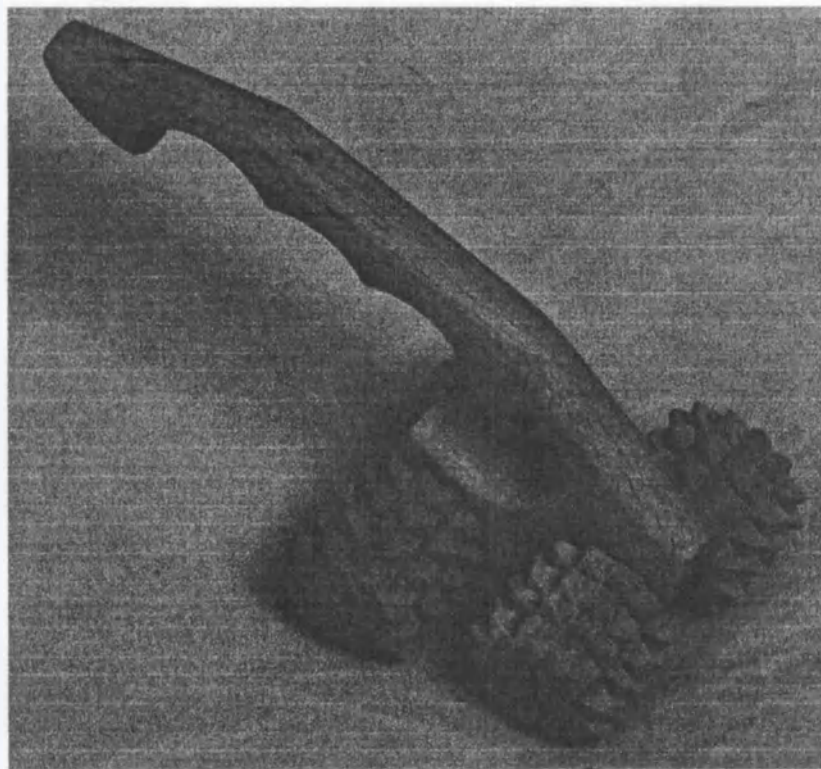

2017 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Тренажёр -массажёр медицинский «DREVMASS» по ТУ 9398-001-0195498780-2016 в вариантах исполнения»

Модель: Массажер «Ручной с шипами».

2. ПРОИЗВОДСТВО

2.1. Разработчик

ООО «Древмасс», 603087, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 8, корп. 2, кв. 81,
Тел.: 8 800-700-37-79, E-mail: drevmass@gmail.com

2.2. Производитель


ООО «Древмасс», 603087, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д. 8, корп. 2, кв. 81,
Тел.: 8 800-700-37-79, E-mail: drevmass@gmail.com

2.3. Место производства

607680, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пос. Афонино, ул. Зеленая, д. 5.

3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Массажер медицинский «Ручной с шипами» DREVMASS, далее массажер «Ручной с шипами», состоит из ручки, 2-х пар малых роликов с шипами и с отверстиями под крепление, 2-х осей для соединения роликов. Все вместе составляет прочную конструкцию, удобную для самомассажа всего тела в домашних условиях. См. рис. А.

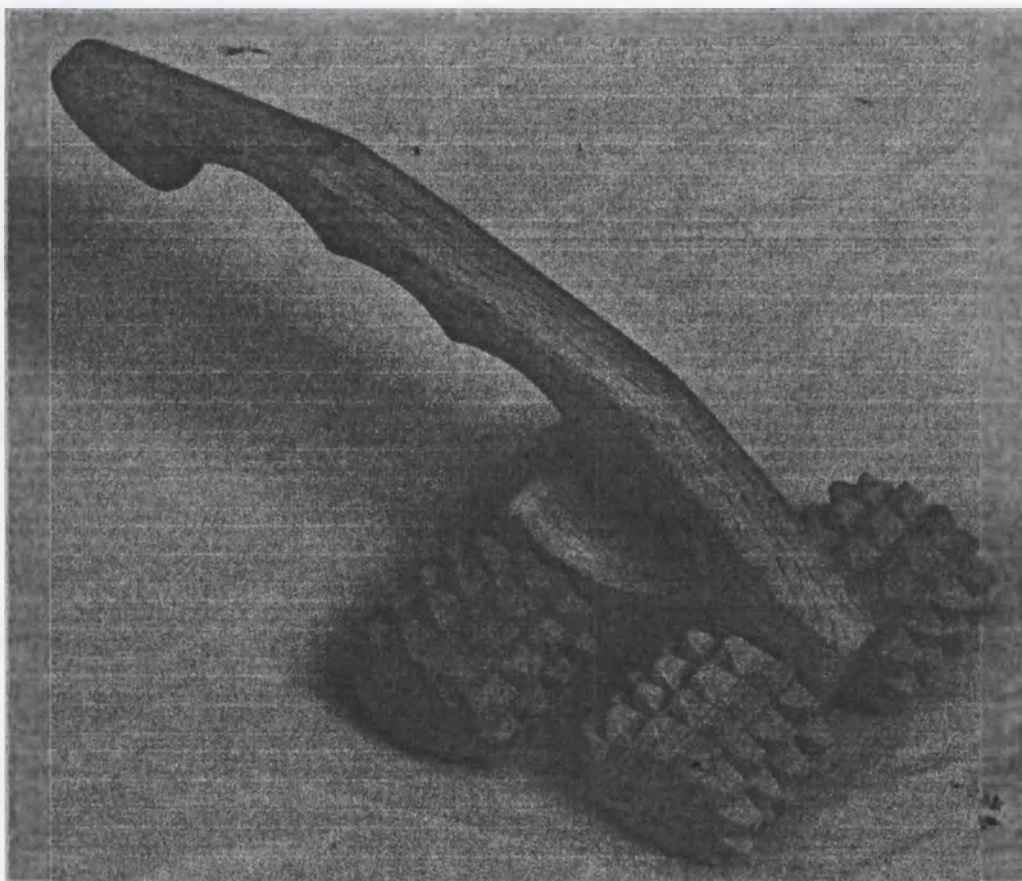

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 1

№ п/п	Наименование деталей и элементов	Количество, шт
1	Массажер «Ручной с шипами»	1
2	Паспорт изделия	1
3	Инструкция по применению	1
4	Индивидуальная упаковка	1

Основные параметры и характеристики

Основные технические характеристики массажера приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование деталей и элементов	Габариты, мм
2	Массажер «Ручной с шипами»	Длина – 142-153,2 Ширина – 65 Высота – 70,5-80

Поверхность массажера должна быть чистой без загрязнений.

Поверхность массажера должна быть гладкой, без зазубрин, острых кромок и необработанных поверхностей.

Механические повреждения в виде задиров, разрывов, трещин, следов расслоения не допускаются.

В соответствии с ГОСТ 2789 параметры гладкости поверхностей упорных ручек и массажных роликов должны быть не более $R_{\text{a}} 63$ мкм.

Класс покрытий поверхности массажера должен быть не ниже IV согласно ГОСТ 9.032.

Массажер должен иметь достаточную механическую прочность и быть сконструирован так, чтобы выдерживать грубое обращение с ним, которое возможно при нормальной эксплуатации.

Покрyтия поверхностей деталей массажера должны быть стойкими к воздействиям туалетного мыла, производимого по ГОСТ 28546 или по другой действующей нормативной документации.

Запрещается использовать для обработки поверхности другие поверхностно-активные материалы.

Массажер должен выдерживать равномерно распределённые статические нагрузки на протяжении не менее одного часа – не менее 6 кг.

Требования к материалам и комплектующим

Для производства массажеров применяют следующие материалы и комплектующие:

- хвойные породы древесины по ГОСТ 8486 (сосна, кедр);
- твердолиственные породы древесины по ГОСТ 2695 (бук, ясень, дуб, береза);
- воск масляный для дерева «Мартьянов» производства компании ООО «Натуральные краски», Россия выпускаемый по ТУ 2318-001-10169846-2013;

5. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Массажер «Ручной с шипами» используется в качестве спортивного, реабилитационного или лечебного инвентаря и предназначен для профилактики и оздоровления позвоночника, укрепления мышц спины, ягодич, улучшения кровообращения верхних и нижних конечностей, а так же предназначен как для лечения всех спинных заболеваний, таких как остеохонроз, протрузии, межпозвоночные грыжи, спондилез, ишиас, кифоз, сколиоз, так и для их профилактики.

При его использовании массажер:

- улучшает кровообращение в околопозвоночных зонах, стопах, ягодичах и бедрах;
- активизирует обменные процессы;
- оказывает нормализующее влияние на нервную систему;
- снижает перенапряжение в мышцах;
- оказывает рефлекторное влияние на соответствующие органы;
- подготавливает тело к более качественным и глубоким занятиям на медицинском тренажёре-массажёре «DREVMASS» модель «Универсальный».

6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Массажер «Ручной с шипами» может применяться как в клинических (реабилитационные центры, стационары), так и в бытовых условиях и предназначен для использования сертифицированными специалистами, а также пациентами самостоятельно в домашних условиях.

Применяется как в составе комплекса упражнений на медицинском тренажёре-массажёре «DREVMASS» модель «Универсальный», так и самостоятельно.

**Не рекомендуется применение данного медицинского изделия вне предназначенных для этого помещений.*

7. ПОКАЗАНИЯ

Показаниями к применению тренажёра-массажёра являются:

- сколиозы (дисплазические, идиопатические, статические)
- протрузии,
- межпозвоночные грыжи,
- спондилез,
- ишиас,
- кифоз,
- остеохондрозы,
- кифолордозы,
- грыжи Шморля 3-5 мм,
- артрозы и артриты суставных отростков тел позвонков,
- начальные формы болезни Бехтерева (анкилозирующий спондилоартроз),
- рефлекторные синдромы, в виде мышечно – тонических, вегетативно сосудистых и нейротрофических проявлений в острых и хронических стадиях течения болезни,
- люмбаишалгия с наличием стойкой миофиксации,
- корешковые синдромы с симптомами раздражения и выпадения без сосудистого компонента.

8. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаниями к применению массажера являются:

- неясный диагноз;
- усиление боли после первого занятия;

- выраженные болевые синдромы с психомоторным возбуждением;
- легочная, сердечно-сосудистая, почечная или печёночная недостаточность;
- травмы позвоночника,
- лихорадочные состояния в стадии обострения;
- инфекционные заболевания;
- обострения соматических и хронических заболеваний;
- наличие злокачественных и доброкачественных образований;
- состояние декомпенсации при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, лёгких, печени, почек;
- болезни крови и кроветворных органов в стадии декомпенсации;
- беременность;
- гипертония в 3-4 стадии;
- острые воспалительные процессы, гнойные процессы любой локализации (кожа, подкожная клетчатка, лимфатические узлы, мышцы, кости): экземы, импетиго, лимфадениты, флегмоны, остеомиелиты, артриты, туберкулёз костей и суставов и пр.;
- повышенная температура, повышенное кровяное давление, вирусные инфекции;
- острые нефриты, острые гепатиты;
- тяжёлые формы гипотрофии (атрофия);
- активная форма туберкулёза лёгких;
- сифилис;
- хронический остеомиелит;
- ломкость и болезненность костей;
- большие пупочные, паховые, мошоночные грыжи со значительным выпадением органов брюшной полости или при выраженной склонности к ущемлению;
- сильные посттравматические боли (каузалгический синдром);
- боли невыясненного характера при пальпации живота;
- тошнота, рвота;
- тяжёлые психические заболевания.

9. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

При применении массажёра могут возникнуть общие и местные реакции, такие как:

- гиперемии (покраснения) на массируемой поверхности;
- в случае хрупкости стенок кровеносных сосудов возможно появление подкожных кровоизлияний на массируемой поверхности;
- болезненность мышц и тканей после первых процедур;
- сонливость или, напротив, возбуждение после первых процедур;
- усиление деятельности выделительных систем в течение всего курса массажа и после его окончания;
- подкожные гематомы;
- усиление боли после первого занятия;

При неправильном применении массажера может возникнуть повышение артериального давления.

10. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Массажёр «Ручной с шипами» сочетает в себе несколько оздоровительных принципов воздействия на весь организм человека и дополняет ряд современных тренажёров и массажёров одновременно:

- эффективно воздействует на околопозвоночные зоны, ягодицы, бёдра и стопы;
- улучшает капиллярное кровообращение, состояние кожного покрова;
- тонизирует и укрепляет мышцы и связки опорно-двигательного аппарата;
- усиливает общий тонус и иммунитет организма;
- сочетает в себе возможность спортивной тренировки и целебного воздействия на организм;
- стимулирует выработку природных лекарств внутри организма в необходимых физиологических дозировках;
- компенсирует недостаток двигательной активности;
- повышает работоспособность и жизненный тонус, нормализует сон и обмен веществ, улучшает настроение;
- помогает в лечении и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем;
- устраняет половые расстройства с последующей нормализацией половых функций у мужчин и женщин;
- способствует лечению простатита и аденомы предстательной железы, устранению воспалительных явлений при лечении гинекологических заболеваний;
- сокращает время полноценного восстановления после переломов, операций, инсультов;
- купирует боли в позвоночнике, суставах и мышцах, головные боли;
- способствует нормализации гормонального баланса, обменных процессов при эндокринных заболеваниях («тучные» теряют вес, «истощённые» набирают необходимые килограммы);

Массажер «Ручной с шипами» весьма полезен людям среднего и пожилого возраста, ведущих малоподвижный образ жизни.

11. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Поверхности изделия являются устойчивыми ко всем обычным дезинфицирующим средствам. Все части массажёра не стерильны.

Для очистки загрязнённых поверхностей элементов массажера используйте хорошо отжатую влажную ткань, предварительно смоченную в тёплом ($t=30-40^{\circ}$) водно-мыльном растворе. Допускается добавление в раствор дезинфицирующих средств с низким содержанием хлора.

При наличии стойких пятен не используйте абразивные или агрессивные средства, которые отличаются от обычных чистящих или моющих средств. Не используйте эфир, ацетон, бензин, концентрированные кислоты, чистящие средства с содержанием хлора высокой концентрации.

Перед началом эксплуатации, должно пройти время достаточное для высыхания изделия.

12. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что все элементы массажёра надёжно скреплены, а ролики свободно вращаются.

Простота и надёжность конструкции позволяет применять массажер как на открытом воздухе, так и в помещении.

Проводите занятия на массажёре строго по инструкции, при возможности под контролем врача или компетентного специалиста.

В случае возникновения плохого самочувствия во время тренировки, следует немедленно прекратить занятие и при необходимости обратиться к врачу.

Рекомендации:

Для устранения скрипа деревянных трущихся поверхностей, в случае его возникновения в процессе эксплуатации тренажёра-массажёра, и улучшения вращения роликов, рекомендуется натереть оси массажера парафином или мылом.

В случае повреждения изделия или его комплектующих дальнейшая эксплуатация изделия запрещается!

13. СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЁРА-МАССАЖЁРА

Если массажёр применяется в лечебных и/или реабилитационных целях под контролем специалиста, то врач должен быть знаком с техникой проведения тренировок. Так же он должен быть знаком с показаниями и случаями, в которых использование массажёра строго противопоказано.

Массажёр выдерживает нагрузку не менее 6 кг.

Массаж с массажёром:

Массаж является самым эффективным способом лечения без лекарств.

Самомассаж снимает спазмы в мышцах и сосудах.

Самомассаж всего тела улучшает кровообращение. Массаж успокаивает нервную систему и активизирует иммунитет.

Усиливает кровообращение, способствует заживлению микротравм мышц и суставов, уменьшению болей.

Способствует усилению обмена веществ для похудения.

Улучшается психическое и эмоциональное состояние.

Воздействие на организм человека:

Тренируются и укрепляются мышцы всего тела.

Снимаются спазмы и зажимы в области всего тела.

Улучшается кровообращение.

Как пользоваться массажером:

Ролики с шипами ставятся на область необходимую для массажа;

Массажер держится за ручку и совершаются прокатывания вперед и назад по телу, согласно инструкции;

При прокатывании с надавливанием по телу ролики массажера активно воздействуют на мышцы всего тела, массируют их и улучшают кровообращение;

Заниматься 1 раз в день утром согласно рекомендациям в инструкции.

Массажер может использоваться в профилактических и лечебных целях.

Комплекс упражнений в профилактических целях:

Упражнение 1. Массаж стоп.

Упражнение удобно делать в положении сидя. Берем в руки поочередно правую и левую стопу и прокатываем по 8-10 раз. Плавно проводим по верхней и нижней части стоп, захватываем всю поверхность; См. рис. А, Б.



Рис. А. 8-10 прокатываний по внутренней стороне стопы.



Рис. Б. 8-10 прокатываний по внешней.

Упражнение 2. Массаж голени.

Упражнение удобно делать в положении сидя. Ставим ногу на полную стопу, совершаем прокатывания по 8-10 раз. Плавно проводим по передней и задней части голени, захватываем всю поверхность; См. рис. А, Б.



Рис. А. Воздействие на внутреннюю часть.



Рис. Б. Воздействие на внешнюю часть.

Упражнение 3. Массаж бедра.

Ставим на скамейку или стул поочередно ноги, стопа плотно стоит на поверхности и делаем прокатывания по 8-10 раз. Плавно проводим по передней и задней части бедра, захватываем всю поверхность; См. рис. А, Б.



Рис. А. Воздействие на бедро в упоре.



Рис. Б. Воздействие на бедро стоя.

Упражнение 4. Массаж ягодиц.

Упражнение удобно выполнять стоя. Делаем скручивание и совершаем прокатывание по 8-10 раз. Плавно проводим по левой и правой ягодице, захватываем всю поверхность; См. рис. А, Б.



Рис. А, Б. Самомассаж ягодиц.

Упражнение 5. Массаж плеч и предплечий.

Выполняем сидя на стуле, делаем поочередно прокатывания по 8-10 раз. Плавно проводим по передней и задней части плеча и предплечья, захватывая всю поверхность; См. рис. А, Б.

Рис. А. Самомассаж левого плеча и предплечья.





Рис. Б. Самомассаж правого плеча и предплечья.

Упражнение 7. Массаж груди и живота.

В положении стоя совершать прокатывания по 8-10 раз. Плавно проводить по всем частям туловища (грудь, живот); См. рис. А, Б.



Рис. А, Б. Массаж туловища.

Упражнение 8. Массаж головы.

В положении стоя или сидя прокатываем по 8-10 раз. Плавно проводим по шее и волосяному покрову, захватываем всю поверхность; См. рис. А, Б.



Рис. А, Б. Самомассаж головы.

Упражнение 9. Массаж спины (Требуется помощь партнера или использование массажера «Коврика с шипами»)

Положение на животе. Партнер плавно прокатывает всю поверхность спины по 8-10 раз. Задействуем всю площадь спины, можно повторно попросить сделать массаж ягодиц и ног. См. рис. А, Б.

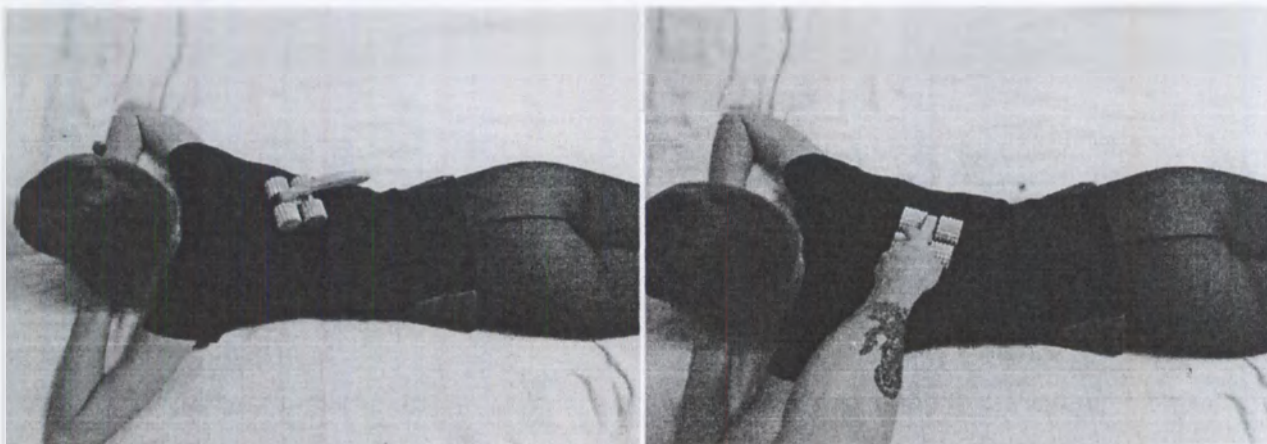


Рис. А, Б. Массаж спины при помощи партнера.

После упражнений рекомендуется остаться в положении лежа на животе или плавно перевернуться на спину и полежать 5-7 минут с закрытыми глазами в полном расслаблении. Способствует хорошему восстановлению психоэмоционального состояния и улучшению настроения. См. рис. А, Б.

В случае определённых симптомов и решения конкретной задачи:

- при интенсивных болях, повышении артериального давления, раздражительности, возбуждении, бессоннице рекомендуется использовать массажёр во второй половине дня или перед сном. Длительность воздействия 10-15 минут;

- при гипотонии, сонливости, слабости и снижении чувствительности, а также у ослабленных больных и стариков воздействие эффективно проводить в утренние часы и первую половину дня. Длительность сеанса 5-7 минут.

- в отдельных случаях выраженный положительный эффект достигается длительным воздействием от 30 минут до 1-2 часов;

- курс лечения составляет 1-2 недели. Лечение можно повторить через 2-4 недели.

Внимание! При занятиях на массажёре «Ручной с шипами» нужно ориентироваться на личные ощущения и контроль!

14. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Специальный температурный режим для применения изделия не требуется. Температура в помещении должна быть комфортной для пациента и специалиста - +10° - +35°С, при относительной влажности не более 90%.

15. МАРКИРОВКА

Маркировка потребительской упаковки

Маркировку, характеризующую массажер, наносят непосредственно на упаковочный материал потребительской упаковки, или на этикетку, которую наклеивают на потребительскую упаковку, или на листок-вкладыш, вкладываемый в каждую единицу потребительской упаковки.

Маркировка потребительской упаковки массажеров должна содержать следующие сведения:

- наименование массажера с указанием типоконструкции;
- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)] и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии);
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- дата изготовления (месяц и год);
- условия хранения;
- рекомендации по эксплуатации;
- гарантийный срок;
- срок службы (эксплуатации), установленный изготовителем;
- символ упаковки, не предназначенной для контакта с пищевой продукцией;
- символ возможности утилизации использованной упаковки;
- номер Регистрационного удостоверения (РУ);
- обозначение настоящих технических условий.



Маркировка транспортной упаковки

Транспортная маркировка массажеров должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и ГОСТ 14292 с нанесением манипуляционных знаков «Верх» и «Осторожно», «Беречь от влаги».


Маркировка транспортной упаковки должна содержать следующие сведения:

- наименование массажера с указанием типоконструкции;
- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- номер партии и дата изготовления;
- условия хранения;
- количество массажеров;
- символ упаковки, не предназначенной для контакта с пищевой продукцией;
- символ возможности утилизации использованной упаковки;
- номер Регистрационного удостоверения (РУ);
- обозначение настоящих технических условий.

16. УПАКОВКА

Потребительская упаковка

Массажеры упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 с последующей упаковкой в картонные коробки (ящики) по ГОСТ 13514, ГОСТ 12301.

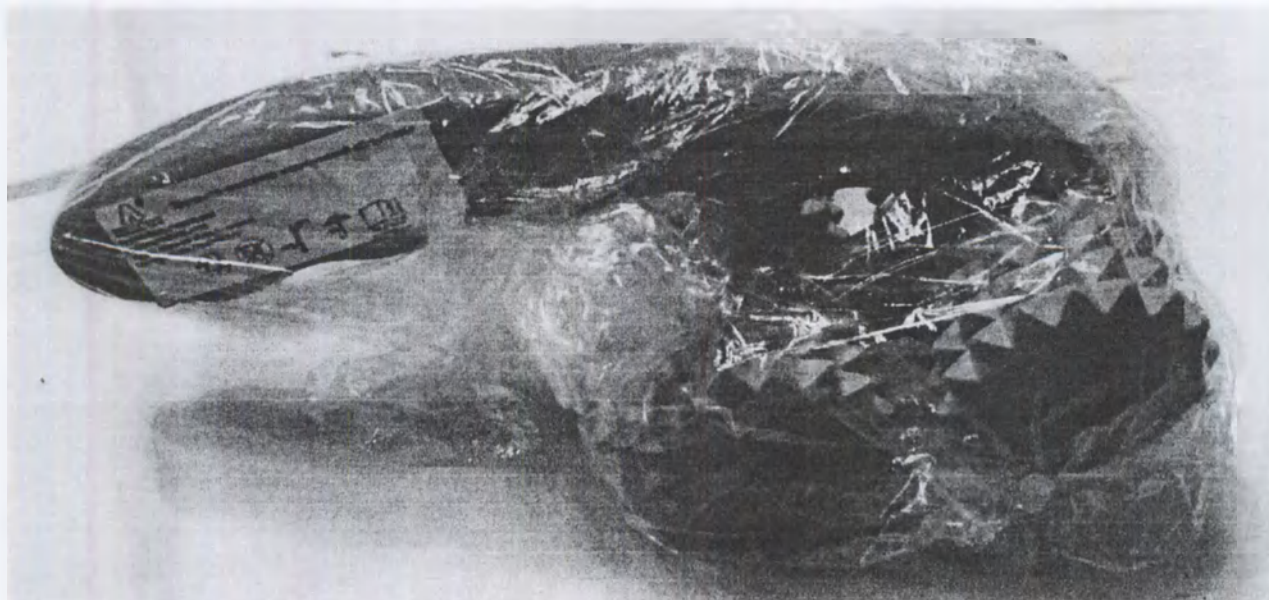

Коробки (ящики) при необходимости оклеивают полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477.

Транспортная упаковка

Потребительскую тару с массажерами упаковывают в транспортные пакеты по ГОСТ 26663.

Упаковка массажера должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011, настоящих технических условий и обеспечивать сохранность массажеров при транспортировании и хранении.

Допускается упаковывать массажеры в другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011.

17. ТРАНСПОРТИРОВКА

Массажиры транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительной влажности от 10% до 90% и при атмосферном давлении 500 ~ 1060 гПа.

Особых климатических условий для транспортировки и хранения не требуется.

При транспортировке необходимо беречь изделие от повреждений упаковки и механических воздействий на само изделие.

После транспортировки массажёра в холодное время года, рекомендуется перед применением передержать тренажёр при комнатной температуре в течение 30-60 минут и только потом приступить к использованию.

18. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Готовые изделия должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом, чистом помещении в заводской упаковке при температуре воздуха от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха не более 70% и при атмосферном давлении 500 ~ 1060 гПа.

Запрещается хранение изделий вместе с загрязняющими или токсичными химическими веществами.

Избегать прямого попадания солнечных лучей.

Избегать длительного прямого контакта с водой во избежание размокания и растрескивания дерева.

Не хранить рядом с отопительными приборами во избежание рассыхания и растрескивания дерева.

Избегать резких перепадов температур.

19. СРОК СЛУЖБЫ

Предприятие-изготовитель гарантирует срок эксплуатации изделия в течение 15-ти (пятнадцати) лет со дня ввода массажёра в эксплуатацию, при соблюдении всех правил эксплуатации установленных производителем.

Массажёр предназначен для многократного использования.

20. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ)

После использования данное изделие не может представлять собой потенциальную биологическую опасность. Поэтому переработку и утилизацию использованных изделий необходимо производить в соответствии с нормами надлежащей медицинской практики, а также применимыми законодательными и нормативными актами.

Утилизацию отходов осуществляют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 - для отходов класса А. Материалы не пригодны для переработки.

21. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует:

Отсутствие дефектов и соответствие заявленным характеристикам в течение 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении потребителем условий, указанных в инструкции по применению.

Безвозмездную замену деталей, вышедших из строя, до истечения гарантийного срока по причине производственного брака.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня ввода массажёра в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Претензии по качеству и комплектности продукции в период гарантийного срока предъявляются предприятию-изготовителю.

Претензии по некомплектности и дефекту изделий принимаются только от организаций или частных лиц, в адрес которых продукция поступила непосредственно от предприятия-изготовителя.

Претензии по качеству и скрытым дефектам изделия, обнаруженным в процессе эксплуатации, предъявляются частными пользователями или организациями-потребителями, в которых выявлены эти дефекты.

При предъявлении претензий гарантийный талон высылается в адрес предприятия-изготовителя или частного потребителя.

Адрес для приема рекламаций:

Адрес: 603087, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская д. 8, корп. 2, кв. 81, Тел.: 8 800-700-37-79 (звонок со всех телефонов по России - бесплатный), E-mail: drevmassia@gmail.com

По всем вопросам связанным с применением данного изделия, обращаться в службу клиентской поддержки компании-производителя по телефону: 8 (800) 700-37-79 (звонок со всех телефонов по России - бесплатный), E-mail: drevmassia@gmail.com

ООО «Древмасс» обеспечивает обращение и надзор за медицинскими изделиями, принятие, рассмотрение и решение претензий клиентов относительно качества продукции компании.

Всю ответственность за выпущенную продукцию, применяемую на территории Российской Федерации, несет ООО «Древмасс»

Прочито, пронумеровано и
скреплено печатью

(15) лист/а (ов)

