



Генеральный директор
ООО Фирма "Вэлونا"
А. М. Исаев
2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Халаты медицинские женские и мужские по ТУ 14.12.30-001-94787928-2017

Варианты исполнения:

Халат медицинский мужской, модель № 528

Халат медицинский женский, модель № 526

1. Назначение и область применения

Халаты предназначены для ношения работниками здравоохранения с целью их изоляции от пациентов. Халат помогает защитить пациента (например, ожоговых больных), от передачи инфекционных агентов, носителями которых могут являться медицинские работники или он может защищать медицинского работника от инфекционного агента, которым инфицирован пациент. Халаты многоразового использования, предполагающая стирку и дезинфекцию после каждого использования.

Халаты предназначены для применения медицинским персоналом в госпиталях, клинических больницах, диспансерах, поликлиниках, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, здравпунктах, медико-санитарных частях, территориальных медицинских объединениях и станциях скорой помощи.

2. Показания к применению, противопоказания и побочные действия

Показанием к применению Халатов является риск передачи инфекционных агентов между медицинским работником и пациентом.

Халаты предназначены для применения медицинским персоналом во всех областях медицины.

Противопоказанием к применению и побочным действием является аллергическая реакция на используемые материалы.

В случае если при ношении халата появляются аллергические реакции (чихание, слезотечение, высыпания на коже, зуд и пр.), необходимо прекратить использование изделия.

3. Описание медицинского изделия

Халаты изготавливаются в двух вариантах исполнения:

- Халат медицинский мужской, модель № 528
- Халат медицинский женский, модель № 526

Халаты поставляются нестерильными и не требуют стерилизации. Изделие многоразового применения, предполагающая стирку и дезинфекцию после каждого использования.

3.1. Халаты женские для медицинского персонала (модель № 526)

Халат женский изготавливается из смесовой ткани марки Тиси (хлопок 35%, полиэстер 65%, ГОСТ 11518-88) или смесовой ткани Сатори (хлопок 50%, полиэстер 50%, ГОСТ 11518-88), пуговиц из аминопласта марки КФА-1 (ГОСТ 9359-80) и ниток армированных швейных 45 ЛЛ - ГОСТ 6309.

Размеры с учетом роста типовой фигуры человека от 146 см до 176 см включительно с учетом обхвата груди от 88 см до 120 см включительно в соответствии с Таблицей 1.

Халат полуприлегающего силуэта с центральной бортовой застежкой на пять пуговиц с петлями.

Полочки с кокетками, вертикальными рельефами, с двумя накладными боковыми карманами в рельефах и боковых швах.

Карманы с цельновыкроенными обтачками. В верхней части левой полочки, на уровне груди расположен накладной карман размером 10 см x 12 см.

Ширина халата по линии талии регулируется хлястиками, которые втачиваются в боковые швы.

Хлястики фиксируются на 2 пуговицы с петлями.

Спинка с центральным швом и шлицей.

Рукава втачные, одношовные, длиной $\frac{3}{4}$, на манжете.

Воротник отложной- «английский».

Масса халата 350 г $\pm$ 50 г.

Размеры упакованного в потребительскую упаковку изделия 30x50 см $\pm$ 0,5 см.

Халат имеет вешалку

Степень белизны не менее 80 %.

Изменение размеров после мокрой обработки не более:

- по основе: - 3,5 %;
- по утку: ± 2 %.

Разрывная нагрузка полоски ткани халатов размером 50x200 мм не менее:

- по основе: 392 Н;
- по утку: 245 Н.

Используемые пуговицы устойчивы к химической чистке, кипячению и дезинфекции при соблюдении указаний по уходу и дезинфекции.

Таблица 1. Размеры женского халата модели №526 с учетом роста типовой фигуры человека и обхвата груди

Измеряемый параметр	Рост типовой фигуры, см	Обхват груди типовой фигуры (<i>O</i> _г) и обхват бедер типовой фигуры (<i>O</i> _б), см									Допускаемое отклонение, см	
		<i>O</i> _г	88	92	96	100	104	108	112	116		120
		<i>O</i> _б	100	104	108	112	116	120	124	128		132
Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	146	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	±1,0	
	152	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0		
	158	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0		
	164	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0		
	170	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0		
	176	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0		
Ширина спинки в самом узком месте	146-176	38,8	39,8	40,8	41,8	42,8	42,6	43,6	44,6	45,6	±0,5	
Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа	146	106,5	107,0	107,5	108,0	108,5	108,0	108,5	109,0	109,5	±1,0	
	152	109,5	110,0	110,5	111,0	111,5	111,0	111,5	112,0	112,5		
	158	112,5	113,0	113,5	114,0	114,5	114,0	114,5	115,0	115,5		
	164	115,5	116,0	116,5	117,0	117,5	117,0	117,5	118,0	118,5		
	170	118,5	119,0	119,5	120,0	120,5	120,0	120,5	121,0	121,5		
	176	121,5	122,0	122,5	123,0	123,5	123,0	123,5	124,0	124,5		
Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	146-176	21,4	22,0	22,6	23,2	23,8	24,0	24,6	25,2	25,8	± 0,5	
Ширина халата на уровне глубины проймы	146-176	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	63,0	65,0	67,0	69,0	± 1,0	
Длина рукава от высшей точки оката до низа	146	53,6	53,8	54,0	54,2	54,4	53,8	54,0	54,2	54,4	± 1,0	
	152	55,6	55,8	56,0	56,2	56,4	55,8	56,0	56,2	56,4		
	158	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4	57,8	58,0	58,2	58,4		
	164	59,6	59,8	60,0	60,2	60,4	59,8	60,0	60,2	60,4		
	170	61,6	61,8	62,0	62,2	62,4	61,8	62,0	62,2	62,4		
	176	63,6	63,8	64,0	64,2	64,4	63,8	64,0	64,2	64,4		
Ширина халата внизу	146-176	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	75,4	77,4	79,4	81,4	± 1,0	
Ширина рукава под проймой	146-176	17,5	18,2	18,9	19,6	20,3	20,4	21,0	21,6	22,2	± 0,5	

3.2. Халаты мужские для медицинского персонала (модель № 528)

Халат мужской изготавливается из хлопчатобумажной ткани марки Бязь (хлопок 100%,

ГОСТ 29298), пуговиц из аминопласта марки КФА-1 (ГОСТ 9359-80) и ниток армированных швейных 36 ЛХ - ГОСТ 6309.

Размеры с учетом роста типовой фигуры человека от 158 см до 188 см включительно с учетом обхвата груди от 88 см до 120 см включительно в соответствии с Таблицей 2.

Халат с центральной бортовой застежкой на пять пуговиц с петлями.

Полочки с двумя накладными боковыми карманами.

В верхней части левой полочки, на уровне груди расположен накладной карман размером 12 см x 15 см.

Ширина халата по линии талии регулируется хлястиками, которые втачиваются в боковые швы. Хлястики фиксируются на 2 пуговицы с петлями.

Спинка с центральным швом и шлицей.

Рукава втачные, одношовные, длинные с манжетами, застегивающимися на пуговицы.

Воротник отложной - «английский».

Масса халата 350 г ± 50 г.

Размеры упакованного в потребительскую упаковку изделия 30x50 см ± 0,5 см.

Халат имеет вешалку

Степень белизны не менее 80 %.

Изменение размеров после мокрой обработки не более:

- по основе: - 3,5 %;

- по утку: ± 2 %.

Разрывная нагрузка полоски ткани халатов размером 50x200 мм не менее:

- по основе: 392 Н;

- по утку: 245 Н.

Используемые пуговицы устойчивы к химической чистке, кипячению и дезинфекции при соблюдении указаний по уходу и дезинфекции.

Таблица 2. Размеры мужского халата модели №528 с учетом роста типовой фигуры человека и обхвата груди

Измеряемый параметр	Рост типовой фигуры, см	Обхват груди типовой фигуры (<i>O_г</i>) и обхват бедер типовой фигуры (<i>O_б</i>), см									Допускаемое отклонение, см	
		<i>O_г</i>	88	92	96	100	104	108	112	116		120
		<i>O_б</i>	70	76	82	88	94	100	106	112		118
Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	158	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	±1,0	
	164	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0		
	170	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0		
	176	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0		
	182	-	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0		
	188	-	-	-	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	-		
Ширина спинки в самом узком месте	158-188	43,0	44,0	45,0	46,0	47,0	47,0	48,0	49,0	50,0	±0,5	
Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа	158	99,5	100,0	100,5	101,0	101,5	102,0	102,5	103,0	103,5	±1,0	
	164	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	105,5	106,0	106,5		
	170	105,5	106,0	106,5	107,0	107,5	108,0	108,5	109,0	109,5		
	176	108,5	109,0	109,5	110,0	110,5	111,0	111,5	112,0	112,5		
	182	-	112,0	112,5	113,0	113,5	114,0	114,5	115,0	115,5		
	188	-	-	-	116,0	116,5	117,0	117,5	118,0	-		

Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	158-188	22,7	23,3	23,9	24,5	25,1	25,9	26,5	27,1	27,7	± 0,5
Ширина халата на уровне глубины проймы	158-188	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	67,0	69,0	71,0	73,0	± 1,0
Ширина халата внизу	158-188	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	± 1,0
Длина рукава от высшей точки оката до низа	158	60,4	60,6	60,8	61,0	61,2	61,8	62,0	62,2	62,4	± 1,0
	164	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,8	64,0	64,2	64,4	
	170	54,4	64,6	64,8	65,0	65,2	65,8	66,0	66,2	66,4	
	176	66,4	66,6	66,8	67,0	67,2	67,8	68,0	68,2	68,4	
	182	-	68,6	68,8	69,0	69,2	69,8	70,0	70,2	70,4	
	188	-	-	-	71,0	71,2	71,8	72,0	72,2	-	
Ширина рукава под проймой	158-188	19,0	19,7	20,5	21,2	22,0	22,2	23,0	23,7	24,5	± 0,5

4. Инструкция по применению

Халат одевают поверх верхней одежды и застёгивают с помощью пуговиц.

Меры предосторожности при применении изделия не требуются.

Халаты многоразового использования.

Халаты стираются и дезинфицируются после каждого использования.

5. Указания по уходу за изделием

При уходе за изделием следует руководствоваться информацией на этикетке. Символы, приведенные на ней, расшифрованы ниже.

	Обычная стирка при температуре воды до 95 °C
	Обычная стирка при температуре воды до 40 °C
	Отбеливание разрешено хлорсодержащими отбеливателями
	Не отбеливать
	Глажка при температуре подошвы утюга до 200 °C
	Глажка при температуре подошвы утюга до 150 °C
	Профессиональная сухая чистка с использованием тетрахлорэтилена и всех растворителей, перечисленных для символа «Р»
	Обычная барабанная сушка при температуре 80 °C

6. Условия хранения и транспортирования

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, кроме не отапливаемых отсеков самолетов в соответствии с ГОСТ 7000 и правилами, утверждёнными в установленном порядке для каждого вида транспорта.

Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем.

Условия транспортирования - по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Хранение изделий у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от +5 °С до +40 °С.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом, или должны храниться в таре, защищающей от этих воздействий.

7. Гарантии производителя

ООО «Вэллона» гарантирует соответствие продукции нормативным требованиям при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок годности – 12 месяцев со дня изготовления.

Изделие не требует технического обслуживания во время эксплуатации и не подвергается ремонту.

По вопросам гарантии и качества медицинского изделия обращаться к изготовителю:

ООО Фирма "Вэллона", Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Каслинская д. 19.

Тел./факс: 8 (351) 727-18-98, 8 (351) 727-18-82.

8. Способы утилизации

Утилизация Халатов осуществляется по СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» в установленном порядке.

Использованные изделия относятся к отходам класса «А» или «Б».

Неиспользованные изделия (с истекшим сроком годности или непригодные для использования) допускается утилизировать вместе с бытовыми отходами.

9. Стирка и уход.

9.1 Халаты медицинские мужские, модель № 528

Халаты из хлопка можно стирать в стиральной машине при температуре до 95 градусов. Для стирки использовать универсальные моющие средства. Допускается использование моющих средств с отбеливающим эффектом. Сушить в хорошо расправленном виде.

Гладить Халаты из хлопка увлажненными (сбрызнуть из пульверизатора или с паром) в режиме «Лен» или «Хлопок». Допустимая температура нагрева утюга – до 200°С.

9.1 Халаты медицинские женские, модель № 526

Халаты из смесовых тканей стирать в стиральной машинке при температуре до 40 градусов. Для стирки использовать мягких моющих средства. Не допускается использование хлорсодержащих моющих средств. Сушить в хорошо расправленном виде.

Халаты из смесовых тканей не требуют глажки. В случае необходимости, гладить увлажненными (сбрызнуть из пульверизатора или с паром) в режиме «Шелк». Допустимая температура нагрева утюга – до 150°С.

10. Дезинфекция

Дезинфекция Халатов медицинских мужских, модель № 528 осуществляется в соответствии с МУ 3.5.736-99. Допускается использование хлорсодержащих веществ.

Дезинфекция Халатов медицинских женских, модель № 526 осуществляется в соответствии с МУ 3.5.736-99. Не допускается использование хлорсодержащих веществ.

Всего пронумерованно и сшито

6 листов) листов

2018 г.



(Исаев А.М.)

МП