


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

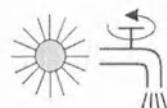

Перед началом работы -
открыть кран для воды



После окончания работы -
закрыть кран для воды



Для защиты обслуживающего персонала
необходимо носить защитные перчатки
при работе с прибором Hugojet!

Использовать только входящие в объем
поставки одноразовые перчатки фирмы
Durr Dental, разработанные специально
для работы с прибором Hugojet.

Одноразовые защитные перчатки, 100
штук, длиной до локтя, номер заказа:
9000-500-10

6.1 Вставка емкости с дезинфицирующим препаратом MD 520 в прибор Hugojet

- Чтобы снять крышку нажать храповой
останов **14** вовнутрь.
- Отвинтить крышку дезинфицирующего
препарата MD 520 **13**.
Учесть срок годности!
При применении других препаратов фирма
Duerr Dental не несет ответственности.
- Надеть входящую в объем поставки крышку
для емкости с обратным клапаном **12** на
емкость MD 520.



Не вставлять в прибор емкость MD 520
без установленного обратного клапана,
так как в таком случае грозит опасность
истечение жидкости.

- Вставить емкость **13** в предназначенное для
этого гнездо в приборе Hugojet.

6.2 Установить крепление для слепков



Для полного высушивания слепков из
гидроколлоида можно использовать
специальное крепление фирмы Duerr,
номер заказа 6040-993-00.

- Установить крепление для слепков **15** в
приборе Hugojet, на самой передней стенке.
После дезинфекции можно вставить части в
крепление.

