



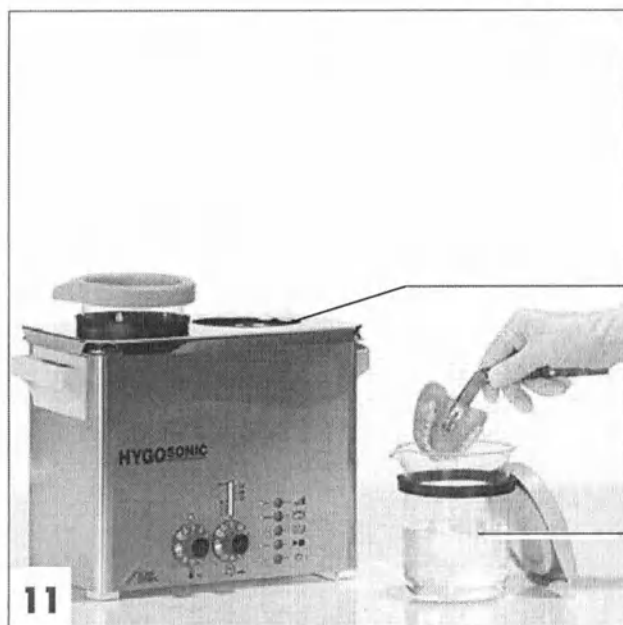

11

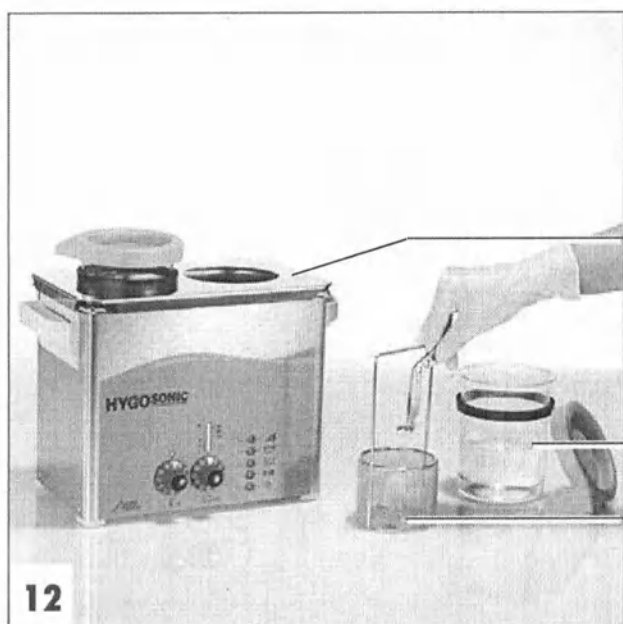

11

12

13

- Дезинфицирующие и очищающие средства (например, ID 213) добавляются в воду по потребности. Соблюдайте указания производителей данной продукции!
- Материал, подлежащий дезинфекции и очистке, положить во вставную корзину при помощи захвата для инструментов. Вес заполненной корзины не должен превышать 1 кг, иначе возникает опасность перегрузки!
- Вставить корзину в аппарат Hygosonic.
- Закрыть крышку.
- Далее действовать по пунктам 10.2 / 10.3

12 10.1.2 Дезинфекция и очистка в химическом стакане

Дезинфекция и очистка, например, **кислотами или сильно щелочными растворами** производится только в химическом стакане (12).

- Растворы (например, MD 530) наливать в химический стакан.
- Очищаемые предметы положить в химический стакан (12).
- Установить крышку-вставку с отверстиями для химических стаканов (11).
- Химический стакан, закрытый крышкой, вставить в аппарат Hygosonic.



За счёт равномерного поддержания высокой температуры раствора (макс. 50 °C) может улучшиться результат очистки.

- Далее действовать по пунктам 10.2 / 10.3

10.1.3 Дезинфекция и очистка в погружной корзине

Дезинфекция и очистка **мелких предметов** в погружной корзине (13) производится с использованием химического стакана.

- Налить раствор (например, ID 220) в химический стакан.
- Мелкие предметы положить в погружную корзину при помощи захвата для инструментов.
- Поместить погружную корзину в химический стакан (12).
- Установить крышку-вставку для химических стаканов (11).
- Вставить химический стакан с погружной корзиной в отверстие крышки-вставки Hygosonic.
- Далее действовать по пунктам 10.2 / 10.3