

Общество с ограниченной ответственностью

«ОРТО ПЛЮС»

ИНН 7202253230; КПП 720301001; ОГРН 1137232053155; р/с 40702810738350000171 в Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Россия, 625013, г. Тюмень,
ул. Пермьякова, 16, оф. 7

Телефон: (3452)200-700; 20-90-81
м. 8-904-463-05-04
E-mail: Ortoplus72@mail.ru

ОКПД2: 32. 50.22.125

«УТВЕРЖДАЮ»


Директор ООО «Орто +»

Новикова Л.Г.

« 20 » _____ 2015 г.



Инструкция по применению

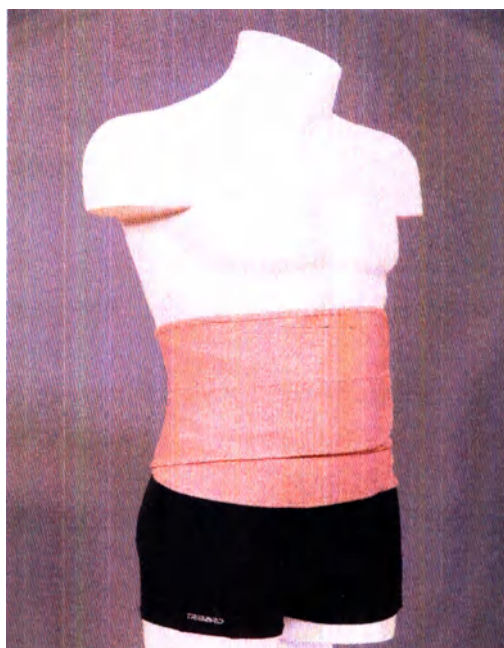

Бандаж послеоперационный (2-полосный) Артикул: ППО;

Бандаж поддерживающий Артикул: ППД;

Бандаж послеоперационный расширенный Артикул: ППО1

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Бандажи обеспечивают среднюю степень фиксации, полужесткие, нулевого класса компрессии и поддерживают грудную клетку либо переднюю брюшную стенку.

Показания к применению:

- Профилактика образования послеоперационных грыж;
- Поддержка передней брюшной стенки.

Отличий по применению в зависимости от артикулов нет.

Обеспечивает:

- фиксацию брюшной стенки, грудной клетки;
- оптимальные условия для заживления послеоперационной раны и формирования послеоперационных рубцов;
- профилактику развития послеоперационных грыж;

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач.

Противопоказания:

- Локальные (в области применения бандажа) дерматиты и гнойничковые инфекции кожи;
- Беременность;
- Диафрагмальные грыжи;
- Невправимые грыжи брюшной стенки;
- Синдром портальной гипертензии;
- Индивидуальная непереносимость материалов.

Предупреждения: ВНИМАНИЕ!

- Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием бандажа необходимо проконсультироваться у врача;

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения бандажа.


Инструкция бандажа послеоперационного (2-х полосного) ППО

Бандаж послеоперационный, поддерживающий

два ребра жесткости, состоит из

следующих элементов:

1. Внутренний фиксирующий пояс изготовлен из прочного, эластичного полотна с высокой износостойкостью и с застежкой-липучкой «молния-застежка».

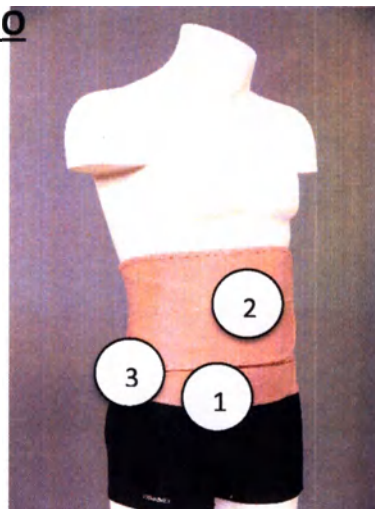

2. Наружный фиксирующий пояс изготовлен из прочного, эластичного полотна с высокой износостойкостью и с застежкой-липучкой «Велькро».
3. Ребра жесткости для предотвращения скручивания бандажа.

Порядок надевания:


Бандаж рекомендуется одевать, лежа на спине, на футболку или майку из хлопка.

1. Застегнуть внутренний фиксирующий пояс с захватом на 2-3см. под животом;
2. Застегнуть наружный фиксирующий пояс с захватом на 2-3см. над внутренним фиксирующим поясом.

Конструкция бандажа ППО1

Бандаж послеоперационный, поддерживающий, с двумя ребрами жесткости, состоит из следующих элементов:

1. Фиксирующий пояс изготовлен из прочного, эластичного полотна с высокой износостойкостью и с застежкой-липучкой «Велькро».
2. Ребра жесткости для предотвращения скручивания бандажа.

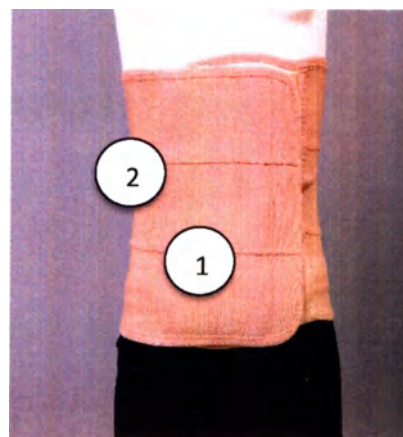


Порядок надевания:

1. Бандаж рекомендуется одевать, лежа на спине, на футболку или майку из хлопка.
2. Застегнуть фиксирующий пояс с захватом на 2-3см. спереди;

Конструкция бандажа послеоперационного (2-х полосного) ППД

Бандаж послеоперационный, поддерживающий, с двумя ребрами жесткости, состоит из следующих элементов:

1. Внутренний фиксирующий пояс изготовлен из прочного, эластичного полотна, проницаемого для воздуха и влаги с высокой износостойкостью и с застежкой-липучкой «Велькро».
2. Наружный фиксирующий пояс изготовлен из прочного, эластичного полотна, проницаемого для воздуха и влаги с высокой износостойкостью и с застежкой-липучкой «Велькро».
3. Ребра жесткости для предотвращения скручивания бандажа.

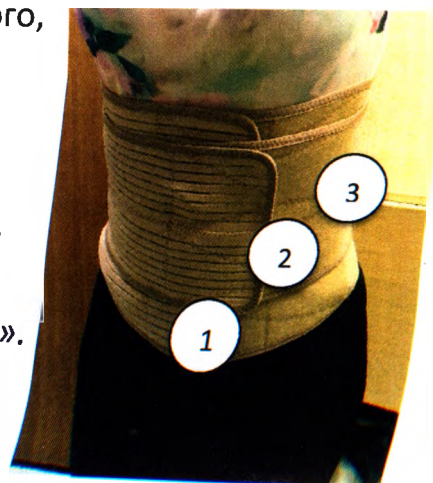

Порядок надевания:

Бандаж рекомендуется одевать, лежа на спине, на футболку или майку из хлопка.

1. Застегнуть внутренний фиксирующий пояс с захватом на 2-3см. под животом;
2. Застегнуть наружный фиксирующий пояс с захватом на 2-3см. над внутренним фиксирующим поясом.

Правила подбора:

Для корректного подбора бандажей ППО; ППО1; ППД необходимо измерить сантиметровой лентой окружность талии.

Согласно полученным результатам подобрать бандаж по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Объем талии	Размер
65-75 (плюс 5 см)	S
75-85 (плюс 5 см)	M
85-95 (плюс 5 см)	L
95-105 (плюс 5 см)	XL
105-115 (плюс 5 см)	XXL
115-125 (плюс 5 см)	XXXL

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Правила ухода.

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40° С. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пароваривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/ химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Изделия со съемными или отстегивающимися каркасами, шинами, ребрами жесткости или пружинами: отсоединять данные съемные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия их следует вернуть обратно.



состав изделия: Полиэстер 93 %; ПЭНД 4%; полиэфир 1%; нейлон 2%

рекомендации по применению:

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

условия хранения:

Изделие должно храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

условия утилизации:

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

срок годности:

Срок годности не ограничен.

Возможность использования биндажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом.

Не допускается прекращение использования биндажа без согласования с лечащим врачом.

гарантийный срок службы:

12 месяцев с момента продажи биндажа при соблюдении инструкции.

гарантийными случаями не являются:

Механические повреждения (включая случайные);

Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;

Дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;

Несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

комплектность:

Биндаж послеоперационный (2-полосный) Артикул: ППО; инструкция по применению, маркировка.

Биндаж поддерживающий Артикул: ППД; инструкция по применению, маркировка.

Биндаж послеоперационный расширенный Артикул: ППО1; инструкция по применению, маркировка.

производитель: ООО «ОРТО +»

Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Котовского, 52б. Тел.: (3452) 200-700; 20-90-81

для корреспонденции: Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Котовского, 52б

г.р. Адрес: Россия, г. Тюмень, ул. Пермякова, 16-7

сайт: www.ortoplus72.ru

Изделия компрессионные эластичные лечебно-профилактические в вариантах исполнения по
ГОСТ 9396-001-27391098-2015»

ГОСТ 15150, ГОСТ 31508, ГОСТ Р 50444

Дата изготовления: май 2015 г.

Прошнуровано, пронумеровано
И скреплено
печатью 6 (шесть) листов

ООО «ОРТО ПЛЮС»

Директор

Новикова Д. Е.

М.П.



Общество с ограниченной ответственностью

«ОРТО ПЛЮС»

ИНН 7202253230; КПП 720301001; ОГРН 1137232053155; р/с 40702810738350000171 в Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Россия, 625013, г. Тюмень,
ул.Пермякова, 16, оф. 7

Телефон: (3452)200-700; 20-90-81
м. 8-904-463-05-04
E-mail: Ortoplus72@mail.ru

ОКПД2: 32.50.22.125

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ОРТО +»

Новикова Л.Г.

«20» _____ 2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Корсеты пояснично-крестцовые

АРТИКУЛ: КПК-25; КПКД-25

Свойства товара (оказываемые эффекты)

Корсет пояснично –крестцовый полужесткий с шестью ребрами жёсткости и дополнительными затяжками, нулевой класс компрессии применяется при необходимости средней степени фиксации поясничного отдела позвоночника, при заболеваниях, после травм и операций, а также для стабилизации связочно-суставного аппарата, уменьшения нагрузки, устранении дисбаланса паравертебральных мышц в поясничном отделе и уменьшении нагрузки на мышцы спины.

Показания к применению:

- острый и хронический болевой синдром в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, на фоне:
 - радикулита, корешкового синдрома;
 - локализованного остеохондроза;
 - грыж и протрузий межпозвонковых дисков;
 - смещений позвонков.
- Функциональная терапия при болях в пояснице в комплексе с мануальной терапией, массажем, лечебной гимнастики, медикаментозными методами лечения;
- Профилактика травм и обострения заболеваний

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения корсета назначает лечащий врач.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Противопоказания:

- беременность;
- невправимые грыжи брюшной стенки. свищи;
- синдром портальной гипертензии;
- диафрагмальные грыжи.
- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения корсета.

Предупреждения:

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

В случаях гнойных заболеваний кожи или заболеваний кожи в области применения корсета необходима консультация лечащего врача.


Людам с особо чувствительной кожей следует надевать корсет на нижнее белье, плотно прилегающее к телу.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться у врача о возможности дальнейшего применения корсета.

Конструкция корсета пояснично-крестцового КПК-25, КПКД-25

Корсеты ортопедические с шестью ребрами жесткости и дополнительными затяжками состоит из следующих элементов:

1. Фиксирующий пояс изготовлен из прочного, эластичного полотна с высокой износостойкостью и с застежкой-липучкой «Велькро».
2. Дополнительные затяжки (ленты усиления)

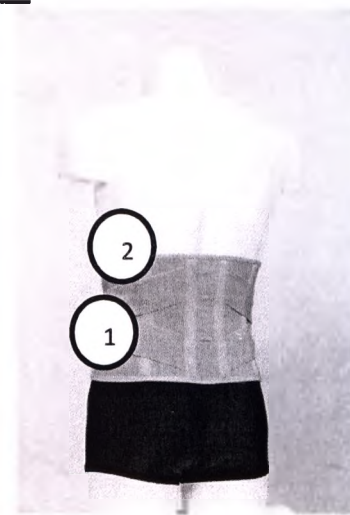

Порядок надевания:

Корсет рекомендуется одевать, лежа на спине, на футболку или майку из хлопка.

1. Застегнуть корсет с помощью липучки- застежки «Велькро» с захватом на 2-3 см.
3. Зафиксировать корсет дополнительными затяжками (лентами усиления).

Правила подбора

Для корректного подбора корсета пояснично-крестцового полужесткого с пластиковыми ребрами и дополнительными затяжками необходимо измерить сантиметровой лентой (плотно, но не утягивая) окружность талии.

Согласно полученным данным подобрать корсет по таблице подбора размеров + 5 см.

Размер	Окружность талии, см
S	65-75
M	75-85
L	85-95
XL	95-105
XXL	105-115
XXXL	115-125

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корсет. Важно, чтобы корсет был удобен.

Отличия по применению в зависимости от артикула нет.

Правила ухода.

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40° С. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстегивающимися каркасами, шинами, ребрами жесткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия их следует вернуть обратно.



Состав изделия: : Полиэстер 93 %; ПЭНД 4%; полиэфир 1%; нейлон 2%

Рекомендации по применению:

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Условия хранения:

Корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не ограничен.

Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом.

Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсета. Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.

Комплектность:

Корсет пояснично-крестцовый арт. КПК-25, инструкция по применению, маркировка
Корсет пояснично-крестцовый арт. КПКД-25, инструкция по применению, маркировка

Гарантийный срок эксплуатации:

6 месяцев с момента продажи бандажа при соблюдении инструкции.

Гарантийный срок хранения:

5 лет с момента изготовления

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Производитель: ООО «ОРТО +»

Россия, 625026, г.Тюмень, ул. Котовского, 52б. Тел.: (3452) 200-700; 20-90-81

Для корреспонденции: Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Котовского, 52б

Юр. Адрес: Россия, г. Тюмень, ул. Пермякова, 16-7

Сайт: www.ortoplus72.ru

«Изделия компрессионные эластичные лечебно-профилактические в вариантах исполнения по ТУ 9396-001-27391098-2015»

По ГОСТ 15150, ГОСТ 31508, ГОСТ Р 50444

Дата изготовления: май 2015 г.

Прошнуровано, пронумеровано
И скреплено печатью 2 (два) листов

ООО «ОРТО ПЛЮС»
Директор _____
Новикова Л.И.
М.П.



Общество с ограниченной ответственностью

«ОРТО ПЛЮС»

ИНН 7202253230; КПП 720301001; ОГРН 1137232053155; р/с 40702810738350000171 в Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Россия, 625013, г. Тюмень,
ул.Пермякова, 16, оф. 7

Телефон: (3452)200-700; 20-90-81
м. 8-904-463-05-04
E-mail: Ortoplus72@mail.ru

ОКПД2:32.50.22.125

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Орто +»

Новикова Л.Г.

« 20 » Июль 2015 г.

Инструкция по применению



Корсеты на грудной отдел позвоночника (Реклинатор)

АРТИКУЛ: РК-25; РКД-25

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Реклинаторы облегченные, обеспечивают легкую степень фиксации, полужесткие, нулевой степени компрессии.

Механизм коррекции сочетает горизонтальную и вертикальную реклинацию за счет натяжения наплечных лямок корректоров. Корсеты на грудной отдел позвоночника (Реклинатор) обеспечивают разведение ключиц, сведение и опущение лопаток за счет наплечных лямок и ребер жесткости, расположенных вдоль позвоночника в проекции поперечных отростков позвонков.

Отличии по применению в зависимости от артикулов нет.

Дополнительные эффекты:

- компенсируют дефицит опорности;
- снижают нагрузки на межпозвонковые диски;
- разгружают позвонки и предохраняют проблемные отделы позвоночника.

Показания к применению:

- нарушения осанки;
- искривления грудного отдела позвоночника (кифозы, сколиозы I-II степени);
- профилактика сутулости, при сидячей работе;
- закрепление достигнутых эффектов после процедур массажа и мануальной терапии.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения корректора осанки назначает лечащий врач.

Рекомендованный режим ношения корректора осанки:

- начиная с 1-1,5 часов в первый день, постепенно, в течение 2-недель, доводя до 6-ти часового ношения в день;
- постоянное в течение 4-х и 6-ти часов в день (в зависимости от возраста ребенка) в течение 2-х месяцев;
- постепенно в течение 2-х недель снизить до 1-1,5 часов;
- по происшествии 3-х месяцев обязательно проконсультироваться с лечащим врачом!

Предупреждения:

ВНИМАНИЕ! Не следует затягивать корректор осанки слишком сильно, во избежание нарушения дыхания.

Конструкция корсетов на грудной отдел позвоночника (Реклинатор)

состоит из следующих элементов:

1. Спинка изделия с застежкой «Велькро» на поясном ремне
2. Эластичные ремни с застежкой «Велькро» на плечевых лямках;
3. Пластиковые ребра жесткости

Порядок надевания:

Расположить спинку изделия по спине в области грудного отдела позвоночника в соответствии с рекомендациями врача.

Зафиксировать плотно, но не утягивая, нижние эластичные ремни вокруг пояса застежками «Велькро». Произвести

коррекцию осанки и зафиксировать туловище и плечи в правильном положении верхними эластичными ремнями, охватывающими области надплечий, далее чуть ниже подмышечных ямок с перекрещиванием на спине и фиксацией друг к другу застежкой «Велькро» на передней поверхности туловища. Не стоит чрезмерно сильно утягивать ремни во избежание нарушений кровообращения.

Правила подбора:


Изделия требуют индивидуальной примерки. Если при примерке ощущается выраженное давление верхних ремней в области подмышечных впадин, рекомендуется использовать изделие на один размер больше.

Таблица подбора размеров:

Корсет на грудной отдел позвоночника (Реклинатор) арт. РК-25; РКД-25	
Размер	Окружность талии (см)
XS	74-79
S	80-88
M	89-101
L	102-114
XL	115-126

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корректор осанки. Важно, чтобы корсет на грудной отдел позвоночника был удобен.

Правила ухода: Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40 С. Обращаться с осторожностью. Не применять

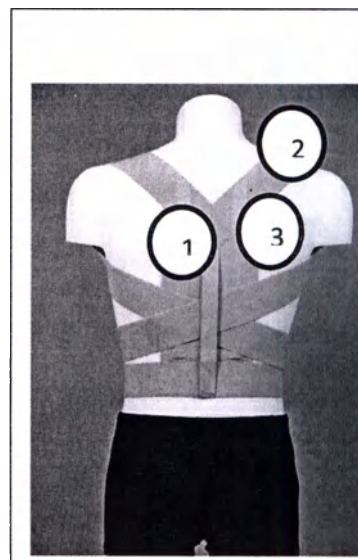

хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съемными и отстегивающимися каркасами, шинами, ребрами жесткости или шарнирами: отсоединить данные съемные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



Состав изделия: Полиэстер 93 %; ПЭНД-4%; полиэфир-1%, нейлон 2%.

Рекомендации по применению:

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Условия хранения:

Корсет на грудной отдел позвоночника должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Корсет на грудной отдел позвоночника (Реклинатор) утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не ограничен.

Возможность использования корсета на грудной отдел позвоночника (Реклинатор) дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом.

Не допускается прекращение использования корсета на грудной отдел позвоночника (Реклинатор) без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсета на грудной отдел позвоночника (Реклинатор). Не допускается эксплуатация поврежденного корректора осанки.

Комплектность:

Корсет на грудной отдел позвоночника артикул: РК-25; инструкция по применению, маркировка.

Корсет на грудной отдел позвоночника артикул: РКД-25; инструкция по применению, маркировка.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи корсета на грудной отдел позвоночника (Реклинатор) при соблюдении инструкции.

Гарантийный срок хранения:

5 лет с момента изготовления

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Производитель: ООО «ОРТО +»

Россия, 625026, г.Тюмень, ул. Котовского, 52б. Тел.: (3452) 200-700; 20-90-81

Для корреспонденции: Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Котовского, 52б

Юр. Адрес: 325013 Россия, г. Тюмень, ул. Пермякова, 16-7

Сайт: www.ortoplus72.ru

«Изделия компрессионные эластичные лечебно-профилактические в вариантах исполнения по ТУ 9396-001-27391098-2015»

По ГОСТ 15150, ГОСТ 31508, ГОСТ Р 50444

Дата изготовления: май 2015 г.

Прошнуровано, пронумеровано
И скреплено печатью 5 (пять) листов

ООО «ОРТО ПЛЮС»

Директор _____

Новикова Д.Г.

М.П.



Общество с ограниченной ответственностью

«ОРТО ПЛЮС»

ИНН 7202253230; КПП 720301001; ОГРН 1137232053155; р/с 40702810738350000171 в Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Россия, 625013, г. Тюмень,
ул.Пермякова, 16, оф. 7

Телефон: (3452)200-700; 20-90-81
м. 8-904-463-05-04
E-mail: Ortoplus72@mail.ru

ОКПД 2: 32.50.22.125

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Орто +»

Новикова Л.Г.

« 20 » _____ 2015 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Корсеты реклинирующие

АРТИКУЛ: КРК-25; КРКД-25

Свойства товара (оказываемые эффекты)

Корсет реклинирующий полужесткий с пластмассовыми ребрами и дополнительными затяжками, нулевой степени компрессии применяется при необходимости средней степени фиксации грудного и поясничного отдела позвоночника, при заболеваниях, после травм и операций, а также для стабилизации связочно-суставного аппарата, уменьшения нагрузки, устранения дисбаланса в грудном и поясничном отделе и нормализации положения позвонков при смещениях.

Показания к применению:

- Нарушения осанки;
- Искривления грудного отдела позвоночника (кифозы, сколиозы I–II степени);
- Профилактика сутулости при сидячей работе;
- Закрепление эффекта после процедуры массажа или мануальной терапии;
- Профилактика переломов при остеопорозе, опухолях и туберкулезном процессе.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения корсета назначает лечащий врач.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Противопоказания:

- беременность;
- не вправимые грыжи брюшной стенки, свищи;
- синдром портальной гипертензии;
- диафрагмальные грыжи;

Индивидуальная непереносимость материалов;

- местные заболевания кожи.

Предупреждения:

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

В случаях гнойных заболеваний кожи или заболеваний кожи в области применения корсета необходима консультация лечащего врача.


Людям с особо чувствительной кожей следует надевать корсет на нижнее белье, плотно прилегающее к телу.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться у врача о возможности дальнейшего применения корсета.

Конструкция корсета реклинирующего КРК-25, КРКД-25:

Корсеты реклинирующие ортопедические состоят из следующих элементов:

1. Реклинатор (спинка) изготовлен из прочного, эластичного полотна с высокой износостойкостью с двумя ребрами жесткости и плечевые лямки с застежкой-липучкой «Велькро»
2. Фиксирующий пояс изготовлен из прочного, эластичного полотна с высокой износостойкостью с шестью ребрами жесткости и с застежкой-липучкой «Велькро»
3. Дополнительные затяжки (ленты усиления).

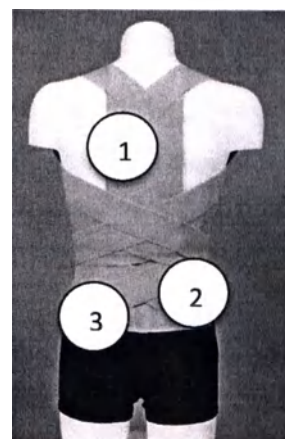

Порядок надевания:

Корсет рекомендуется одевать, лежа на спине, на футболку или майку из хлопка.

1. Застегнуть корсет с помощью липучки- застежки «Велькро»
2. Зафиксировать корсет дополнительными затяжками (лентами усиления);
3. Разворот плеч поддерживают лямки с застежками «Велкро».

Правила подбора

Для корректного подбора корсета реклинирующего полужесткого с пластиковыми ребрами и дополнительными затяжками необходимо измерить сантиметровой лентой (плотно, но не утягивая) окружность талии.

Согласно полученным данным подобрать корсет по таблице подбора размеров + 5 см.

Размер	Окружность талии, см
S	65-75
M	75-85
L	85-95
XL	95-105
XXL	105-115
XXXL	115-125

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить корсет. Важно, чтобы корсет был удобен.

Отличия по применению в зависимости от артикула нет.

Правила ухода.

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40° С. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съемными или отстегивающимися каркасами, шинами, ребрами жесткости или шарнирами: отсоединять данные съемные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия их следует вернуть обратно.



Состав изделия: Полиэстер 93 %; ПЭНД-4%, полиэфир 3%, нейлон 2%.

Рекомендации по применению:

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Условия хранения:

Корсет должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Корсет утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не ограничен.

Возможность использования корсета дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом.

Не допускается прекращение использования корсета без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции корсета. Не допускается эксплуатация поврежденного корсета.

Срок годности:

Срок годности не установлен.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи корсета при соблюдении инструкции.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Комплектность:

Корсет реклинирующий арт. КРК-25, инструкция по применению, маркировка
Корсет реклинирующий арт. КРКД-25, инструкция по применению, маркировка

Производитель: ООО «ОРТО +»

Россия, 625026, г.Тюмень, ул. Котовского, 52б. Тел.: (3452) 200-700; 20-90-81

Для корреспонденции: Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Котовского, 52б

Юр. Адрес: 625013 Россия, г. Тюмень, ул. Пермякова, 16-7

Сайт: www.ortoplus72.ru

«Изделия компрессионные эластичные лечебно-профилактические в вариантах исполнения по ТУ 9396-001-27391098-2015»

По ГОСТ 15150, ГОСТ 31508, ГОСТ Р 50444

Дата изготовления: май 2015 г.

Прошнуровано, пронумеровано
И скреплено печатью 5 (пять) листов

ООО «ОРТО ПЛЮС»

Директор

Новикова Л.Г.

М.П.



Общество с ограниченной ответственностью

«ОРТО ПЛЮС»

ИНН 7202253230; КПП 720301001; ОГРН 1137232053155; р/с 40702810738350000171 в Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Россия, 625013, г. Тюмень,
ул.Пермякова, 16, оф. 7

Телефон: (3452)200-700; 20-90-81

м. 8-904-463-05-04

E-mail: Ortoplus72@mail.ru

ОКПД 2: 32.50.22.125

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ОРТО +»

Новикова Л.Г.

« 20 » _____ 2015 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Бандаж на шейный отдел позвоночника

АРТИКУЛ: БШО

Свойства и оказываемые эффекты:

- Стабилизация и разгрузка шейного отдела позвоночника;
- Ограничение подвижности в шейном отделе позвоночника;
- Фиксация положения головы и шеи в положении, снижающем нагрузки на мышцы и связочный аппарат;
- Уменьшение напряжения мышечных групп шеи и надплечья;
- Улучшение кровообращения головы и шеи;
- Легкий теплосберегающий эффект тканей шейного отдела.

Относительные ограничения и противопоказания к применению бандажа на шейный отдел позвоночника, артикул: БШО

- Индивидуальная непереносимость материалов бандажа на шейный отдел позвоночника;
- Острые заболевания кожи в области применения изделия;
- Открытые раны в области применения изделия.

Показания к применению:

- Болевые ощущения в шее;
- Комплексное лечение головной боли, головокружения;
- Комплексное лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника;
- Закрепление эффекта после процедуры массажа или мануальной терапии;
- Профилактика заболеваний шейного отдела позвоночника при длительном напряжении мышц шеи и надплечий (при работе за компьютером, при длительных поездках в транспорте и др.);
- Шейный миозит.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Предупреждения:

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

В случаях гнойных заболеваний кожи или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача.

Возможные побочные действия:

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться у врача о возможности дальнейшего применения бандажа.

Конструкция бандажа БШО:

Бандаж на шейный отдел позвоночника состоит из следующих элементов:

- Наполнитель
- Основа

Способ применения бандажа:

Бандаж на шейный отдел позвоночника, арт.: БШО размещают у передней поверхности шеи так, чтобы подбородок расположился в выемке по середине верхнего края бандажа. Застегивают на задней поверхности шеи с помощью застежки- липучки «Велькро», обеспечив плотное прилегание бандажа к коже по всей окружности шеи.

Правила подбора

Для корректного подбора бандажа на шейный отдел позвоночника, арт.: БШО необходимо измерить сантиметровой лентой окружность шеи у ее основания. Для определения высоты шеи необходимо в вертикальном положении головы измерить расстояние от угла нижней челюсти до ключицы.

В соответствии с полученными данными подобрать нужный размер по таблице.

Размер	Окружность шеи, см	Высота шеи, см.
XXS	До 25	4±1
XS	До 25	5±1
S	30-35	8±1
M	35-45	9±1
L	35-45	10±1
XL	35-45	11±1

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Правила ухода.

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 30° С. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съемными или отстегивающимися каркасами, шинами, ребрами жесткости или шарнирами: отсоединять данные съемные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия их следует вернуть обратно.



Состав:

Наполнитель: 100% пенополиуретан; основа: 90% вискозы, 10% лайкры.

Рекомендации по применению:

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Условия хранения:

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

Гарантийный срок эксплуатации:

6 месяцев с момента продажи бандажа при соблюдении инструкции.

Гарантийный срок хранения:

5 лет с момента изготовления

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;

-дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;

-несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом.

Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

Комплектность:

Бандаж на шейный отдел позвоночника арт. БШО, инструкция по применению, маркировка.

Производитель: ООО «ОРТО ПЛЮС»

Россия, 625026, г.Тюмень, ул. Котовского, 52б. Тел.: (3452) 200-700; 20-90-81

Для корреспонденции: Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Котовского, 52б

Юр. Адрес: 625013 Россия, г. Тюмень, ул. Пермякова, 16-7

Сайт: www.ortoplus72.ru

«Изделия компрессионные эластичные лечебно-профилактические в вариантах исполнения по ТУ 9396-001-27391098-2015»

По ГОСТ 15150. ГОСТ 31508. ГОСТ Р 50444

Дата изготовления: май 2015 г.

Прошнуровано, пронумеровано
И скреплено печатью 5 (пять) листов

ООО «ОРТО ПЛЮС»

Директор _____

М.П.



Общество с ограниченной ответственностью

«ОРТО ПЛЮС»

ИНН 7202253230; КПП 720301001; ОГРН 1137232053155; р/с 40702810738350000171 в Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Россия, 625013, г. Тюмень,
ул.Пермякова, 16, оф. 7
E-mail: Ortoplus72@mail.ru

Телефон: (3452)200-700; 20-90-81
м. 8-904-463-05-04

ОКПД 2: 32.50.22.125

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Орто +»

Новикова Л.Г.

« 20 » 2015 г.

Инструкция по применению



Бандаж на голеностопный сустав

АРТИКУЛ: БГ

Свойства товара (оказываемые эффекты):

Бандаж на голеностопный сустав полужесткий, нулевой степени компрессий, обеспечивают легкую степень фиксации и поддержку голеностопного сустава.

Показание к применению:

- Травмы, ушибы, растяжения связок суставов;
- Профилактика развития и обострений воспалительных заболеваний суставов (артритов, тендинитов, тендовагинитов);
- Болевой синдром при хронических дегенеративных заболеваниях суставов (артрозах и остеоартрозах);
- Профилактика травм при занятиях спортом, производственных нагрузках на сустав, особенно в холодную или сырую погоду.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач.

Противопоказания:

- Локальные (в области применения бандажа) дерматиты и гнойничковые инфекции кожи;

Предупреждения: ВНИМАНИЕ!

- Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием бандажа необходимо проконсультироваться у врача;
- При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться с врачом о возможности дальнейшего применения бандажа.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость материала.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Объём г/стопа	Размер
42 ± 1	M
47 ± 1	L
52 ± 1	XL

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Правила ухода.

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40° С. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/ химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Для изделий со съёмными или отстегивающимися каркасами, шинами, ребрами жесткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия их следует вернуть обратно.



Состав изделия: Полиэстер 97%; полиэфир 1%; нейлон 2%

Рекомендации по применению:

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Условия хранения:

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы:

Срок службы не ограничен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом.

Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок:

6 месяцев с момента продажи бандажа при соблюдении инструкции.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Производитель: ООО «ОРТО +»

Россия, 625026, г.Тюмень, ул. Котовского, 52б. Тел.: (3452) 200-700; 20-90-81

Для корреспонденции: Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Котовского, 52б

Юр. Адрес: Россия, г. Тюмень, ул. Пермякова, 16-7

Сайт: www.ortoplus72.ru

«Изделия компрессионные эластичные лечебно-профилактические в вариантах исполнения по ТУ 9396-001-27391098-2015»

По ГОСТ 15150, ГОСТ 31508, ГОСТ Р 50444

Дата изготовления: май 2015 г.

и скреплено печатью 4 листа листов

ООО «ОРТО ПЛЮС»

Директор

Новикова Л.Г.

М.П.



Общество с ограниченной ответственностью

«ОРТО ПЛЮС»

ИНН 7202253230; КПП 720301001; ОГРН 1137232053155; Р/С 40702810738350000171 В ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК» К/С 30101810100000000964; БИК 046577964

Россия, 625013, г. Тюмень,
Ул. Пермякова, дом 16, оф.7

ОКПД2: 32.50.22.125

Телефоны: (3452) 200-700; 20-90-81
моб. +7-904-463-05-04
E-mail: Ortoplus72@mail.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Орто +»

Л.Г. Новикова

«10» _____ 2015г.



Инструкция по применению

Бандаж для поддержки верхней конечности (косынка); Артикул: БПВК

Свойства товара (оказываемые эффекты)

Бандаж для поддержки верхней конечности (косынка) арт.БПВК полужесткий, нулевой степени фиксации, предназначен для поддержки плеча и руки и широко используется как самостоятельный способ иммобилизации, так и в сочетании с другими бандажами или ортезами на суставы верхних конечностей или традиционными гипсовыми повязками.

Простая и эффективная конструкция бандажа обеспечивает эффективную разгрузку и фиксацию суставов в поддерживающей опорной муфте и оптимизирует положение руки.

Показания к применению:

- Ушибы, реабилитация после подвывихов, вывихов и переломов костей руки;
- Частичные повреждения связок плечевого сустава, акромиально-ключичного сочленения, локтевого сустава;
- Поддержание руки при острых и хронических воспалительных заболеваниях суставов руки (артриты, артрозы плечевого сустава, плече-лопаточные периартриты);
- Парезы и параличи руки.

Режим и сроки ношения:

Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

Предупреждения:

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

В случаях гнойных заболеваний кожи или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача.

Возможные побочные действия:

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно проконсультироваться у врача о возможности дальнейшего применения корсета.

Преимущества и особенности:

Материал муфты бандажа представляет собой прочный материал с высокой влаго и воздухопроницаемостью, наплечные и поясной ремни выполнены из мягкой прочной ленты, обеспечивая комфорт ношения;

Лекала в области локтевого и лучезапястного суставов обеспечивают хорошее прилегание бандажа к руке;

Длина ремней легко регулируется благодаря наличию застежки "Карабин";

Подбор размера:

Для правильного выбора подходящего размера плечевого бандажа БПВК необходимо сантиметровой лентой измерить длину надплечья (от локтя до начала мизинца). Далее воспользоваться размерной таблицей, представленной ниже:

Размер	S	M	L	XL
Длина предплечья	30-33 см	33-36 см	36-39 см.	40-42 см.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Правила ухода.

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40° С. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Сухая чистка/ химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.



Состав изделия:

Хлопок 95%, ПВД 2%, полиэфир 1%, нейлон 2%

Рекомендации по применению:

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Условия хранения:

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Условия утилизации:

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

Срок службы не ограничен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом.

Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом.

Гарантийный срок эксплуатации:

6 месяцев с момента продажи бандажа при соблюдении инструкции.

Гарантийный срок хранения:

5 лет с момента изготовления

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Комплектность:

Бандаж для поддержки верхней конечности (косынка) арт.БПВК , инструкция по применению, маркировка.

Производитель: ООО «ОРТО +»

Россия, 625026, г.Тюмень, ул. Котовского, 526. Тел.: (3452) 200-700; 20-90-81

Для корреспонденции: Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Котовского, 526

Юр. Адрес: Россия, г. Тюмень, ул. Пермякова, 16-7

Сайт: www.ortoplus72.ru

«Изделия компрессионные эластичные лечебно-профилактические в вариантах исполнения по ТУ 9396-001-27391098-2015»

По ГОСТ 15150, ГОСТ 31508, ГОСТ Р 50444

Дата изготовления: май 2015 г.

Прошнуровано, пронумеровано
И скреплено печатью 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 листов

ООО «ОРТО ПЛЮС»

Директор _____

Новикова Л.Г.

М.П.

