

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «ДЕСМО»



А.Н. Алипов

ГЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «АКВАГЕЛЬ - УНИВЕРСАЛ»

Этикетка

ГИЕТ.943129.003 ЭТ.

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

2009г.

Перв. примен.	
Справ. №	

1 Наименование изделия

1.1 Гель универсальный «АКВАГЕЛЬ - УНИВЕРСАЛ» (в дальнейшем - гель) предназначен для обеспечения контакта при ультразвуковом сканировании при исследовании мягких тканей человека и для снижения переходного сопротивления между электродами и контактирующими с ними участками кожи при электрокардиографии, электроэнцефалографии, дефибриляции и электромиостимуляции. в условиях клиник, больниц, диагностических центров, научно - исследовательских институтов медицинского профиля.

2 Технические данные

2.1 Масса геля в потребительской таре не более 5 кг.

2.2 Показатель РН геля находится в пределах от 6 до 8.

2.3 Гель имеет вязкость, обеспечивающую его нерастекаемость на теле пациента.

2.4 Удельное электрическое сопротивление геля ρ в диапазоне частот от 0,05 до 75 Гц находится в пределах от 2000 до 200 Ом · см.

2.5 Затухание ультразвукового сигнала не более: $0,4 \cdot 10^{-2}$ дБ/см – на 2 МГц; $1,5 \cdot 10^{-2}$ дБ/см – на 8 МГц.

3 Обозначение технических условий

3.1 ТУ 9398 - 004- 34340322 - 2009

4 Сведения о приемке

5.1 Приемка геля удостоверяется штампом ОТК в этикетке ГИЕТ.943129.001 на партию.

5.2 Гель соответствует требованиям ТУ 9398 - 004 - 34340322 - 2009

5 Сведения об упаковке

6.1 В ящике - 4 канистры по 5 л;

в коробке – 15 флаконов по 1 л;

Подп. и дата	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл

Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Станкова		<i>Станкова</i>	08.2009
Пров.	Голубев		<i>Голубев</i>	08.2009
Н. контр.	Ландау		<i>Ландау</i>	08.2009

ГИЕТ.943129.003ЭТ

Гель универсальный
«АКВАГЕЛЬ - УНИВЕРСАЛ»
Этикетка

Лит.	Лист.	Листов.
А	2	3
ЗАО «ДЕСМО»		

в коробке — 140 флаконов по 0,05 л.

6 Дата изготовления и номер партии

6.1 Указываются в сопроводительном документе на партию.

7 Указание по эксплуатации

7.1 Гель наносится на кожу пациента и распределяется на поверхности легким разглаживанием.

7.2 В случае повторного исследования гель наносится вторично.

7.3 После окончания исследования гель тщательно удаляется с кожи и поверхности электрода бумажными или марлевыми салфетками.

8 Показания и противопоказания

8.1 Гель рекомендуется применять при ультразвуковом обследовании, электрокардиографии, электроэнцефалографии, дефибрилляции и электромиостимуляции

8.2 Противопоказаний нет.

9 Условия хранения

9.1. Гель хранится в потребительской таре с закрытой пробкой при температуре от плюс 5 до 40° С и относительной влажности 80% при температуре 20° С.

в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

[illegible]

ГИЕТ.943129.003 ЭТ

Лист

3



Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ
ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
Закрытое акционерное общество "ДЕСМО"

(полное наименование в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	0	2	7	8	0	1	5	7	3	9	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации **18 февраля 1993 г.**

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Межрайонной ИФНС России №
17 по Санкт-Петербургу**

7	8	0	2
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП


7	8	0	2	0	7	0	2	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

7	8	0	2	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---


Свидетельство подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений.

Заместитель начальника инспекции

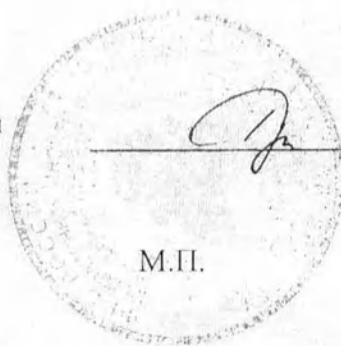

М.П.

Галчунова С.А.

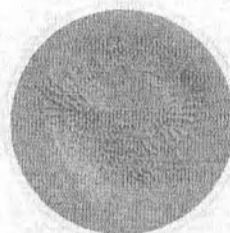

серия 78 № 006617741

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ

16 ДЕК 2010

Санкт-Петербург "16 ДЕК 2010" года я, Суслов
Андрей Юрьевич нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга
свидетельствую верность этой копии с подлинником документа
в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет

Зарегистрировано в реестре за № К-4202
Взыскано госпошлины (по тарифу) 20 руб
Нотариус

