

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «ДЕСМО»

 Л.Н. Алипов
29.01.08

**ГЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«АКВАГЕЛЬ - ЭЛЕКТРО»**

Этикетка

ГИЕТ.943129.001 ЭТ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата
0962	10.02.2008			

2008г.

Перв. примен.
прим. №

Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. №
Подп. и дата
в № подл.
0362

1 Наименование изделия

1.1 Гель для электрокардиографических исследований "АКВАГЕЛЬ-ЭЛЕКТРО" (в дальнейшем - гель) предназначен для снижения сопротивления между электродами и контактирующими с ними участками кожи при электрокардиографии, электроэнцефалографии, дефибрилляции и электромиостимуляции в условиях клиник, больниц, диагностических центров, научно - исследовательских институтов медицинского профиля.

2 Технические данные

- 2.1 Масса геля в потребительской таре не более 5 кг.
2.2 Показатель pH геля находится в пределах от 6 до 8.
2.3 Вязкость геля при градиенте скорости сдвига $6,3 \text{ c}^{-1}$ и температуре $(25 \pm 1) ^\circ\text{C}$ должна быть от 12 до 18 Па·с.
2.4 Удельное электрическое сопротивление геля ρ в диапазоне частот от 0,05 до 75 Гц находится в пределах от 2000 до 200 Ом ·см.

3 Обозначение технических условий

3.1 ТУ 9398 - 002 - 34340322 - 2003

4 Сведения о приемке

- 5.1 Приемка геля удостоверяется штампом ОТК в этикетке ГИЕТ.943129.001 на партию.
5.2 Гель соответствует требованиям ТУ 9398 - 002 - 34340322 - 2003

5 Сведения об упаковке

- 6.1 В ящике - 4 канистры по 5 л;
в коробке - 15 флаконов по 1 л;
в коробке - 20 флаконов по 0,5 л;
в коробке - 70 флаконов по 0,1 л;
в коробке - 140 флаконов по 0,05 л.

Ф.И.О.	Д.И.С.	№ докум.	Подп.
Рязанб.	Станкова	01.2008	
Пров.	Голубев	01.08	
Н. контр.	Лавдау	01.08	

ГИЕТ.943129.001 ЭТ

Гель для электрокардиографических исследований
«АКВАГЕЛЬ - ЭЛЕКТРО»
Этикетка

Лист	Лист	Лист
01	2	3

ЗАО «ДЕСМО»

6 Дата изготовления и номер партии

6.1 Указываются в сопроводительном документе на партию.

7 Указание по эксплуатации

7.1 Гель наносится на кожу пациента и распределяется на поверхности легким разглаживанием.

7.2 В случае повторного исследования гель наносится вторично.

7.3 После окончания исследования гель тщательно удаляется с кожи и поверхности электрода бумажными или марлевыми салфетками.

8 Показания и противопоказания

8.1 Гель рекомендуется применять при обследовании мягких тканей человека.

8.2 Противопоказаний нет.

9 Условия хранения

9.1. Гель хранится в потребительской таре с закрытой пробкой при температуре от плюс 5 до 40° С и относительной влажности 80% при температуре 20° С.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. №	Подп. и дата
2561	10.08.2008			

ГИЕТ.943129.000 ЭТ

Лист

3