

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «ДЕСМО»



Н. Алипов

ГЕЛЬ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ «АКВАГЕЛЬ»

Этикетка

ГИЕТ.943129.000 ЭТ.

Инв. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

2004г.

Перв. примен.				
Справ. №				
Подп. и дата				
Взам. инв. №				
Инв. № дубл				
Подп. и дата				
№ подл.				

1 Наименование изделия

1.1 Гель для ультразвуковой диагностики "АКВАГЕЛЬ" (в дальнейшем - гель) предназначен для обеспечения контакта при ультразвуковом сканировании при исследовании мягких тканей человека в условиях клиник, больниц, диагностических центров.

2 Технические данные

2.1 Масса геля в потребительской таре не более 5 кг.

2.2 Показатель pH геля находится в пределах от 6 до 8.

2.3 Вязкость геля при градиенте скорости сдвига $6,3 \text{ c}^{-1}$ и температуре $(25 \pm 1)^\circ \text{C}$ должна быть от 17 до 24 Па·с.

3 Обозначение технических условий

3.1 ТУ 9398 - 003 - 34340322 - 2007

4 Сведения о приемке

5.1 Приемка геля удостоверяется штампом ОТК в этикетке ГИЕТ.943129.000 на партию.

5.2 Гель соответствует требованиям ТУ 9398 - 003- 34340322 – 2007.

5 Сведения об упаковке

6.1 В коробке - 4 канистры по 5 л;
 в коробке – 15 флаконов по 1 л;
 в коробке - 20 флаконов по 0,5 л;
 в коробке – 40 флаконов по 0,25 л,
 в коробке – 70 флаконов по 0,1 л;
 в коробке – 140 флаконов по 0,05 л.

				ГИЕТ.943129.000 ЭТ						
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Гель для ультразвуковой диагностики «АКВАГЕЛЬ»		Лит.	Лист.	Листов.		
Разраб.	Станкова		<i>[Подпись]</i>			5080	A		2	3
Пров.	Голубев		<i>[Подпись]</i>			5080				
				Этикетка		ЗАО «ДЕСМО»				
Н. контр. Ландав <i>[Подпись]</i> 12.01.14										

ООО ЦИРМИ
INFO@CIRMI.RU
WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6 Дата изготовления и номер партии

6.1 Указываются в сопроводительном документе на партию.

7 Указание по эксплуатации

7.1 Гель наносится на кожу пациента и распределяется на поверхности легким разглаживанием.

7.2 В случае повторного исследования гель наносится вторично.

7.3 После окончания исследования гель тщательно удаляется с кожи и поверхности электрода бумажными или марлевыми салфетками.

8 Показания и противопоказания

8.1 Гель рекомендуется применять при обследовании мягких тканей человека.

8.2 Противопоказаний нет.

9 Условия хранения

9.1. Гель хранится в потребительской таре с закрытой пробкой при температуре от плюс 5 до 40° С и относительной влажности 80% при температуре 20° С.

Ин. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата