



Общество с ограниченной ответственностью

420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Галеева 12 Тел./факс: (843)272-10-04
ИНН 1660033075 КПП 166001001 ОКПО 48675428 ОКОНХ 19320
Р/счет: 40702810962190100997 в банке «Татарстан» № 8610 СБ РФ г. Казани БИК 049205603
К/счет: 30101810600000000603 СОСБ № 6669/0000 СБ РФ г. Казани.



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Опора»

Штопоров Ю.В.
2010 г.

Бандажи грыжевые Памятка по пользованию

Бандажи грыжевые изготавливается по ТУ 9396-087-55220088-2007 (далее бандаж).
Бандаж предназначен для реабилитации в послеоперационный период на органах брюшной полости, а также для поддержания органов брюшной полости при ослаблении брюшной стенки живота.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандажи БН5-07, БН5-08, БН5-25, БН5-26, БН5-29 на жестком поясе с пружинами металлическими изготовлены: верх - из кожи хромовой для обуви; подкладка - из кожи хромовой для протезов, замши, фланели; пружины бандажной.

Бандажи БН5-23, БН5-24, БН5-27, БН5-28 на поясе эластичном изготовлены из ленты эластичной протезной шириной 40 мм.

Пелот состоит из крышки металлической с тремя лапками для удержания подушки из микроцеистого полиуретана.

На пелот надевается чехол трикотажный.

Бандаж БН5-31 и БН5-32 должен состоит из пояса эластичного из пластины резино-тканевой «Трикор» (пассив) с застежкой текстильной «Контакт» с подбедренником и пелотом.

Также допускается изготавливать пояс бандажей БН5-31 и БН5-32 из ткани «Ортопирен» или из ленты эластичной «В008» производства Германия.

Пелоты вставляются в карманы, настроенные с внутренней стороны бандажа из

хлопчатобумажного трикотажного полотна.

Карманы для пелотов соответствует размеру пелотов и не имеют морщин и складок.

Поверхность подушек пелотов имеет равномерную выпуклую форму.

На поверхности подушек пелотов из микроячеистого полиуретана имеются вкрапления высотой более 1 мм и следы от их выпадения глубиной более 0,5 мм, площадью более 2 мм² и общей площадью более 20 мм².

Пружина металлическая и пояс эластичный обеспечивают полное прилегание пелота и создают необходимое давление для закрывания грыжевого выпячивания.

Подбедренник бандажей БН5-07, БН5-08, БН5-25, БН5-26, БН5- 29 изготовлен из ленты хлопчатобумажной «саржевой» шириной 20 мм.

Подбедренник бандажей БН5-23, БН5-24, БН5-27, БН5-28, БН5-31, БН5-32 изготовлен из ленты эластичной шириной 20 мм.

Допускается подкладку бандажа на жестком поясе изготавливать из двух частей.

Место соединения пелота с поясом со стороны подкладки является плавным, без складок и напусков.

Фиксация бандажей: БН5-07 и БН5-25 на теле потребителя осуществляется с помощью кнопки, расположенной в центре крышки, пелота и штрипки, а в БН5-08, БН5-26 и БН5-29 правая и левая половины бандажа соединены и закреплены штрипкой фигурной на первое от места пришива штрипки отверстие.

Фиксация бандажей БН5-23, БН5-24, БН5-27, БН5-28 на теле потребителя осуществляется с помощью застежки на крючке и отверстия в крышке пелота и подбедренников.

Фиксация бандажа БН5-31 и БН5-32 на теле пользователя осуществляется с помощью застежки текстильной «Контакт».

Обрезанные края деталей бандажа обработаны лентой отделочной или проклеены клеем.

НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ БАНДАЖОМ

Бандаж надевается непосредственно на тело или хлопчатобумажное белье с расположением пелота непосредственно над областью выхода пупочной грыжи в положении лежа на спине. Осуществляется плотное прилегание пелота непосредственно над областью выхода пупочной грыжи, предотвращающее выход грыжи.

Конструкция бандажа должна обеспечивать удобство пользования надевания и снятия.

Бандаж должен плотно прилегать к телу, не оказывая болезненного давления, не смещаться вдоль тела и не ограничивать дыхательные движения.

УХОД ЗА БАНДАЖОМ

При пользовании бандажом следует оберегать его от механических повреждений.

В случае загрязнения стирать бандаж вручную в теплой воде (40⁰) с добавлением нейтральных моющих средств, не содержащих хлора или детским мылом. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла, не гладить.

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Не реже двух раз в сутки следует проводить гигиеническую обработку кожных покровов мыльным раствором.

РЕМОНТ БАНДАЖА

ООО «Опора» гарантирует соответствие качества бандажа требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 40 дней со дня выдачи потребителю готового изделия. В течение этого срока, в случае выявления производственного дефекта, предприятие-изготовитель производит необходимый ремонт или замену изделия бесплатно.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- бандаж - 1 шт.;
- чехол трикотажный - 1 шт. (на пелот);
- памятка по пользованию - 1 экз.;
- упаковка - 1 шт.

Директор ООО "Сибирь" И. Шигорев

