



Общество с ограниченной ответственностью

420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Галеева 12 Тел./факс: (843)272-10-04
ИНН 1660033075 КПП 166001001 ОКПО 48675428 ОКОНХ 19320
Расчет: 40702810962190100997 в банке «Татарстан» № 8610 СБ РФ г. Казани БИК 049205603
К/счет: 30101810600000000603 СОСБ № 6669/0000 СБ РФ г. Казани.

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР
ШТОПОРОВ



УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ОПОРА»

Штопоров Ю.В.

« »

2007

Бандаж на голеностопный сустав короткий БН6 – 63

Памятка по пользованию

Бандаж на голеностопный сустав короткий БН6 – 63 изготавливается по ТУ 9396-083-55220088-2006 (далее бандаж).

Бандаж предназначен для поддержания и фиксации голеностопного сустава.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж изготовлен неразъемным из ленты эластичной шириной 80 мм.

НАДЕВАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ БАНДАЖОМ

Бандаж надевается непосредственно на тело или хлопчатобумажный носок.

Бандаж должен плотно прилегать к телу, не оказывать болезненного давления, не смещаться вдоль конечности.

УХОД ЗА БАНДАЖОМ

При пользовании бандажом следует оберегать его от механических повреждений.

В случае загрязнения стирать бандаж вручную в теплой воде (40°)с добавлением нейтральных моющих средств, не содержащих хлора или детским мылом. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла, не гладить.

УХОД ЗА КОНЕЧНОСТЬЮ

Не реже двух раз в сутки следует проводить гигиеническую обработку кожных покровов конечности мыльным раствором.

РЕМОНТ БАНДАЖА

ООО «Опора» гарантирует соответствие качества бандажа требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 40 дней со дня выдачи потребителю готового изделия. В течение этого срока, в случае выявления производственного дефекта, предприятие-изготовитель производит необходимый ремонт или замену изделия бесплатно.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- бандаж на голеностопный сустав короткий БН6 – 63 – 1 шт.;
- памятка по пользованию – 1 экз.;
- упаковка – 1 шт.

КОПИЯ ВЕРНА
ДИРЕКТОР
ШТОПОРОВ Ю. В.

