

2.2 Компоненты аппаратного обеспечения МР-системы

Ниже приводится описание компонентов аппаратного обеспечения МР-системы. Более подробная информация по всей системе формирования изображения см. Руководство "Планирование площадки для МР-системы Toshiba."

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускается открывать дверцы или крышки электрооборудования. Воздействие напряжения и тока электрооборудования может привести к тяжелым травмам или смерти от поражения электрическим током. Открывать дверцы и крышки электрооборудования может только надлежащим образом подготовленный персонал центра обслуживания Toshiba

2.2.1 Электромагнит

Гентри является основным компонентом МР-системы (рисунок 2.2-1). Корпус магнита закрывает сам электромагнит, градиентную катушку и охлаждающую головку блока охлаждения.

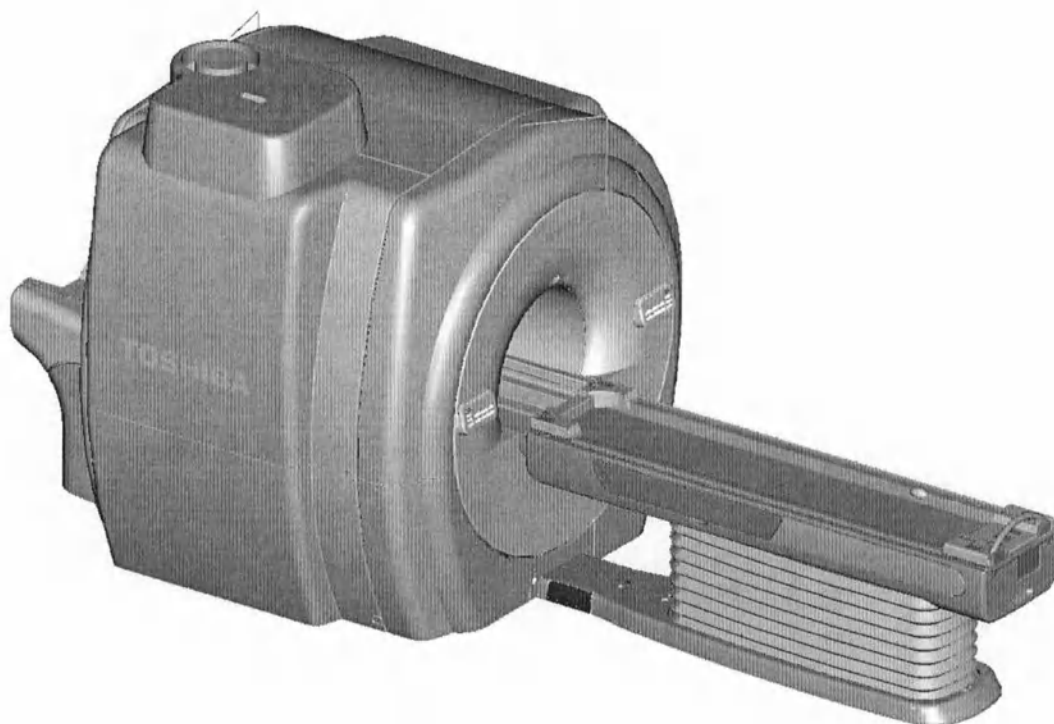


Рисунок 2.2-1 Гентри и стол пациента



ОСТОРОЖНО: Перед утилизацией электромагнита обязательно свяжитесь с обслуживающим персоналом. См. параграф 3.6.