

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от _____ 20__ г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН

«Медгамал» НИИЭМ

им. Н.Ф. Гамалеи РАМН)



А.Л.Гинцбург

200__ г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для культивирования
различных микроорганизмов

(«Мясо-пептонный агар, готовый к применению»)

Набор реагентов «Мясо-пептонный агар, готовый к применению», (далее по тексту - набор) представляет собой непрозрачный гель светло-коричневого цвета следующего состава:

Пептон сухой ферментативный	10,0 г
Экстракт мясной	(11,0±1,0)* г
Натрия хлорид	5,0 г
Агар микробиологический	(15,0±3,0)г
Вода дистиллированная	до 1 л
pH от 7,1 до 7,5	

* Из расчета содержания сухого остатка.

1. Назначение. Набор предназначен для культивирования различных микроорганизмов, включая энтеробактерии, синегнойную палочку, стафилококки.

Набор стерилен, готов к применению.

2. Форма выпуска. Набор расфасован по 400, 300 или 200 мл в стеклянные бутылки.

3. Меры предосторожности

При работе с набором реагентов следует соблюдать требования данной инструкции по применению и правила работы с нагревательными приборами.

4. Оборудование и материалы

1. Водяная баня
2. Стерильные чашки Петри



3. Стерильная ватно-маревая пробки

5. Способ применения.

Работа должна быть проведена с соблюдением правил асептики.

Перед использованием с бутылки с мясо-пептонным агаром снять алюминиевый колпачок, заменить резиновую пробку на стерильную ватно-марлевую. Выдерживать бутылку с мясо-пептонным агаром в кипящей водяной бане до полного расплавления геля, охладить до температуры 45-50 °С и разлить в стерильные чашки Петри слоем 4-5 мм, соблюдая правила асептики. После застывания чашки Петри с мясо-пептонным агаром подсушить закрытыми, вверх дном при температуре (37±1) °С в течение 20-24 ч. Разлитый в чашки Петри мясо-пептонный агар можно хранить в течение 10 суток при температуре 2-8 °С.

6. Условия хранения и транспортирования. Набор реagensов транспортируют в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 25 °С.

Хранить набор реагентов необходимо в герметично закрытой упаковке, в защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 2 до 25 °С в соответствии с СП 3.3.2.1248 – 03.

7. Срок годности 1 год. Набор с истекшим сроком годности не применять.

Рекламации на качество набора в течение срока годности следует направлять в адрес предприятия-изготовителя: НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН (Филиал «Медгамал» НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН); Россия, 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18; тел. (499)193-30-50, (499)190-44-59; факс (499)190-66-71.

Заместитель директора Филиала «Медгамал»

Н.Е. Филиппова

Филиппова Н.Е.

НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН

« » 200 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Зав. кафедрой клинической

Лабораторной диагностики

«РМАПО Росздрава»

Подпись *В.В. Долгов*

удостоверяю: специалист по

кадровой работе ГОУ ДПО

РМАПО Росздрава

ИНФО@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



д.м.н., профессор Долгов В.В.

«22» декабря

2009 г.