

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ИНСТРУКЦИЯ

по применению БТН-бульона
(Питательного бульона для культивирования микроорганизмов),
сухого

БТН-бульон предназначен для культивирования микроорганизмов широкого спектра. При необходимости может быть обогащен солями, углеводами, кровью, сывороткой и др.

Препарат представляет собой мелкодисперсный гигроскопичный порошок светлосерого цвета.

Состав:

пептон ферментативный сухой по ГОСТ 13805-76 или импортный при соответствии качества требованиям ГОСТ 13805-76 - 5,0 г/л,

гидролизат казеина средней степени расщепления кислотный, сухой по ФС 42-3526-98 - 5,0 г/л,

гидролизат соевой муки ферментативный, сухой по ТУ 9385-006-39484474-2003 - 12,0 г/л,

экстракт автолизированных дрожжей осветленный по ТУ 9385-001-70030178-2004 или импортный при соответствии качества требованиям ТУ 9385-001-70030178-2004 - 2,0 г/л,

натрий хлористый по ГОСТ 4233-77 - 5,0 г/л,

калий фосфорнокислый двузамещенный трехводный по ГОСТ 2493-75 - 1,0 г/л.

30 г порошка размешивают в 1 л дистиллированной воды, кипятят в течение 1-3 мин, фильтруют при необходимости, разливают в стерильные пробирки, стерилизуют автоклавированием при температуре 121 °С в течение 15 мин.

Готовая к употреблению среда должна быть прозрачной, желтого цвета. Среда в готовом виде хранится 10 суток при температуре от 2 до 8 °С.

Препарат расфасован по 250 г в полиэтиленовые банки.

Условия хранения: Препарат необходимо хранить в герметически закрытой упаковке в сухом защищенном от света месте при температуре 2-25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности препарата – 2 года.

Условия отпуска: для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ .

Рекламации на качество препарата в течение срока годности направлять предприятию-производителю ООО «Биотехновация» (105064, г. Москва, М. Казенный пер., д. 5а, т/ф (495) 916-03-20) и в Институт стандартизации и контроля лекарственных средств ФГУ «НЦ ЭСМП» Росздравнадзора (117246, г. Москва, Научный проезд, д. 14а, тел. (495) 120-60-95, 128-26-32).

Директор ООО «Биотехновация»



А.В. Пискунова