

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ФОРМАН Продактс»



В.В. Новиков

2018 г.

СТОЙКА-ПОСТ МЕДИЦИНСКИЙ «ФОРМАН» (FOREMAN)

по ТУ 32.50.50-005-79722512-2018

Инструкция по применению

ФРМН.942819.005 ИП

г. Санкт-Петербург

2018

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 2 из 27

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Назначение и условия применения	4
1.2 Показания	4
1.3 Противопоказания	4
1.4 Побочные эффекты.....	4
1.5 Меры предосторожности	4
1.6 Общий вид стойки-поста.....	5
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	12
2.1 Основные параметры и характеристики.....	12
2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.....	14
2.3 Требования к надежности	16
2.4 Комплектность	16
2.5 Маркировка.....	16
2.6 Упаковка	17
3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	17
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	18
4.1 Эксплуатационные ограничения	18
4.2 Подготовка к эксплуатации	18
5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ И РЕМОНТ	19
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	21
7 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	22
8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	22
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	23
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	24
11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	25
12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	26

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 3 из 27

Настоящая инструкция распространяется на Стойку-пост медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN) (в дальнейшем – стойка-пост) и представляет собой объединенный документ, содержащий сведения о назначении, конструкции, принципе действия и характеристиках стойки-поста, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения, обслуживания и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

 Информация, важная для безопасного применения стойки-поста отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 К эксплуатации допускается медицинский персонал, детально изучивший настоящую инструкцию по применению.

 **ВНИМАНИЕ!** Модификация изделия не допускается!

По всем вопросам, касающимся использования стойки-поста, необходимо обращаться к изготовителю:

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРМАН Продактс»
 Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12
 Тел: +7 (812) 332-58-43
 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП Версия: 1.1 Страница: 4 из 27
--	--

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение и условия применения

Стойка-пост медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN) (далее – стойка-пост) предназначен для установки в медицинских пунктах с целью обеспечения их функциональности и выделения места для хранения инструментов, материалов, документов и т.п.

Условия применения – лечебно-профилактические учреждения.

В зависимости от потенциального риска применения стойка-пост относится к классу 1 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

Вид стойки-поста в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 188320 (согласно приказу министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

В зависимости от устойчивости к климатическим воздействиям стойка-пост относится к виду УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации стойка-пост относится к группе 1 по ГОСТ Р 50444-92.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации стойка-пост относится к классу Г по ГОСТ Р 50444-92.

1.2 Показания

- организация функционального рабочего места для медицинского работника в условиях лечебно-профилактических учреждений;
- организация хранения инструментов, материалов, документов и других предметов медицинского работника.

1.3 Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материала.

1.4 Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящей инструкции по применению, показаний и противопоказаний.

1.5 Меры предосторожности

Внимание!

- Используйте стойку-пост только в соответствии с данной инструкцией.
- Уход за стойкой-постом осуществлять в соответствии с данной инструкцией.
- Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за стойкой-постом.
- Не следует ставить на поверхность стойки-поста горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 5 из 27

1.6 Общий вид стойки-поста

Стойка-пост предназначен для медицинской сестры: ведения письменной работы, работы с персональным компьютером, хранения документов (карточек пациентов, справочных материалов и т.п.), хранения канцелярских принадлежностей.

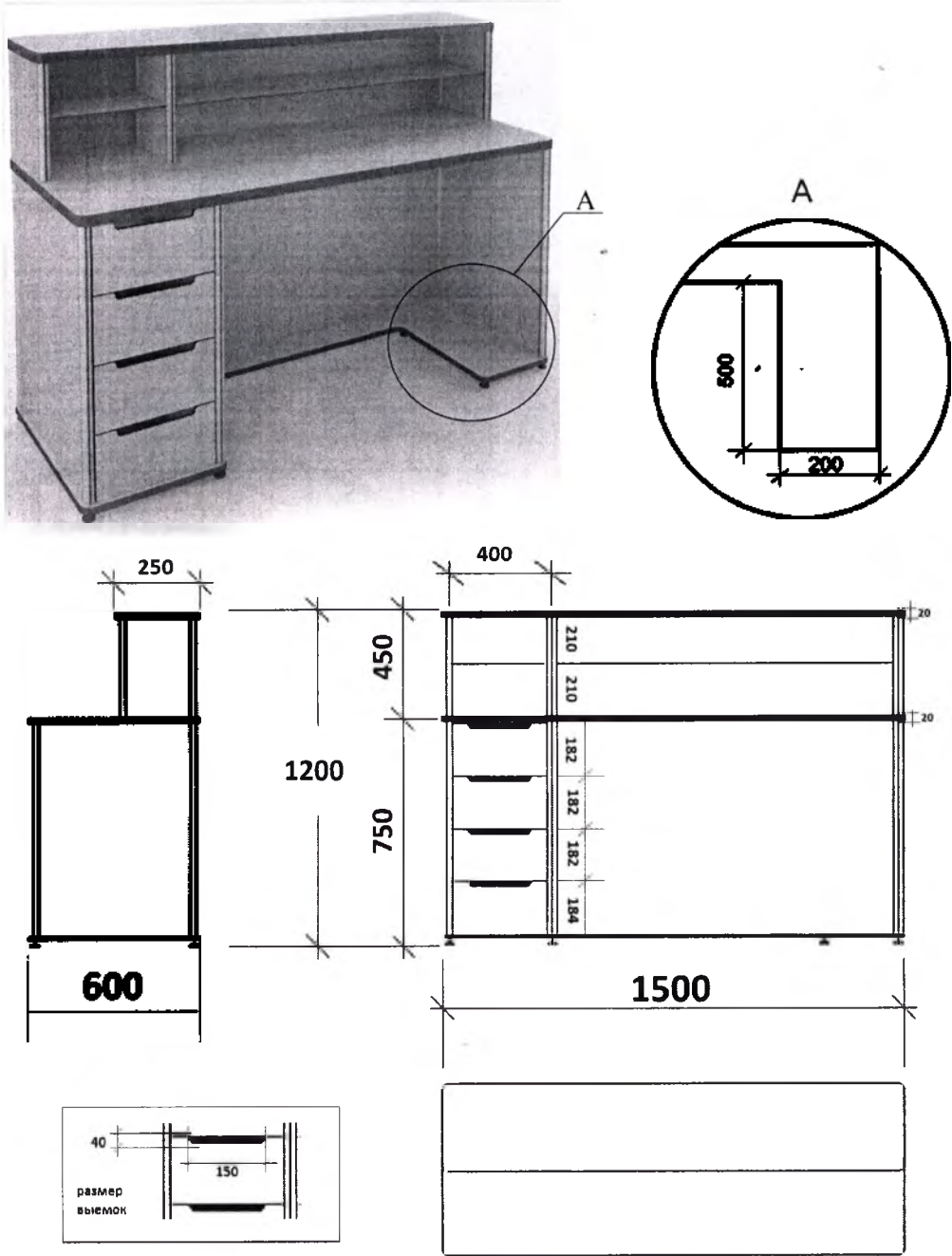


Рисунок 1 - Артикул FP-1-05-01. Стойка-пост прямой «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 1 - Размеры Стойки-поста прямого «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Шири-на стойки-поста	Высота стойки-поста	Глуби-на стойки-поста	Полки 2 шт.				Ящик 3 шт.			Ящик 1 шт.		
				1		2		Ши-рина	Высо-та	Глу-бина	Ши-рина	Вы-со-та	Глу-бина
				Ши-рина	Глу-бина	Ши-рина	Глу-бина						
Разме-ры, мм	1500	1200	600	1092	212	396	212	400	182	560	400	184	560

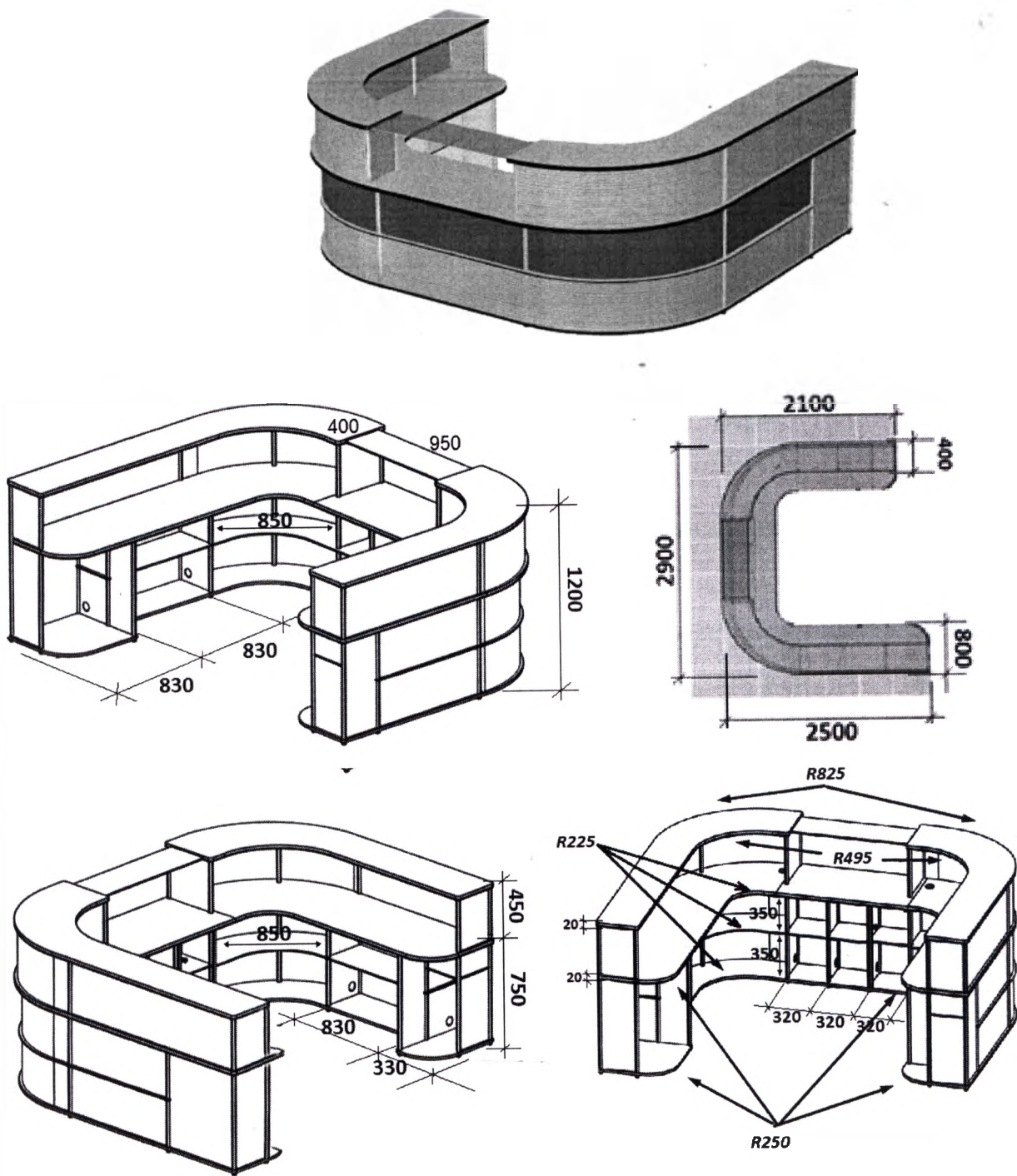


Рисунок 3 - Артикул FR-1-05-03. Стойка-пост угловой полукруглый-2 «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 3 - Размеры Стойки-поста углового полукруглого-2 «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина стойки-поста	Высота стойки-поста	Глубина стойки-поста	Полки 2 шт.		Полки 2 шт.		Полки 3 шт.		Полка стеклянная 1 шт.	
				Ширина	Глубина	Ширина	Глубина	Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
Размеры, мм	2900	1200	2500	830	762	850	762	316	762	950	390

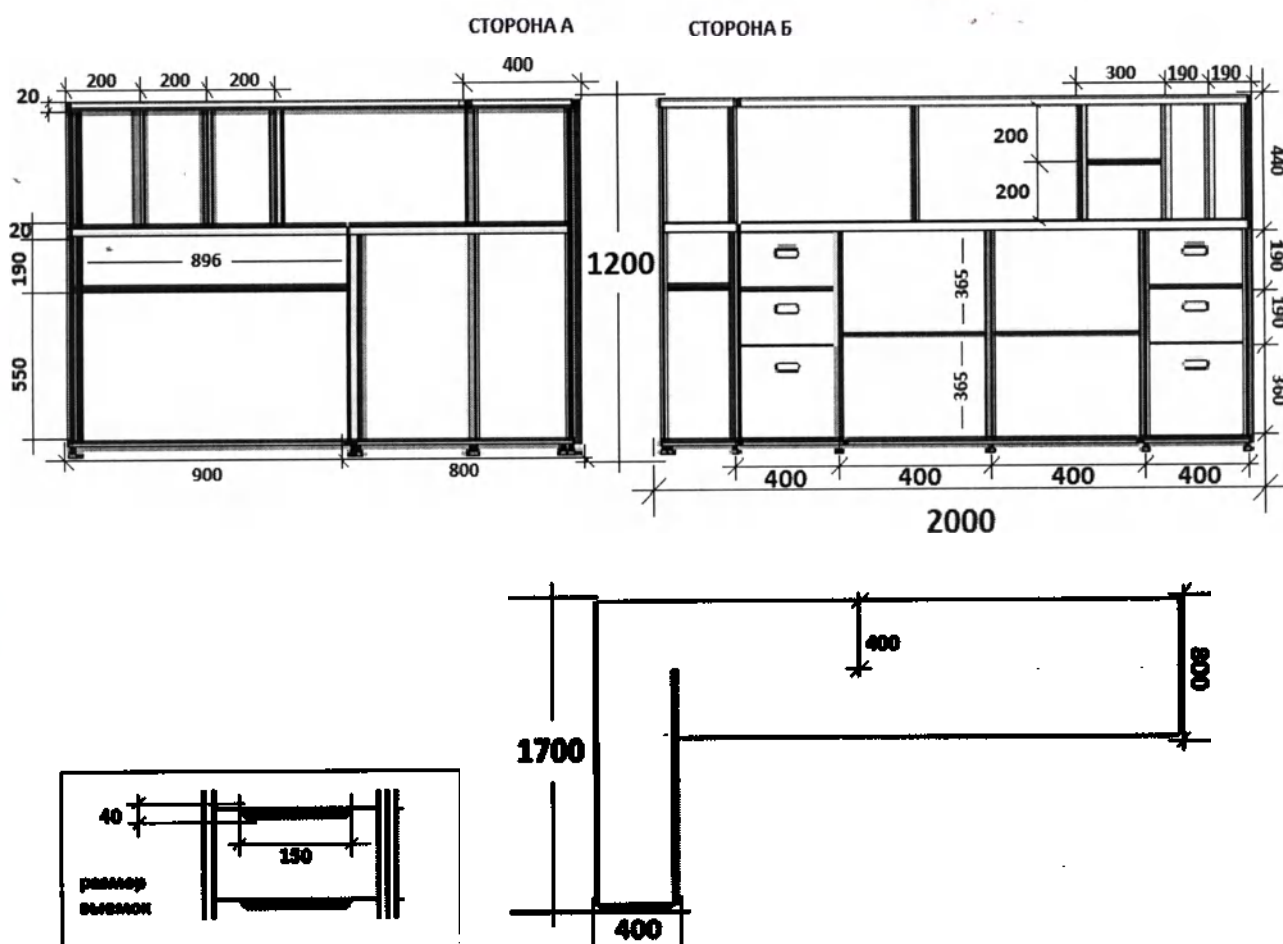
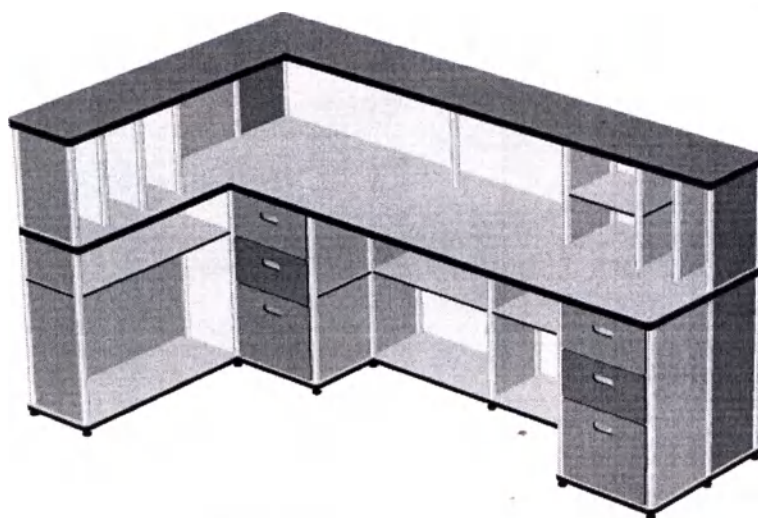


Рисунок 4 - Артикул FP-1-05-04. Стойка-пост угловой «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 4 - Размеры Стойки-поста углового «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина стойки-поста	Высота стойки-поста	Глубина стойки-поста	Полки 1 шт.		Полки 2 шт.		Полки 1 шт.		Ящик 6 шт.					
				Ширина	Глубина	Ширина	Глубина	Ширина	Глубина	1 (4шт.)			2 (2 шт.)		
										Ширина	Высота	Глубина	Ширина	Высота	Глубина
Размеры мм	2000	1200	1700	896	362	396	362	296	362	400	190	762	400	360	762

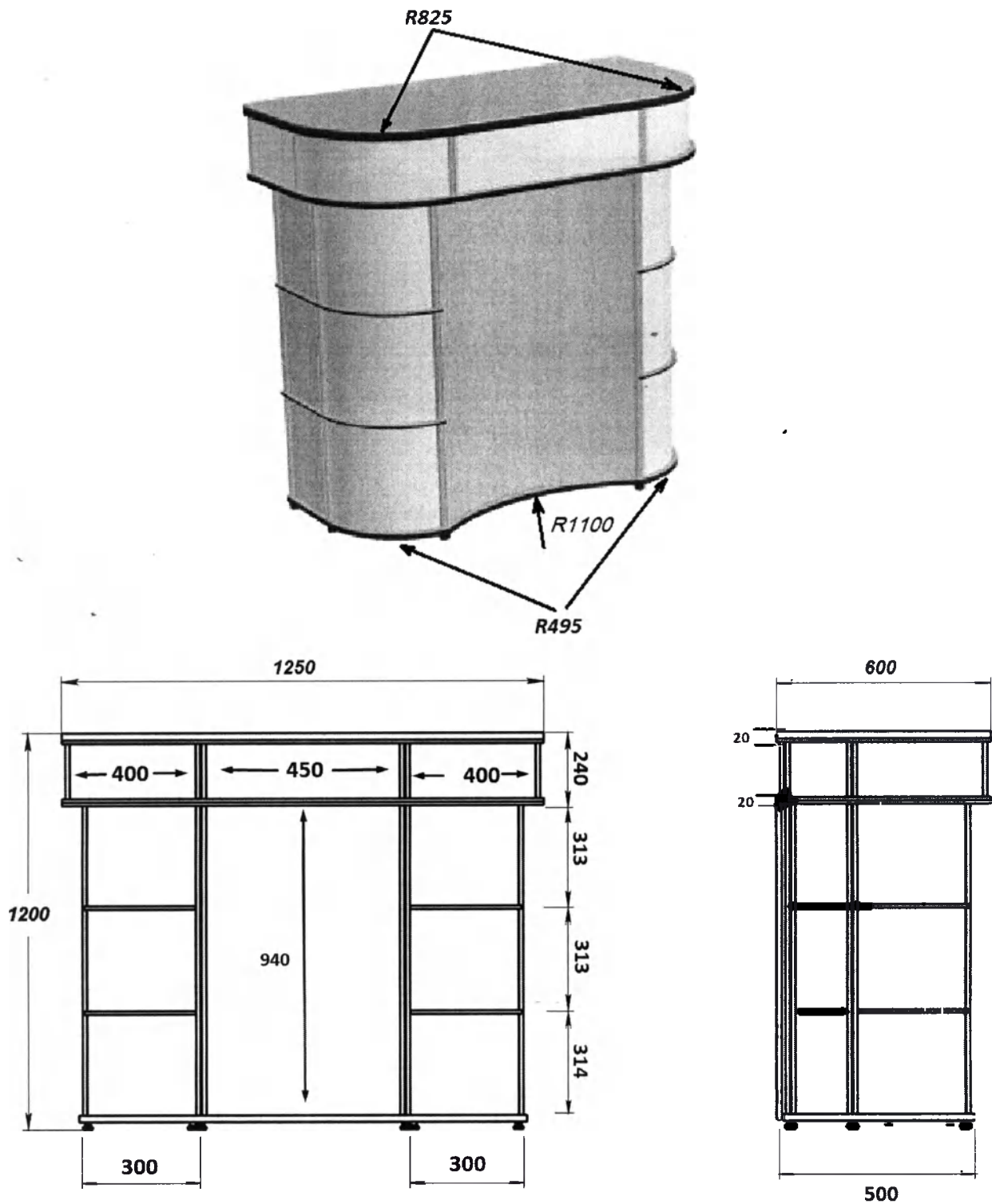


Рисунок 5 - Артикул FP-1-05-05. Стойка-пост малый «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 5 - Размеры Стойки-поста малого «ФОРМАН» (FOREMAN)

	Ширина стойки- поста	Высота стойки- поста	Глубина стойки- поста	Полки 4 шт.	
				Ширина	Глубина
Размеры, мм	1250	1200	600	296	462

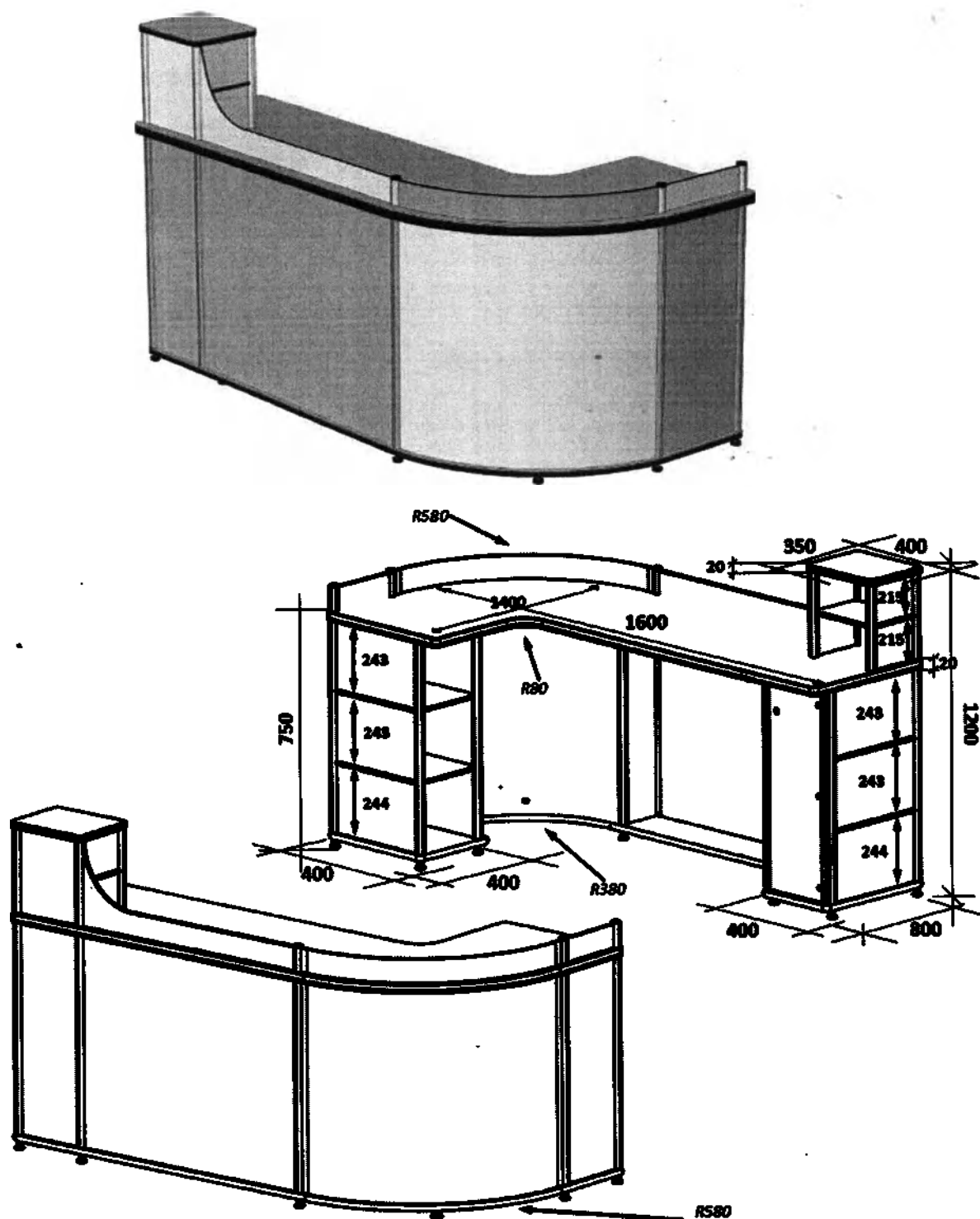


Рисунок 6 - Артикул FP-1-05-06. Стойка-пост средний «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 6 - Размеры Стойки-поста среднего «ФОРМАН» (FOREMAN)

Размеры, мм	Ширина стойки-поста	Высота стойки-поста	Глубина стойки-поста	Полки 2 шт.		Полки 1 шт.	
				Ширина	Глубина	Ширина	Глубина
	1600	1200	1400	396	392	396	342

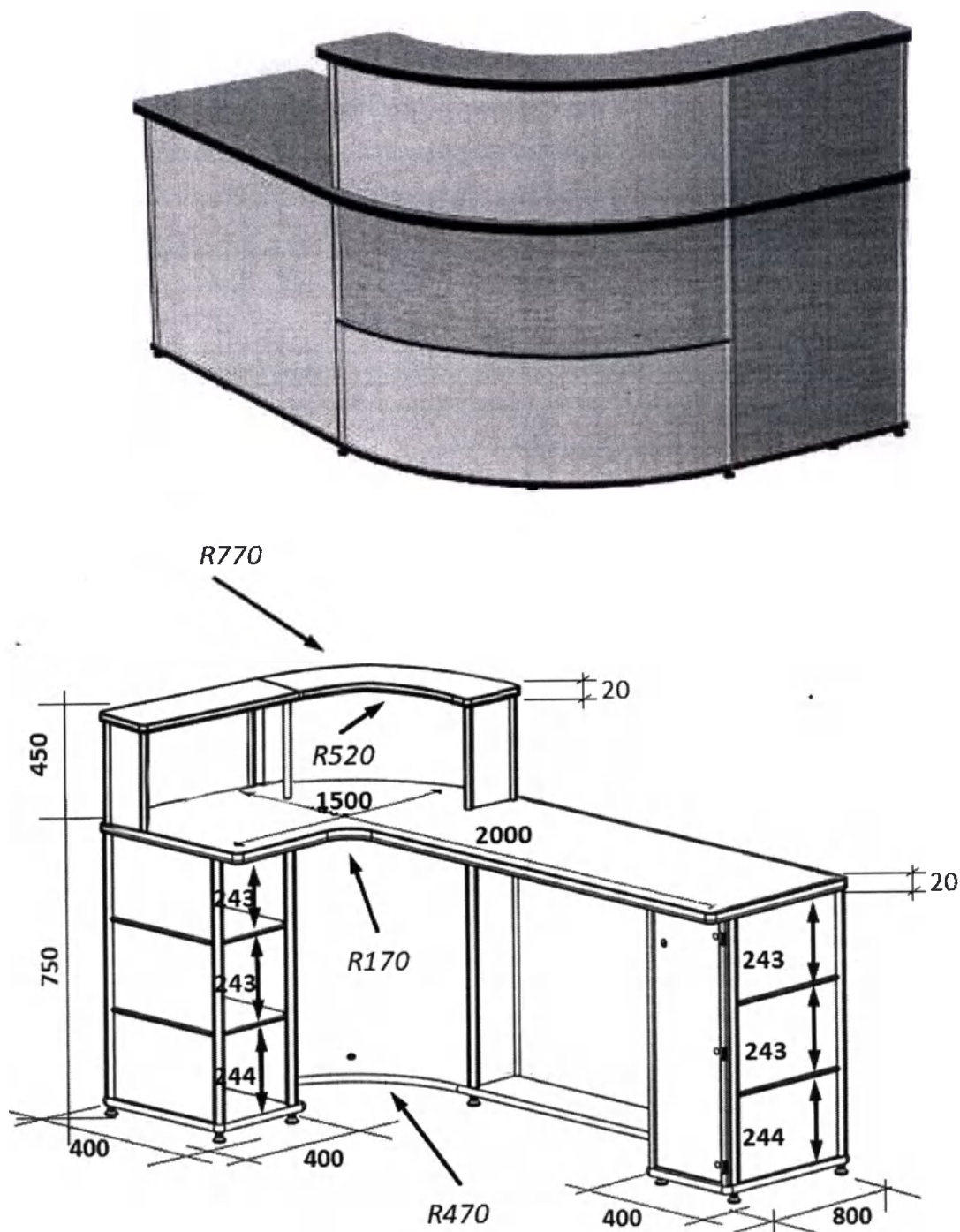


Рисунок 7 - Артикул FP-1-05-07. Стойка-пост большой «ФОРМАН» (FOREMAN)

Таблица 7 - Размеры Стойки-поста большого «ФОРМАН» (FOREMAN)

Размеры, мм	Ширина стойки-поста	Высота стойки-поста	Глубина стойки-поста	Полки 2 шт.	
				Ширина	Глубина
	2000	1200	1500	396	392

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 12 из 27

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Основные параметры и характеристики

2.1.1 Стойка-пост соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ 16371-2014, настоящих технических условий и комплектов конструкторской документации согласно таблице 8.

Таблица 8 – Полный (номенклатурный) перечень изделий

Артикул	Наименование	Обозначение документа	№ Рисунка
FP-1-05-01	Стойка-пост прямой «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.005-01	Рис. 1
FP-1-05-02	Стойка-пост угловой полукруглый-1 «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.005-02	Рис. 2
FP-1-05-03	Стойка-пост угловой полукруглый-2 «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.005-03	Рис. 3
FP-1-05-04	Стойка-пост угловой «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.005-04	Рис. 4
FP-1-05-05	Стойка-пост малый «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.005-05	Рис. 5
FP-1-05-06	Стойка-пост средний «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.005-06	Рис. 6
FP-1-05-07	Стойка-пост большой «ФОРМАН» (FOREMAN)	ФРМН.942819.005-07	Рис. 7

2.1.2 Конструкция и внешний вид стойки-поста соответствуют рисункам 1-7 раздела 1.6.

2.1.3 Габаритные размеры и масса стойки-поста соответствуют значениям, указанным в таблице 9. Предельные отклонения размеров стойки-поста не превышают ± 4 мм.

Таблица 9 – Массогабаритные характеристики

Артикул	Наименование	Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	Масса, не более, кг
FP-1-05-01	Стойка-пост прямой «ФОРМАН» (FOREMAN)	1500х1200х600	170
FP-1-05-02	Стойка-пост угловой полукруглый-1 «ФОРМАН» (FOREMAN)	2900х1200х2500	270
FP-1-05-03	Стойка-пост угловой полукруглый-2 «ФОРМАН» (FOREMAN)	2900х1200х2500	280
FP-1-05-04	Стойка-пост угловой «ФОРМАН» (FOREMAN)	2000х1200х1700	240
FP-1-05-05	Стойка-пост малый «ФОРМАН» (FOREMAN)	1250х1200х600	160
FP-1-05-06	Стойка-пост средний «ФОРМАН» (FOREMAN)	1600х1200х1400	180
FP-1-05-07	Стойка-пост большой «ФОРМАН» (FOREMAN)	2000х1200х1500	220

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 13 из 27

2.1.4 Зазоры в проемах на сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не превышают значений по ГОСТ 16371-2014.

2.1.5 Покоробленность щитовых деталей стойки-поста по ГОСТ 16371-2014.

2.1.6 На видимой поверхности стойки-поста отсутствуют дефекты по ГОСТ 20400-2013: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеявые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины.

2.1.6.1 Кромки стеклянных полок вариантов исполнения стойки-поста Арт. FP-1-05-02, Арт. FP-1-05-03 обработаны шлифованием и полированием.

2.1.7 Столешницы стойки-поста, полки и днища ящиков выдерживают двукратную номинальную равномерно распределенную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой:

- на столешницу 30 ± 1 кг;
- на полку $3 \pm 0,5$ кг;
- на дно ящика 5 ± 1 кг.

2.1.8 Количество и размеры ящиков и полок, а также их расположение соответствуют рисункам 1-7 раздела 1.6. Предельные отклонения размеров не превышают ± 2 мм.

2.1.8.1 Стойка-пост вариантов исполнения Арт. FP-1-05-02, Арт. FP-1-05-03 имеют стеклянные полки толщиной $8 \pm 0,5$ мм.

2.1.8.2 Толщина стенок стойки-поста 4 мм. Толщина полок стойки-поста: 10 мм. Толщина столешниц стойки-поста 20 мм. Допускаемое отклонение: $\pm 0,5$ мм.

2.1.8.3 Изгибы (округления) стойки-поста соответствуют рисункам 2, 3, 5-7 раздела 1.6.

2.1.8.4 Размеры выемок на ящиках для открывания соответствуют рисункам 1, 4 раздела 1.6. Допускаемое отклонение: ± 2 мм.

2.1.9 Выдвижные ящики стойки-поста имеют свободный ход без заеданий и перекосов, с усилием выдвигания не более 30 Н.

2.1.10 Ящики имеют устройство для предотвращения выпадения их из корпуса.

2.1.11 Стойка-пост устойчиво стоит на опорах. Зазор между одной из опор и поверхностью пола не превышает 3 мм.

2.1.12 Стойка-пост устойчив при приложении нагрузки на выдвинутый ящик 75Н.

2.1.13 Опоры стойки-поста допускают регулировку по высоте в пределах 10 мм. Минимальная высота опоры стойки-поста 10 мм; максимальная высота – 20 мм. В таблицах 1-7 раздела 1.6 указана высота стойки-поста при максимальной высоте опор.

2.1.14 Защитные и защитно-декоративные покрытия для поверхностей фурнитуры и деталей из металла по ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84 для изделий группы условий 1.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 14 из 27

2.1.15 Наружные поверхности стойки-поста устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644-96 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16-89.

2.1.16 Стойка-пост при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2.1.17 Стойка-пост в транспортной таре обладает прочностью к воздействию климатических факторов при транспортировании в условиях 5 по ГОСТ 15150-69. Стойка-пост в транспортной таре обладает прочностью к воздействию климатических факторов при хранении в условиях 2 по ГОСТ 15150-69.

2.1.18 Стойка-пост в транспортной упаковке обладает прочностью к механическим воздействиям при транспортировании, соответствующим требованиям ГОСТ Р 50444-92.

- 2.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям
- 2.2.1 Материалы, сырье и покупные изделия, применяемые при изготовлении стойки-поста, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на эти материалы, сырье и покупные изделия, предусмотренные действующим законодательством, и имеют сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.
- 2.2.2 Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве стойки-поста, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013.
- 2.2.3 Для изготовления стойки-поста используются сырье, материалы и покупные изделия согласно таблице 10.

Таблица 10 - Сырье, материалы и покупные изделия

Артикул	Наименование изделия	Наименование составных частей	Материалы
			Наименование, марка, изготовитель
FP-1-05-01	Стойка-пост прямой «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, полки, ящики	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав А1Мg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-05-02	Стойка-пост угловой полукруглый-1 «ФОРМАН»	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos,

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 15 из 27

Артикул	Наименование изделия	Наименование составных частей	Материалы Наименование, марка, изготовитель
	(FOREMAN)		Финляндия
		Стенки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
			Стекло закаленное М1 по ГОСТ 30698-2014, ООО «АКМА», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-05-03	Стойка-пост угловой полукруглый-2 «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
			Стекло закаленное М1 по ГОСТ 30698-2014, ООО «АКМА», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-05-04	Стойка-пост угловой «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, полки, ящики	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-05-05	Стойка-пост малый «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия

Артикул	Наименование изделия	Наименование составных частей	Материалы
			Наименование, марка, изготовитель
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-05-06	Стойка-пост средний «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия
FP-1-05-07	Стойка-пост большой «ФОРМАН» (FOREMAN)	Каркас	Профиль алюминиевый марки АД31 по ГОСТ 4784-97, Группа компаний «Авангард», Россия
			Покрытие профиля - Порошковая краска-термореактивный порошковый ЛКМ INFRALIT PE 8350-15 RAL 7037-GL, Teknos, Финляндия
		Стенки, полки	Декоративный бумажно-слоистый пластик (High Pressure Laminate) 1478, ООО «Слотекс», Россия
		Опоры	Сталь 08X18H10 по ГОСТ 2590-2006, Челябинский металлургический комбинат, Россия
			Полиэтилен низкой плотности LDPE 21008-075, ООО «Волжский Завод Полимеров», Россия
		Фурнитура	Алюминиевый сплав AlMg3 по ГОСТ 4784-97, HEFELE FISHER, Германия

2.3 Требования к надежности

2.3.1 Средняя наработка на отказ (To) не менее 5000 часов. Критериями отказа является несоответствие требованиям п.п. 2.1.5 - 2.1.8.

2.3.2 Средний срок службы стойки-поста не менее 4 лет. Критерием предельного состояния стойки-поста считается невозможность или нецелесообразность его восстановления (или использования).

2.4 Комплектность

2.4.1 Комплект поставки включает в себя:

- Стойка-пост одного из исполнений, в сборе
- Эксплуатационная документация:

Инструкция по применению ФРМН.942819.005 ИП

Примечание: количество и исполнение стойки-поста определяются при заказе по согласованию с заказчиком.

2.5 Маркировка

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 17 из 27

2.5.1 Маркировка стойки-поста соответствует ГОСТ 16371-2014, ГОСТ Р 50444-92 и ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

2.5.2 На каждом изделии этикетка, на которой указано:

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя и (или) товарный знак предприятия;
- наименование изделия, его исполнение;
- обозначение изделия (артикул);
- дата изготовления: месяц и год;
- гарантийный срок эксплуатации;
- срок службы;
- заводской номер;
- обозначение настоящих технических условий, ГОСТ 16371-2014.

2.5.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96.

Транспортная маркировка нанесена на бумажные или картонные ярлыки, или непосредственно на тару, ярлыки прикреплены к упаковке клеем или другими материалами, обеспечивающими сохранность груза и маркировки.

На каждую транспортную тару нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх».

2.6 Упаковка

2.6.1 Упаковка соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ Р 50444-92 и конструкторской документации.

2.6.2 Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту стойки-поста от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 По санитарно-химическим, токсикологическим и биологическим показателям стойка-пост соответствует требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, а также нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

3.2 Уровни летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуатации стойки-поста в воздух помещений, соответствуют ГОСТ 16371-2014 и не превышают допустимый уровень, а именно: аммиака – не более 0,04 мг/м³; спирта метилового – не более 0,5 мг/м³; формальдегида – не более 0,01 мг/м³; фенола – 0,003 мг/м³.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП Версия: 1.1 Страница: 18 из 27
--	---

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения

 Каждое изделие проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством изделия.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния изделия, чтобы убедиться в отсутствии различных повреждений. Если Вы обнаружите повреждения, обратитесь к Изготовителю.

Рабочие условия окружающей среды:

Температура от плюс 10 до плюс 35°C.

Относительная влажность воздуха: до 80%.

4.2 Подготовка к эксплуатации

При использовании изделия впервые после его приобретения проверьте соответствие комплектности по разделу 2.3 настоящей инструкции по применению.

Использование изделия не требует специального обучения и может быть выполнено силами пользователя.

4.3 Порядок работы с изделием

- Освободите стойку-пост от упаковки, выбросьте упаковочный материал.

 Все изделия поставляются готовыми к применению, однако рекомендуется перед первым использованием осуществить дезинфекцию в соответствии с требованиями Раздела 5.

- Используйте изделие в соответствии с его функциональным назначением.

Примечание: Следует учитывать информацию по рекомендуемой нагрузке (п. 2.1.7).

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 19 из 27

5 УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ И РЕМОНТ

Необходимо регулярно (не менее одного раза в неделю) контролировать отсутствие механических повреждений.

Так же необходимо обеспечивать дезинфекцию изделия согласно разделу 5.1 настоящей инструкции.

5.1 Внешние и внутренние доступные поверхности стойки-поста протрите салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, затем протрите насухо мягкой тканью. В качестве дезинфицирующего раствора рекомендуется использовать 3% раствор перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или "Астра" по ГОСТ 25644-96 или иные средства согласно МУ 287-113.

 Не допускается применять соду, порошки, пасты и другие абразивные материалы, не предназначенные для ухода за стойкой-постом.

 Не следует ставить на поверхность стойки-поста горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

5.2 Ремонт

Если в процессе подготовки изделия к работе, его эксплуатации или обслуживания выявлены дефекты или неисправности, то необходимо обратиться в ближайший сервисный центр по гарантийному и послегарантийному обслуживанию для проверки, ремонта или замены изделия (его частей).

 Ремонт стойки-поста может осуществляться только квалифицированным специально обученным персоналом сервисных центров.

Персоналу сервисного центра необходимо заносить в таблицу 11 сведения о проведенном ремонте.

Таблица 11 – Сведения о проведенном ремонте

№	Дата прове- дения	Организация, должность, испол- нитель	Неисправность, замеча- ния, проведенные работы	Подпись исполнителя

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 21 из 27

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование и хранение стойки-поста должно проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92.

Транспортирование стойки-поста может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны проводиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом – в отапливаемом герметизированном отсеке.

6.2 Условия транспортирования стойки-поста должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100%).

6.3 Условия хранения стойки-поста в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °C и относительной влажности до 98%).

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 22 из 27

7 ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1 Утилизация должна осуществляться в соответствии с правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, предусмотренным СанПиН 2.1.7.2790-10.

7.2 Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 стойка-пост относится к медицинским отходам класса А – эпидемиологически безопасные отходы.

7.3 Перед утилизацией стойка-пост должен быть подвергнут санитарной обработке в соответствии с методическими указаниями МУ-287-113 от 30.12.1998 г.

7.4 Стойка-пост должен подлежать утилизации в случае:

- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью пользователя и свидетельствующих о невыполнении предусмотренного назначения.

7.5 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Использование стойки-поста должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

8.2 К эксплуатации стойки-поста допускается медицинский персонал, детально изучивший инструкцию по применению.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 23 из 27

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Стойка-пост медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN) производства
ООО «ФОРМАН Продактс»

Исполнение _____ Артикул _____ Заводской номер _____

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандар-
тов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 24 из 27

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Стойка-пост медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN)

Исполнение _____ Артикул _____ Заводской номер _____

упакован на предприятии-изготовителе ООО «ФОРМАН Продактс» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(Дата)

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 25 из 27

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют при несоответствии поставляемого изделия, его тары, упаковки, маркировки и комплектности требованиям сопроводительной документации.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование, артикул и заводской номер изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому оно получено;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения;
- наименование поврежденных частей и т.д.

Предприятие-изготовитель принимает рекламацию, если не установлена вина получателя в возникновении дефекта в изделии.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 26 из 27

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества стойки-поста требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи предприятием-изготовителем.

12.3 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие не соответствует требованиям технических условий в гарантийный период, обратитесь к продавцу.

Гарантийный срок эксплуатации изделия указан в настоящей инструкции и исчисляется с даты продажи. При обнаружении несоответствия изделия требованиям технических условий покупателю гарантируется бесплатный ремонт или обмен на аналогичный товар надлежащего качества.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

- Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием, даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- Если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления.

- Несовпадения заводского номера изделия с гарантийным талоном
- Наличия механических повреждений
- Несоблюдения правил эксплуатации изделия и т.д.

ООО «ФОРМАН Продактс» Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, литера КБ, корпус №12 Тел: +7 (812) 332-58-43 E-mail: nzaharov@foremanfitness.com	Документ: ФРМН.942819.005 ИП
	Версия: 1.1
	Страница: 27 из 27

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
 на замену в течение гарантийного срока

Стойка-пост медицинский «ФОРМАН» (FOREMAN)

Исполнение _____ Артикул _____ Заводской номер _____

Приобретен _____

(дата, подпись и штамп покупателя)

Продавец _____

(подпись, печать)

печатью 27 лист(ов)

(квадратный метр)

Генеральный директор

ООО «ФОРМАН ПРОДАКТС»

В.В. Новиков

«*Форман*» *Индустри* 2018 г

