

Перв. прим.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

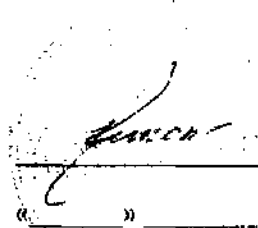
Подп. и дата

Изм. № подл.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «Стомахим»


 Ю.В.Николаев
 « » 2005 г.

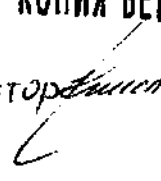
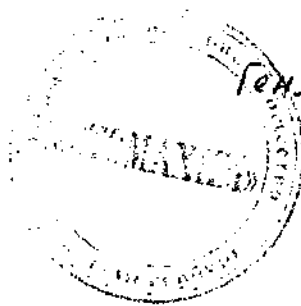
УИЯГ . 942422.013 Д1

МАТЕРИАЛЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
«СТОМАХИМ»

ЭТИКЕТКА

КОПИЯ ВЕРНА

Ген. директор  Ю.В.Николаев

1 НАИМЕНОВАНИЕ

Материалы стоматологические восстановительные (в дальнейшем материалы стоматологические),разработанные ЗАО «Стомахим»:

-материал композиционный пломбировочный химического отверждения «Комподент-М» (в дальнейшем «Комподент-М»), предназначенный для пломбирования кариозных полостей III, IV, V классов в области передних зубов (допускается использовать «Комподент-М» для пломбирования кариозных полостей I и II классов).

-материал композиционный пломбировочный светового отверждения «Комподент-С» (в дальнейшем «Комподент-С»), предназначенный для пломбирования кариозных полостей III, IV, V классов в области передних зубов(допускается использовать «Комподент-С» для пломбирования кариозных полостей I и II классов)

- комплект для приготовления амальгамы серебряной в капсулах ССК-68,5— 01 «Амадент»(в дальнейшем «Амадент»), предназначенный для применения в стоматологической практике для приготовления амальгамы в капсулах с использованием стандартных амальгамосмесителей типа АС-01

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ

ТУ 9391- 005-31008751-2005, ОКП 939100

Примеры записи обозначения материалов при заказе и в документации другого изделия:

- «Материал композиционный пломбировочный химического отверждения «Комподент-М» ТУ 9391- 005-31008751-2005,
- «Материал композиционный пломбировочный светового отверждения «Комподент-С» ТУ 9391- 005-31008751-2005,
- «Комплект для приготовления амальгамы серебряной в капсулах ССК-68,5-01 «Амадент» ТУ 9391- 005-31008751-2005.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Климатическое исполнение при эксплуатации У5 по ГОСТ 15150, но при температуре от +32 до +42° С.

Класс потенциального риска применения – 2а по ГОСТ Р 51609.

Технические характеристики материалов приведены в таблицах 1,2.

УИЯГ . 942422.013 Д1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Тимофеев		05.04.05
Пров.		Буш		05.04.05
Н. контр.		Шпекторова		05.04.05
Утв.		Николаев		05.04.05

**Материалы
стоматологические
восстановительные.
«Стомахим»
ЭТИКЕТКА.**

Лит.	Лист	Листов
А	2	4

ЗАО «Стомахим»

Физико-механические свойства материалов «Компомент-М», «Компомент-С»

Инв. № подл.	Полг. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
23-10055X	20.05.2015			

Таблица 2

Физико – механические свойства амальгамы материала «Амадент»

№	Наименование показателей	Значение показателей
1	Предел прочности при сжатии , МПа (кгс /см²) через 1 час , не менее через 24 часа , не менее	50 (500)
2	Сроки схватывания: начало , мин , не ранее конец , мин , не позднее	300 (3000) 3 60
3	Текучесть , % , max.	3
4	Изменение размеров при затвердевании по высоте образца , %	от - 0,1 до + 0,2

4. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения материалов стоматологических 1.2 по ГОСТ 15150 при температуре от -10 до 20 °С.

5. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ

Соответствует требованиям ТУ 9391-005-31008751-2005

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Гарантийный срок годности для материала "Комподент-М", -1,5 года, для материала- Компонент -С» - 2 года , для материала «Амадент» - 5 лет с момента изготовления (исчисляется с даты подписания паспорта).

7. ДАТА ВЫПУСКА

Указывается «Годен до...»

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

Рекламация о качестве предъявляется в установленном порядке предприятию-изготовителю по адресу: 195043 ,г.С-Петербург, ул.Челябинская,д. 95, ЗАО «СТОМАХИМ» ,тел./факс (812)527-50-72

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

УИЯГ . 942422.013 Д1

Лист

4